

Descripción del producto

HandyBelt se utiliza como soporte en los traslados. Habitualmente, el cinturón se le pone al paciente y el cuidador lo utiliza como ayuda para el traslado. De forma alternativa, se puede colocar en el paciente y en el cuidador de modo que el paciente también pueda utilizar el cinturón como apoyo durante el traslado.

¡IMPORTANTE!

El traslado de un paciente siempre implica un cierto riesgo. Lea la guía de instrucciones antes de su uso. Es importante comprender la totalidad del contenido de la guía de instrucciones. El equipo solo debe ser utilizado por personal capacitado. Asegúrese de que el accesorio es adecuado para la transferencia. Tenga cuidado y precaución durante su uso. Como cuidador, usted es el responsable de la seguridad del paciente. Debe conocer la capacidad del paciente para soportar el transporte. Si no está seguro de algo, póngase en contacto con el fabricante o proveedor.

Descripción de los símbolos

Estos símbolos se pueden encontrar en este documento o en el producto.

Símbolo	Descripción
	Advertencia. Se emplea cuando se requiere un cuidado y una atención adicionales.
	Lea la guía de instrucciones antes de utilizarla.
	Marca CE
	Fabricante legal
	Fecha de fabricación
	Identificador de producto
	Número de serie
	Dispositivo médico
	No limpiar en seco
	No planchar
	Secar en secadora
	No secar en secadora
	Lavado El símbolo siempre va acompañado de la temperatura recomendada en °C y °F.
	No contiene látex
	Inspección periódica
	No usar lejía
	Tender las prendas a la sombra
	Dirección hacia arriba y símbolo en la parte exterior del equipo
	Símbolo en la parte exterior del equipo
	El código de barras Data Matrix GS1 puede contener la siguiente información. (01) Número global de artículo comercial (11) Fecha de fabricación (21) Número de serie

Instrucciones de seguridad

Antes del uso, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Planifique la elevación para que se realice de forma tan segura y práctica como sea posible.
- Una persona responsable de su organización debe decidir si es necesaria la asistencia de uno o más cuidadores, según cada caso.
- El paciente debe comprender y seguir las instrucciones de modo que se le pueda guiar para que realice un movimiento natural durante la elevación.
- El paciente debe presentar estabilidad en la cabeza y el tronco y ser capaz de estar sentado en posición vertical. Durante la rehabilitación para la marcha, es importante que el paciente tenga buen equilibrio al estar de pie y que sea capaz de mover sus pies de forma independiente al andar.
- Antes de realizar la transferencia, compruebe que HandyBelt se haya colocado correctamente.
- HandyBelt no es un dispositivo de elevación y, por tanto, las asas no están diseñadas para este fin.
- Para minimizar el esfuerzo del cuidador, si el paciente se cayera, es importante que el cuidador no intente por sus propios medios mantenerlo de pie. En su lugar, recomendamos que el cuidador baje al paciente hasta el suelo con un movimiento suave. No olvide soltar las asas para evitar lesiones en las manos del cuidador por aplastamiento.
- Trabaje siempre de forma ergonómica. Utilice la capacidad del paciente para que participe activamente de las operaciones.

 Producto técnico-médico de clase I

Modificaciones en los productos

Los productos Liko están en un continuo desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de realizar modificaciones en ellos sin previo aviso. Póngase en contacto con su representante de Liko para obtener asesoramiento e información sobre actualizaciones de productos.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko posee la certificación de calidad de acuerdo con la ISO 9001 y su certificación correspondiente para empresas médico-técnicas, ISO 13485.

Liko posee la certificación medioambiental de acuerdo con la ISO 14001.

Aviso para usuarios o pacientes de la UE

Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra el usuario o el paciente.

Cuidado y Mantenimiento

Compruebe el producto antes de cada uso. Compruebe los siguientes elementos por si hubiera desgaste o daños:

- Tejido
- Cintas
- Costuras
- Asas
- Hebilla de seguridad

No utilice productos dañados.

Si no está seguro de algo, póngase en contacto con el fabricante o proveedor.

Instrucciones de lavado: Consulte la etiqueta del producto.

Tiempo de vida útil estimado

Según la guía de instrucciones, este producto se debe inspeccionar con regularidad, especialmente después de su lavado. Se ha de prestar especial atención al desgaste y a los daños que pudieran presentar las costuras, las cintas/asas y el tejido, así como supervisar las propiedades de este último. Usar de acuerdo con estas instrucciones y seguirlas para el cuidado y mantenimiento del producto, que podrá seguir usándose siempre que pase las inspecciones.


Instrucciones de reciclaje

Todo el producto debe clasificarse como residuo combustible.


Hill-Rom evalúa y proporciona orientación a los usuarios sobre la manipulación y la eliminación seguras de sus dispositivos para ayudar a prevenir lesiones, entre las que se incluyen cortes, punciones en la piel o abrasiones, y sobre la limpieza y desinfección del dispositivo médico necesarias después de su uso y antes de su eliminación. Los clientes deben cumplir todas las leyes y normativas federales, estatales, regionales o locales relativas a la eliminación segura de los dispositivos y accesorios médicos.

En caso de duda, el usuario del dispositivo debe ponerse en contacto primero con el servicio de asistencia técnica de Hill-Rom para obtener orientación sobre los protocolos de eliminación segura.

Aplicación


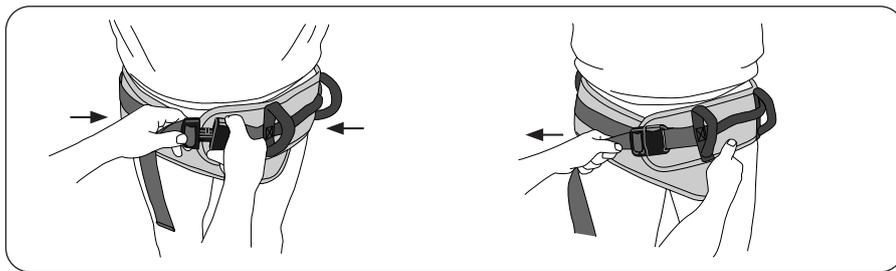


Retirada

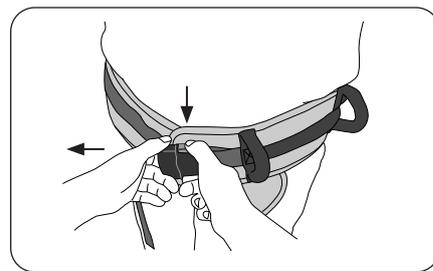


Áreas de uso

Elevación de una posición de sentado a otra de pie, traslado de posición de sentado a posición de sentado y como soporte para estar de pie o andar.

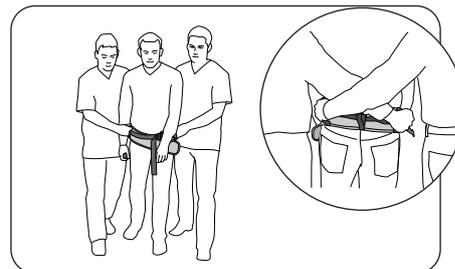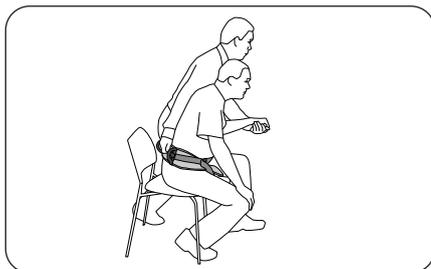

Descripción general de HandyBelt

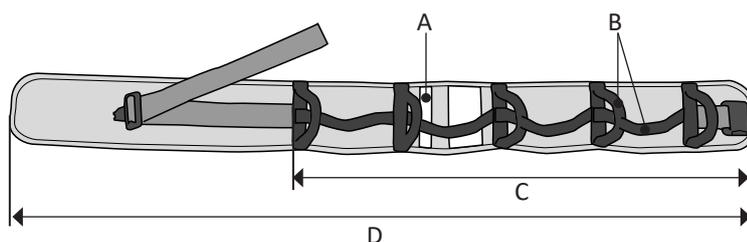

Nombre	N.º de prod.	Talla	Marcado de tallas (A)	Número de asas (B)	Longitud (C/D)
Cinturón HandyBelt	3760014	S Pequeño	Naranja	7	60/100 cm (24"/39")
Cinturón HandyBelt	3760015	M Mediano	Amarillo	9	75/120 cm (30"/47")
Cinturón HandyBelt	3760016	L Grande	Azul	11	90/140 cm (35"/55")
Cinturón HandyBelt	3760017	XL Extragrande	Negro	13	110/180 cm (43"/71")

Material: poliéster

El tejido de Handybelt no está fabricado con materiales ignífugos.

Carga máxima: Cada asa puede soportar cargas de hasta 30 kg/66 lb

Productos Alternativos

Es importante asegurarse de que la operación de traslado no sea demasiado agotadora para el cuidador. Si el paciente necesita más apoyo, Liko recomienda otros productos de nuestra amplia gama de complementos de ayuda para la elevación y la marcha.

Productos alternativos de la gama Liko:

Elevador de posición sentada a posición de pie Sabina

Liko LiftPants en combinación con una grúa de pacientes

Liko MasterVest en combinación con una grúa de pacientes



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Suecia
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings inc.

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom