


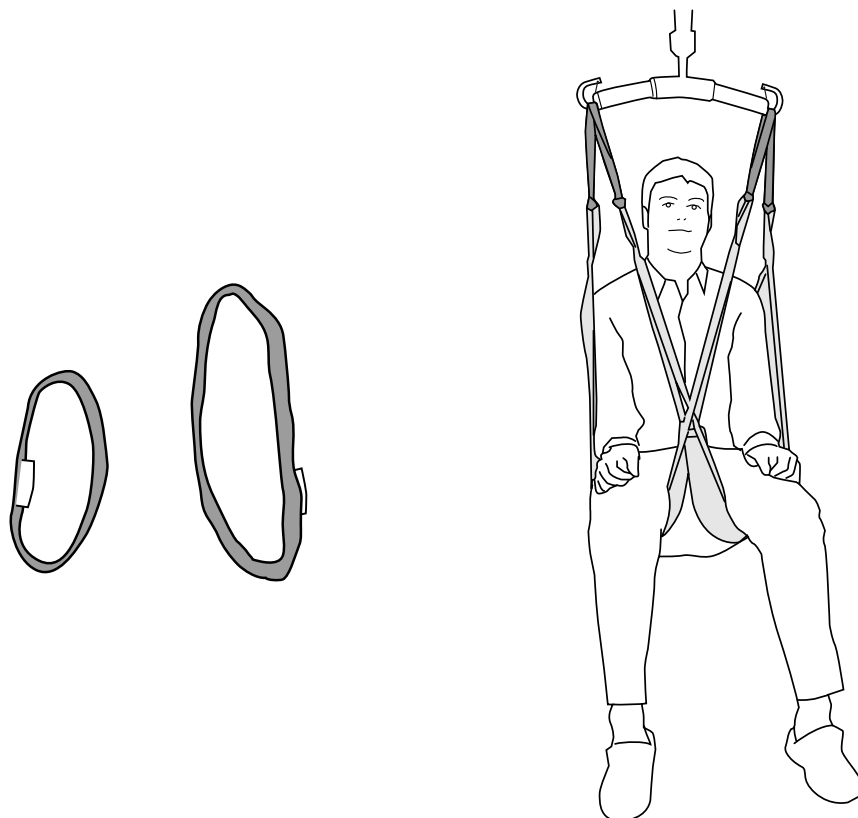

Produktbeskrivelse

Likos Extension Loops er beregnet til enkle justeringer af Likos tilbehørssortiment. De fastgøres til båndløgkerne og løkkebåndene for at indstille længden efter behov.

Extension Loops fås i to forskellige længder og i farverne grøn eller grå. Hvilken længde du vælger, afhænger af, hvor stor en justering du ønsker at foretage.


I dette dokument henvises der til den person, der skal løftes, som brugeren, og den person, som hjælper til, kaldes for medhjælperen.

VIGTIGT!

Løft og forflytning af en bruger medfører altid en vis risiko. Læs derfor brugsanvisningen til liften og løftetilbehøret før brug. Det er vigtigt at have læst og forstået indholdet i brugsanvisningen. Udstyret bør kun anvendes af oplært personale. Kontrollér, at løftetilbehøret passer til den lift, der anvendes. Udvis forsigtighed og omsorg ved brug. Som medhjælper er du altid ansvarlig for brugerens sikkerhed. Du skal være velinformeret om brugerens evne til at klare løftesituationen. Hvis noget er uklart, skal du kontakte producenten eller leverandøren.

Symbolbeskrivelse

Disse symboler findes i dette dokument og/eller på produktet.

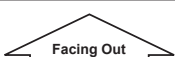Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: Denne situation kræver ekstra forsigtighed og opmærksomhed
	Læs brugsanvisningen før brug
	CE-mærke
	Juridisk producent
	Produktionsdato
	Produktidentifikator
	Serienummer
	Medicinsk udstyr
	Må ikke renses kemisk
	Må ikke stryges
	Tørretumbling
	Må ikke tørres i tørretumbler
	Vask Symbolet er altid i kombination med den anbefalede temperatur i °C og °F.
	Latexfri
	Periodisk eftersyn
	Må ikke bleges
	Tørring på snor i skyggen
	Skal vende opad med symbol på ydersiden af udstyret.
	Symbol på ydersiden af udstyret.
 (01) 0100887761997127 (11) AAMMDD (21) 012345678910	GS1 datamatrixstregkode, der kan indeholde følgende oplysninger. (01) Globalt handelsvarenummer (11) Produktionsdato (21) Serienummer

Sikkerhedsanvisninger

Vær opmærksom på følgende, før du løfter:

- Bemærk, at løftesejlets geometri ændres, når du fastgør Extension Loops til enkelte båndløg. En ændring af løftesejlets geometri kan påvirke sikkerheden, så vær forsigtig under test, og testen skal udføres af en autoriseret person, der kan godkende brug af løftesejl.
- Kontroller, at Extension Loops er korrekt fastgjort til løftesejlet/løftetilbehøret før hvert løft. Vær særligt opmærksom efter vask.
- På trods af, at Likos løftebøjler er forsynet med afkrogningsbeskyttelse, skal der udvises særlig forsigtighed. Inden brugeren løftes fra underlaget, men når båndene er strakt helt ud, skal det kontrolleres, at båndene er hængt korrekt på løftebøjleens kroge.
- Arbejd altid ergonomisk. Udnyt brugerens evne til at deltage aktivt i løftet.
- Når løftesejlet ikke anvendes, må det ikke placeres i direkte sollys.

Forkert fastgørelse af løftesejlet til løftebøjlen kan forårsage alvorlig skade på brugeren.

Manuel vending af brugeren i sengen kan medføre skader på medhjælperen.

 Medicinsk klasse I-produkt

Produktændringer

Likos produkter udvikles løbende, hvorfor vi forbeholder os ret til at foretage produktændringer uden forudgående varsel. Kontakt din repræsentant fra Hill-Rom for rådgivning og information om produktopgraderinger.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko er certificeret iht. ISO 9001 og den tilsvarende standard for medicinsk udstyr ISO 13485. Liko er også certificeret iht. miljøstandarden ISO 14001.

Meddelelse til brugere og/eller patienter i EU

Enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med udstyret, skal rapporteres til fabrikanten og den kompetente myndighed i brugerens og/eller patientens medlemsstat.

Eftersyn og vedligeholdelse

Efterse produktet før hver brug. Kontrollér følgende punkter for slid og beskadigelse:

- Bånd
- Sømme

⚠ Anvend ikke beskadiget liftilbehør.

Hvis noget er uklart, bedes du kontakte fabrikanten eller leverandøren.

Vaskeanvisning: Se produktmærket på Extension Loop samt det vedhæftede bilag "Vedligeholdelsesanvisninger til Likos løftesejl".

Periodisk eftersyn

Produktet skal efterses mindst hver 6. måned. Hyppigere eftersyn kan være nødvendige, såfremt produktet anvendes eller vaskes oftere end normalt. For protokoller bedes du kontakte din Hill-Rom-repræsentant.

Forventet levetid

Hvis produktet er fremstillet af grønne polyesterremme, har det en forventet levetid på 5 år. Hvis produktet er fremstillet i gråt polyester, har det en forventet levetid på 3 år. Den forventede levetid er baseret på, at produktet anvendes til 10 løft pr. dag, og vaskes en gang om ugen iht. vaskeanvisningen. Hill-Rom anbefaler, at produktet kun anvendes inden for den forventede levetid.


Anvisninger for genanvendelse

Hele Extension Loop skal sorteres som brændbart affald.


Hill-Rom evaluerer og giver vejledning til sine brugere om sikker håndtering og bortskaffelse af sit udstyr for at hjælpe med at forebygge skader, herunder bl.a. snitsår, punkteringer af hud og hudafskrabninger, og om eventuel nødvendig rengøring og desinfektion af det medicinske udstyr efter brug og før bortskaffelse. Kunderne skal overholde alle nationale, regionale og/eller lokale love og bestemmelser, som vedrører sikker bortskaffelse af medicinsk udstyr og tilbehør.

I tvivlsspørgsmål skal brugeren af enheden først kontakte Hill-Roms tekniske support for at få vejledning angående protokoller for sikker bortskaffelse.

Montering

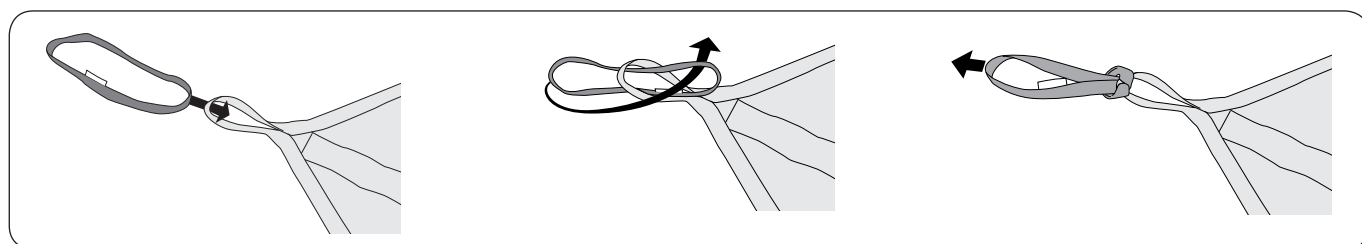


Anvendelsesområder

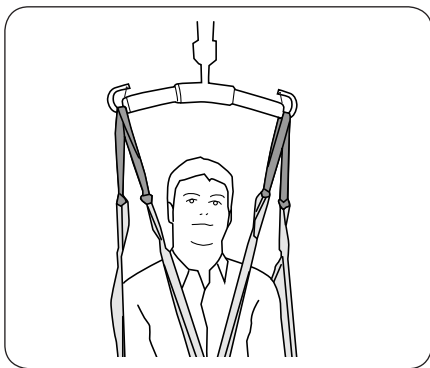


1. Forøgelse af afstanden mellem hoved og løftebøjle

Forlæng **alle** løftesejlets/løftetilbehørets båndløgner for at øge afstanden mellem patientens hoved og løftebøjlen. Bemærk, at jo længere Extension Loops der anvendes, jo højere er løftesejlets samlede højde, og det kan gøre det vanskeligere at løfte til den ønskede højde.

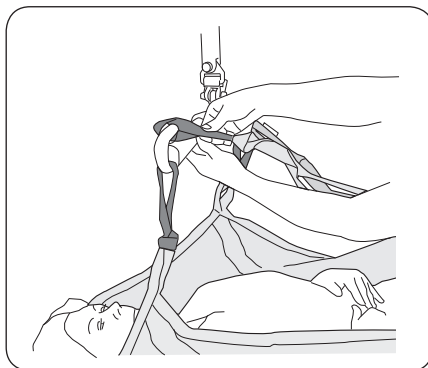


2. Forenklet påhægtning på løftebøjlen

Hvis løftesejlets/løftetilbehørets båndløgner ikke når op til løftebøjlen, skal du forlænge **alle** løftesejlets båndløgner for at gøre sammenkoblingen nemmere. Hvis de forlænges for meget, kan det være vanskeligt at løfte patienten til den ønskede højde.

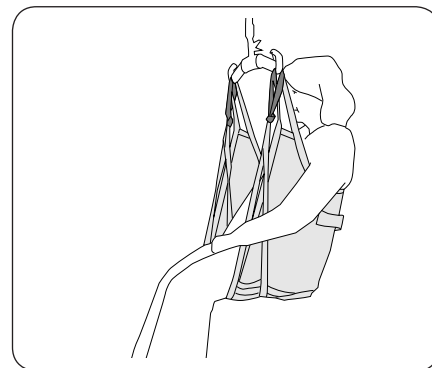


3. Mere opret siddestilling

Når du monterer benstøtterne på et løftesejl, der overlapper under begge ben, kan det nogle gange være nødvendigt at forlænge benstøttens båndløgner for at opnå en mere opret siddestilling.

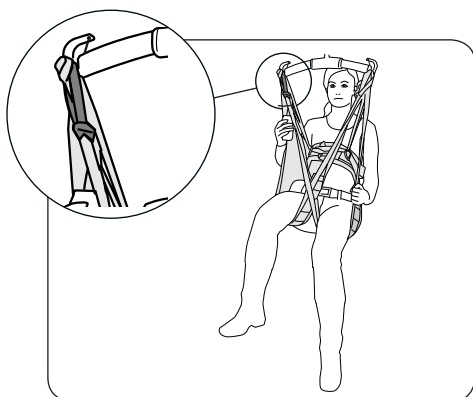


4. Mindre bøjning af hofte

Forlæng båndløgner på løftesejlets benstøtte for at opnå en mere åben hoftevinkel. Dette kan gøres på den ene af benstøttens båndløgner eller på begge efter behov.

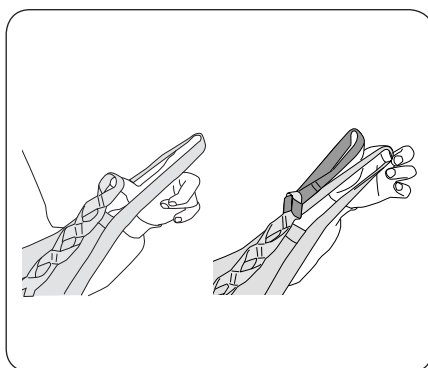

5. Indstilling af løjkebåndenes længde


Forlæng løftesejlets/løftetilbehørets løjkebånd, hvis de er for korte. Extension Loop kan fastgøres på en af de udvendige løjker på løjkebåndet efter behov.

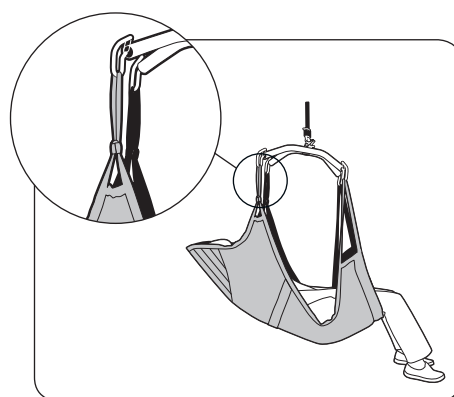

6. Kombineret med Comfort Sling Plus/Comfort Sling

Når du kombinerer Comfort Sling Plus, model 300/310/350/360 eller Comfort Sling, model 30/31/35/36 med Liko Sling Cross-bars eller Side Bars, skal du **altid** forlænge løftesejlets øverste båndløgner. Denne kombination giver en mere tilbagelænet siddestilling med mindre bøjning af hoftelæddet. Se brugsanvisningen til løftesejlet.

Oversigt over Liko™ Extension Loop

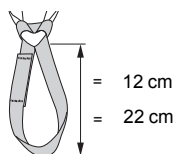

Betegnelse	Varenr.	Forlænger med	Maksimal belastning
Extension Loop, grøn, 12 cm	3691102	12 cm	150 kg/løkke
Extension Loop, grøn, 22 cm	3691103	22 cm	150 kg/løkke
Extension Loop, grå, 12 cm	3691302	12 cm	150 kg/løkke
Extension Loop, grå, 22 cm	3691303	22 cm	150 kg/løkke

Godkendte kombinationer

Likos Extension Loops må kun anvendes sammen med Likos løftetilbehør. Vi godkender kombinationer med følgende løftetilbehør i henhold til de anvendelsesområder (1-6), der er beskrevet på side 5.

	Anvendelses- område 1*	Anvendelses- område 2*	Anvendelses- område 3	Anvendelses- område 4	Anvendelses- område 5	Anvendelses- område 6
Universal Sling, model 00/02	2	2	2	2	4	4
Ultra Sling, model 06 - se brugsanvisningen til produktet	-	-	-	-	-	-
Original Sling, model 10/11	2	2	2	2	4	4
Original High Back Sling, model 20/21	2	2	2	2	4	4
Silhouette Sling, model 22	2	2	2	2	4	4
Solo High Back Sling, model 25	2	2	2	2	4	4
Soft Original High Back Sling, model 26	2	2	2	2	4	4
Comfort Sling, model 30/31/35/36	2	2	4	4	4	1
Comfort Sling Plus, model 300/310/350/360	2	2	4	4	4	1
Hygiene Sling, model 40/41/45/46	2	4	3	3	2	4
HygieneVest, model 50/55	2	4	2	2	2	4
MasterVest, model 60/64	2	4	4	4	2	4
Vest for StandingShell, model 67	2	2	4	4	2	4
Amputee Sling, model 70/75	2	2	3	3**	4	4
Lift Pants, model 92	2	4	4	4	2	4
Ultra Lift Pants, model 920	2	4	4	4	2	4
Liko Straps, varenr. 3590115	3	3	4	4	4	4
Head Support	2	2	4	4	4	4
Stat RepoSheet Original	4	4	4	4	4	4
Sabina - tilbehør						
SupportVest, model 91	4	2	4	4	4	4
Solo SupportVest, model 911	4	2	4	4	4	4
SafetyVest, model 93/94	4	2	4	4	2	4
ComfortVest, model 95	4	2	4	4	2	4
Seatstrap	4	2	4	4	2	4
Planløfter - tilbehør						
LiftSheet Octo, model 83	4	2	4	4	4	4
Solo Octo LiftSheet, model 83	4	2	4	4	4	4
LiftStrap Octo, model 83	4	2	4	4	4	4
Cross Strap Octo, model 83	4	2	4	4	4	4
LiftSheet XL, model 84	4	2	4	4	4	4
LiftStrap XL, model 84	4	2	4	4	4	4

Forklaring: 1 = Skal anvendes 2 = Kan anvendes 3 = Kan anvendes, men bemærk, at løftesejlets geometri er ændret 4 = Ikke relevant/Frårådes

* Forlæng alle produktets båndløg.

** Med krydsede benstøtter.



www.hillrom.com