


# Liko LiftPants Hebegurt, Mod. 92

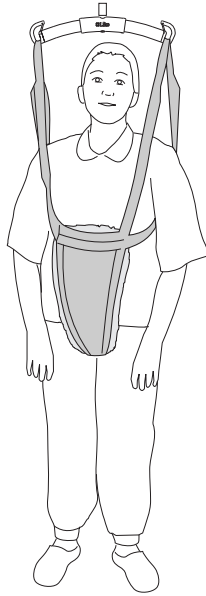

## Gebrauchsanweisung



### Produktbeschreibung

#### Verwendungszweck

Der **Liko LiftPants Hebegurt** ermöglicht sichere Steh- und Gehübungen für Pflegebedürftige mit schlechter Balance und eingeschränkter Beinfunktion und gibt ihnen damit das Selbstvertrauen, neue Schritte zu wagen. Er ist für die Verwendung in folgenden Umgebungen vorgesehen: Gesundheitswesen, Intensivstation, Notaufnahme, Rehabilitation, Physiotherapie und Pflegeeinrichtungen.

Es ist wichtig, dass der Pflegebedürftige in der Lage ist, die Beine zu belasten. Der **LiftPants Hebegurt** ermöglicht es dem Pflegebedürftigen, sich zu bewegen, während ihm sein Körpergewicht zu einem mehr oder weniger großen Teil abgenommen wird. Der Hebevorgang ist sicher, sodass der Pflegebedürftige sich selbständig bewegen kann, ohne einen Sturz zu riskieren. Während der Übungen kann der Lifter das gesamte Gewicht aufnehmen, sodass der Pflegebedürftige und der Pfleger sich voll und ganz auf die Übungen konzentrieren können, ohne Angst vor den Folgen eines unbedachten Schritts haben zu müssen.

Der **LiftPants Hebegurt** nimmt den Großteil des Gewichts im Schritt auf, wodurch er sich möglicherweise für Pflegebedürftige eignet, die empfindlich gegenüber Druck am Oberkörper oder unter den Armen sind. Ein gepolsterter Schritt verringert den Druck.

Der **LiftPants Hebegurt** wurde nicht für die Anwendung bei schwangeren Pflegebedürftigen getestet.

#### Größen

Die **LiftPants Hebegurte** sind in verschiedenen Größen erhältlich, um unterschiedlichen Körpergrößen und -umfängen gerecht zu werden.

#### Geeignete Lifter

Der **LiftPants Hebegurt** kann sowohl mit den Deckenliftern als auch den mobilen Liftern von Liko verwendet werden.

Mit einem Deckenlifter kann sich der Pflegebedürftige im gesamten Hebebereich frei bewegen, indem er einen **LikoGuard** Deckenlifter, **Likorall** Deckenlifter oder **Multirall** Deckenlifter verwendet. Der **LiftPants Hebegurt** kann auch mit den mobilen Liftern von Liko verwendet werden, idealerweise mit dem mobilen Lifter **Golvo**, dem mobilen Lifter **Uno** oder dem mobilen Lifter **Viking**. Während des Trainings mit dem **LiftPants Hebegurt** kann es für einige Pflegebedürftige von Vorteil sein, wenn ein Teil des Gewichts von den Armen, z. B. durch eine Gehstütze (Gehwagen, Gehstöcke), aufgefangen wird.

#### Alternativen

Als Alternative zum **Liko LiftPants Hebegurt** empfehlen wir die **Liko MasterVest**, Mod. 60.

*In dieser Gebrauchsanweisung wird die zu hebende Person als „Pflegebedürftiger“ und die Person, die dem Pflegebedürftigen behilflich ist, als „Pfleger“ bezeichnet. Die weibliche Form ist hierbei eingeschlossen.*

#### WICHTIG!

Das Heben und Transferieren eines Pflegebedürftigen ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Lesen Sie vor der Benutzung die Gebrauchsanweisung sowohl des Lifters für den Pflegebedürftigen als auch die des Lifter- und Hebezubehörs aufmerksam durch. Es ist wichtig, den Inhalt der Gebrauchsanweisung vollständig verstanden zu haben. Diese Vorrichtung darf ausschließlich von geschulten Pflegern verwendet werden. Um geschult zu werden, muss ein Pfleger die Gebrauchsanweisung lesen und verstehen. Stellen Sie sicher, dass das Hebezubehör für den verwendeten Lifter geeignet ist. Gehen Sie bei der Verwendung mit Sorgfalt und Vorsicht vor. Als Pfleger sind Sie jederzeit für die Sicherheit des Pflegebedürftigen verantwortlich. Sie müssen sich über die Fähigkeit des Pflegebedürftigen, die Hebesituation zu meistern, im Klaren sein. Wenden Sie sich bei Unklarheiten an den Hersteller oder an den Zulieferer.

# Sicherheitshinweise

## **⚠ Beachten Sie vor dem Heben folgende Punkte:**

- Eine verantwortliche Person in Ihrer Einrichtung sollte von Fall zu Fall entscheiden, ob ein oder mehrere Pfleger nötig sind.
- Stellen Sie sicher, dass der gewählte Hebegurt hinsichtlich des Modells, der Größe, des Gewebes sowie der Ausführung den Bedürfnissen des Pflegebedürftigen gerecht wird.
- Die maximale Tragfähigkeit des gesamten Liftersystems hängt immer von dem Produkt im System ab, das die niedrigste maximale Tragfähigkeit besitzt.
- Um die Sicherheit und Hygiene des Pflegebedürftigen zu schützen, darf der Hebegurt nicht bei mehreren Pflegebedürftigen verwendet werden.
- Planen Sie den Hebevorgang, damit dieser so sicher und reibungslos wie möglich durchgeführt werden kann.
- Stellen Sie sicher, dass das Lifter- und Hebezubehör senkrecht hängt und sich frei bewegen kann.
- Auch wenn die Liko Hebebügel mit Schutzhäkchen ausgestattet sind, ist besondere Vorsicht geboten. Vergewissern Sie sich vor dem Anheben des Pflegebedürftigen, aber nach dem vollständigen Spannen der Hebebänder, dass diese korrekt an den Haken des Hebebügels befestigt sind.
- Heben Sie einen Pflegebedürftigen niemals höher an, als es für das Heben und Umbetten notwendig ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Laufrollen von Rollstühlen, Betten, Tragen usw. während des Hebens bzw. Umbettens arretiert sind.
- Arbeiten Sie stets ergonomisch. Machen Sie sich das Vermögen des Pflegebedürftigen, sich aktiv am Hebevorgang zu beteiligen, zunutze.

**⚠ Eine falsche Befestigung des Hebegurts am Hebebügel kann zu schweren Verletzungen des Pflegebedürftigen führen.**

**⚠ Lassen Sie einen Pflegebedürftigen während eines Hebevorgangs niemals unbeaufsichtigt!**

**⚠ Lassen Sie Kinder in der Nähe des Hebegurts niemals unbeaufsichtigt!**

**⚠ Bewahren Sie den Hebegurt nicht an Orten auf, an denen er direktem Sonnenlicht oder Wärmequellen wie Heizkörpern, Kaminen oder Öfen ausgesetzt ist!**

**⚠ Bedienen, lagern und transportieren Sie den Hebegurt nicht in der Nähe von Haustieren, Schädlingen oder unbeaufsichtigten Kindern!**

**⚠ Eine falsche Befestigung des Hebegurts am Hebebügel kann zu schweren Verletzungen des Pflegebedürftigen führen!**

**⚠ Stellen Sie sicher, dass sich der Pflegebedürftige und der Pfleger während des Hebevorgangs von Quetschstellen und beweglichen Teilen fernhalten. Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen.**

**⚠ Beurteilen Sie von Fall zu Fall, ob die Gefahr besteht, dass sich der Pflegebedürftige einklemmt, und überwachen Sie diesen entsprechend. Stellen Sie sicher, dass sich Kopf und Gliedmaßen des Pflegebedürftigen während des Hebevorgangs nicht in oder zwischen den Hebegurtschlaufen befinden. Andernfalls können schwere Verletzungen oder der Tod des Pflegebedürftigen die Folge sein.**

**⚠ Der LiftPants Hebegurt wurde nicht für die Anwendung bei schwangeren Pflegebedürftigen getestet.**

**CE** Medizintechnisches Produkt der Klasse I

**PATENT [www.hillrom.com/patents](http://www.hillrom.com/patents)**

**Das Produkt ist möglicherweise durch ein oder mehrere Patent(e) geschützt. Siehe obige Internetadresse.**

Die Hillrom Unternehmen sind Inhaber von Patenten und anhängigen Patentanmeldungen in Europa, den USA und anderen Ländern.

## **Produktänderungen**

Die Produkte von Liko werden ständig weiterentwickelt. Daher behalten wir uns das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Produkt vorzunehmen. Informationen zu Produktneuerungen erhalten Sie von Ihrer Hillrom-Vertretung.

## **Design and Quality by Liko in Sweden**

Das Qualitätsmanagementsystem von Liko ist nach ISO 9001 sowie nach ISO 13485, deren Entsprechung für Medizinproduktehersteller, zertifiziert. Das Umweltmanagement von Liko ist nach ISO 14001 zertifiziert.

## **Hinweis für Benutzer und/oder Pflegebedürftige in der EU**

Alle schwerwiegenden Vorfälle, die im Zusammenhang mit dem Gerät aufgetreten sind, müssen dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats gemeldet werden, in dem der Benutzer und/oder Pflegebedürftige ansässig ist.

# Symbolerläuterung

Diese Symbole finden Sie möglicherweise in diesem Dokument und/oder auf dem Produkt.

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Warnung: In dieser Situation muss mit besonderer Sorgfalt und Vorsicht vorgegangen werden. Dieses Symbol ist ein gelbes Dreieck mit schwarzem Rand und einem schwarzen Ausrufezeichen in der Mitte.		
	Recyclbar		
	Vor der Verwendung die Gebrauchsanweisung lesen. Dieses Symbol ist ein blauer Kreis mit einem weißen Bild einer Person, die ein Buch liest.		
	Vor der Verwendung die Gebrauchsanweisung lesen		<b>Achtung!</b> Lesen Sie die Gebrauchsanweisung.
	CE-Kennzeichen. Konformitätskennzeichen der Europäischen Medizinproduktrichtlinie, Medizinprodukt der Klasse I.		
	Autorisierter Vertreter in der Schweiz		
	Verantwortlicher Hersteller		Herstellungsdatum
	Produktreferenz		Medizinprodukt
	Seriennummer		Eindeutige Geräteerkennung
	Nicht chemisch reinigen		Trocknen auf Wäscheständer im Schatten
	Nicht bügeln		Nicht bleichen
	Trocknen im Wäschetrockner		Nicht waschen
	Nicht im Trockner trocknen		
	Das Waschsymbold wird immer zusammen mit der empfohlenen Temperatur in °C und °F dargestellt.		
	Ohne Latex		
	Periodische Inspektion		
	Produkt nicht verwenden (Nur bei Solo Produkten, und erst nach dem Waschen sichtbar, wenn die Verwendung untersagt ist)		Name des Pflegebedürftigen
	Verwendung für nur jeweils einen Pflegebedürftigen (nur bei Solo Produkten)		
	Das Symbol weist nach oben und befindet sich an der Außenseite des Produkts.		Das Symbol befindet sich an der Außenseite des Produkts.
	GS1 Datenmatrix-Barcode, der folgende Informationen enthalten kann: (01) Global Trade Item Number (GTIN) (11) Produktionsdatum (21) Seriennummer		

# Pflege und Überprüfung

Überprüfen Sie den Hebegurt vor jeder Benutzung. Überprüfen Sie folgende Punkte auf Verschleiß und Beschädigung:

- Gewebe
- Bänder
- Nähte
- Schlaufen

**⚠ Verwenden Sie niemals beschädigtes Lifter- und Hebezubehör.**

Wenden Sie sich bei Unklarheiten bitte an den Hersteller oder Zulieferer.

**Anweisungen zum Waschen und zur Desinfektion:** Siehe Produktetikett des Hebegurts und Anhang „Pflege und Wartung von Liko Hebegurten“.

**Material:** Das LiftPants Zubehör besteht aus Polyester

**Falls der Hebegurt zum Baden oder Duschen verwendet wird:** Nach seiner Verwendung zum Baden oder Duschen sollte der Hebegurt so aufbewahrt werden, dass er schnellstmöglich trocknet.

## Periodische Inspektion

Das Produkt muss mindestens einmal alle 6 Monate überprüft werden. Regelmäßigere Inspektionen sind möglicherweise erforderlich, wenn das Produkt häufiger als üblich verwendet oder gewaschen wird. Weitere Protokolle erhalten Sie von Ihrem Hillrom Ansprechpartner.

## Zu erwartende Lebensdauer

Das Produkt hat bei normaler Nutzung eine zu erwartende Lebensdauer von 3 Jahren. Die zu erwartende Lebensdauer variiert und hängt vom Gewebe, der Benutzungshäufigkeit, dem Waschvorgang sowie dem zu tragenden Gewicht ab.


## ♻ Recycling-Anweisungen

Der gesamte Hebegurt, einschließlich Verstärkungselementen, Polstermaterial usw., muss als brennbarer Abfall sortiert werden.

Hillrom beurteilt Anleitungen und bietet den Benutzern Hilfestellung bei der sicheren Handhabung und Entsorgung der Hebehilfsmittel, um u. a. Verletzungen wie Schnitte, Einstiche in die Haut und Abschürfungen zu vermeiden, sowie Informationen zu allen erforderlichen Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen des Medizinprodukts nach dem Gebrauch und vor der Entsorgung. Die Kunden müssen alle Gesetze und Vorschriften des Bundes, des Landes, der Region und/oder der Kommune einhalten, die sich auf die sichere Entsorgung von Medizinprodukten und Zubehör beziehen.

Im Zweifelsfall muss sich der Benutzer des Produkts zunächst an den Technischen Kundendienst von Hillrom wenden, um Informationen über Protokolle zur sicheren Entsorgung zu erhalten.




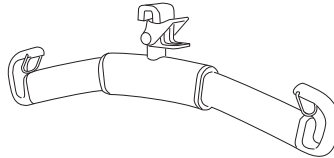
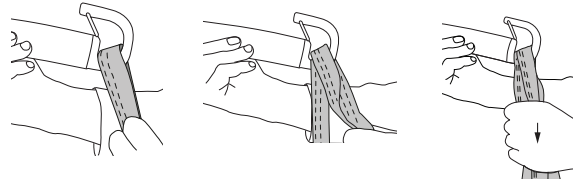
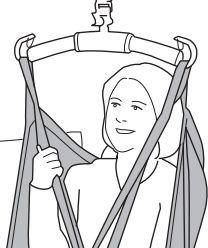
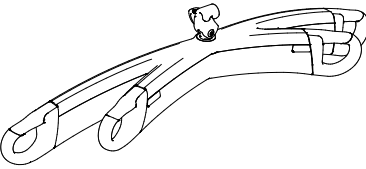
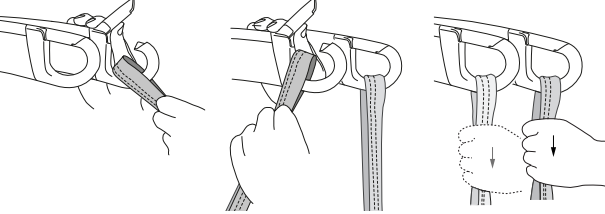
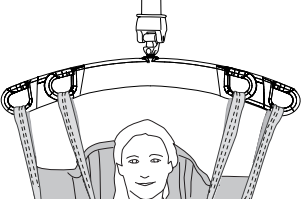
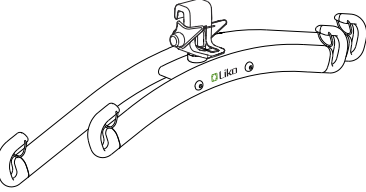
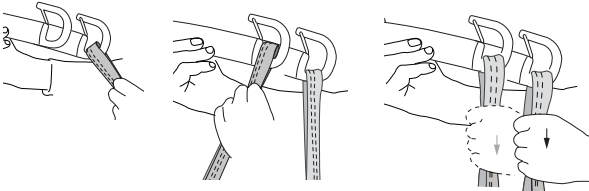
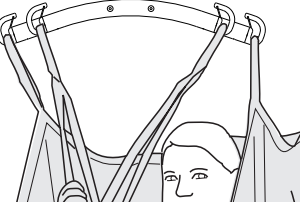
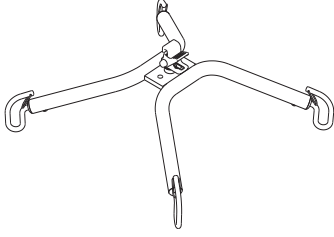
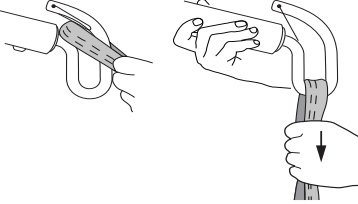
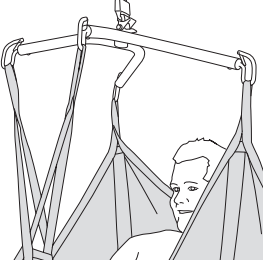
## Definitionen

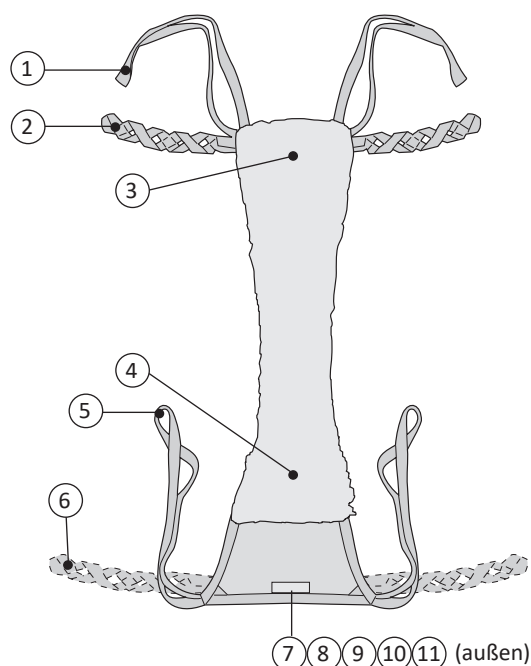


1. Vorderes Aufhängeband
2. Schlaufenband (Größen S, M und L)
3. Vorderer Teil
4. Hinterer Teil
5. Hinteres Aufhängeband
6. Schlaufenband (nur für die Größe XL)
7. Größenangabe
8. Seriennummer
9. Produktetikett
10. Etikett: Periodische Inspektion
11. Etikett: Individuelle Kennzeichnung (Gehört)

**HINWEIS!** Bei der Größe XL befinden sich die Schlaufenbänder am hinteren und nicht am vorderen Teil.


# Anbringen eines Hebegurts an verschiedenen Hebebügeln

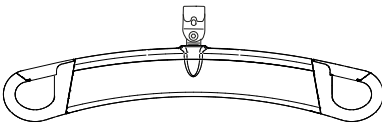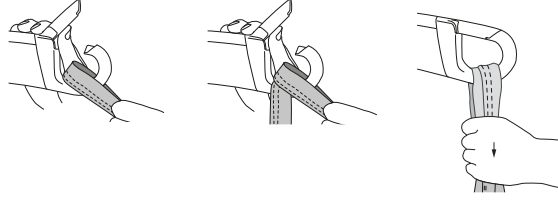Hebebügel	Schlaufen an den Haken des Hebebügels befestigen	Richtig
 <p data-bbox="279 492 422 526">SlingGuard</p>		
 <p data-bbox="287 784 414 817">Universal</p>		
 <p data-bbox="247 1064 462 1097">SlingGuard Twin</p>		
 <p data-bbox="255 1366 446 1400">Universal Twin</p>		
 <p data-bbox="287 1668 414 1702">Cross-Bar</p>		

## Falsch!

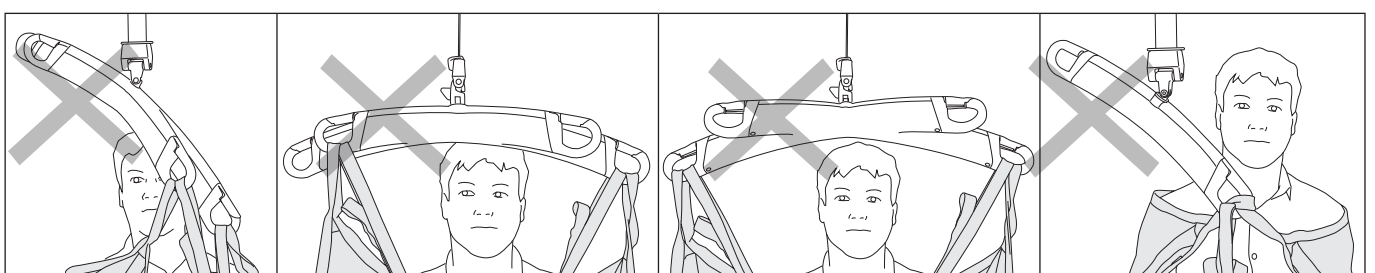


# Anbringen eines LiftPants Hebegurts an einen Hehebügel mit 4 Haken (Twin- und Kreuzbügel)

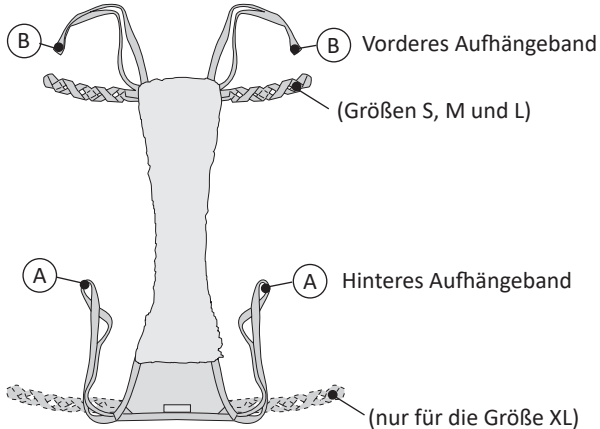


**B** Vorderes Aufhängeband  
(Größen S, M und L)

**A** Hinteres Aufhängeband  
(nur für die Größe XL)


**1.**

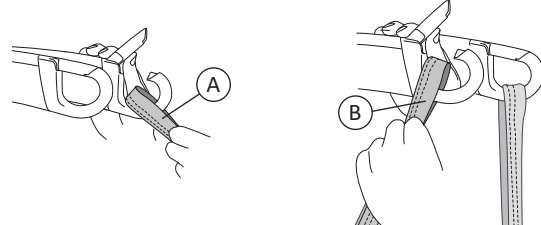

**2.**

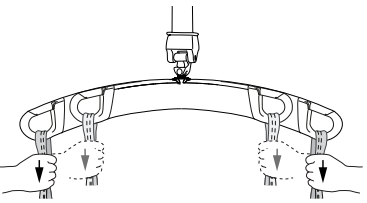

**3.**

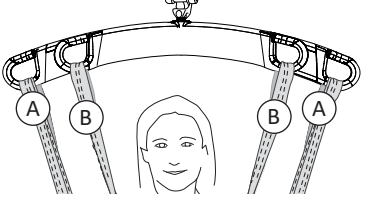

Die Abbildungen 1, 2 und 3 zeigen einen Twin-Bar. Die Vorgehensweise gilt jedoch auch für Cross-Bars und Hehebügel mit Seitenbügel.

## Auswählen der Größe des Hebegurts

**⚠ Wählen Sie keine zu große Größe aus, da dies bedeuten kann, dass die erforderliche Hubhöhe nicht erreicht werden kann.**

**⚠ Verwenden Sie nur einen Hebegurt mit der richtigen Größe für den Pflegebedürftigen. Die richtige Größe muss von einem geschulten Pfleger beurteilt werden. Der Pflegebedürftige könnte eingeklemmt werden oder ersticken.**

Der Brustumfang des Pflegebedürftigen wird bei der Größenauswahl des Hebegurts als Richtlinie herangezogen. Vergleichen Sie die Abmessung für die Brust des Pflegebedürftigen (siehe Messanweisung) und die Abmessung des Hebegurts (siehe Tabelle oder Messanweisung).

Gleichen Sie den Brustumfang des Pflegebedürftigen mit der Produktgröße in der nachfolgenden Abbildung bzw. Tabelle ab.

Der Lift Pants Hebegurt sollte bis über die Taille reichen, jedoch nicht soweit nach oben, dass Druck unter den Armen aufgebracht wird.

Messen Sie den Pflegebedürftigen mit einem Maßband am Rücken, und zwar von direkt unterm Schritts (an der Seite gemessen) bis zur Brusthöhe. Eine schwerere Person benötigt möglicherweise eine größere Größe als eine schlanke Person, auch wenn beide gleich groß sind. Richtlinien für das Gewicht/die Körpergröße des Pflegebedürftigen finden Sie auf der letzten Seite.

### Messen Sie den Pflegebedürftigen wie folgt:


Messen Sie von unterhalb des Schulterblatts den Rücken entlang nach unten bis an die Seite des Schritts und dann bis zur Brust.

### Abmessungen, siehe Seitenlänge (I) des Hauptteils in „Abmessungen“ auf Seite 7:

Größe des Hebegurts	Min. bis max. Brustumfang	Seitenlänge des Hauptteils
<b>S</b>	52–94	85
<b>M</b>	58–116	108
<b>L</b>	90–142	120
<b>XL</b>	116–168	139

Alle Abmessungen sind in cm angegeben.

# Abmessungen

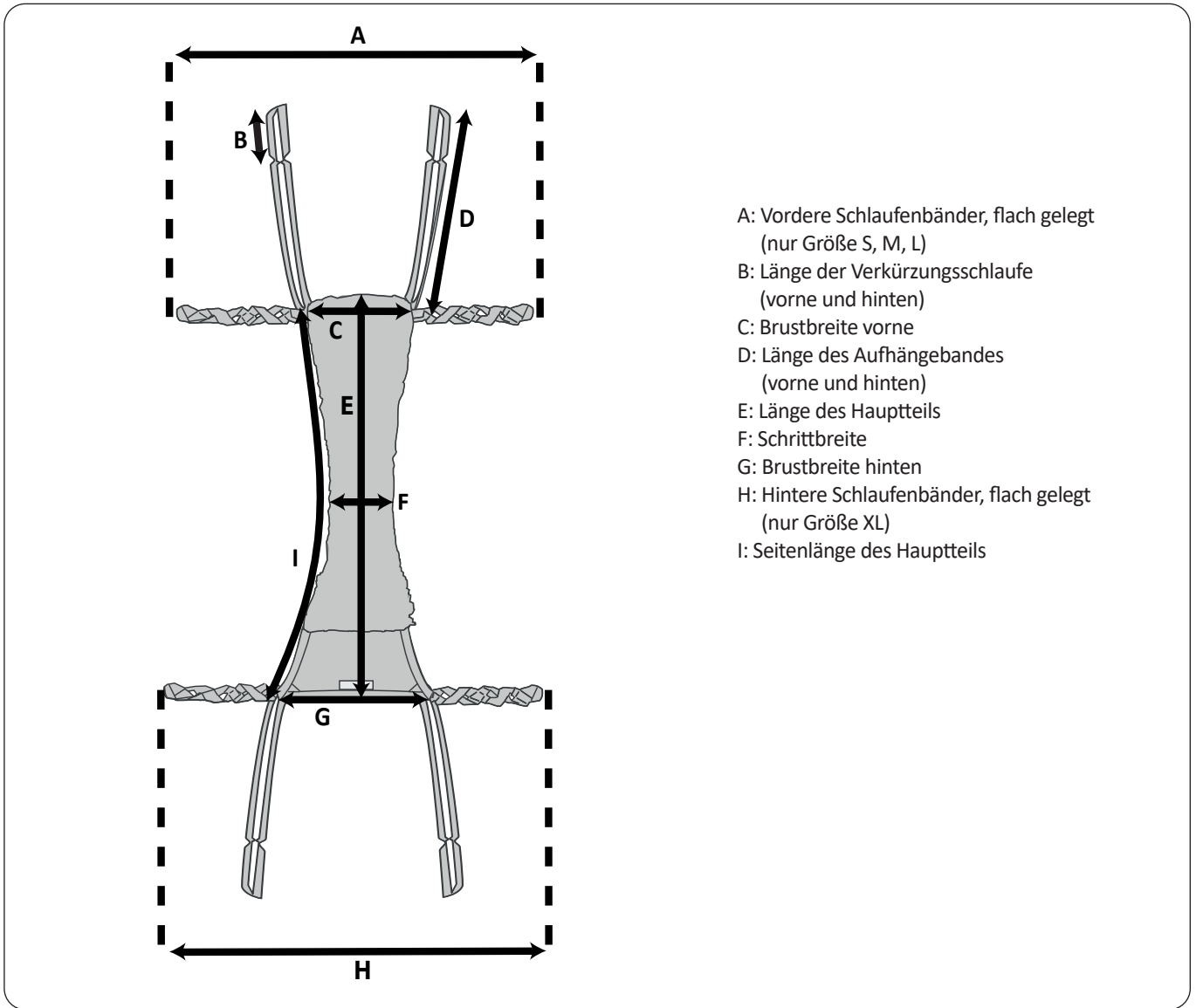


Größenabmessungen in Zentimetern

GRÖSSE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Max. Tragfähigkeit (kg)	Art.-Nr.
S	70	10	17	56	81	10	30	nicht zutreffend	85	200	3592324
M	78	10	20	56	102	10	36	nicht zutreffend	108	200	3592325
L	108	10	25	56	112	10	41	nicht zutreffend	120	200	3592326
XL	nicht zutreffend	10	49	56	131	10	48	125	139	500	3592327

Größenabmessungen in Zoll

GRÖSSE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Max. Tragfähigkeit (lbs)	Art.-Nr.
S	28	4	7	22	32	4	12	nicht zutreffend	34	440	3592324
M	31	4	8	22	40	4	14	nicht zutreffend	42	440	3592325
L	43	4	10	22	44	4	16	nicht zutreffend	47	440	3592326
XL	nicht zutreffend	4	19	22	52	4	19	49	55	1100	3592327


## Anlegen des LiftPants Hebegurts

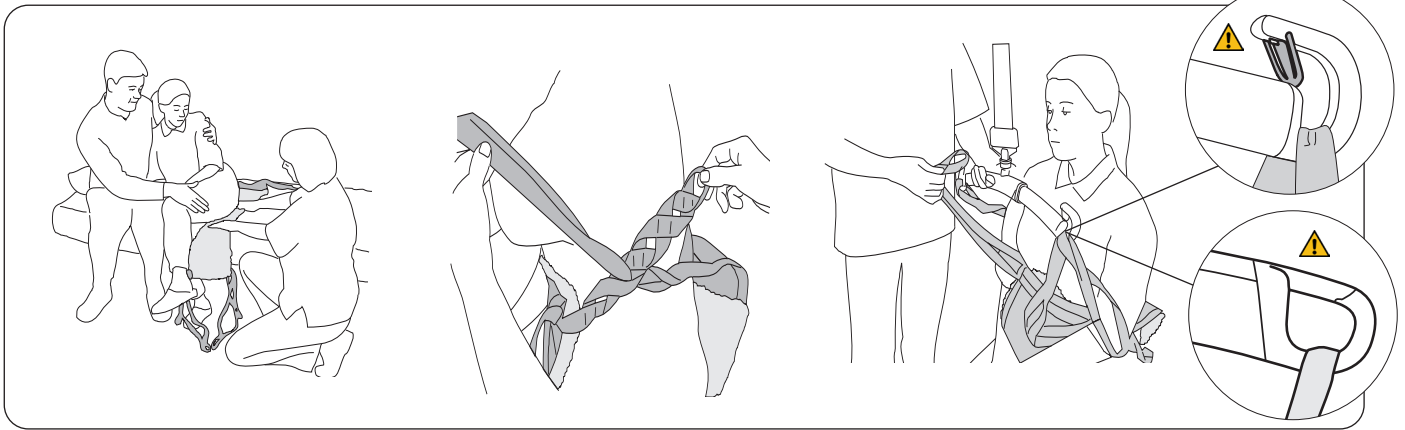

Die Ausgangsposition für die Verwendung des LiftPants Hebegurts ist die Sitzposition. Der Pflegebedürftige lehnt sich zur Seite, damit der Pfleger den LiftPants Hebegurt direkt unter dem Sitz des Pflegebedürftigen positionieren kann. Platzieren Sie den LiftPants Hebegurt soweit wie möglich unter dem Pflegebedürftigen, sodass das Markierungsetikett nach unten und in Richtung der Rückseite des Sitzes zeigt.

Ziehen Sie den vorderen Teil des LiftPants Hebegurts zwischen den Beinen nach oben, sodass sie von vorne Zugang zu den Bändern haben. Führen Sie die hinteren Aufhängebänder (vordere Aufhängebänder für Größe XL) durch die entsprechenden Schlaufen an den Schlaufenbändern (siehe „Anpassen der Schlaufenbänder“ auf Seite 9).

Haken Sie die hinteren und die vorderen Aufhängebänder am Hebebügel ein. Die am weitesten außen gelegenen Schlaufen werden am häufigsten benutzt. Anweisungen zum Anbringen der Hebegurtschlaufen an den verschiedenen Hebebügeln finden Sie unter „Anbringen eines Hebegurts an verschiedenen Hebebügeln“ auf Seite 5 und „Anbringen eines LiftPants Hebegurts an einen Hebebügel mit 4 Haken (Twin- und Kreuzbügel)“ auf Seite 6.

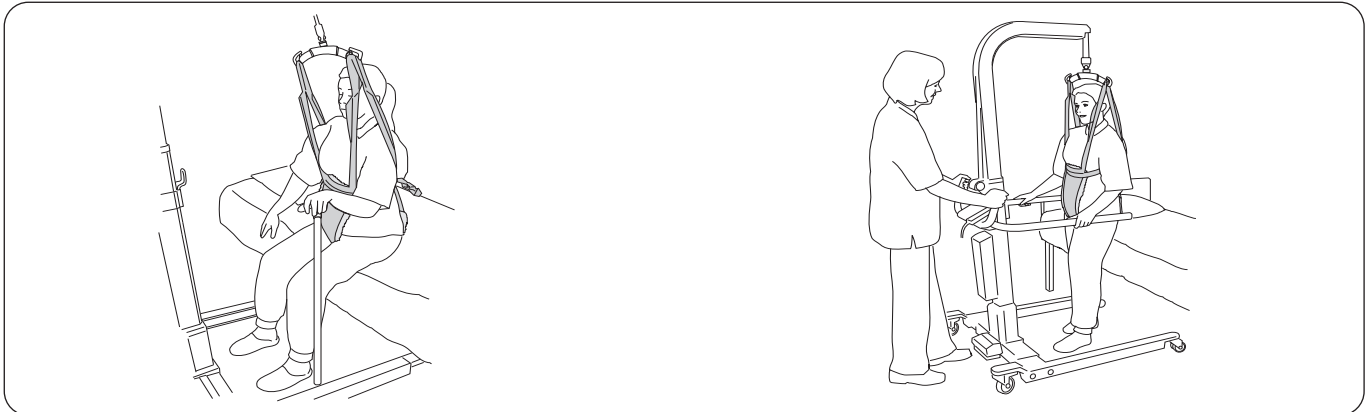


**Bevor der Pflegebedürftige aus der sitzenden Position angehoben wird:** Helfen Sie dem Pflegebedürftigen, sich auf der Sitzfläche so weit wie möglich nach vorne zu bewegen, und bringen Sie seine Füße auf dem Boden so weit wie nötig nach hinten, sodass er bequem aufstehen kann. Erhöhen Sie den Lifter etwas, sodass die Bänder leicht gespannt werden, jedoch ohne dass der Sitz des Pflegebedürftigen zu diesem Zeitpunkt bereits von der darunterliegenden Oberfläche angehoben wird, während Sie sich vergewissern, dass die Spannung der Bänder am Oberkörper des Pflegebedürftigen für diesen so bequem wie möglich ist.

**Beim Heben:** Ziehen Sie den Lifter in Richtung der Hebebewegung nach vorne, um den ordnungsgemäßen und optimalen Gewichtstransfer zu ermöglichen, bis der Pflegebedürftige vollständig gerade steht und sich ausbalanciert hat. Heben Sie den Pflegebedürftigen nur so weit an, dass er angehoben ist, jedoch nach wie vor ausreichend Kontakt mit dem Boden hat. Wenn Sie einen mobilen Lifter mit dem LiftPants Hebegurt benutzen, verwenden Sie nur Lifter, die für das Gewicht des Pflegebedürftigen ausgelegt sind.

### Verkürzungsposition

In bestimmten Fällen ist es vorteilhaft, die Aufhängebänder zu verkürzen, damit größere Pflegebedürftige genügend Platz zum Stehen hat. Die Verkürzungsposition kann vorübergehend verwendet werden, um die richtige Länge zu überprüfen. Eine längere Verwendung kann jedoch zu Schäden an den Nähten führen. Wenn Sie die Aufhängebänder jedoch längerfristig verkürzen möchten, empfehlen wir, Knoten in die Aufhängebänder zu knüpfen, um diese um etwa 10 cm zu verkürzen. Verwenden Sie die Schlaufe am Ende des Aufhängebandes, um das Aufhängeband mit dem Hebebügel zu verbinden.

## Entfernen des LiftPants Hebegurts

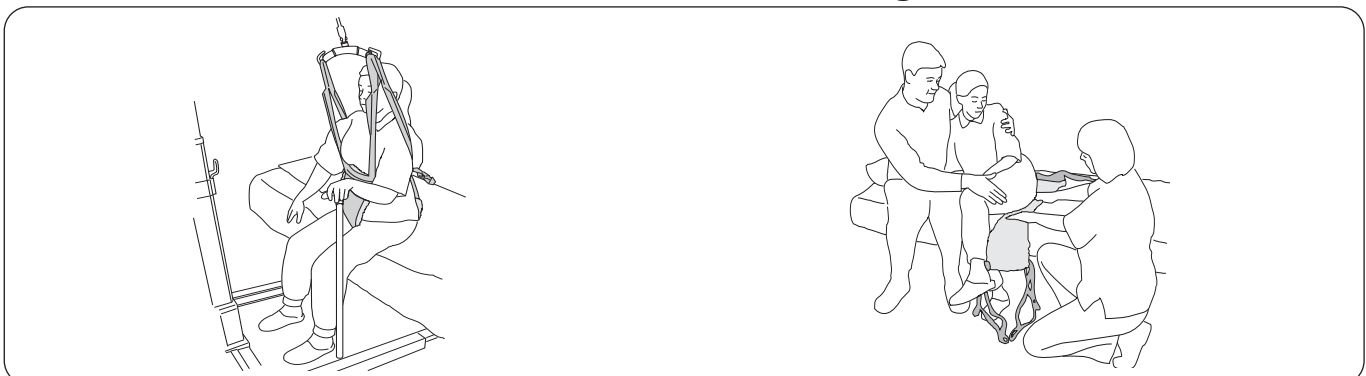


Senken Sie den Pflegebedürftigen in eine sitzende Position ab. Haken Sie die Aufhängebänder aus dem Hebebügel aus. Entfernen Sie die hinteren Aufhängebänder von den Schlaufenbändern.

Fordern Sie den Pflegebedürftigen auf, sich nach einer Seite zu lehnen, und entfernen Sie den LiftPants Hebegurt vorsichtig.



# Anpassen der Schlaufenbänder

Die Schlaufen, die den Oberkörper stützen, sollten weder zu locker noch zu straff sein. Am besten ist eine bequeme Spannung.

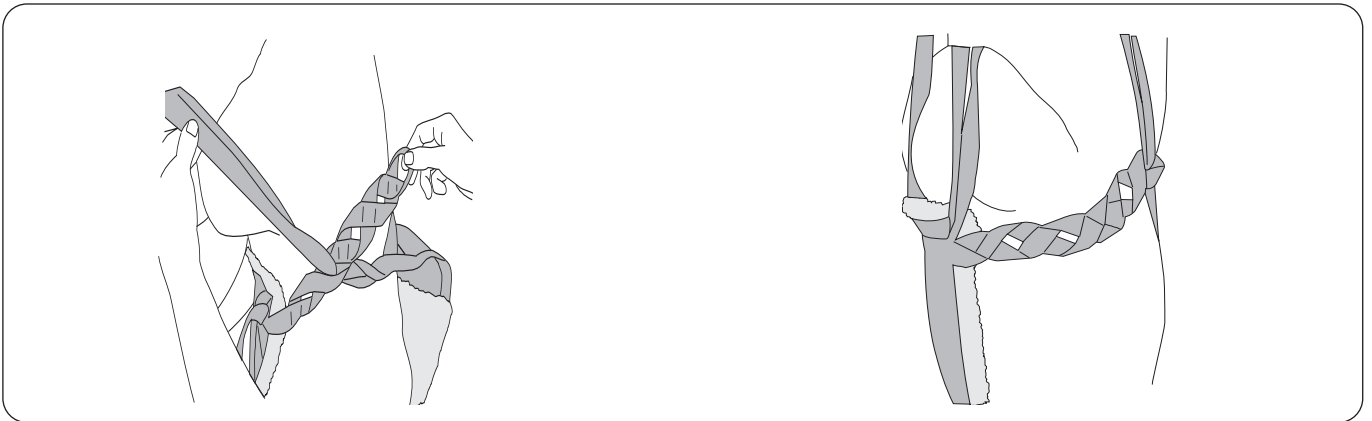


Bei schlanken Pflegebedürftigen können die Aufhängebänder durch eine innere Schlaufe gefädelt werden.

Bei schwereren Pflegebedürftigen können die Aufhängebänder durch eine äußere Schlaufe gefädelt werden.

## Memo-Clips

Diese praktische Komponente wird verwendet, um jene Schlaufen zu markieren, die für eine bestimmte Person ausprobiert wurden. Es erleichtert den Pflegern die Auswahl der richtigen Schlaufe, durch die das Aufhängeband gezogen wird.

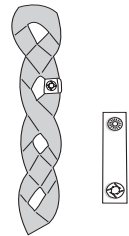


## Optionale Komponenten

### Polster für Entlastungsbänder

Art.-Nr. 3666021

Druckentlastende Polster zum Anbringen an den vorderen und/oder hinteren Aufhängebändern. Die Polster sind zum einfachen Anbringen entlang einer Längsseite mit Klettverschlüssen versehen.

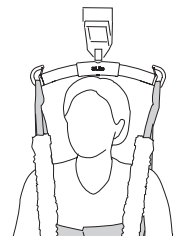


### Extension Loop

Die Extension Loops sind in zwei verschiedenen Längen und in den Farben Grün oder Grau erhältlich. Die von Ihnen gewählte Länge hängt von der Anpassung ab, die Sie vornehmen möchten.

- Extension Loop, grün, 12 cm
- Extension Loop, grün, 22 cm
- Extension Loop, grau, 12 cm
- Extension Loop, grau, 22 cm


- Art.-Nr. 3691102
- Art.-Nr. 3691103
- Art.-Nr. 3691302
- Art.-Nr. 3691303

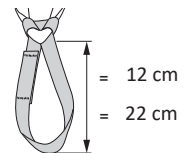

### Memo-Clips

- Memo-Clips, rot, 4 Stck.
- Memo-Clips, orange, 4 Stck.
- Memo-Clips, gelb, 4 Stck.
- Memo-Clips, blau, 4 Stck.
- Memo-Clips, schwarz, 4 Stck.

- Art.-Nr. 3666033
- Art.-Nr. 3666034
- Art.-Nr. 3666035
- Art.-Nr. 3666036
- Art.-Nr. 3666037

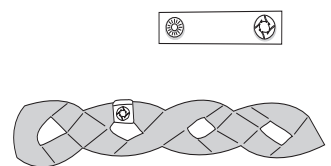

# Übersicht LIKO LiftPants Hebegurt. Mod. 92

Artikel	Art.-Nr.	Größe	Gewicht des Pflegebedürftigen <sup>1</sup>	Größe des Pflegebedürftigen <sup>1</sup>	Max. Tragfähigkeit <sup>2</sup>	Material
LiftPants	3592324	S	20–50 kg	120–160 cm	200 kg	Polyesternetz
LiftPants	3592325	M	50–85 kg	160–180 cm	200 kg	Polyesternetz
LiftPants	3592326	L	70–120 kg	170–200 cm	200 kg	Polyesternetz
LiftPants	3592327	XL	100–500 kg	170–210 cm	500 kg	Polyesternetz

<sup>1</sup> Das/die angegebene Gewicht/Größe des Pflegebedürftigen dient lediglich als Richtlinie – Abweichungen können vorkommen.

<sup>2</sup> Um die max. Tragfähigkeit ausnutzen zu können, sind Lifter bzw. Zubehörteile mit derselben oder einer größeren max. Tragfähigkeit erforderlich.

## Empfohlene Kombinationen

Empfohlene Kombinationen des LIKO LiftPants Hebegurts mit den Hebebügeln von Liko:	Mini SlingBar 220	Universal SlingBar 350	Standard SlingBar 450	SlingGuard 450	Universal SlingBar 450	Universal SlingBar 600	Universal TwinBar 670	SlingGuard 670 Twin	Sling CrossBar 450	Sling CrossBar 670	Univ. Seitenbügel + Universal 350	Univ. Seitenbügel + Universal 450
	LiftPants, S	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
LiftPants, M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LiftPants, L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
LiftPants, XL *	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓

Diese Tabelle dient zwar als Orientierungshilfe, doch es ist wichtig, zu wissen, dass verschiedene Umstände zu ungeeigneten Hebegurt-Hebebügel-Kombinationen führen können. In der Matrix zugelassene Kombinationen müssen weiterhin von geschultem medizinischen Fachpersonal beurteilt und validiert werden.

\* XL-Größe zur Verwendung in Kombination mit dem Ultra-Liftersystem, siehe Gebrauchsanweisung des Ultra-Liftersystems.

**Erläuterung:** ✓ = empfohlen

## Andere Kombinationen

Kombinationen von anderen als den von Liko empfohlenen Zubehörteilen bzw. Produkten können Sicherheitsrisiken für Pflegebedürftige bergen.

Golvo, Hillrom, Liko, LikoGuard, Likorall und Viking sind Marken der Baxter International, Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften.



[www.hillrom.com](http://www.hillrom.com)

Liko AB  
Nedre Vägen 100  
975 92 Luleå, Schweden  
+46 920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

