


Nosidło Liko LiftPants, mod. 92

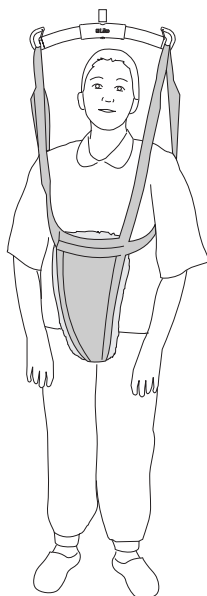

Instrukcja obsługi



Opis produktu

Przeznaczenie

Liko LiftPants to nosidło ułatwiające wykonywanie ćwiczeń stania i chodzenia przez pacjentów z zaburzeniami równowagi i niską sprawnością nóg, które zapewnia większe bezpieczeństwo podczas stawiania pierwszych kroków. Produkt jest przeznaczony do użytku w placówkach opieki zdrowotnej, na oddziałach intensywnej terapii, oddziałach ratunkowych, oddziałach rehabilitacyjnych oraz w trakcie domowej opieki zdrowotnej.

Pacjent musi być zdolny do utrzymania ciężaru własnego ciała na nogach. Nosidło LiftPants gwarantuje swobodę ruchów, jednocześnie podtrzymując część masy ciała pacjenta. Dzięki temu pacjent może poruszać się samodzielnie bez ryzyka upadku. Ponieważ podczas ćwiczeń podnośnik może przejąć całą masę ciała pacjenta, pacjent i opiekun mogą poświęcić całą uwagę ćwiczeniom, nie martwiąc się o konsekwencje złe wykonanego kroku.

Głównym punktem podparcia w przypadku nosidła LiftPants jest krocze, dzięki czemu nosidło to może być z powodzeniem stosowane u pacjentów wrażliwych na ucisk w obrębie górnej części tułowia lub pod ramionami. Wyściółka w kroczu zmniejsza ucisk.

Nosidło LiftPants nie było badane pod kątem stosowania u pacjentek w ciąży.

W niniejszej instrukcji osoba podnoszona jest nazywana pacjentem, natomiast osoba podnosząca — opiekunem.

Rozmiary

Nosidło LiftPants jest dostępne w kilku rozmiarach dopasowanych do wzrostu i budowy ciała pacjenta.

Odpowiednie podnośniki

Nosidło LiftPants może być użytkowane wraz z podnośnikami sufitowymi i podnośnikami mobilnymi firmy Liko.

Po zamocowaniu nosidła do podnośnika sufitowego **LikoGuard**, **Likorall** lub **Multirall** pacjent może swobodnie poruszać się w całym obszarze podnoszenia. Nosidło LiftPants może być również używane z podnośnikami mobilnymi firmy Liko, najlepiej z podnośnikiem mobilnym **Golvo**, **Uno** lub **Viking**. Podczas ćwiczeń z użyciem nosidła LiftPants przydatne może być zapewnienie pacjentowi możliwości przeniesienia części obciążenia na ręce, np. przy użyciu sprzętu ułatwiającego chodzenie (balkonik, laska).

Rozwiązania zastępcze

Rozwiązaniem alternatywnym dla nosidła **Liko LiftPants** jest kamizelka **Liko MasterVest**, mod. 60.



WAŻNE!

Podnoszenie i przenoszenie pacjenta zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Przed przystąpieniem do użytkowania podnośnika pacjenta oraz akcesoriów do podnoszenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Dokładne zrozumienie informacji zawartych w instrukcji obsługi jest niezmiernie ważne. Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolonego opiekuna. W ramach przeszkolenia opiekun powinien przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi. Należy się upewnić, że akcesoria do podnoszenia są przeznaczone do użytku z danym podnośnikiem. Podczas korzystania z wyrobu należy zachować ostrożność. Za bezpieczeństwo pacjenta zawsze odpowiada opiekun. Podczas podnoszenia opiekun musi mieć na uwadze stan pacjenta. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z producentem bądź dostawcą.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

⚠ Przed przystąpieniem do podnoszenia należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- Osoba decyzyjna w danej placówce powinna w każdym przypadku określić, czy potrzebna jest większa liczba opiekunów.
- Należy upewnić się, że model, rozmiar, tkanina i konstrukcja wybranego nosidła odpowiadają potrzebom pacjenta.
- Za całkowite maksymalne obciążenie systemu podnoszenia przyjmuje się zawsze najniższą maksymalną wartość obciążenia któregokolwiek z komponentów.
- Aby zapewnić bezpieczeństwo i zadbać o higienę pacjenta, nie używać nosidła u wielu pacjentów.
- Zaplanować podnoszenie, tak aby mogło ono zostać przeprowadzone jak najsprawniej i najbezpieczniej.
- Upewnić się, że akcesoria do podnoszenia są swobodnie zawieszane w pionie i mogą być swobodnie przesuwane.
- Uchwyty nośne Liko są wyposażone w zatrzaski. Mimo to należy zachować szczególną ostrożność. Przed podniesieniem pacjenta z danej powierzchni, ale po pełnym napięciu pasów, należy upewnić się, że pasy są prawidłowo zamocowane do haków uchwyty nośnego.
- Nie należy podnosić pacjenta na wysokość większą niż wystarczająca do jego przeniesienia.
- Należy upewnić się, że koła wózka inwalidzkiego, tóżka lub wózka transportowego są zablokowane podczas podnoszenia/przenoszenia.
- Należy zawsze pracować zgodnie z zasadami ergonomii. Należy zachęcać pacjenta do aktywnej współpracy.

⚠ Nieprawidłowe zamocowanie nosidła do uchwyty nośnego może spowodować poważne obrażenia ciała pacjenta.

⚠ Nigdy nie pozostawiać pacjenta bez nadzoru podczas podnoszenia!

⚠ Nigdy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru w pobliżu nosidła!

⚠ Nie przechowywać nosidła w miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych lub źródeł ciepła, takich jak kaloryfer, kominek lub kuchenka bądź piekarnik!

⚠ Nie używać, nie przechowywać ani nie transportować nosidła w pobliżu zwierząt domowych, szkodników lub dzieci bez nadzoru!

⚠ Nieprawidłowe zamocowanie nosidła do uchwyty nośnego może spowodować poważne obrażenia ciała pacjenta!

⚠ Upewnić się, że podczas podnoszenia pacjent i opiekun pozostają z dala od miejsc stwarzających ryzyko przytrzaśnięcia i od ruchomych części. Zignorowanie tego ostrzeżenia może prowadzić do obrażeń ciała.

⚠ Pacjentów należy ocenić pod kątem ryzyka zakleszczenia i odpowiednio ich monitorować. Podczas podnoszenia należy upewnić się, że głowa i kończyny pacjenta nie znajdują się w pętlach nosidła ani pomiędzy nimi. W przeciwnym wypadku może dojść do poważnych obrażeń ciała, a nawet zgonu pacjenta.

⚠ Nosidło LiftPants nie było badane pod kątem stosowania u pacjentek w ciąży.

CE Wyrób medyczny klasy I

PATENT www.hillrom.com/patents

Wyrób może być objęty co najmniej jednym patentem. Patrz powyższa strona internetowa.

Firmy należące do grupy Hillrom są właścicielami patentów i rozpatrywanych wniosków patentowych w Europie, Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Zmiany w produkcji

Produkty firmy Liko są stale udoskonalane i z tego względu zastrzega sobie ona prawo do wprowadzania w nich zmian bez uprzedniego powiadomienia. Informacje oraz wskazówki dotyczące modernizacji produktów można uzyskać u przedstawiciela firmy Hillrom.

Design and Quality by Liko in Sweden






























Firma Liko posiada certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 i jego odpowiednik dla wyrobów medycznych ISO 13485. Firma Liko posiada również certyfikat systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001.

Informacja dla użytkowników i/lub pacjentów w UE

Wszelkie poważne wypadki, które wystąpiły w związku z wyrobem, należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym przebywa użytkownik i/lub pacjent.

Opis symboli

W niniejszym dokumencie i/lub na produkcie mogą znajdować się poniższe symbole.

| Symbol | Opis | Symbol | Opis |
|--|--|--|--|
|  | Ostrzeżenie; zwraca uwagę na sytuację wymagającą szczególnej uwagi oraz zachowania ostrożności. Ten symbol to żółty trójkąt z czarną obwódką i czarnym wykrzyknikiem w środku. | | |
|  | Produkt nadaje się do recyklingu. | | |
|  | Przed użyciem zapoznać się z instrukcją obsługi. Ten symbol to niebieskie koło z białym wizerunkiem osoby czytającej książkę. | | |
|  | Przed użyciem zapoznać się z instrukcją obsługi. |  | Przeostroga! Zapoznać się z instrukcją obsługi. |
|  | Oznaczenie CE. Oznaczenie zgodności wyrobu medycznego w Unii Europejskiej, wyrób medyczny klasy I. | | |
|  | Autoryzowany przedstawiciel w Szwajcarii | | |
|  | Producent odpowiedzialny |  | Data produkcji |
|  | Identyfikator wyrobu |  | Wyrób medyczny |
|  | Numer seryjny |  | Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu |
|  | Nie czyścić chemicznie. |  | Pozostawić do wyschnięcia w cieniu. |
|  | Nie prasować. |  | Nie wybielać. |
|  | Suszenie w suszarce bębnowej. |  | Nie prać. |
|  | Nie suszyć w suszarce bębnowej. | | |
|  | Symbol prania, przy którym zawsze znajduje się zalecana temperatura w °C i °F. | | |
|  | Nie zawiera lateksu. | | |
|  | Przeglądy okresowe | | |
|  | Nie używać produktu. (Oznaczenie umieszczone jest wyłącznie na produktach Solo i jest widoczne po ich wypraniu, aby poinformować, że ich ponowne użycie jest zabronione). |  | Imię i nazwisko pacjenta |
|  | Do użytku u jednego pacjenta (wyłącznie w przypadku produktów Solo). | | |
|  | Kierunek do góry i symbol na zewnętrznej części urządzenia. |  | Symbol na zewnętrznej części urządzenia. |
|  <small>(01) 0100887761997127 (11) RRMDD (21) 012345678910</small> | Kod kreskowy typu GS1 Data Matrix może zawierać następujące informacje: (01) Globalny numer jednostki handlowej (11) Data produkcji (21) Numer seryjny | | |

Konserwacja i przeglądy

Nosidło należy sprawdzić przed każdym użyciem. Wszystkie wymienione poniżej elementy należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń lub zużycia:

- Tkanina
- Pasy
- Szwy
- Pętle

⚠ **Nie używać uszkodzonych akcesoriów do podnoszenia.**

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z producentem bądź dostawcą.

Instrukcje dotyczące czyszczenia i dezynfekcji: patrz etykieta nosidła oraz w załącznik „Serwis i konserwacja nosideł Liko”.

Materiał: akcesorium LiftPants jest wykonane z poliestru.

Jeśli nosidło jest używane do kąpieli w wannie lub pod prysznicem: po zakończeniu kąpieli rozwiesić nosidło, aby jak najszybciej wyschło.

Przeglądy okresowe

Produkt musi być sprawdzany co najmniej raz na 6 miesięcy. Jeśli częstotliwość użytkowania lub czyszczenia produktu jest większa od standardowej, mogą być wymagane częstsze przeglądy. W sprawie protokołów należy kontaktować się z przedstawicielem firmy Hillrom.

Przewidywany okres eksploatacji

Przewidywany okres eksploatacji produktu wynosi 3 lata przy normalnym użytkowaniu. Długość przewidywanego okresu eksploatacji zależy od rodzaju tkaniny, częstotliwości użytkowania, stosowanej procedury czyszczenia oraz masy ciała podnoszonych pacjentów.


Wskazówki dotyczące utylizacji

Całe nosidło, w tym listwy usztywniające, materiał wyściółki itd., należy utylizować jako odpady łatwopalne.

Firma Hillrom dokonuje oceny bezpiecznej obsługi i utylizacji wyrobów przez użytkowników w celu zapobiegania obrażeniom (np. skaleczenia, przebicia skóry i otarcia) oraz wymaganych czynności związanych z czyszczeniem i dezynfekcją wyrobu medycznego po użyciu i przed jego usunięciem, a także udziela użytkownikom wskazówek związanych z tymi procedurami. Klienci powinni przestrzegać wszystkich przepisów krajowych, wojewódzkich/stanowych, regionalnych i/lub lokalnych w zakresie bezpiecznej utylizacji wyrobów i akcesoriów medycznych.

W razie wątpliwości użytkownik powinien najpierw skontaktować się z działem wsparcia technicznego firmy Hillrom w celu uzyskania wskazówek dotyczących protokołów bezpiecznej utylizacji.







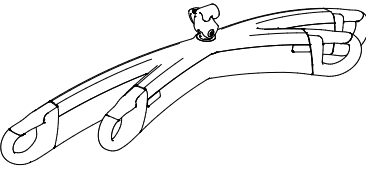
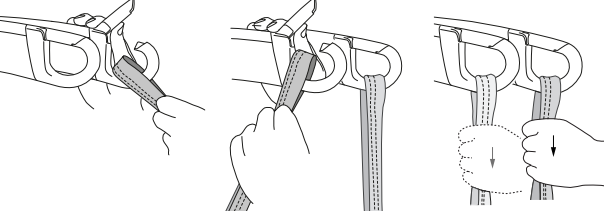
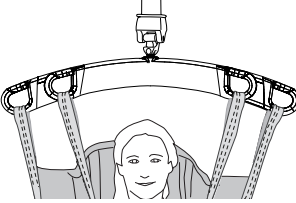
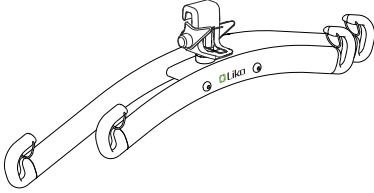
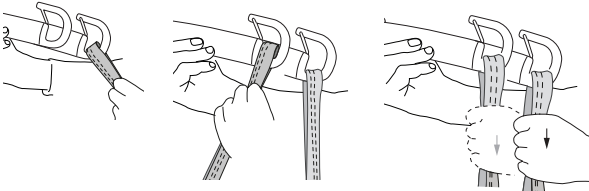
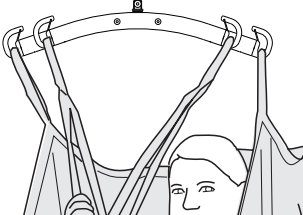
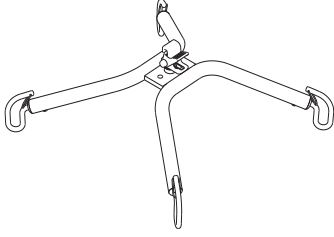
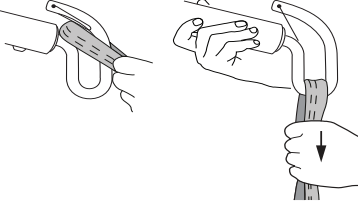
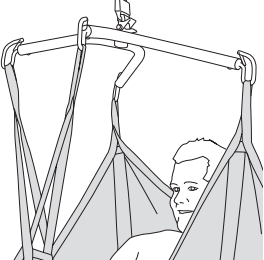
Budowa

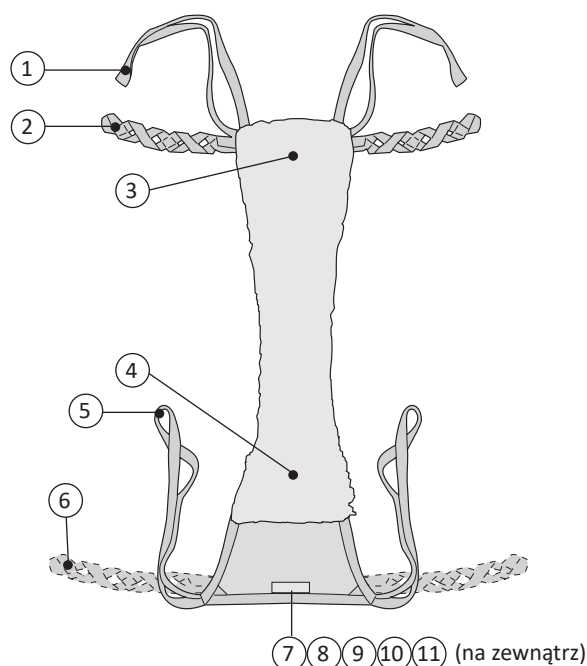


1. Przedni pas mocujący
2. Pętla nośna (rozmiar S, M i L)
3. Część przednia
4. Część tylna
5. Tylny pas mocujący
6. Pętla nośna (tylko rozmiar XL)
7. Oznaczenie rozmiaru
8. Numer seryjny
9. Etykieta produktu
10. Etykieta: przeglądy okresowe
11. Etykieta: oznaczenie indywidualne (użytkownik)

UWAGA! W przypadku rozmiaru XL pętle nośne umieszczone są w części tylnej, a nie w przedniej.


Mocowanie nosidła do różnych uchwytów nośnych
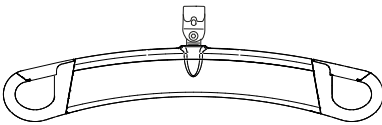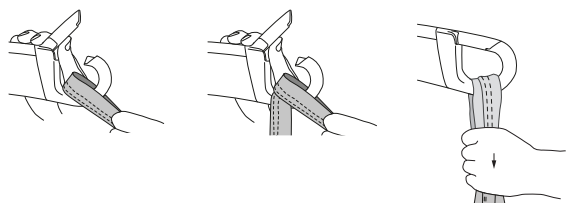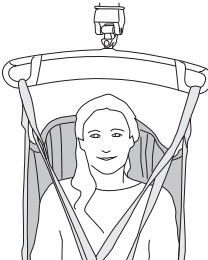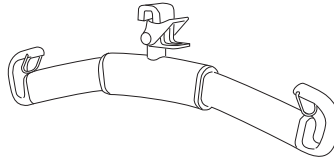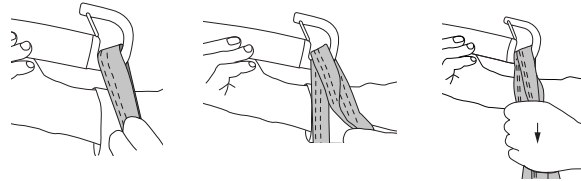
| Uchwyt nośny | Pętle nosidła mocowane do haków uchwytu nośnego | Prawidłowo |
|---|--|---|
|  <p>SlingGuard</p> |  |  |
|  <p>Universal</p> |  |  |
|  <p>SlingGuard Twin</p> |  |  |
|  <p>Universal Twin</p> |  |  |
|  <p>Cross-Bar</p> |  |  |

Źle!

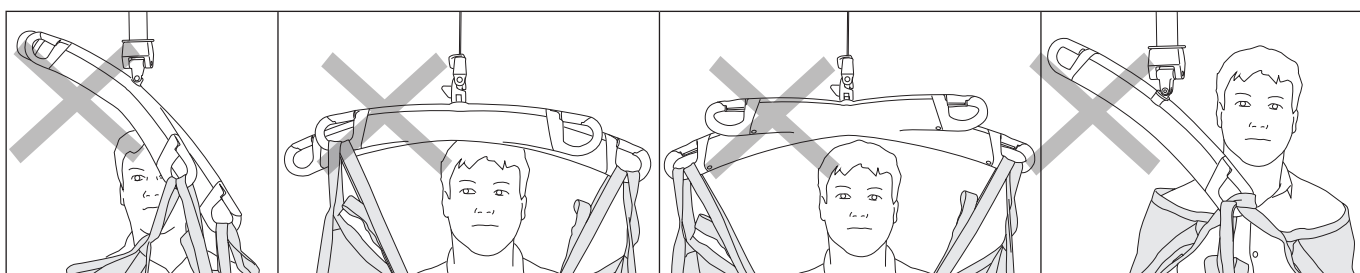

Mocowanie nosidła LiftPants do uchwyty nośnego z czterema hakami (uchwyty podwójne TwinBar i krzyżowe CrossBar)

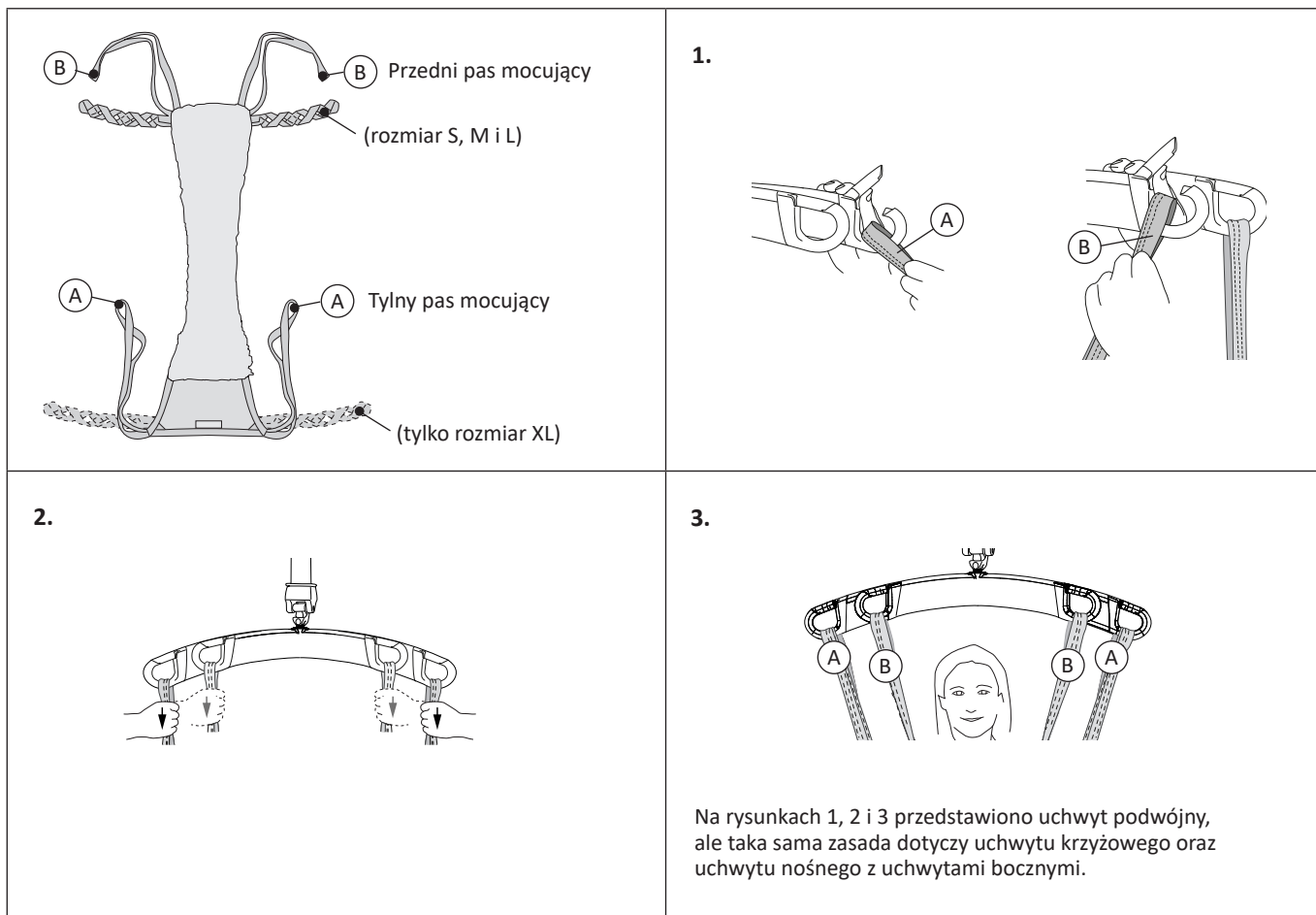

Jak wybrać rozmiar nosidła

⚠ **Rozmiar nosidła nie może być zbyt duży, ponieważ uniemożliwi to uzyskanie wymaganej wysokości podnoszenia.**

⚠ **Należy używać nosidła tylko w rozmiarze odpowiednim dla pacjenta. Prawidłowy rozmiar musi zostać wybrany przez przeszkolonego opiekuna. Może dojść do zakleszczenia lub uduszenia pacjenta.**

Rozmiar nosidła można wybrać na podstawie obwodu klatki piersiowej pacjenta. Należy porównać wymiary klatki piersiowej pacjenta (patrz instrukcja pomiaru) i wymiary nosidła (patrz tabela lub instrukcja pomiaru).

Należy porównać obwód klatki piersiowej pacjenta i wymiary produktu z wartościami na poniższej ilustracji i w tabeli.

Górna krawędź nosidła LiftPants powinna sięgać powyżej talii, jednak nie aż tak wysoko, aby wywierać ucisk pod pachami. Dokonać pomiaru za pomocą miary od pleców pacjenta, prowadząc miarę pod boczną częścią kroczka, do poziomu klatki piersiowej. W przypadku pacjentów o większej masie ciała konieczne może być użycie większego nosidła niż w przypadku szczupłych pacjentów tego samego wzrostu. Wytyczne dotyczące masy ciała / wzrostu pacjenta można znaleźć na ostatniej stronie.

Zmierzyć pacjenta według poniższych instrukcji:


Dokonać pomiaru od dołu łopatki, w dół pleców, przez boczną część kroczka i w górę do klatki piersiowej.

Pomiary, patrz Długość krawędzi panelu głównego (I) w części „Wymiary” na str. 7:

| Rozmiar nosidła | Obwód klatki piersiowej (min.–maks.) | Długość krawędzi panelu głównego |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| S | 52–94 (20–37) | 85 (34) |
| M | 58–116 (23–46) | 108 (42) |
| L | 90–142 (35–56) | 120 (47) |
| XL | 116–168 (46–66) | 139 (55) |

Wszystkie wymiary podano w centymetrach (w nawiasach wartości w calach).

Wymiary

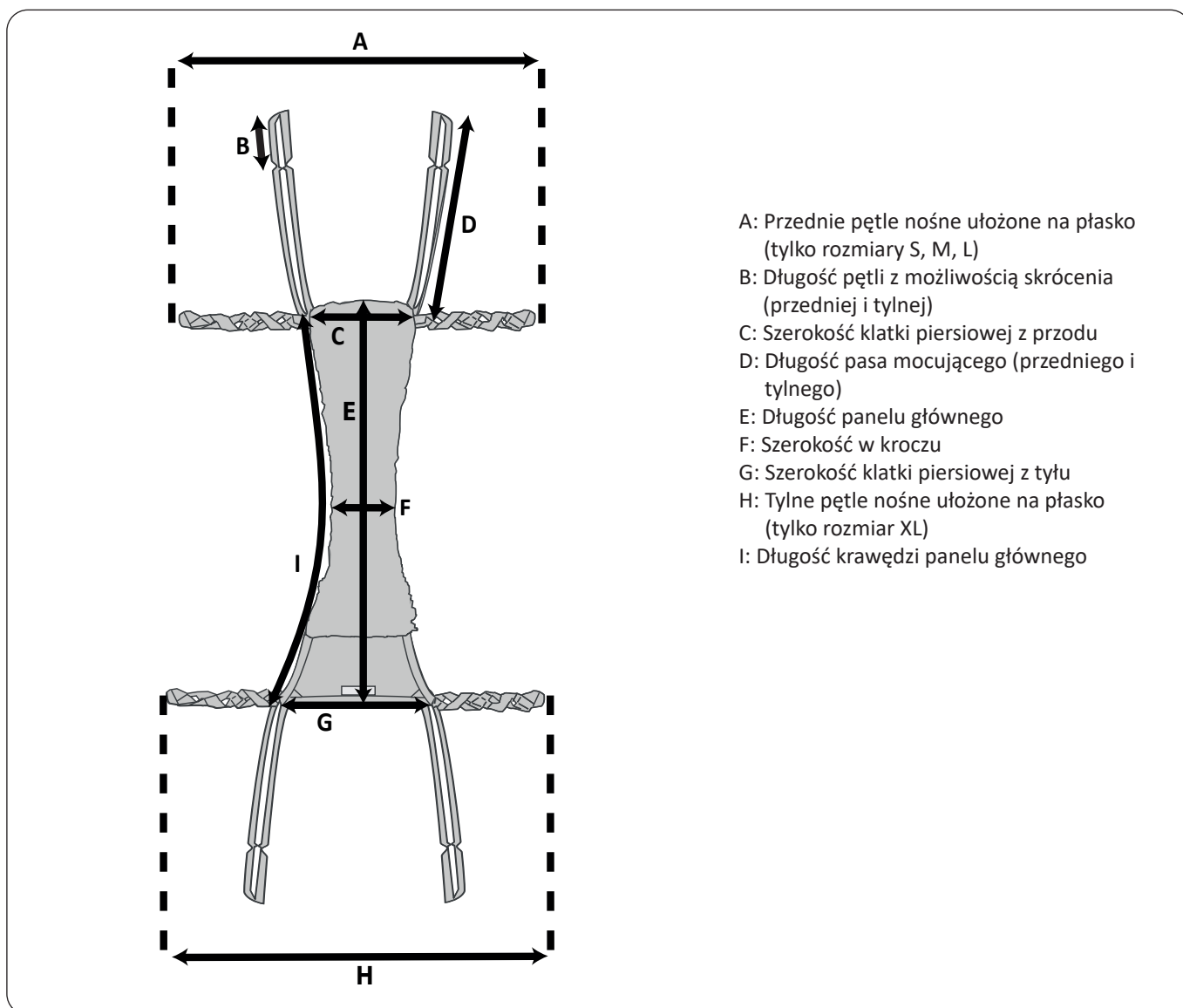


Wymiary w centymetrach

| ROZMIAR | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Maksymalne obciążenie (kg) | Nr prod. |
|---------|-------------|----|----|----|-----|----|----|-------------|-----|----------------------------|----------|
| S | 70 | 10 | 17 | 56 | 81 | 10 | 30 | Nie dotyczy | 85 | 200 | 3592324 |
| M | 78 | 10 | 20 | 56 | 102 | 10 | 36 | Nie dotyczy | 108 | 200 | 3592325 |
| L | 108 | 10 | 25 | 56 | 112 | 10 | 41 | Nie dotyczy | 120 | 200 | 3592326 |
| XL | Nie dotyczy | 10 | 49 | 56 | 131 | 10 | 48 | 125 | 139 | 500 | 3592327 |

Wymiary w calach

| ROZMIAR | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Maksymalne obciążenie (funty) | Nr prod. |
|---------|-------------|---|----|----|----|---|----|-------------|----|-------------------------------|----------|
| S | 28 | 4 | 7 | 22 | 32 | 4 | 12 | Nie dotyczy | 34 | 440 | 3592324 |
| M | 31 | 4 | 8 | 22 | 40 | 4 | 14 | Nie dotyczy | 42 | 440 | 3592325 |
| L | 43 | 4 | 10 | 22 | 44 | 4 | 16 | Nie dotyczy | 47 | 440 | 3592326 |
| XL | Nie dotyczy | 4 | 19 | 22 | 52 | 4 | 19 | 49 | 55 | 1100 | 3592327 |


Zakładanie nosidła LiftPants

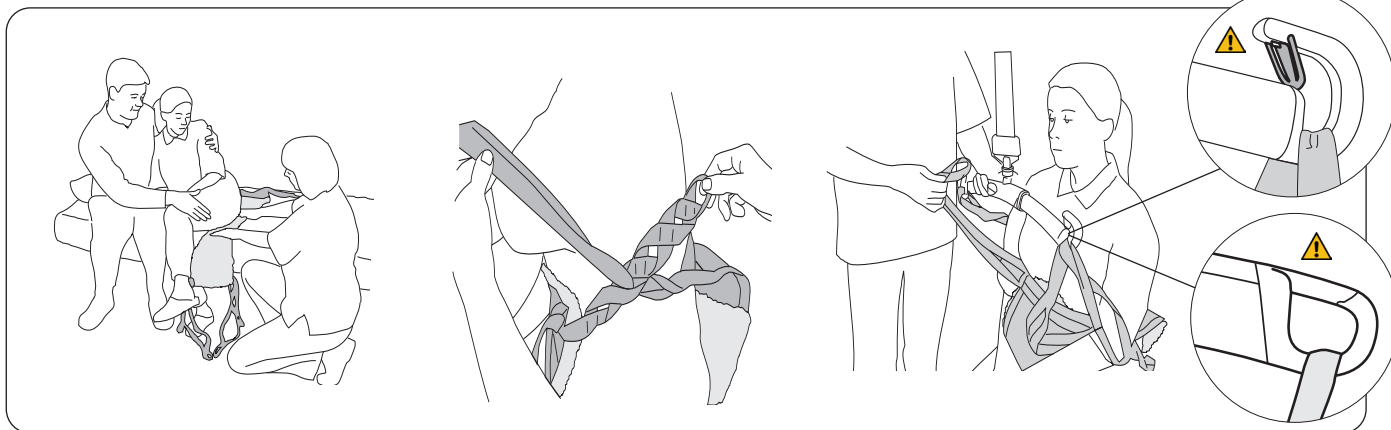

Pozycją wyjściową podczas korzystania z nosidła LiftPants jest pozycja siedząca. Pacjent powinien przechylić się na bok, aby ułatwić umieszczenie nosidła LiftPants na siedzeniu bezpośrednio pod sobą przez opiekuna. Wsunąć nosidło LiftPants możliwie jak najgłębiej pod pacjenta tak, aby etykieta nosidła była skierowana w dół i w stronę tylnej części pośladków.

Pociągnąć przednią część nosidła LiftPants w górę między nogami pacjenta tak, aby pasy były dostępne od przodu. Przełożyć tylne pasy mocujące (przednie pasy mocujące dla rozmiaru XL) przez odpowiednie pętle na pętlach nośnych (patrz „Regulacja pętli nośnych” na str. 9).

Zamocować tylne i przednie pasy mocujące do haków uchwytu nośnego. Najczęściej w tym celu wykorzystywane są skrajne pętle. Instrukcje dotyczące mocowania pętli nośnych do różnych uchwytów nośnych znajdują się w częściach „Mocowanie nosidła do różnych uchwytów nośnych” na str. 5 i „Mocowanie nosidła LiftPants do uchwytu nośnego z czterema hakami (uchwyty podwójne TwinBar i krzyżowe CrossBar)” na str. 6.

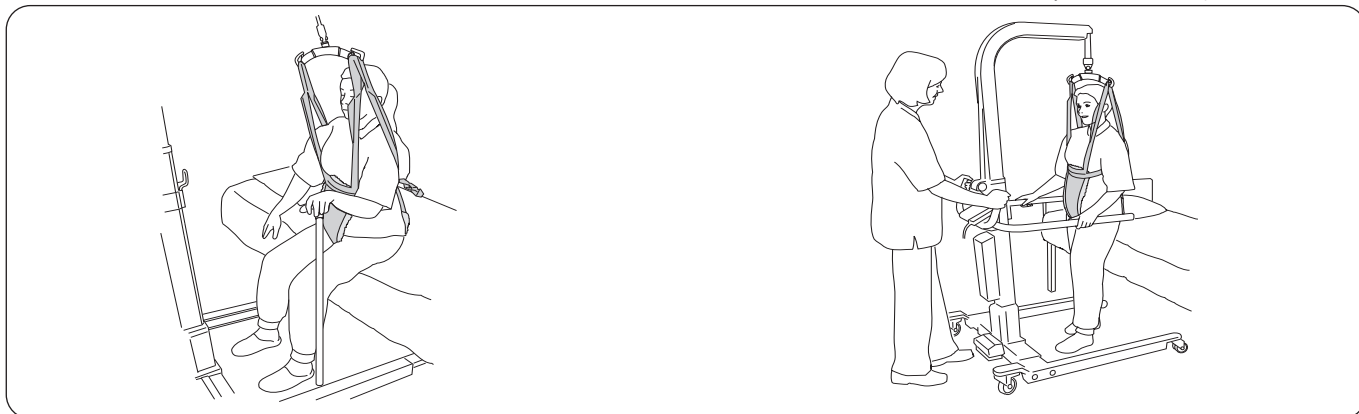


Przed podniesieniem pacjenta z pozycji siedzącej: przesunąć siedzącego pacjenta możliwie najbardziej do przodu, zaś jego stopy ustawić na podłodze tak (przesuwając ku tyłowi), aby przejście do pozycji pionowej przebiegło dla niego jak najbardziej komfortowo. Nieznacznie unieść podnośnik, tak aby napiąć pasy bez podnoszenia pacjenta, jednocześnie upewniając się, że nacisk pasów na górną część ciała pacjenta nie powoduje dyskomfortu.

Ustawienie umożliwiająca skrócenie

W niektórych przypadkach korzystne jest skrócenie pasów mocujących, aby wyższy pacjent miał wystarczająco dużo miejsca do stania. Takie ustawienie można stosować tymczasowo w celu sprawdzenia prawidłowej długości, jednakże jego stosowanie na dłuższą metę może spowodować uszkodzenie szwów. Jeśli zachodzi potrzeba długotrwałego skrócenia pasów mocujących, zaleca się zawiązanie węzła na pasie mocującym, co poskutkuje skróceniem pasa o około 10 cm (4 cale). Użyć pętli na końcu pasa mocującego, aby połączyć pas mocujący z uchwytem nośnym.

Podczas podnoszenia: pociągnąć podnośnik do przodu w kierunku ruchu podnoszenia, aby umożliwić prawidłowe i optymalne przeniesienie obciążenia na podnośnik, aż pacjent będzie stabilnie stać w pozycji wyprostowanej. Podnieść pacjenta tylko na taką wysokość, jaka jest niezbędna do utrzymania go w pozycji pionowej i zachowania wystarczającego kontaktu z podłogą. Podczas korzystania z podnośnika mobilnego z nosidłem LiftPants należy używać wyłącznie podpór pacjenta, które są przystosowane do utrzymania masy ciała pacjenta.

Zdejmowanie nosidła LiftPants

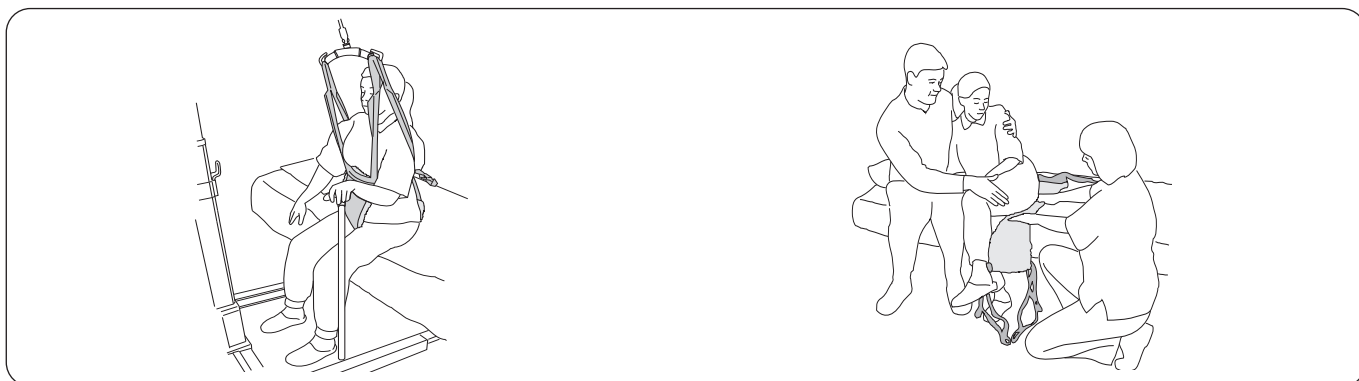

Opuścić pacjenta do pozycji siedzącej. Odczepić pasy mocujące od uchwytu nośnego. Wyjąć tylne pasy mocujące z pętli nośnych.

Przechylić pacjenta na bok i ostrożnie wyjąć nosidło LiftPants.

Regulacja pętli nośnych

Pasy podtrzymujące górną część ciała nie mogą być ani za luźne, ani za mocno napięte. Pasy powinny być napięte w sposób zapewniający pacjentowi optymalny komfort.




W przypadku szczupłych pacjentów pasy mocujące można przeciągnąć przez wewnętrzne pętle nośne.

W przypadku pacjentów o większej masie ciała pasy mocujące należy przeciągnąć przez zewnętrzne pętle nośne.

Klipsy do pętli nośnych

Ten praktyczny element pozwala oznaczyć pętle dobrane odpowiednio do danego pacjenta. Ułatwia to opiekunowi wybranie odpowiedniej pętli do przełożenia pasów mocujących.

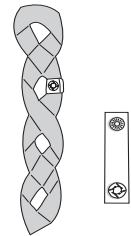


Elementy opcjonalne

Wyściółki pasów naramiennych

Nr prod. 3666021

Wyściółki służą do łagodzenia ucisku wywieranego przez przednie/tylne pasy mocujące. Wyściółki wyposażone są w rzepy umieszczone wzdłuż krawędzi, co umożliwia ich bezproblemowe zakładanie.

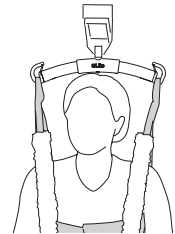

Pętla wydłużająca

Pętla wydłużająca są dostępne w dwóch wersjach o różnej długości i w dwóch różnych kolorach – zielonym lub szarym. Wybrana długość zależy od tego, w jak dużym zakresie ma być wykonywana regulacja.

Pętla wydłużająca, zielona, 12 cm (5 cali)

Nr prod. 3691102

Pętla wydłużająca, zielona, 22 cm (9 cali)


Nr prod. 3691103

Pętla wydłużająca, szara, 12 cm (5 cali)

Nr prod. 3691302

Pętla wydłużająca, szara, 22 cm (9 cali)

Nr prod. 3691303

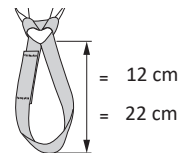

Klipsy do pętli nośnych

Klipsy do pętli nośnych, czerwone, 4 szt.

Nr prod. 3666033

Klipsy do pętli nośnych, pomarańczowe, 4 szt.

Nr prod. 3666034

Klipsy do pętli nośnych, żółte, 4 szt.


Nr prod. 3666035

Klipsy do pętli nośnych, niebieskie, 4 szt.

Nr prod. 3666036

Klipsy do pętli nośnych, czarne, 4 szt.

Nr prod. 3666037

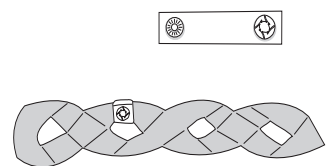

Informacje ogólne o nosidle LIKO LiftPants, mod. 92

| Produkt | Nr prod. | Rozmiar | Masa ciała pacjenta ¹ | Wzrost pacjenta ¹ | Maksymalne obciążenie ² | Materiał |
|-------------------|----------|---------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Nosidło LiftPants | 3592324 | S | 20–50 kg (44–110 funtów) | 120–160 cm (47–63 cale) | 200 kg (440 funtów) | Siatka poliestrowa |
| Nosidło LiftPants | 3592325 | M | 50–85 kg (110–187 funtów) | 160–180 cm (63–71 cale) | 200 kg (440 funtów) | Siatka poliestrowa |
| Nosidło LiftPants | 3592326 | L | 70–120 kg (154–264 funtów) | 170–200 cm (67–79 cale) | 200 kg (440 funtów) | Siatka poliestrowa |
| Nosidło LiftPants | 3592327 | XL | 100–500 kg (220–1100 funtów) | 170–210 cm (67–83 cale) | 500 kg (1100 funtów) | Siatka poliestrowa |

¹ Podane wartości masy ciała / wzrostu pacjenta stanowią tylko wskazówkę – dopuszczalne są odstępstwa od zaleceń.

² W celu utrzymania maksymalnego obciążenia należy stosować podnośnik/akcesoria przeznaczone do przenoszenia takiego samego lub większego obciążenia.

Zalecane kombinacje

| Zalecane kombinacje nosidła LIKO LiftPants i uchwytów nośnych Liko: | Mini SlingBar 220 | Universal SlingBar 350 | Standard SlingBar 450 | SlingGuard 450 | Universal SlingBar 450 | Universal SlingBar 600 | Universal SlingBar 670 | SlingGuard 670 Twin | Sling CrossBar 450 | Sling Crossbar 670 | Uchwyt Universal SideBar + Universal 350 | Uchwyt Universal SideBar + Universal 450 |
|---|-------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| LiftPants, S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LiftPants, M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LiftPants, L | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| LiftPants, XL* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |

Chociaż ta tabela zawiera zalecenia, ważne jest, aby pamiętać, że różne okoliczności mogą sprawić, iż niektóre kombinacje nosideł i uchwytów nośnych będą nieodpowiednie. Zatwierdzone kombinacje wskazane w tabeli muszą zostać ocenione i zatwierdzone przez przeszkolonego pracownika ochrony zdrowia.

* Rozmiar XL należy stosować w połączeniu z systemem podnoszenia Ultra, patrz instrukcja obsługi systemu podnoszenia Ultra.

Objaśnienie: ✓ = zalecane

Inne kombinacje

Łączenie akcesoriów/produktów innych niż zalecane przez firmę Liko może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjenta.

Golvo, Hillrom, Liko, LikoGuard, Likorall i Viking są znakami towarowymi firmy Baxter International, Inc. lub jej podmiotów zależnych.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Szwecja
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom