

## Návod k použití

















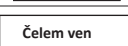

Liftsheet XL je zvedací pás pro zvedání a přemísťování pacientů ve vodorovné poloze. Je určen jen k použití společně s příslušenstvím FlexoStretch™, č. výrobku 3156057, a příslušenstvím UltraStretch™, č. výrobku 3156058. Pás Liftsheet XL je k dispozici v dvou variantách, normální a dlouhé. Maximální zatížení je 400 kg.

### DŮLEŽITÉ!

Zvedání a přenášení pacientů vždy znamená určitou míru rizika. Před použitím si přečtěte návod k použití zvedáku a příslušenství FlexoStretch nebo UltraStretch. Je důležité úplně porozumět obsahu návodu k použití. Toto zařízení smí obsluhovat pouze vyškolený personál. Při používání dbejte opatrnosti. Jako ošetřující personál vždy zodpovídáte za bezpečnost pacienta. Pokud je vám něco nejasné, kontaktujte výrobce nebo dodavatele výrobku.

## Popis symbolů

V tomto dokumentu nebo na výrobku se můžete setkat s těmito symboly.

Symbol	Popis
	Výstraha: Tato situace vyžaduje zvláštní péči a pozornost.
	Značka CE
	Zákonný výrobce
	Datum výroby
	Před použitím si prostudujte návod k použití.
	Identifikátor produktu
	Sériové číslo
	Zdravotnický prostředek
	Nepoužívat suché čištění
	Nežehlit
	Zákaz sušení v bubnové sušičce
	Praní Symbol je vždy v kombinaci s doporučenou teplotou ve °C a °F.
	Neobsahuje latex
	Nebělte
	Pravidelné prohlídky
	Směr vzhůru a symbol na vnější části produktu.
	Symbol na vnější části produktu.
	Čárový kód datové matice GS1, který může obsahovat následující informace. (01) Číslo globální obchodní položky (11) Datum výroby (21) Sériové číslo

# Bezpečnostní pokyny

## Změny výrobků

Výrobky Liko prochází neustálým vývojem, a proto si vyhrazujeme právo na změnu výrobku bez předchozího upozornění. Informace o aktualizaci produktů Liko™ poskytnete autorizovaný zástupce společnosti Hill-Rom.

## Design and Quality by Liko in Sweden

Systém správy výroby i vývoje výrobku je certifikován v souladu s normou ISO9001 a jeho ekvivalentem pro odvětví zdravotnických prostředků, ISO13485. Systém správy také splňuje požadavky normy pro ochranu životního prostředí ISO14001.

## Upozornění pro uživatele a/nebo pacienty v EU

Všechny závažné příhody, ke kterým dojde v souvislosti s tímto zdravotnickým prostředkem, musí být hlášeny výrobcí a příslušnému úřadu členského státu, ve kterém uživatel a/nebo pacient sídlí.

## Péče a údržba

Před každým použitím produkt zkontrolujte. Zkontrolujte následující prvky, zda nejsou opotřebené a poškozené:

- Tkanina
- Švy
- Smyčky

**⚠ Nepoužívejte poškozené zvedací příslušenství.**

Pokud něčemu nerozumíte, kontaktujte výrobce nebo dodavatele výrobku.

## Pokyny k praní

Viz štítek výrobku na zvedacím příslušenství a přiložený dodatek „Pacientské závěsy Liko – péče a údržba“.

## Pravidelné prohlídky

Výrobek musí být prohlížen minimálně každých 6 měsíců. Pokud se výrobek používá nebo myje častěji, než je obvyklé, může být nutné provádět častější kontroly. O tyto protokoly požádejte svého zástupce společnosti Hill-Rom.

## Předpokládaná životnost

Výrobek má předpokládanou životnost 5 let. Předpokládaná životnost je založena na 10 použitích denně a praní jednou týdně, podle pokynů k praní. Společnost Hill-Rom doporučuje, aby byl produkt používán jen po dobu předpokládané životnosti.

## Pokyny pro recyklaci

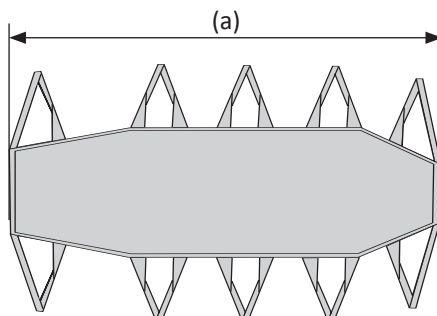
Celý pás LiftSheet by měl být tříděn jako spalitelný odpad.

Společnost Hill-Rom poskytuje svým uživatelům vyhodnocení a pokyny k bezpečné manipulaci a likvidaci jejich zařízení a pomáhá tak s prevencí poranění, mimo jiné pořezání, propíchnutí kůže, odřenin. Poskytuje také pokyny k požadovanému čištění a dezinfekci zdravotnického prostředku po použití a před jeho likvidací. Zákazníci by se měli řídit všemi místními a národními zákony a směrnicemi, které se týkají bezpečné likvidace zdravotnických prostředků a příslušenství.

V případě pochybnosti má uživatel nejprve kontaktovat technickou podporu společnosti Hill-Rom a vyžádat si protokoly bezpečné likvidace.

## Přehled pásu Liko™ LiftSheet™ XL

Název	Č. výrobku	Materiál	Délka (a)	Max. zatížení
LiftSheet XL, normální	3684105	Polyester	165 cm	400 kg
LiftSheet XL, dlouhý	3684106	Polyester	185 cm	400 kg



www.hillrom.com

Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå, Švédsko  
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for  
patients and their caregivers:

Hill-Rom