

Instrukciju rokasgrāmata















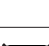

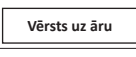

LiftSheet XL ir paredzēts pacientu celšanai un pārvietošanai horizontālā stāvoklī. To ir paredzēts izmantot tikai kopā ar FlexoStretch™ piederumu, izstr. Nr. 3156057, un UltraStretch™ piederumu, izstr. Nr. 3156058. Liftsheet XL ir pieejams divos variantos — standarta un garajā. Maks. slodze 400 kg.

 **SVARĪGI!**

Pacienta celšana un pārvietošana vienmēr ir saistīta ar noteiktu riska līmeni. Pirms izmantošanas izlasiet instrukciju rokasgrāmatas gan attiecībā uz pacienta pacelšanu, gan FlexoStretch un UltraStretch piederumiem. Ir svarīgi pilnībā izprast instrukciju rokasgrāmatas saturu. Aprīkojumu drīkst lietot tikai apmācīts personāls. Lietošanas laikā rīkojieties uzmanīgi un piesardzīgi. Aprūpētājs vienmēr ir atbildīgs par pacienta drošību. Ja rodas neskaidrības, sazinieties ar ražotāju vai piegādātāju.

Simbolu apraksts

Šajā dokumentā un/vai uz izstrādājuma ir izmantoti tālāk norādītie simboli.

| Simbols | Apraksts |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Uzmanību! Šajā situācijā jāievēro īpaša rūpība un piesardzība. |
|  | CE zīme |
|  | Juridiskais ražotājs |
|  | Ražošanas datums |
|  | Pirms lietošanas izlasiet instrukciju rokasgrāmatu |
|  | Izstrādājuma identifikators |
|  | Sērijas numurs |
|  | Medicīniska ierīce |
|  | Neveikt ķīmisko tīrīšanu |
|  | Negludināt |
|  | Nežāvēt veļas žāvētājā |
|  | Mazgāšana Šis simbols vienmēr tiek lietots kopā ar ieteicamo temperatūru °C un °F grādos. |
|  | Nesatur lateksu |
|  | Nebalināt |
|  | Regulārā pārbaude |
|  | Virziena norāde uz augšu un simbols izstrādājuma ārpusē. |
|  | Simbols izstrādājuma ārpusē. |
|  | GS1 datu matricas svītrkods, kas var ietvert šādu informāciju: (01) Globālais tirdzniecības identifikācijas numurs (11) Ražošanas datums (21) Sērijas numurs |

 I klases medicīniskā ierīce

Drošības instrukcijas

Izstrādājuma izmaiņas

Liko izstrādājumi tiek nepārtraukti uzlaboti, tāpēc mēs paturam tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izstrādājumu izmaiņas. Lai saņemtu konsultācijas un informāciju par izstrādājumu uzlabojumiem, sazinieties ar uzņēmuma Hill-Rom pārstāvi.

Design and Quality by Liko in Sweden

Izstrādājumu ražošanas un izstrādes pārvaldības sistēma ir sertificēta saskaņā ar ISO 9001 un tā ekvivalentu medicīnisko ierīču nozarei — ISO 13485. Pārvaldības sistēma ir sertificēta arī saskaņā ar vides standartu ISO 14001.

Paziņojums lietotājiem un/vai pacientiem ES

Par jebkuru nopietnu ar ierīci saistītu negadījumu ir jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā lietotājs veic uzņēmējdarbību un/vai dzīvo pacients.

Tehniskā apkope un uzturēšana

Pārbaudiet izstrādājumu pirms katras lietošanas reizes. Pārbaudiet, vai tālāk norādītās daļas nav nolietojušās vai bojātas:

- audums;
- šuves;
- cilpas.

⚠ Nelietojiet bojātus celšanas piederumus.

Ja rodas neskaidrības, sazinieties ar ražotāju vai piegādātāju.

Mazgāšanas instrukcijas

Skatiet pacelšanas piederuma izstrādājuma etiķeti un pievienoto pielikumu „Liko” slingu tehniskā apkope un uzturēšana.

Regulārā pārbaude

Izstrādājums ir jāpārbauda vismaz reizi sešos mēnešos. Var būt vajadzīgas biežākas pārbaudes, ja izstrādājumu izmanto vai mazgā biežāk nekā parasti. Lai saņemtu protokolus, sazinieties ar Hill-Rom pārstāvi.

Paredzētais kalpošanas laiks

Izstrādājuma paredzētais kalpošanas laiks ir 5 gadi. Paredzētais kalpošanas laiks ir aprēķināts, pieņemot, ka izstrādājumu lieto 10 reizes dienā un mazgā reizi nedēļā atbilstoši mazgāšanas instrukcijām. Hill-Rom iesaka izmantot izstrādājumu tikai tā paredzētajā kalpošanas laikā.

Norādījumi par pārstrādi

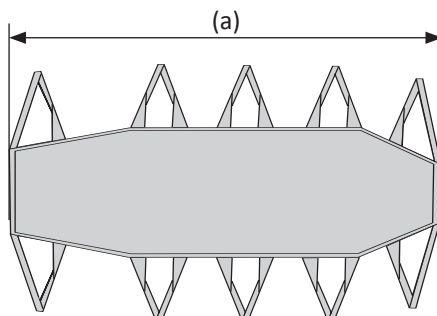
Viss LiftSheet jāšķiro kā degamie atkritumi.

Hill-Rom novērtē un sniedz norādījumus lietotājiem par ierīču drošu izmantošanu un likvidēšanu, lai palīdzētu novērst savainojumus, tostarp (bet ne tikai) ādas iegriezumus, pārduršanu, nobrāzumus, kā arī par jebkuru nepieciešamo medicīniskās ierīces tīrīšanu un dezinfekciju pēc lietošanas un pirms tās likvidēšanas. Klientiem ir jāievēro visi federālie, valsts, reģionālie un/vai vietējie tiesību akti un noteikumi, kas attiecas uz medicīnisko ierīču un piederumu drošu likvidēšanu.

Šaubu gadījumā ierīces lietotājam vispirms ir jāsaazinās ar Hill-Rom tehniskā atbalsta dienesta pārstāvi, lai saņemtu norādījumus par drošas likvidēšanas protokoliem.

Pārskats par Liko™ LiftSheet™ XL

| Nosaukums | Izstr. Nr. | Materiāls | Garums (a) | Maks. slodze |
|-------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| LiftSheet XL, standarta | 3684105 | poliesters | 165 cm | 400 kg |
| LiftSheet XL, garais | 3684106 | poliesters | 185 cm | 400 kg |



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Zviedrija
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom