



Liko MasterVest Mod. 60, 64




Návod na použitie

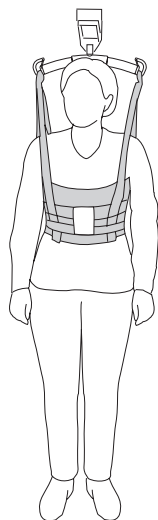

Mod. 60

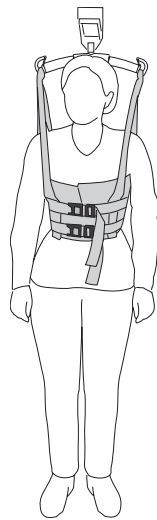

Mod. 64

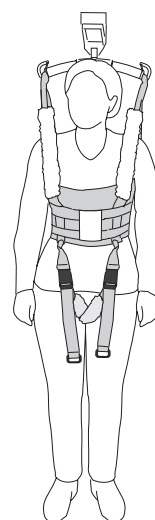

Mod. 60
s postrojom na nohy a
obalmi s vypchávkami

Opis produktu

Určené použitie

Určené na použitie v nasledujúcich prostrediach: zdravotná starostlivosť, intenzívna starostlivosť, urgentný príjem, rehabilitačné prostredie, habilitačné prostredie a prostredie domácej starostlivosti.

Vesta **Liko** MasterVest je univerzálny postroj so širokou škálou použití, napr. ako pomoc pri státí a chôdzi alebo pri návšteve toalety.

Vesta MasterVest podopiera pacienta okolo hornej časti tela, ako aj pod pažami. Pri veste MasterVest sa vyžaduje, aby boli pacienti schopní uniesť váhu na nohách.

Vesta **Liko** MasterVest umožňuje dosiahnuť určité ťažko dosiahnuteľné ciele, napr.:

- pacientom dáva vhodnú pomoc pri cvičení a nosení hmotnosti na svojich nohách
- ošetrovatelia sa vyhnú rizikám spojeným s ťažkým zdvíhaním.

Pri zdvíhaní pacienta a jeho prechode na záchod a zo záchodu môže ošetrovateľ utrpieť závažné poranenia. Vesta MasterVest uľahčuje hladký a jednoduchý prechod pacienta na záchod a zo záchodu.

Keďže vesta MasterVest pokrýva len hornú časť tela, spodná časť tela je ľahko prístupná na obliekanie a vyzliekanie.

Vesta MasterVest s predným zapínaním, mod. 64

Model vesty **Liko** MasterVest s predným zapínaním. 64 je možné použiť u pacientov, ktorí si dokážu vestu sami obliecť a vyzliecť.

Vesta MasterVest je vybavená dvomi nastaviteľnými bezpečnostnými sponami krížom cez hrudník. Ich použitie sa odporúča aj v prípadoch, keď je potrebné nastaviť napnutie a upraviť tlak na hrudníku.

MasterVest s postrojom na nohy

Postroj na nohy drží vestu MasterVest na svojom mieste a často sa používa pri nácvičku chôdze.

Vhodné zdvíhaky

Vestu MasterVest je možné používať so všetkými stropnými aj mobilnými zdvíhacími zariadeniami **Liko**. Môžete si vybrať stropné zdvíhacie zariadenie **LikoGuard**, stropné zdvíhacie zariadenie **Likorall** a stropné zdvíhacie zariadenie **Multirall**, prípadne mobilné zdvíhacie zariadenie **Golvo**, mobilné zdvíhacie zariadenie **Viking**, mobilné zdvíhacie zariadenie **Uno** a mobilné zdvíhacie zariadenie **Liko M220/M230**.

V tomto dokumente sa zdvíhaná osoba označuje ako pacient a asistujúca osoba sa označuje ako ošetrovateľ.

DÔLEŽITÉ!

Zdvíhanie a premiestňovanie pacienta so sebou vždy prinášajú určitú mieru rizika. Pred použitím si prečítajte návod na použitie zdvíhaka pacienta aj zdvíhacieho príslušenstva. Je dôležité, aby ste úplne porozumeli obsahu návodu na použitie. Toto zariadenie smie používať iba vyškolený ošetrovateľ. Ošetrovateľ si na vyškolenie musí prečítať a pochopiť návod na použitie. Zabezpečte, aby zdvíhacie príslušenstvo zodpovedalo používanému zdvíhaku. Počas používania postupujte pozorne a opatrne. Ako ošetrovateľ vždy zodpovedáte za bezpečnosť pacienta. Musíte mať istotu, že pacient zdvíhanie zvládne. Ak vám niečo nie je jasné, obráťte sa na výrobcu alebo dodávateľa.

Obsah

Určené použitie	1
Bezpečnostné informácie	3
Popis symbolov	4
Starostlivosť a kontrola.....	5
Definície.....	5
Ako vybrať veľkosť postroja	6
Rozmery.....	7
Ako upevniť vestu MasterVest na rôznych závesných tyčiach	8
Ako upevniť vestu MasterVest k dvojramenu.....	9
Zdvíhanie zo sediacej polohy.....	10
Skúšanie vesty Liko MasterVest.....	11
Odporúčané zdvíhacie príslušenstvo.....	13
Voliteľné komponenty	13
Prehľad modelov viest Liko MasterVest. 60, 64	14
Odporúčané kombinácie	14


Bezpečnostné informácie


Skôr, ako začnete so zdvíhaním, majte na pamäti nasledujúce body:

- Zodpovedná osoba vo vašej organizácii má podľa jednotlivých prípadov rozhodnúť, či je potrebný jeden ošetrovateľ alebo viacerí ošetrovatelia.
- Zabezpečte, aby zvolený vak spĺňal potreby pacienta z hľadiska modelu, veľkosti, tkaniny a prevedenia.
- Vyskúšajte núdzové spúšťanie na zdvíhaku, ktorý používate, aby ste sa uistili, že správne funguje.
- Upravte maximálnu výšku, aby nebolo možné zdvihnúť pacienta príliš vysoko.
- V záujme ochrany bezpečnosti a hygieny pacientov vak po každom pacientovi vyperte.
- Pred zdvíhaním naplánujte zdvíhaciu procedúru tak, aby mohla byť vykonaná čo najbezpečnejšie a najplynulejšie.
- Pred zdvíhaním skontrolujte, či zdvíhacie príslušenstvo visí vertikálne a dokáže sa voľne pohybovať.
- Hoci sú ramená na vaky Liko vybavené západkami, musíte dávať mimoriadny pozor: predtým, ako pacienta zdvihnete z podkladu ale keď sú popruhy úplne napnuté, zabezpečte, aby boli správne pripojené k hákom ramena na vak.
- Pacienta nikdy nezdvíhajte z podkladu vyššie, než je potrebné na dokončenie procesu zdvíhania a premiestňovania.
- Zabezpečte, aby boli počas zdvíhania/premiestňovania kolesá na invalidnom vozíku, lôžku, ležadle atď. zabrzdené.
- Vždy pracujte ergonomicky. Využívajte pacientovu schopnosť aktívne sa zapájať do úkonov.

 **Nesprávne upevnenie vaku na zdvíhacie rameno môže spôsobiť vážne poranenie pacienta.**

 **Manuálne otáčanie pacienta na lôžku môže spôsobiť poranenie ošetrovateľa.**

 **Dbajte na to, aby sa pacient a ošetrovateľ počas zdvíhania vyhýbali miestam, kde dochádza k zovretiu, a pohyblivým častiam. Mohlo by dôjsť k zraneniu.**

 **Vyhodnoťte riziko zachytenia pacientov a náležite ich monitorujte. Dbajte na to, aby sa hlava a končatiny pacienta počas zdvíhania nenachádzali v slučkách vaku alebo medzi nimi. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k vážnemu poraneniu alebo smrti.**


 **Ak je vak opotrebovaný, nerovnomerne nasadený na pacienta alebo ho neopatrne dáte dole z pacienta, môže dôjsť k zovretiu alebo drobným poraneniam.**


 **Vak nepoužívajte, neskladujte ani neprepravujte v blízkosti domácich zvierat, škodcov alebo detí bez dozoru!**

 **Keď je pacient zdvihnutý, nikdy ho nenechávajte bez dozoru!**

 **Nikdy nenechávajte deti bez dozoru v blízkosti vaku!**

 **Postroj neodkladajte na miesta, kde bude vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo zdrojom tepla, ako je radiátor alebo krb, sporák/rúra!**

 **Postroj nebol testovaný na použitie v prostredí magnetickej rezonancie (MR). Pacienta presuňte na podložku kompatibilnú s prostredím MR a výrobok odstráňte z miestnosti MR.**

 Zdravotnícka pomôcka triedy I

PATENT www.hillrom.com/patents

Na produkt sa môže vzťahovať jeden alebo viac patentov. Pozrite si vyššie uvedenú internetovú adresu.

Spoločnosti Hillrom sú majiteľmi európskych, amerických a iných patentov, ako aj patentov čakajúcich na schválenie.

Zmeny produktu

Produkty **Liko** sa neustále vyvíjajú a z tohto dôvodu si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien produktov bez predchádzajúceho upozornenia. Rady a informácie týkajúce sa inovácií produktov vám poskytne zástupca spoločnosti Hillrom.

Design and Quality by Liko in Sweden


















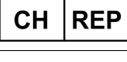











Liko má certifikát kvality v súlade s normou ISO 9001 a jej ekvivalentom v priemysle zdravotníckych pomôcok, normou ISO 13485. Liko má certifikáciu aj podľa normy o životnom prostredí ISO 14001.

Upozornenie pre používateľov a/alebo pacientov v EÚ

Akýkoľvek vážny incident, ktorý nastal v súvislosti s pomôckou, je potrebné oznámiť výrobcovi a príslušným orgánom členského štátu, kde má používateľ a/alebo pacient trvalé bydlisko.

Opis symbolov

V tomto dokumente a/alebo na produkte je možné nájsť tieto symboly.

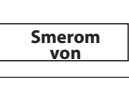Symbol	Opis	Symbol	Opis
	Varovanie; táto situácia si vyžaduje mimoriadnu opatrnosť a pozornosť. Tento symbol je žltý trojuholník s čiernym okrajom a čiernym výkričníkom uprostred.		
	Recyklovateľné		
	Pred použitím si prečítajte návod na použitie. Tento symbol je modrý kruh s bielym obrázkom osoby čítajúcej knihu.		
	Pred použitím si prečítajte návod na použitie		Upozornenie! Prečítajte si návod na použitie.
	Označenie CE. Označenie zhody zdravotníckej pomôcky Európskej únie, zdravotnícka pomôcka triedy I.		
	Autorizovaný zástupca vo Švajčiarsku		
	Právne zodpovedný výrobca		Dátum výroby
	Identifikátor produktu		Zdravotnícka pomôcka
	Sériové číslo		Jedinečná identifikácia pomôcky
	Nečistite chemicky		Sušenie na šnúre v tieni
	Nežehlite		Nepoužívajte bielidlo
	Sušenie v sušičke		Neprať
	Nesušiť v bubnovej sušičke		
	Pranie Symbol je uvedený vždy spolu s odporúčanou teplotou v °C a °F.		
	Neobsahuje latex		
	Pravidelná kontrola		
	Nepoužívajte produkt (iba v prípade produktov Solo, viditeľné po vypratí, keď je použitie zakázané)		Meno pacienta
	Použitie u jedného pacienta (len v prípade produktov Solo)		
	Smer nahor a symbol na vonkajšej strane pomôcky.		Symbol na vonkajšej strane pomôcky.
	Čiarový kód dátovej matice GS1, ktorý môže obsahovať nasledovné informácie. (01) Globálne číslo obchodnej položky (11) Dátum výroby (21) Sériové číslo		

Starostlivosť a kontrola

Vak pred každým použitím skontrolujte. Skontrolujte nasledujúce miesta, či nedošlo k opotrebovaniu a poškodeniu:

- Tkanina
- Popruhy
- Švy
- Slučky
- Spony

⚠ Poškodené zdvíhacie príslušenstvo nepoužívajte.

Ak vám niečo nie je jasné, obráťte sa na výrobcu alebo dodávateľa.

Ak sa vak používa pri kúpaní alebo sprchovaní: po použití vaku pri kúpaní alebo sprchovaní treba vak uložiť tak, aby čo najskôr vyschol.

Pokyny na pranie a dezinfekciu: pozrite si štítok produktu vaku a priložený dodatok „Starostlivosť a údržba o vaky Liko“. Bezpečnostné spony na mod. 64 musia byť počas prania zatvorené.

Materiál: vesta MasterVest je vyrobená z polyesteru.

Pravidelná kontrola

Produkt sa musí kontrolovať minimálne raz za 6 mesiacov. Častejšie kontroly sa môžu vyžadovať, ak sa produkty používajú alebo perú častejšie, ako je bežné. Ak chcete získať protokoly, obráťte sa na zástupcu spoločnosti Hillrom.

Očakávaná životnosť

Mod. 60: Výrobok má pri bežnom používaní očakávanú životnosť 5 rokov.

Mod. 64: Produkt má pri bežnom používaní očakávanú životnosť 4 roky.

Dĺžka životnosti závisí od tkaniny, frekvencie používania, spôsobu prania a záťažovej hmotnosti. Spoločnosť Hillrom odporúča, aby sa výrobok používal len počas očakávanej životnosti.


Pokyny na recykláciu

Celý vak vrátane líšt, materiálu vypchávkov a pod. by sa mal vytriediť ako horľavý odpad.

Spoločnosť Hillrom vyhodnocuje a používateľom poskytuje návod na bezpečnú manipuláciu a likvidáciu svojich pomôcok, aby sa predišlo zraneniam okrem iného vrátane: porezania a prepichnutia kože, odrenín, a akéhokoľvek požadovaného čistenia a dezinfekcie zdravotníckej pomôcky po použití a pred jej likvidáciou. Zákazníci majú dodržiavať všetky federálne, vnútroštátne, regionálne a/alebo miestne zákony a predpisy týkajúce sa bezpečnej likvidácie zdravotníckych pomôcok a príslušenstva.

V prípade pochybností sa musí používateľ pomôcky najskôr obrátiť na technickú podporu spoločnosti Hillrom a získať pokyny k protokolom bezpečnej likvidácie.

Definície

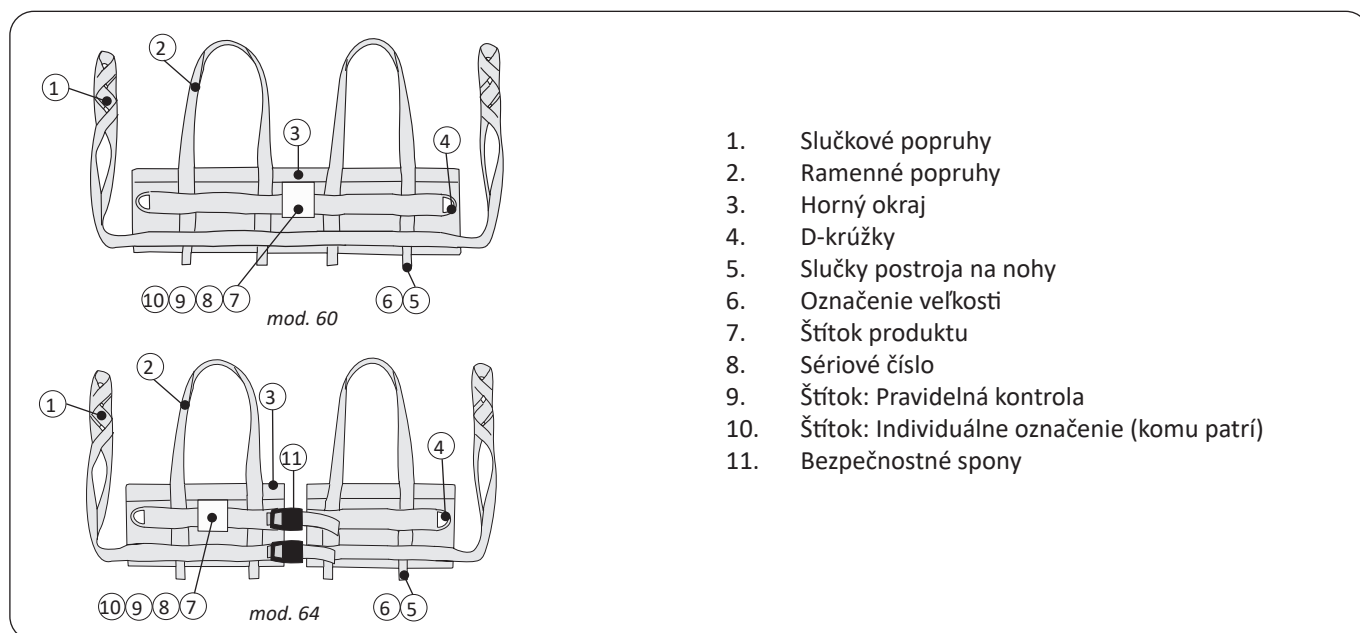


Ako vybrať veľkosť vaku

⚠ Používajte iba postroj, ktorého veľkosť vyhovuje danému pacientovi. Správnu veľkosť musí posúdiť vyškolený ošetrovateľ. Môže dôjsť k uviaznutiu alebo uduseniu pacienta.


Pri výbere veľkosti postroja sa riadte obvodom pacienta a šírkou vesty. Porovnajte rozmery pacienta (pozri návod na meranie) a rozmery vaku (pozri tabuľku alebo návod na meranie).

Obvod hrudníka pacienta zmerajte takto:

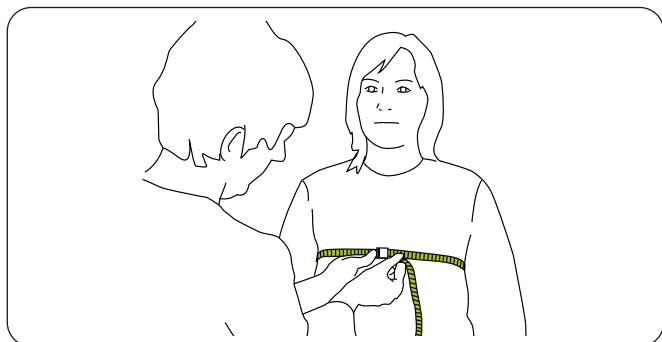


Zmerajte obvod hrudníka pacienta (u žien pod prsiami).

Šírku vesty postroja pacienta zmerajte takto:

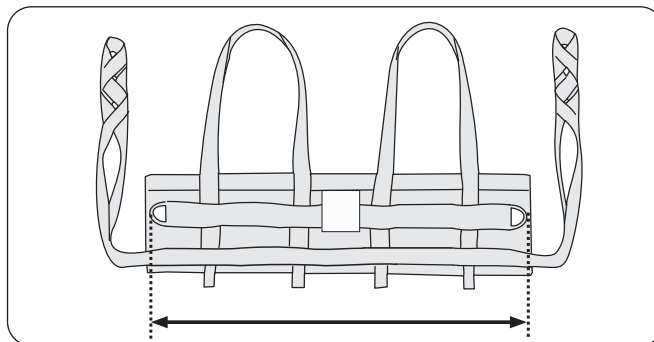


Zmerajte vonkajšiu vzdialenosť medzi kovovými krúžkami. Miery nájdete aj v časti „Rozmery“, pozri stranu 7.


Voľba správnej veľkosti:

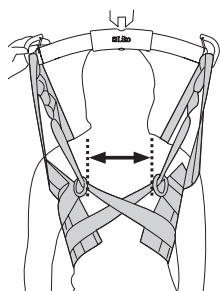

5 – 30 cm

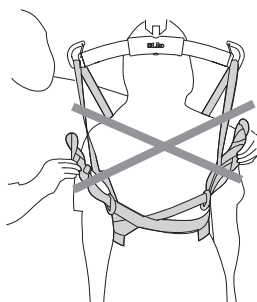


viac ako 30 cm

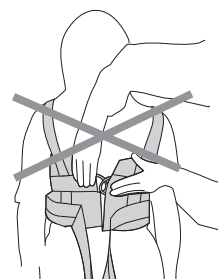

menej ako 5 cm

Vyberte si postroj so šírkou vesty, ktorá je o 5 – 30 cm menšia ako nameraný obvod hrudníka pacienta. Medzera medzi kovovými krúžkami by mala byť 5 – 30 cm, keď je vesta na pacientovi a ramenné pásy sú úplne roztiahnuté. Medzera medzi kovovými krúžkami môže byť pri väčších rozmeroch postrojov väčšia. Uistite sa, že ste si vybrali správnu veľkosť postrojov a starostlivo nastavte slučkové pásy.

Rozměry

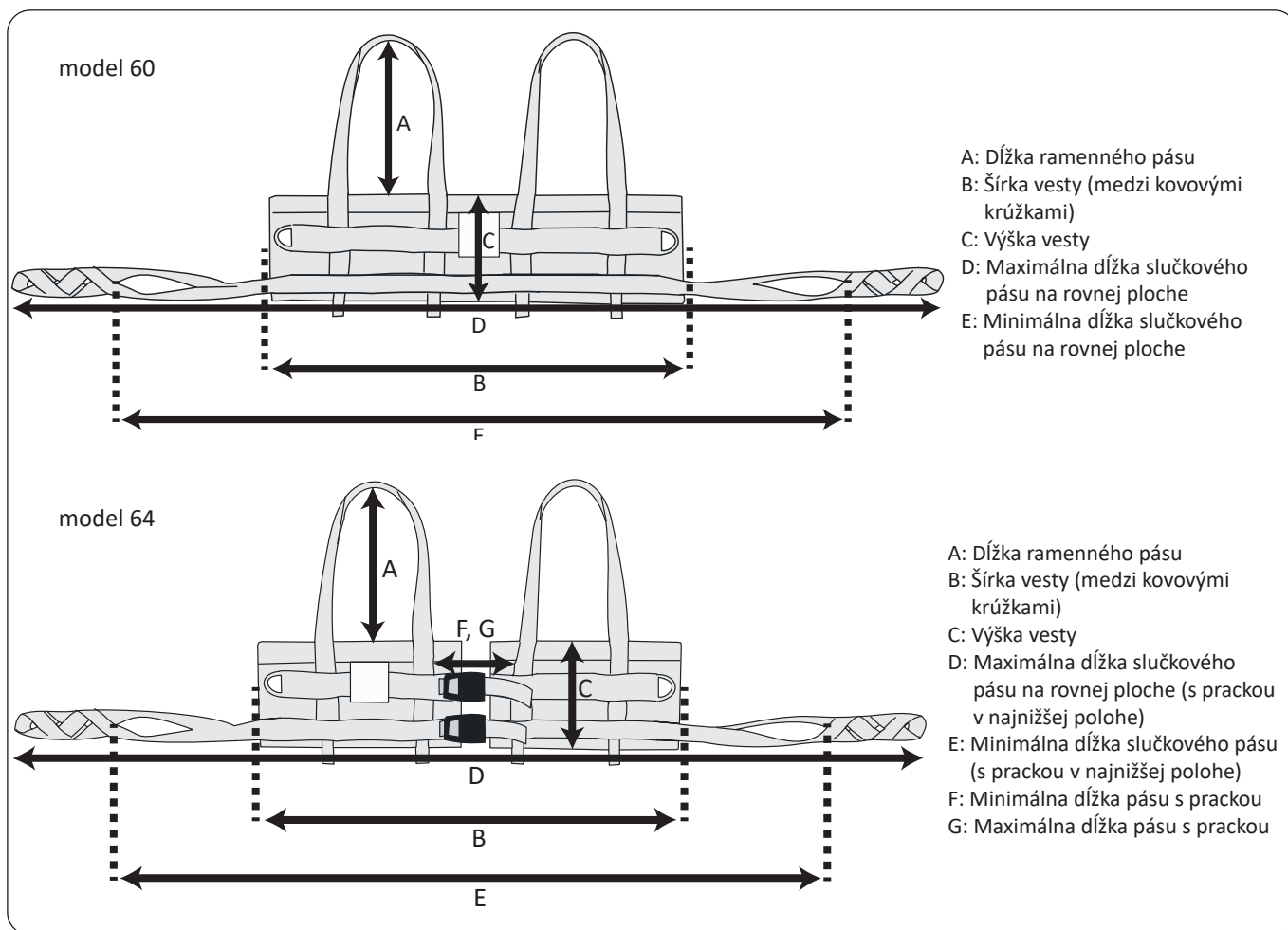

Rozměry veľkostí v centimetroch pre model 60

VEĽ-KOŠŤ	A	B	C	D	E	Maximálna záťaž (kg)	Č. prod.
XS	43	60	18	204	170	200	3560113
S	48	70	23	190	156	200	3560114
M	38	80	23	197	164	200	3560115
L	39	90	22	207	174	200	3560116
XL	39	100	22	233	198	300	3560117
XXL	38	110	23	250	218	300	3560118

Rozměry veľkostí v palcoch pre model 60

VEĽ-KOŠŤ	A	B	C	D	E	Maximálna záťaž (lb)	Č. prod.
XS	17	24	7	80	67	440	3560113
S	19	28	9	75	61	440	3560114
M	15	32	9	78	65	440	3560115
L	15	35	9	92	78	440	3560116
XL	15	39	9	92	78	660	3560117
XXL	15	43	9	98	86	660	3560118







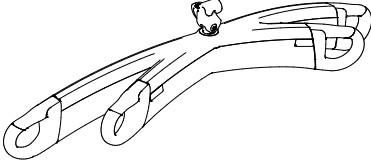
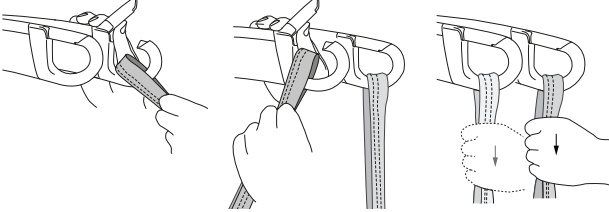
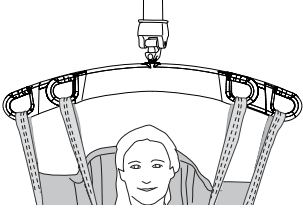
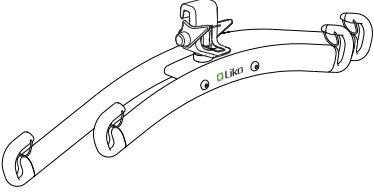
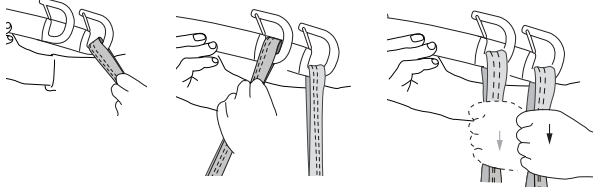
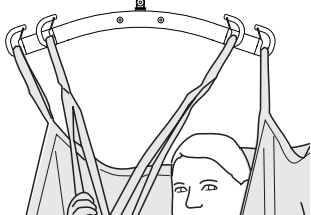
Rozměry veľkostí v centimetroch pre model 64

VEĽ-KOŠŤ	A	B	C	D	E	F	G	Maximálna záťaž (kg)	Č. prod.
S	39	70	22	182	149	10	35	200	3564114
M	38	80	22	190	157	11	36	200	3564115
L	38	90	22	201	167	12	39	200	3564116
XL	38	100	23	215	182	17	46	200	3564117
XXL	39	110	22	239	205	16	43	200	3564118


Rozměry veľkostí v palcoch pre model 64

VEĽ-KOŠŤ	A	B	C	D	E	F	G	Maximálna záťaž (lb)	Č. prod.
S	15	28	9	72	59	4	14	440	3564114
M	15	32	9	75	62	4	14	440	3564115
L	15	35	9	79	66	5	15	440	3564116
XL	15	39	9	85	72	7	18	440	3564117
XXL	15	43	9	94	81	6	17	440	3564118


Ako upevniť vestu MasterVest na rôznych závesných tyčiach

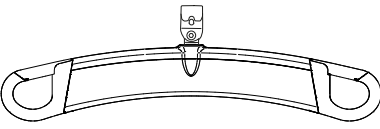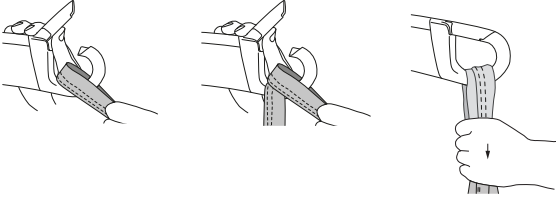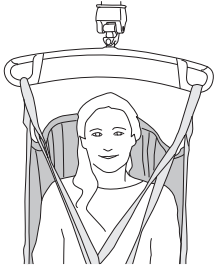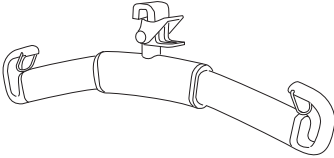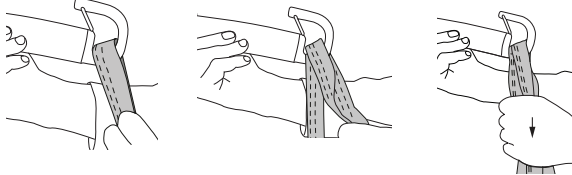Rameno na vak	Slučky vaku na háky ramena na vak	Správne
 <p data-bbox="204 495 349 528">SlingGuard</p>		
 <p data-bbox="215 786 338 819">Universal</p>		
 <p data-bbox="169 1070 386 1104">SlingGuard Twin</p>		
 <p data-bbox="177 1368 373 1402">Universal Twin</p>		


Nesprávne!

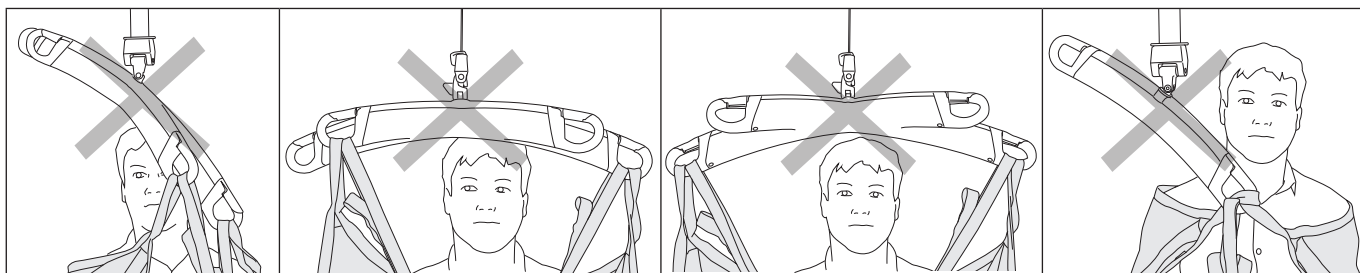

Ako upevniť vestu MasterVest k dvojramenu

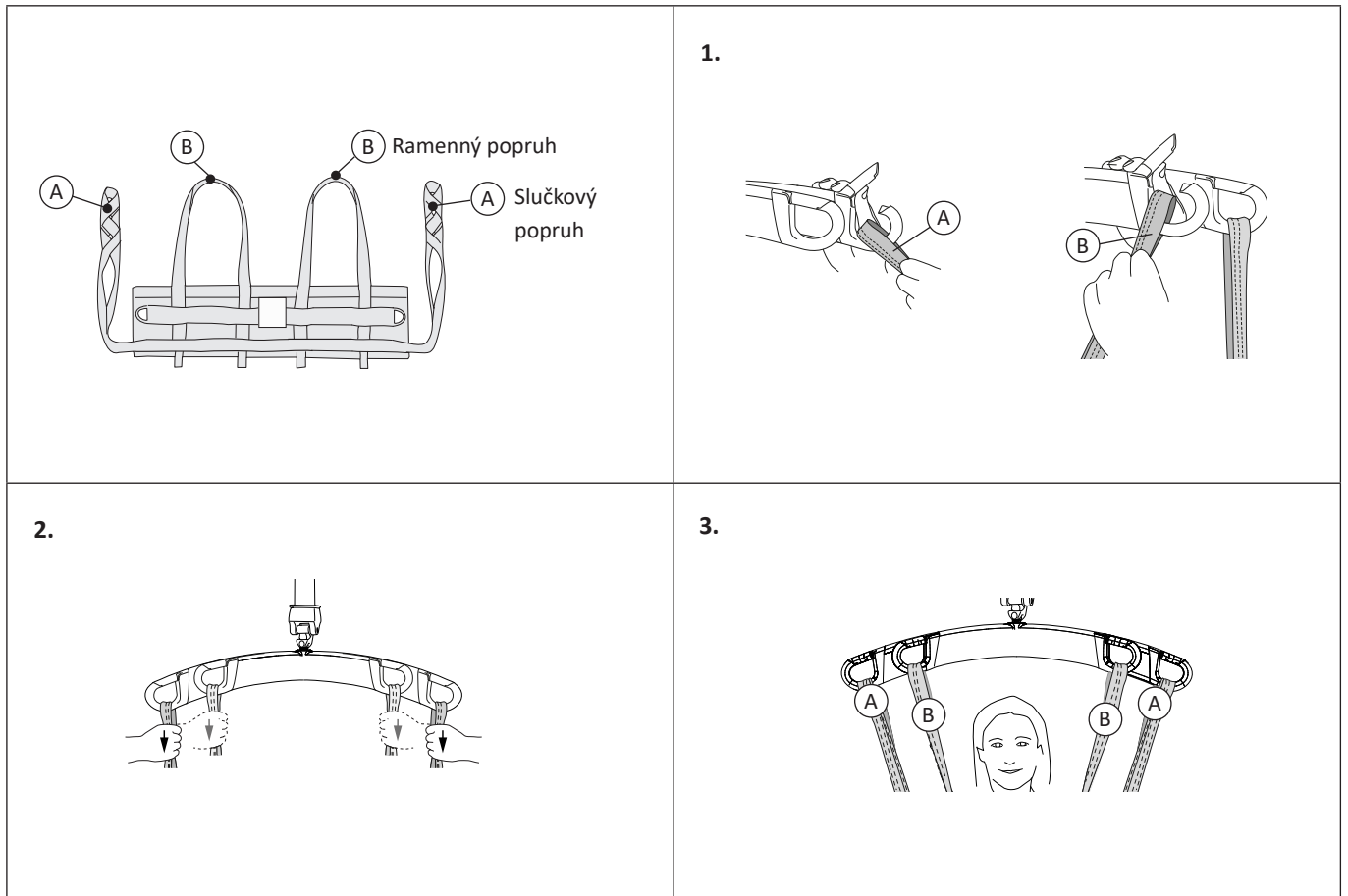


Zdvíhanie zo sediacej polohy

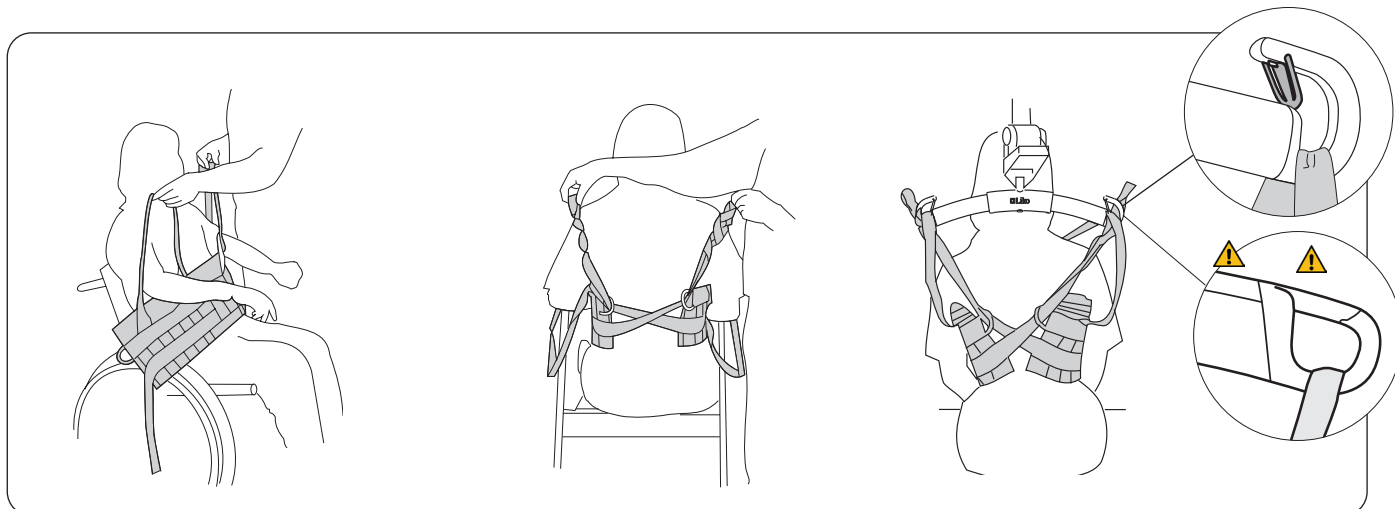

Oblečte vestu MasterVest spredu. Paže pacienta sú položené cez ramenné popruhy.

Za chrbtom: každý slučkový popruh pretiahnite cez chrbát a prevlečte ho cez kovový D-krúžok na opačnej strane, ako ukazuje obrázok.

Zaistite, aby bola závesná tyč za chrbtom pacienta, a pomocou vhodnej slučky upevnite slučkové pásy, pozri strany „Nastavenie slučkových pásov“ na strane 11– 12. Ramenné popruhy upevnite k ramenu na vak. Na stranách 8 – 9 nájdete pokyny na pripevnenie slučiek vaku na rôzne ramená na vaky.

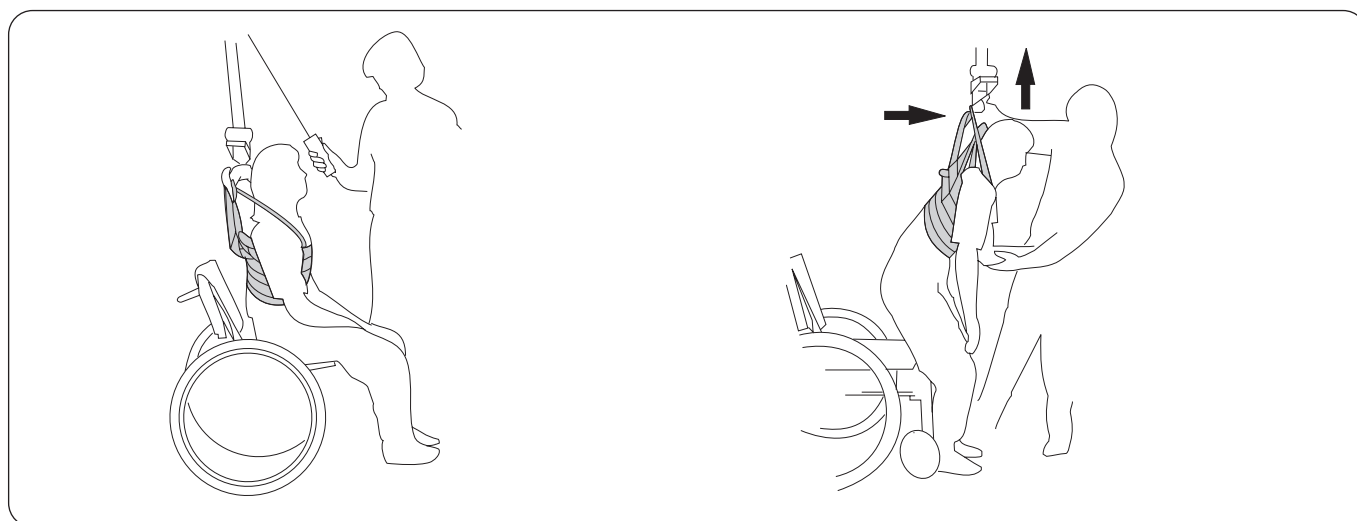

Pred zdvíhaním: skontrolujte, či má pacient chodidlá pevne na podlahe, aby dokázal po zdvihnutí závesnej tyče uniesť príslušnú váhu. Závesnú tyč mierne zdvihnite, aby ste utiahli pásy (bez zdvihnutia pacienta zo sedadla), a skontrolujte, či je tlak okolo hornej časti tela pacienta rozložený pohodlne.

Počas zdvíhania: potiahnite závesnú tyč dopredu, aby sa váha pacienta hladko prenášala, kým sa pacient nepostaví do vzpriamenej polohy a nedosiahne rovnováhu. Rameno na vak mierne spustite, aby sa uvoľnil tlak okolo hrudníka. Teraz má pacient možnosť preniesť váhu na nohy a pracovať na precvičovaní rovnováhy.

Skúšanie vesty LIKO MasterVest

Nastavenie slučkových pásov


Slučka, na ktorú zavesíte na rameno na vak, určuje, do akej miery bude vesta sťahovať hrud'.

Ak sa vesta šmýka nahor – skúste vnútornú slučku alebo menšiu veľkosť vesty.

Ak je vesta okolo hrude príliš úzka – skúste vonkajšiu slučku alebo väčšiu veľkosť vesty.

Ak si rovnakú veľkosť vyskúšajú dve rôzne osoby, štíhlejšia z nich bude potrebovať vnútornú slučku a urastenejšia vonkajšiu slučku. Vesta MasterVest je nastavená správne vtedy, keď sú ramenné a slučkové popruhy pri zdvíhaní pacienta rovnomerne napnuté.


Skúšanie slučkových popruhov

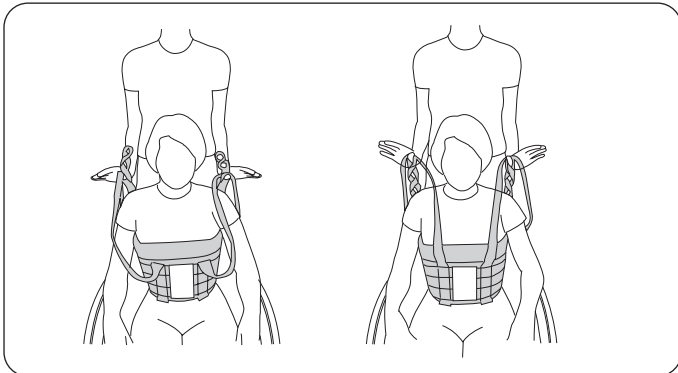

Na zistenie, ktoré slučky najlepšie pasujú, vyskúšajte slučkové popruhy potáhaním za rôzne slučky spolu s ramennými popruhmi.


Pri skúšaní správneho nastavenia slučkových popruhov sa postavte za pacienta a zaveste ramenné popruhy a slučkové popruhy na vaše palce a zdvíhajte hore, až kým nebudú popruhy napnuté. Vesta MasterVest sedí správne vtedy, keď sú slučkové popruhy a ramenné popruhy pri zdvíhaní napnuté rovnomerne.

Spony pre slučky

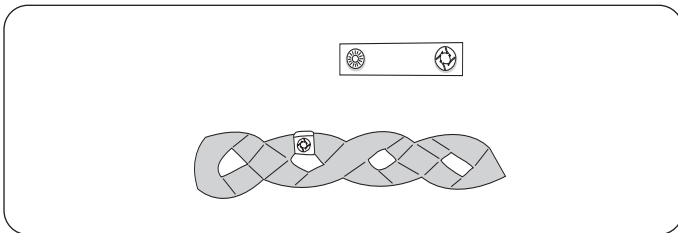

Toto je praktické príslušenstvo, ktoré sa používa na označenie slučiek, ktoré boli pre určitú osobu odskúšané. Pre ošetrovateľov je jednoduchšie zvoliť správnu slučku na pripojenie k zdvíhaciemu ramenu.

Telesný postoj

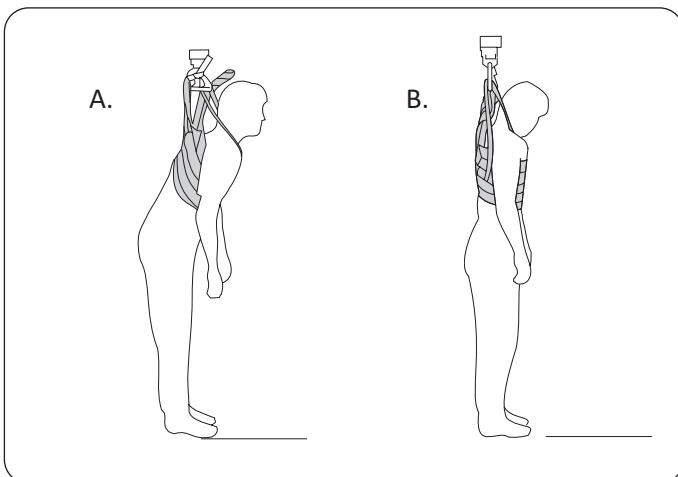


Často sa stáva, že jednému človeku sú dobré dve veľkosti vesty MasterVest, pri obidvoch veľkostiach však treba správne nastaviť slučkové popruhy. Výsledky sa líšia podľa držania tela a rozloženia tlaku okolo hrudníka.

A. Väčšia vesta MasterVest si vyžaduje použitie vnútorných slučiek na slučkovom popruhu. Takéto upevnenie umožňuje, aby sa pacient predklonil, pričom pôsobí väčším tlakom na prednú dolnú časť hrudníka.

B. Menšia vesta MasterVest si vyžaduje upevnenie jednej z vonkajších slučiek slučkového popruhu k ramenu na vak, čím sa dosiahne rovnomerné napnutie všetkých štyroch popruhov. V tomto prípade je držanie tela vzpriamenejšie a tlak okolo hrudníka je rozložený rovnomernejšie.



Vesta MasterVest s predným zapínaním, mod. 64

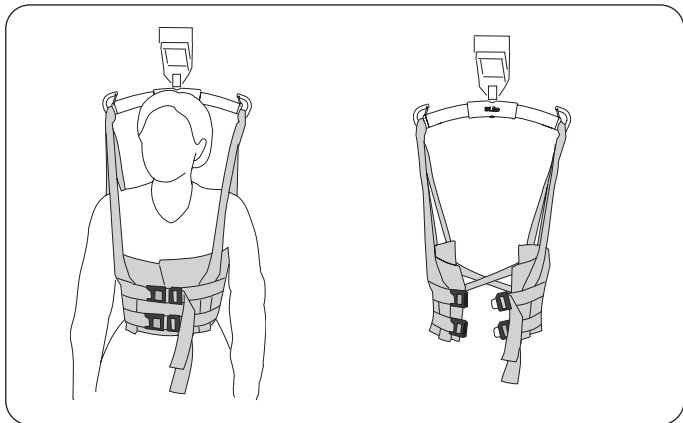

Vesta MasterVest je k dispozícii aj ako model s predným zapínaním.

Vesta MasterVest s predným zapínaním je vybavená dvomi nastaviteľnými bezpečnostnými sponami v prednej časti. Skúšku správnej veľkosti vesty a správnej polohy slučkových popruhov môžete vykonať aj v prípade, keď si pacient oblečie vestu MasterVest sám. Po správnom nastavení môže vesta MasterVest pri obliekaní visieť za rameno na vak.

- ⚠ Uistite sa, že pacient dokáže sám rozopnúť pracky alebo mu pri vyzliekaní vesty pomáha ošetrovateľ, aby ste predišli nepohodliu, ak sa vesta po skončení aktivity nevyzlečie.
- ⚠ Ak nie je postroj na nohy uzavretý, alebo ak sa na pracky vyvíja príliš veľký tlak, ktorý spôsobuje ich otvorenie, vesta sa môže posunúť nahor a spôsobiť nepohodlie.

Problém počas skúšania?

Problém: Vesta sa vytiahne nahor pod pacientove ramená.

Upravte vestu MasterVest pomocou jedného alebo viacerých z týchto spôsobov:

- upravte slučkový popruh použitím vnútornej slučky.
- zvoľte menšiu veľkosť.
- skúste vyskúšať postroj na nohy.
- pri zdvíhaní pacienta držte vestu na mieste za chrbtom tlačením svojho palca nadol na prekrížených slučkových popruhoch.
- pacientovi povedzte, aby ruky pri zdvíhaní držal dole.

Odporúčané zdvíhacie príslušenstvo

Predlžovacia slučka

Predlžovacia slučka, zelená, 12 cm

Predlžovacia slučka, zelená, 22 cm

Predlžovacia slučka, sivá, 12 cm


Predlžovacia slučka, sivá, 22 cm

č. prod. 3691102

č. prod. 3691103

č. prod. 3691302

č. prod. 3691303

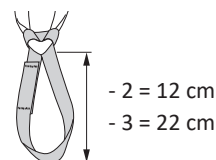


Voliteľné komponenty

Postroj na nohy

č. prod. 3666004-06

Ak chcete zabrániť tomu, aby sa vesta posúvala po tele smerom nahor, môžete spolu s ňou použiť špeciálny postroj na nohy **Liko MasterVest**. Postroj môžete nasadiť sediacemu pacientovi a po jeho zdvihnutí môžete nastaviť polohu a napnutie postroja. Popruhy postroja môžu ísť v oblasti rozkroku krížom cez seba alebo rovnobežne vedľa seba.

POZOR! Postroj na nohy je kompatibilný s vestami s výrobným číslom 736166. Ďalšie informácie o starších modeloch vám poskytne zástupca spoločnosti Hillrom.

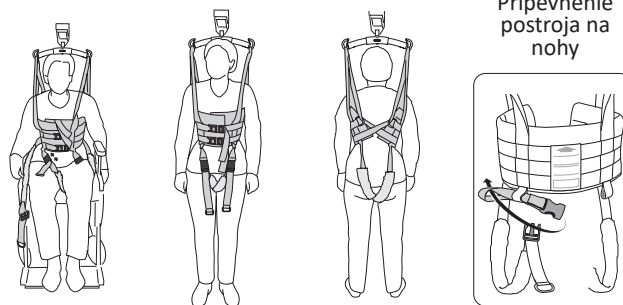


Obal s vypchávkami pre ramenný popruh

č. prod. 3666021

Obaly s vypchávkami sú príslušenstvom, ktoré je k dispozícii na odľahčenie tlaku na predné popruhy.

Kvôli jednoduchému používaniu sú obaly s vypchávkami na jednej strane vybavené zapínaním na háčik a slučku.

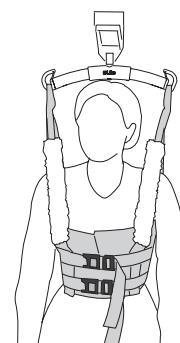

Spony pre slučky

Spony pre slučky, červené, 4 ks

Spony pre slučky, oranžové, 4 ks

Spony pre slučky, žlté, 4 ks

Spony pre slučky, modré, 4 ks

Spony pre slučky, čierne, 4 ks


č. prod. 3666033

č. prod. 3666034

č. prod. 3666035

č. prod. 3666036

č. prod. 3666037

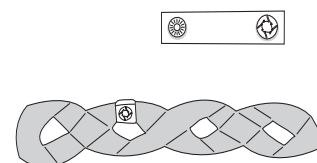

Prehľad modelov viest LIKO MasterVest 60,64

Produkt	Č. prod.	Veľkosť	Hmotnosť tela ¹	Maximálna záťaž ²
MasterVest mod. 60	3560113	XS	20 – 40 kg (44 – 88 libier)	200 kg (440 lb)
MasterVest mod. 60	3560114	S	40 – 60 kg	200 kg (440 lb)
MasterVest mod. 60	3560115	M	60 – 80 kg	200 kg (440 lb)
MasterVest mod. 60	3560116	L	80 – 100 kg (176 – 220 libier)	200 kg (440 lb)
MasterVest mod. 60	3560117	XL	100 – 130 kg (220 – 286 libier)	300 kg
MasterVest mod. 60	3560118	XXL	120 – 300 kg (264 – 660 libier)	300 kg
MasterVest mod. 64	3564114	S	40 – 60 kg	200 kg (440 lb)
MasterVest mod. 64	3564115	M	60 – 80 kg	200 kg (440 lb)
MasterVest mod. 64	3564116	L	80 – 100 kg (176 – 220 libier)	200 kg (440 lb)
MasterVest mod. 64	3564117	XL	100 – 130 kg (220 – 286 libier)	200 kg
MasterVest mod. 64	3564118	XXL	120 – 200 kg (264 – 440 libier)	200 kg

¹ Indikovaná hmotnosť pacienta je len orientačná – môžu existovať odchýlky.

² Na zachovanie maximálnej záťaže sa vyžadujú zdviháky/príslušenstvo určené pre rovnakú alebo vyššiu záťaž.

Odporúčané kombinácie

Odporúčané kombinácie viest Liko MasterVest s ramenami na vaky Liko:	Mini 220	Universal SlingBar 350	Standard 450	Universal SlingBar 450	SlingGuard 450	Rameno Universal SlingBar 600	Dvojrameno Universal Twinbar 670	SlingGuard 670
MasterVest, XS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MasterVest, S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MasterVest, M	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MasterVest, L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MasterVest, XL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MasterVest, XXL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Vysvetlenie: ✓ = odporúčané

Aj keď táto tabuľka slúži ako usmernenie, je dôležité vedieť, že rôzne okolnosti môžu viesť k nevhodným kombináciám postroja so závesnou tyčou. Schválené kombinácie vo vzorci je potrebné vždy vyhodnotiť a schváliť vyškoleným zdravotníkom.

Dôsledkom rôznych širok ramena na vak sú rôzne úrovne tlaku na hrudník. Skúšajte rozličné alternatívy, kým nenájdete šírku, ktorá najlepšie vyhovuje príslušnému pacientovi.

Iné kombinácie

Kombinácie vesty Liko MasterVest s prekríženými tyčami Cross-bar, Cross-bar 450/670 alebo tyčami Side bar nie sú vhodné.

Kombinácie príslušenstva/produktov iných ako tých, ktoré odporúča spoločnosť Liko, môžu mať za následok riziká pre bezpečnosť pacienta.

Golvo, Hillrom, Liko, LikoGuard, Likorall, M220, M230, Multirall, Uno a Viking sú ochranné známky spoločnosti Baxter International, Inc. alebo jej dcérskych spoločností.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Švédsko
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom