

Kasutusjuhend



Toote kirjeldus

Liko Original HighBack Sling on põhimudel, sobitub patsiendi kehaga ilma reguleerimata ja on üks meie enimkasutatud lingudest.

See tagab poolviltuse isteesendi, toetab kogu keha ja sobib kehvema kehasabiilsusega patsientidele. Korralikult sobitatud ja hoolikalt ümber pandud ling annab patsiendile turvatunde ja on ühtlasi ka väga mugav.

Original HighBack Sling on soovitatav ka pörandalt tõstmiseks, kuna see toetab mugavalt pead nii istuvas kui lamavas asendis.

Suurused

Original HighBack Sling on saadaval kolmes suuruses. Turvalisuse ja mugavuse tagamiseks on tähtis valida õige suurus. Liiga suure linguga kaasneb oht, et patsient võib sellest välja libiseda. Liiga väikese suurusega ling võib kubemesse lõikuda ja põhjustada ebamugavust.

Suuremate suuruste puhul sobib hästi kombinatsioon lingulatiga TwinBar 670.

Materjalid

Original HighBack Sling on saadaval kolmest erinevast materjalist. Kuna lingu Original HighBack transportimise järel enamasti patsiendi alla ei jäeta, soovime kasutada polüestrist mudelit. See materjal on vastupidav ja vähene hõõrdumus muudab lingu ümberpanemise ja äravõtmise lihtsaks.

Selles dokumendis nimetatakse tõstetavat isikut patsiendiks ja teda abistavat isikut hooldajaks.

OLULINE!

Patsiendi tõstmine ja liigutamine kätkeb alati teatud tasemel ohtu. Enne kasutamist lugege nii patsiendi tõstuki kui ka tõstetarvikute kasutusjuhendeid. Oluline on kasutusjuhendi sisust täielikult aru saada. Seadmeid võib kasutada ainult asjakohase väljaõppe saanud personal. Veenduge, et tõstetarvikud oleksid kasutatava tõstuki jaoks sobivad. Olge kasutamise ajal hoolikas ja ettevaatlik. Hooldajana vastutate alati patsiendi ohutuse eest. Tuleb teada, kas patsiendi seisund võimaldab kavandatavat tõstmistoimingut teha. Kui midagi jääb ebaselgeks, võtke ühendust tootja või edasimüüjaga.

Original HighBack Sling on saadaval ka polüestervõrgust. See materjal on soovitatav, kui ling jääb pärast transportimist peale või kui soovitakse õhurikkamat mudelit.

Vannitamiseks ja duši all käimiseks on saadaval plastkattega võrgust mudel, mis on vett läbilaskev ja mida saab lihtsalt kuivatada. See materjal kuivab kiiresti ja ei jahuta patsienti nii nagu niiske imav kangas.

Kui te eelistate lingu, mis on tehtud tugevast kuivaks pühitavast materjalist, siis on saadaval ka plastkattega materjalist mudel.

Lingude tõsterihmad on alati tehtud vastupidavast polüestrist.

Jalatoed

Original HighBack Sling on saadaval erineva ehitusega jalatugedega. Enim levinud on tugevdusega jalatoed. Tugevdusega jalatoed on väga mugavad, jaotavad raskuse ühtlaselt ja ei lase lingul reite alt soonima hakata.














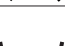

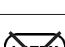



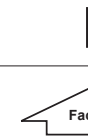
Üks mudel on lihtsast materjalist tugevdusteta jalatugedega, mis tähendab, et ling on hästi painduv ja lihtne hooldada.

Sisukord

Sümbolite kirjeldused	3
Ohutusjuhised	4
Puhastamine ja hooldamine.....	5
Mõisted	5
Kuidas kinnitada lingu erinevate lingulattide külge	6
Kuidas kinnitada lingu Original HighBack Sling 4 haagiga lingulati külge (topelplatid ja ristlatid).....	7
Tõstmine istuvast asendist	8
Tõstmine istuvasse asendisse	9
Lingu eemaldamine toolil/ratastoolis	9
Voodist tõstmine	10
Lingu ümberpanemine, kui patsient lamab voodil	10
Lingu ümberpanemine, kui patsient istub voodil	10
Tõstmine voodisse	11
Lingu eemaldamine, kui patsient lamab voodil	11
Lingu eemaldamine, kui patsient istub voodil	11
Tõstmine põrandalt	12
Tõstmine põrandale	12
Nõuanded sobitamiseks	13
Erinevad isteasendid	13
Erinevad viisid jalatugede ühendamiseks.....	13
Patsient ei istu lingus hästi – Miks see on nii?.....	14
Lühike asend.....	14
Tarvikud	14
Ülevaade – Liko Original HighBack Sling, mudel 200, 210.....	15
Kombineerimine	15

Sümbolite kirjeldused

Need sümbolid on toodud käesolevas dokumendis ja/või asuvad seadme peal.

Sümbol	Kirjeldus
	Hoiatus. Vajalik on eriline hoolikus ja tähelepanu.
	Enne kasutamist lugege kasutusjuhiseid
	CE-märgis
	Ametlik tootja
	Valmistamiskuupäev
	Viitenumber
	Seerianumber
	Meditiiniseade
	Mitte puhastada keemiliselt
	Mitte triikida
	Trummelkuivatus
	Ärge kuivatage trumlis
	Pesemine Sümbol on alati kombineeritud soovitatava temperatuuriga (°C ja °F).
	Lateksivaba
	Korraline ülevaatus
	Ärge pleegitage
	Kuivatada nõõril varjulises kohas
	Suund üles ja sümbol seadme välisküljel.
	Sümbol seadme välisküljel.
 <small>(01) 0100887761997127 (11) AAKKPP (21) 012345678910</small>	GS1 DataMatrixi võõtkood, mis võib sisaldada järgmist teavet. (01) GTIN (Global Trade Item Number) (11) Valmistamiskuupäev (21) Seerianumber

Ohutusjuhised

Enne tõstmist pange tähele järgmist.

- Teie organisatsiooni vastutav isik peab otsustama iga juhtumi puhul eraldi, kas on tarvis üht või mitut hooldajat.
- Veenduge, et valitud ling vastaks patsiendi vajadustele nii mudeli, suuruse, kanga kui ka ehituse osas.
- Ohutuse ja hügieeni tagamiseks peab igal patsiendil olema oma ling.
- Mõelge kogu tõstmisprotsess enne tõstmist otsast lõpuni läbi, et see toimuks võimalikult ohutult ja sujuvalt.
- Enne tõstmist kontrollige, et tõstetarvik ripuks vertikaalselt ja saaks vabalt liikuda.
- Ehkki Liko lingulatid on varustatud riividega, tuleb olla eriti ettevaatlik. Enne patsiendi tõstmist all olevalt pinnalt, ent siis, kui rihmad on täielikult pikendatud, veenduge, et rihmad oleks lingulattide haakidega õigesti ühendatud.
- Enne patsiendi liigutamist teise kohta veenduge, et ta oleks lingus turvaliselt kinnitatud.
- Ärge tõstke patsienti kunagi aluspinnast kõrgemale, kui on vaja tõstmise ja liigutamise lõpule viimiseks.
- Ärge jätke patsienti tõstmisel kunagi järelevalveta!
- Veenduge, et ratastooli, voodi, kandraami vms rattad oleksid tõstmise/liigutamise ajal lukustatud.
- Töötage alati ergonoomiliselt. Kasutage patsiendi võimekust aktiivselt toimingus osaleda.
- Kui lingu parasjagu ei kasutata, ärge jätke seda otsese päikesevalguse kätte.
- Soovitav on ling pärast patsiendi liigutamist eemaldada. Kui mingil põhjusel on tarvis ling pärast patsiendi liigutamist kohale jätta, on soovitatav kasutada polüestervõrgust lingu.

Lingu vale kinnitamine lingulatile võib põhjustada patsiendile raskeid vigastusi.

Patsiendi voodis käsitsi pööramine võib põhjustada hooldajale vigastusi.

 Meditsiiniseade, I klassi toode

PATENT www.hillrom.com/patents

Toodet võib kaitsta üks patent või mitu patenti. Vaadake eeltoodud internetiaadressi.

Hill-Romi ettevõtte on Euroopa, USA ja muude patentide ja kinnitamata patenditaotluste omanikud.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko tooted on pidevas arendustöös, mistõttu jätame endale õiguse teha etteteatamata muudatusi. Nõuannete ja tooteparenduste kohta teabe saamiseks võtke ühendust ettevõtte Hill-Rom esindajaga.

Teatis kasutajatele ja/või patsientidele ELis

Kõigist seadmega seoses esinenud tõsistest vahejuhtumitest tuleb teatada tootjale ja kasutaja ja/või patsiendi asukohaks oleva liikmesriigi pädevale asutusele.

Puhastamine ja hooldamine

Kontrollige lingu enne iga kasutuskorda. Kontrollige kulumise ja kahjustuste suhtes järgmisi punkte.

- Materjal
- Rihmad
- Õmblused
- Tõsteasad

⚠ Ärge kasutage katkisi tõstetarvikuid.

Kui midagi jääb ebaselgeks, võtke ühendust tootja või edasimüüjaga.

Kui lingu kasutatakse duši all või vannis: pärast kasutamist vannis või duši all tuleb ling võimalikult ruttu kuivama panna.

Pesemisjuhised: vaadake lingu andmesilti ja lisa "Liko tõstelinade puhastamine ja hooldamine".

Korraline ülevaatus

Toode tuleb vaadata üle vähemalt üks kord iga 6 kuu tagant. Tooteid, mida kasutatakse või pestakse tavalisest sagedamini, võib olla vaja tihedamini kontrollida. Vaadake Liko protokollsi „Periodic Inspection Liko Textile Products“ (Liko tekstiiltoodete perioodiline ülevaatus). Protokollide suhtes võtke ühendust ettevõtte Hill-Rom esindajaga.

Eeldatav kasutusiga

Tavapärasel kasutamisel on toote eeldatav kasutusiga 1–5 aastat. Eeldatav kasutusiga erineb olenevalt kangast, kasutussagedusest, pesemisviisist ja tõstetavast raskusest.


Ringlussevõtu juhised

Kogu toode, sealhulgas latid, pehmdusmaterjal jne, tuleb sortida põlevjäätmetena.







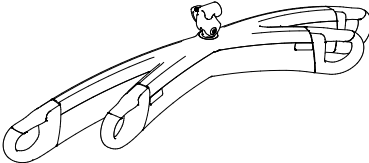
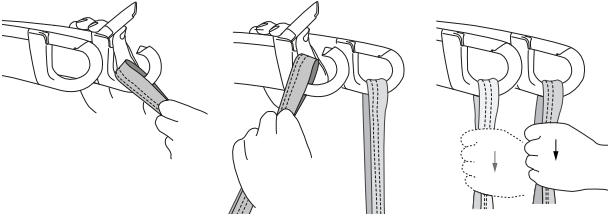
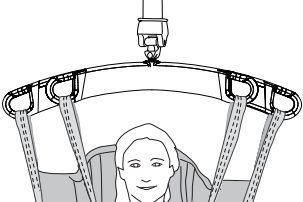
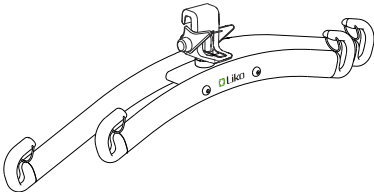
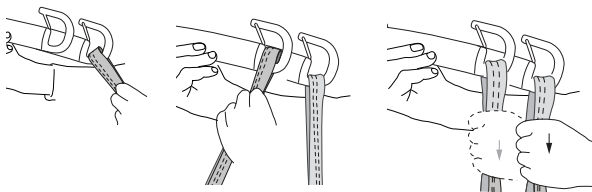
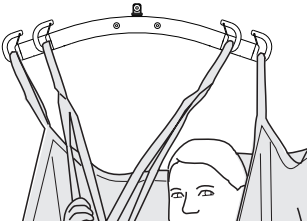
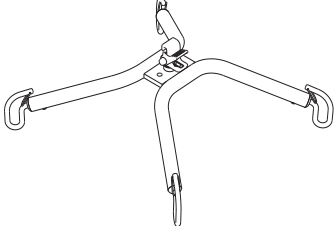
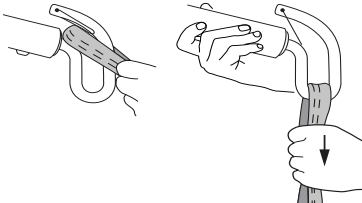
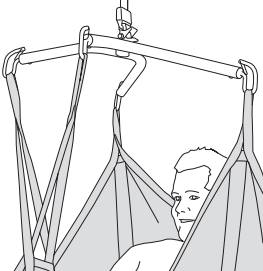
Hill-Rom hindab ja esitab kasutajatele juhiseid oma seadmete ohutu käsitlemise ja jäätmete kõrvaldamise kohta abiks vigastuste, sealhulgas, kuid mitte ainult, lõigete, nahatorgete, kriimustuste ennetamisel ning meditsiiniseadme puhul nõutava puhastamise ja desinfitseerimise kohta pärast kasutamist ning enne jäätmete kõrvaldamist. Kliendid peavad järgima kõiki föderaalseid, osariigi, piirkondlikke ja/või kohalikke seadusi ning määrusi meditsiiniseadmete ja -tarvikute jäätmete ohutu kõrvaldamise kohta.

Kahtluse korral peab seadme kasutaja võtma esmalt ühendust ettevõtte Hill-Rom tehnilise toega, et saada juhised jäätmete ohutu kõrvaldamise eeskirjade kohta.


Mõisted

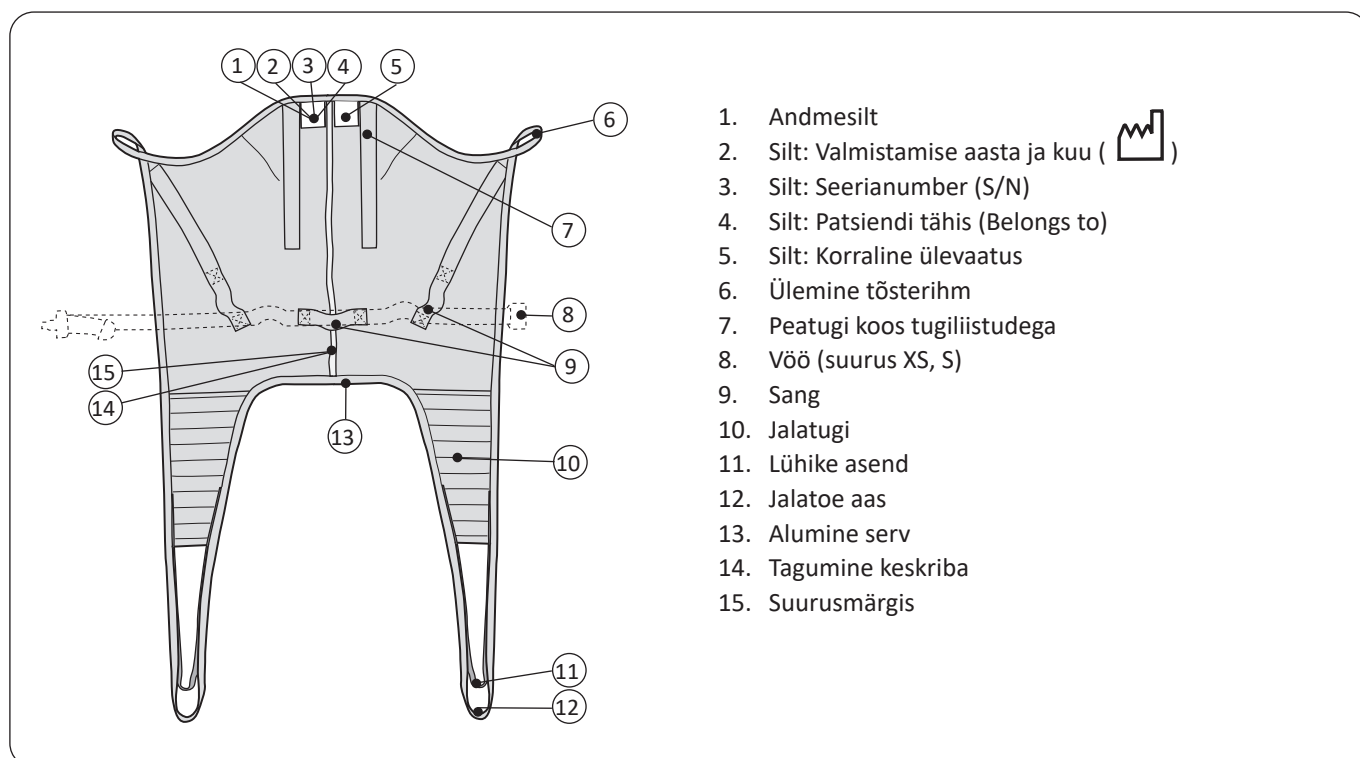





Kuidas kinnitada lingu erinevate lingulattide külge

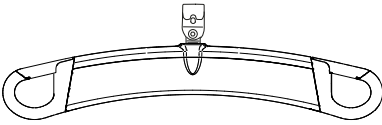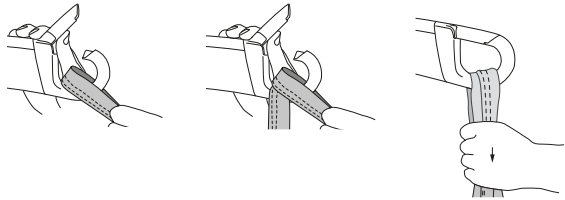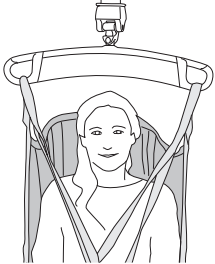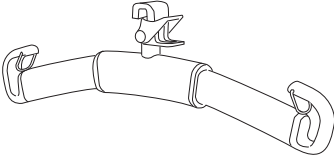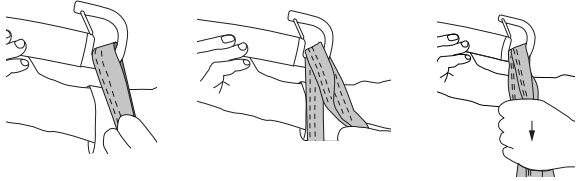Lingulatt	Lingu aasad lingulati haakide külge	Õige
 <p>SlingGuard™</p>		
 <p>Universal</p>		
 <p>SlingGuard™ Twin</p>		
 <p>Universal Twin</p>		
 <p>Ristlatt</p>		

Vale!

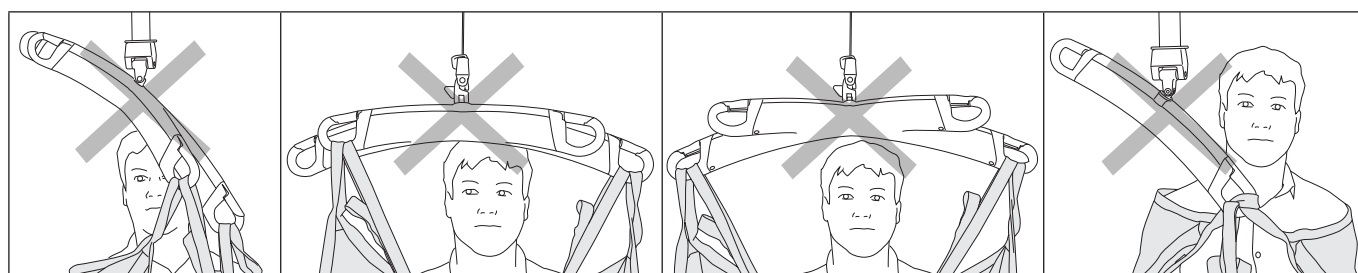


Kuidas kinnitada lingu Original HighBack Sling 4 haagiga lingulati külge (topeltlatid ja ristlatid)

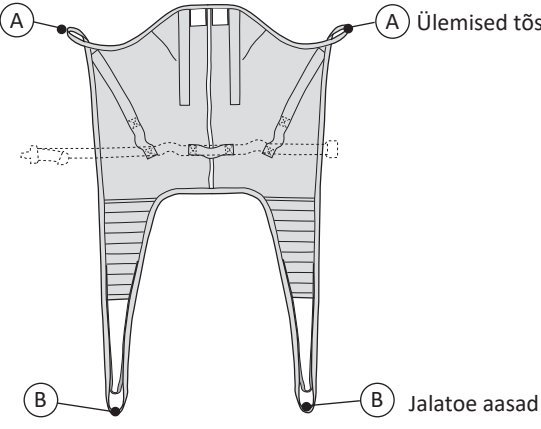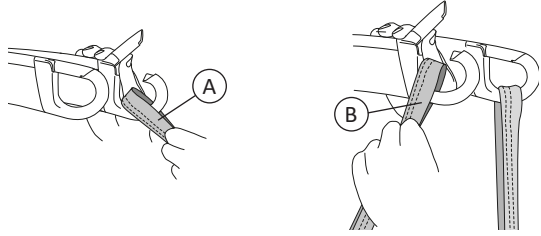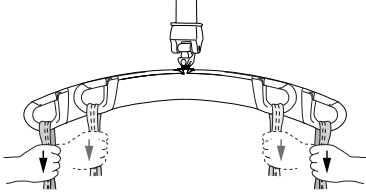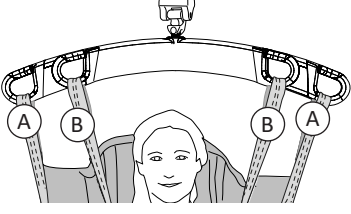 <p>A Ülemised tõsterihmad</p> <p>B Jalatoe aasad</p>	<p>1.</p> 
<p>2.</p> 	<p>3.</p>  <p>Joonistel 1, 2 ja 3 on kujutatud topeltlati (Twinbar), kuid see kehtib ka ristlati kohta.</p>


Tõstmine istuvast asendist

Et paigaldada linge vastavalt ergonoomikareeglitele, läheb vaja kahte hooldajat. Enamasti kallutatakse patsienti linge ümberpanemisel ettepoole ja seepärast on tähtis, et üks hooldaja seisaks patsiendi ees, et vajadusel takistada patsienti ettepoole kukkumast.

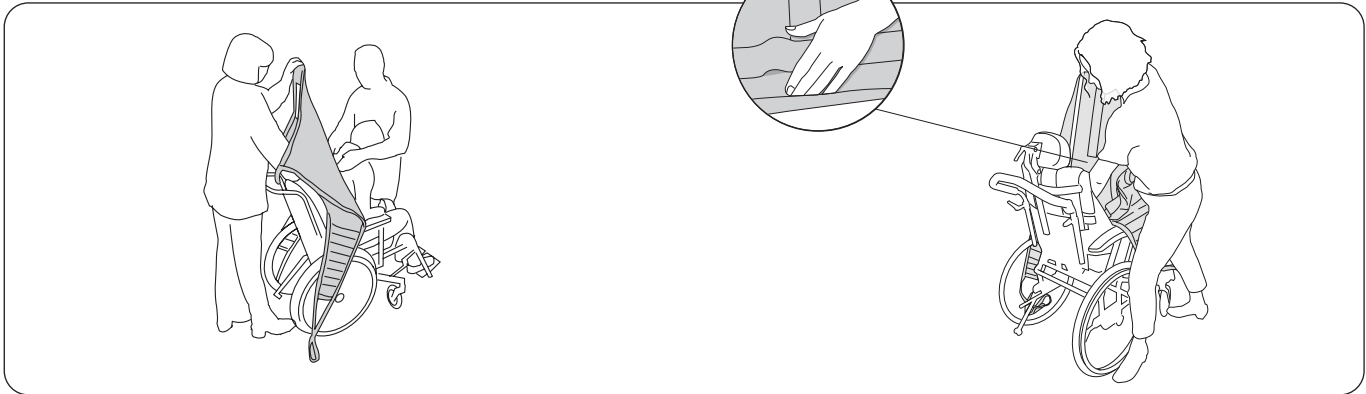


Asetage linge patsiendi selja taha selliselt, et andmesilt jääb väljapoole. Voltige linge alumine serv ümber näppude, et seda oleks hõlpsam paika juhtida.

Lükake linge alumine osa peopesaga alla kuni patsiendi sabakondini, see on väga tähtis. **NB!** Õige paigutamine on kergem, kui patsient kummardab (kummardatakse) kergelt ettepoole.

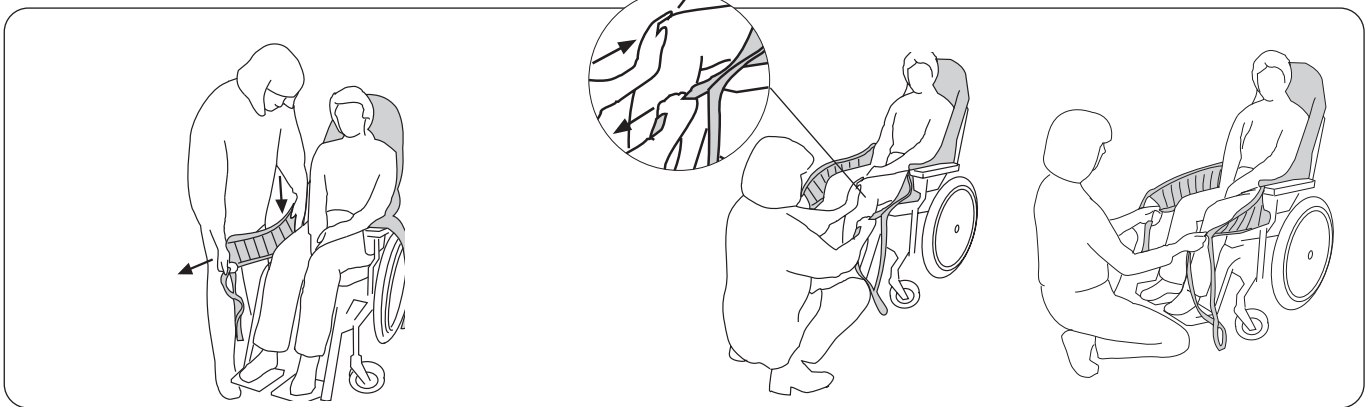


Tõmmake linge jalatugesid mööda patsiendi reite väliskülgi ettepoole. Asetage peopesa patsiendi keha ja linge vahele ja lükake jalatugede alumist külge alla istme suunas. Samaaegselt lükake jalatugesid ettepoole ja tõmmake need teise käega sirgu.

Tõmmake jalatugesid ettepoole, et sirgeks tõmmata võimalikud tahapoole jäänud kortsud. Kontrollige, kas mõlemad jalatoed ulatuvad ühekaugusele. **NB!** Jalatugesid on lihtsam ettepoole tõmmata, kui toetada patsienti õrnalt põlveõndlast.

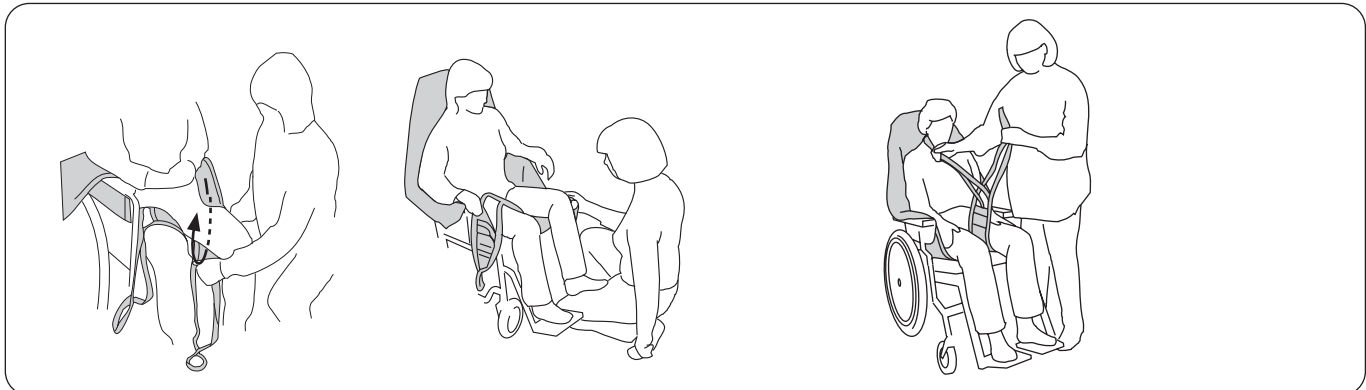

Asetage üks jalatugi kummagi reie alla. Veenduge, et materjal on sirge ja et see ulatub korralikult ümber jala. **NB!** Jalatugede paigaldamine on lihtsam, kui patsiendi jalad on toolilt pisut tõstetud. Selleks võib patsiendi jalad toetada nt pingile või enda jalale, vt joonist.

Seadke jalatugede rihmad ühendamiseks valmis. Kõige tavapärasem viis linge kasutamiseks on ristatud jalatugedega. Muude viiside kohta vt lk 13.

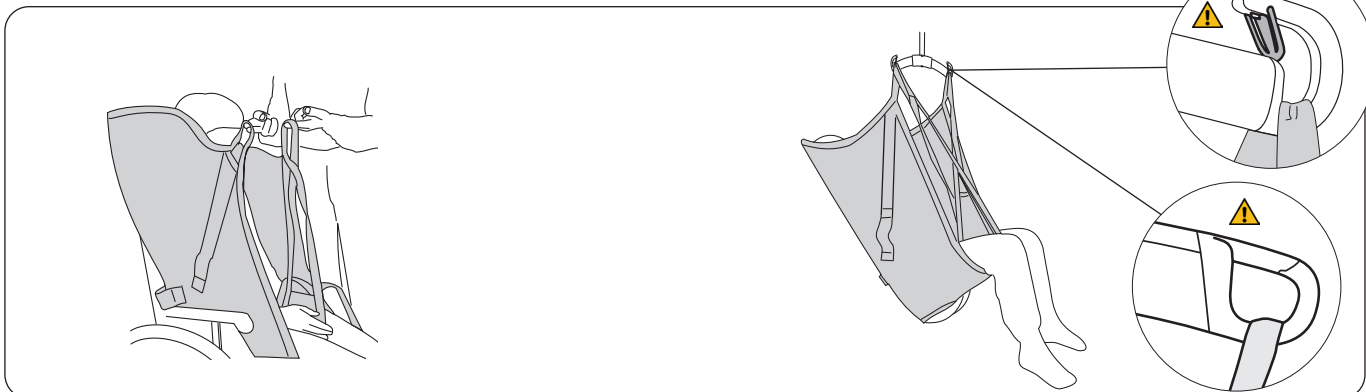


NB! Kontrollige, et kõik tõsterihmad oleksid ühepikkused, st asuvad pingutamisel enne tõstmist samal kõrgusel. Seadke lingu asendit, kui rihmad ei ole samal kõrgusel.

Esimesena kinnitage lingulati konksude külge ülemiste tõsterihmade aasad ja seejärel jalatugede aasad. Juhiseid, kuidas lingu aasu erinevate lingulattide külge kinnitada, vaadake lk 6-7. Tõstke patsient üles.

Tõstmine istuvasse asendisse

Patsiendi asetamisel ratastooli on tähtis, et patsient istuks piisavalt sügavalt tooli, et tal oleks mugav istuda. Seda on võimalik saavutada mitmel viisil.

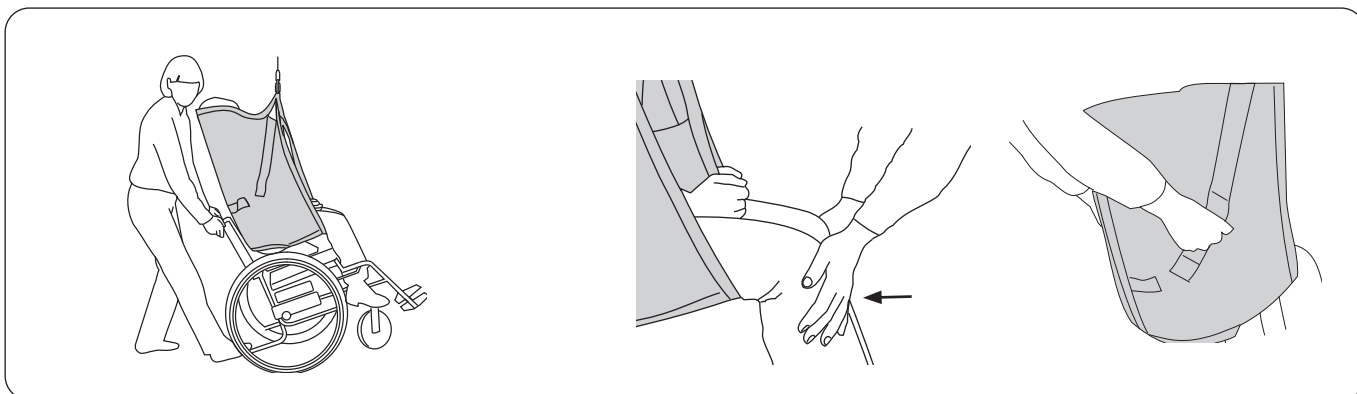


Patsiendi asetamisel ratastooli: kallutage ratastooli patsiendi langetamisel tahapoole. Langetamise lõpus laske patsiendi istmikul mööda ratastooli seljatuge alla libiseda. Juhtige ratastooli kallet, pannes oma jala kaldetoele.

Teine võimalus: toetage langetamise ajal patsienti õrnalt põlvede alt nii, et istmik liiguks ratastooli seljatoe poole. Kui lingul on sangad, saab neid kasutada lingu juhtimiseks.

⚠ Ärge kasutage sängu tõstmiseks! Ülemäärase jõu rakendamisel sangadele võivad need rebeneda.

Lingu eemaldamine toolil/ratastoolis

Soovitame lingu pärast tõstmist eemaldada. Kui mingil põhjusel on tarvis ling pärast tõstmist tooli jätta, soovitame kasutada polüestervõrgust lingu.

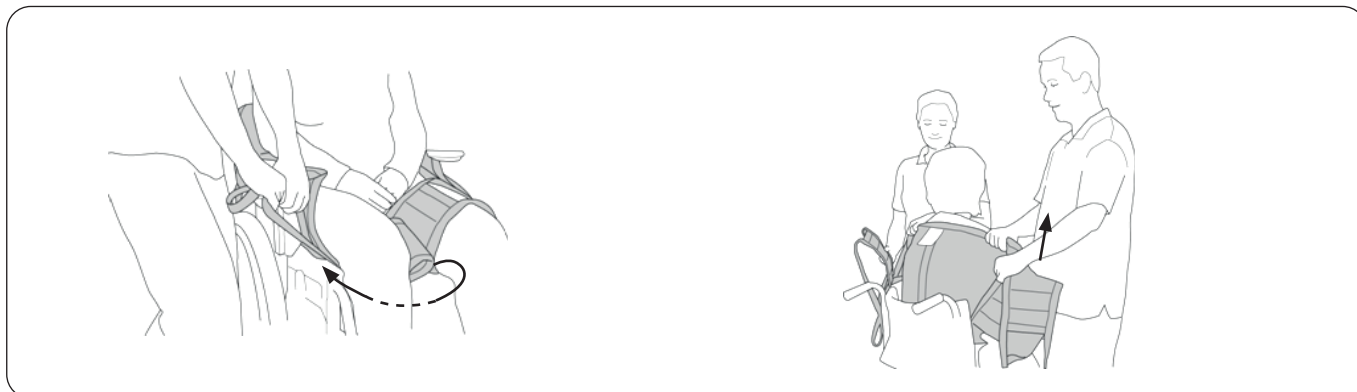

Eemaldage ettevaatlikult jalatugi. Kõige õrnemalt saab seda teha, kui tõmmata jalatoe rihmad altpoolt jalatoe kangast välja.


Eemaldage ling, tõmmates jalatugesid ettevaatlikult üles.

Voodist tõstmine

Lingu saab sõltuvalt patsiendi olukorrast mitmel viisil patsiendile ümber panna. Seda saab ümber panna, kui patsient lamab või istub voodil. Kui kasutatakse keerukat rõhujaotusega madratsit, on lingu ümberpanemine lihtsam, kui madrats on maksimaalselt täis pumbatud.


Pidage silmas enda tööasendit ja patsiendi mugavust. Kasutage voodi tõstmis- ja langetusfunktsiooni. Hea tööasend saavutatakse, kui madratsi kõrgus on samal tasemel hooldaja sõrmenukkidega, kui käed on sirgelt all. Sõltuvalt hooldajale langevast raskusest tuleb igas olukorras eraldi hinnata, kui mitut hooldajat toimingu jaoks tarvis läheb.

Lingu ümberpanemine, kui patsient lamab voodil

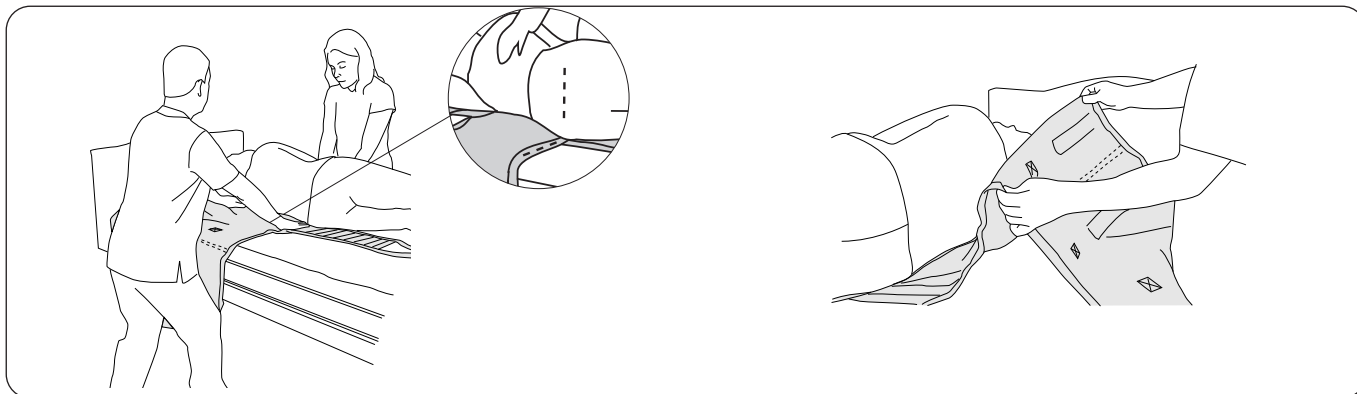

Pöörake patsient küljele. See toiming on lihtsam, kui patsient saab ise kaasa aidata, võttes kinni voodi raamist sellel küljel, kuhupoole teda pööratakse. Asetage lingu äär vastu patsiendi selga selliselt, et lingu alumine serv oleks samal tasemel **patsiendi ristluuga**.

Voltige lingu selliselt, et selle tagumine keskriiba asuks patsiendi selgrooga kohakuti. Et vähendada hõõrdumist, veenduge, et volt katab lingu serva, mis asub vastu patsiendi selga. Keerake patsient õrnalt selili ja tõmmake ling teiselt poolt välja. Sellise ümberpanemisviisi korral on tarvis patsienti keerata ainult üks kord.

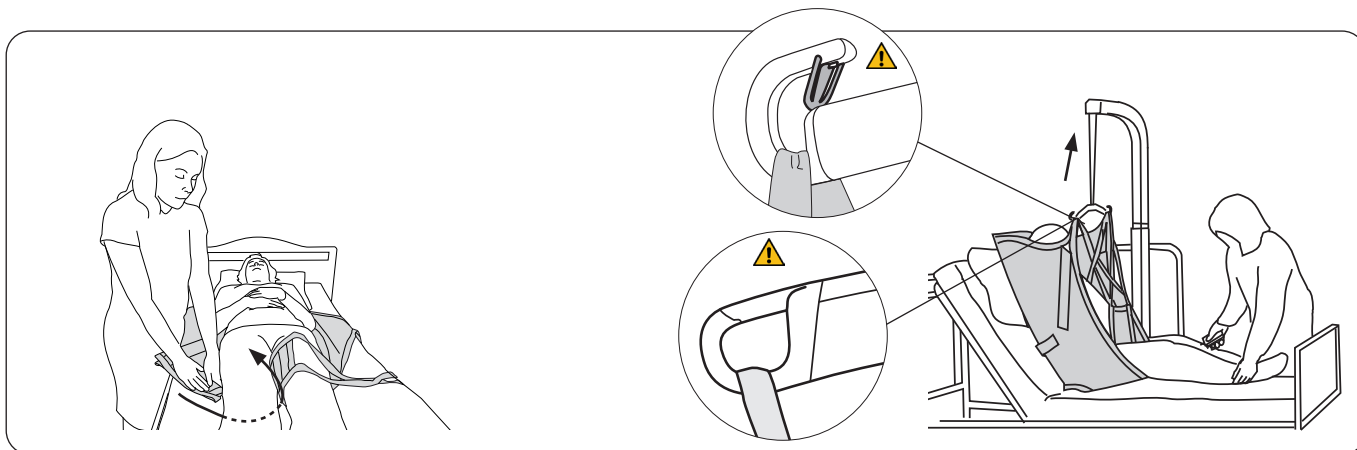

Asetage jalatoed kummagi jala alla. Seda on hõlpsam teha, kui suruda jalatugi põlve alla panemisel allapoole vastu madratsit. Veenduge, et materjal on sirge ja et see ulatuks korralikult ümber jala. Jalatugesid saab ühendada erineval viisil, vt lk 13.

Tõstke voodi peats üles. Esimesena kinnitage lingulati konsude külge ülemiste tõsterihmade aasad ja seejärel jalatugede aasad. Juhiseid, kuidas lingu aasu erinevate lingulattide külge kinnitada, vaadake lk 6-7. Tõstke patsient üles.

Lingu ümberpanemine, kui patsient istub voodil


Tõstke voodi peats patsiendi taga üles. Asetage ling voodile selliselt, et andmesilt jääb allapoole vastu madratsit. Libistage ling patsiendi istmiku alla selliselt, lingu alumine ots on **samal tasemel patsiendi ristluuga**. **NB!** Seda on lihtsam teha, kui patsient kummardub (patsienti kallutatakse) ettepoole.

Tõstmine voodisse

Soovitame lingu pärast tõstmist eemaldada. Kui mingil põhjusel on tarvis ling pärast tõstmist voodile jätta, soovitame kasutada polüestervõrgust lingu.


Pidage silmas enda tööasendit ja patsiendi mugavust. Kasutage voodi tõstmis- ja langetusfunktsiooni. Hea tööasend saavutatakse, kui madratsi kõrgus on samal tasemel hooldaja sõrmenukkidega, kui käed on sirgelt all. Sõltuvalt hooldajale langevast raskusest tuleb igas olukorras eraldi hinnata, kui mitut hooldajat toimingu jaoks tarvis läheb.

Lingu eemaldamine, kui patsient lamab voodil

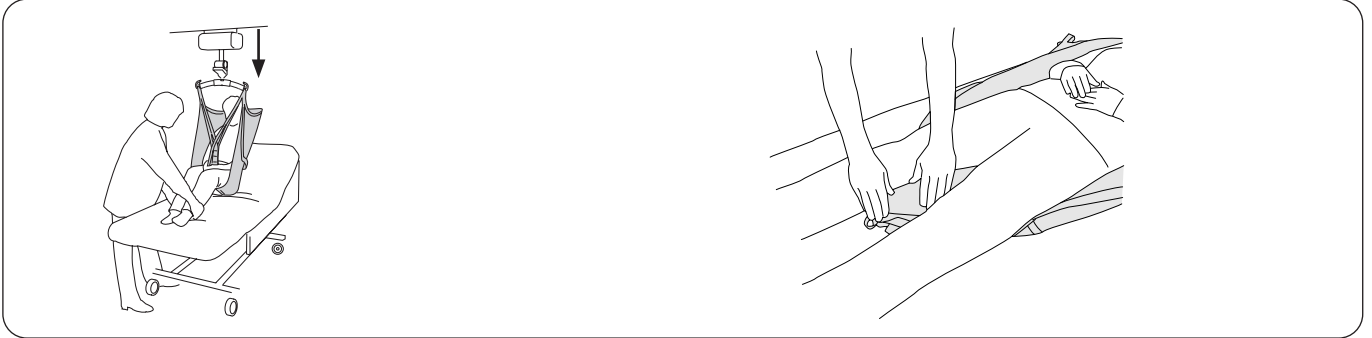

Liigutage patsient voodi kohale. Tõstke voodi peats üles, et patsiendil oleks mugavam. Langetage patsient voodisse. Langetage voodi peats.


Asetage jalatugede rihmad jalatugede alla patsiendi jalgade vahele.

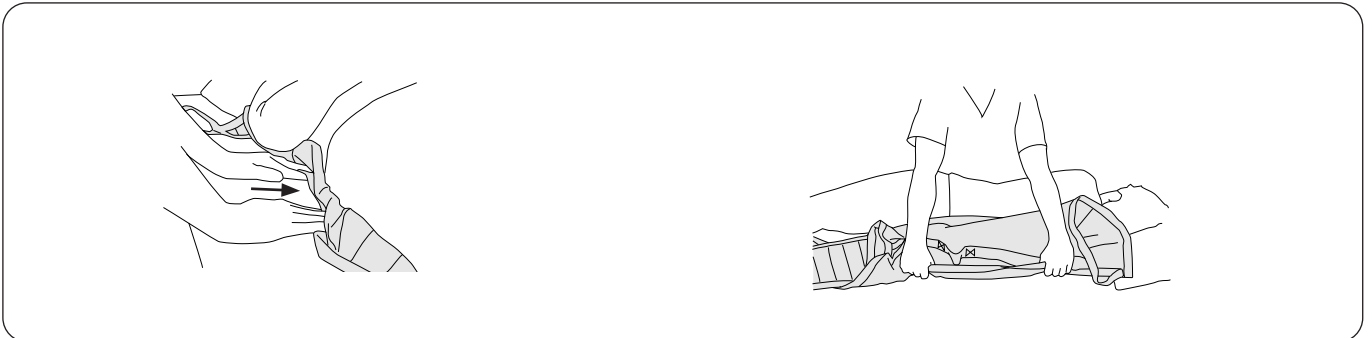

Haarake lingu äärest kinni. Lükake lingu äär lingu alla. Suruge ling vastu madratsit ja lükake patsiendi alla.

Pöörake patsient ettevaatlikult küljele. Haarake alt lingust kinni ja eemaldage see ettevaatlikult.

Lingu eemaldamine, kui patsient istub voodil

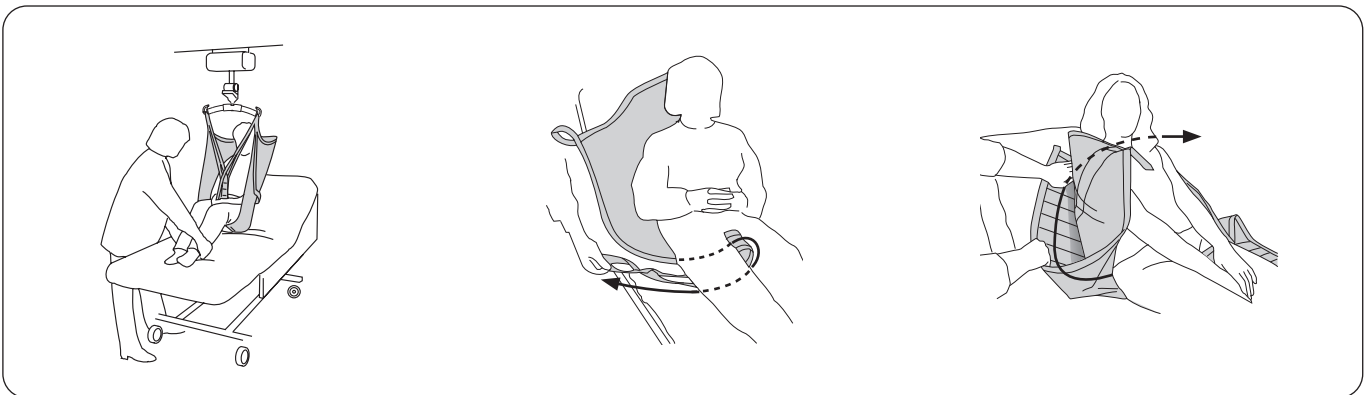

Liigutage patsient voodi kohale. Tõstke voodi peats üles, et patsiendil oleks mugavam. Langetage patsient voodisse.


Eemaldage jalatoed, tõmmates jalatoe rihmad altpoolt kangast välja. **NB!** Seda on lihtsam teha, kui patsiendi jalad on kõverdatud.

Eemaldage ling, tõmmates ühe jalatoe lingu tagant ja ümber vastasküljele.

Tõstmine pörandalt


Allpool on kirjeldatud pörandalt tõstmine Liko liikuvtõstukiga Golvo. Sama meetod kehtib tõstmisel ka Liko muude liikuv- ja statsionaarsete tõstukitega. Lugege läbi kasutatava tõstuki kasutusjuhend.

NB! Et patsiendil oleks mugavam, pange tema pea alla padi.

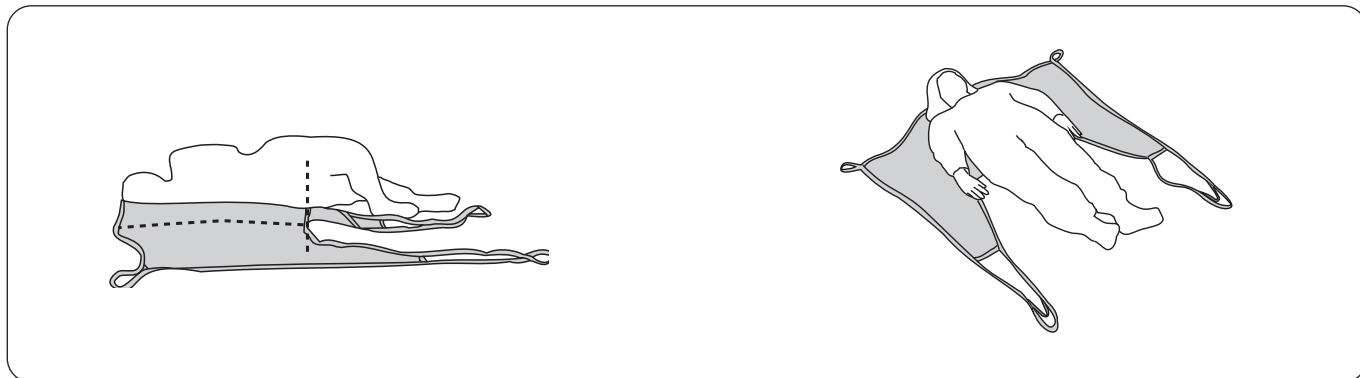

Pöörake patsient ettevaatlikult küljele ja asetage linge äär patsiendi alla selliselt, et linge alumine serv oleks **samal tasemel patsiendi ristluuga**. Voltige linge selliselt, et selle tagumine keskriba asuks patsiendi selgrooga kohakuti. Tõmmake linge ettevaatlikult teiselt poolt välja.

Veenduge, et linge asub patsiendi all sümmeetriliselt, vajadusel kohendage linge asendit. Asetage jalatoed jalgade alla.

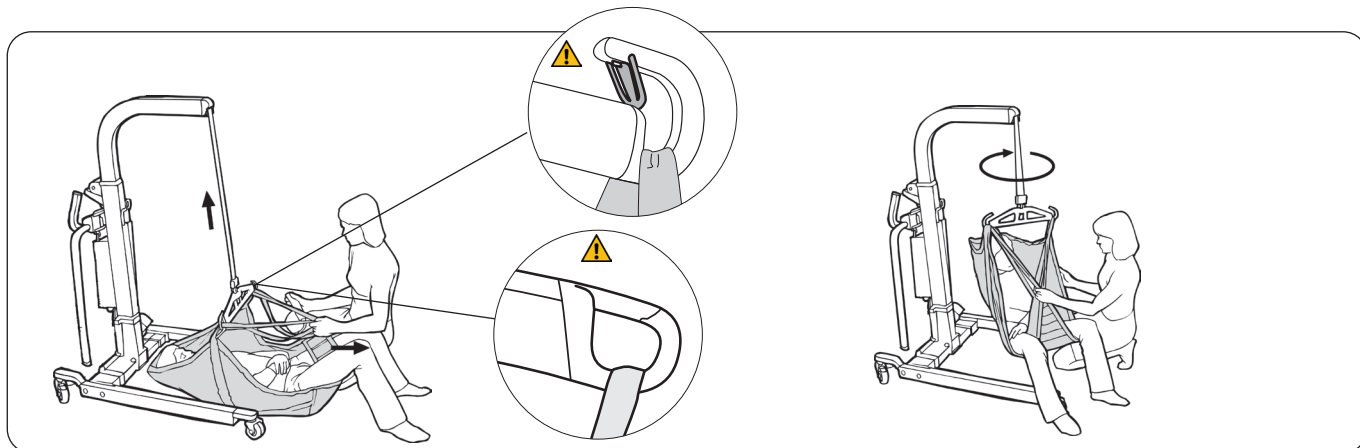


Tõmmake jalatoed patsiendi jalgade all sirgu. Hoidke jalatoed kubemest eemal, et vältida võimalikku ebamugavust patsiendile. Seda on lihtsam teha, kui patsient kõverdab jalgu. Juhiseid, kuidas linge aasu erinevate lingulattide külge kinnitada, vaadake lk 6-7.

Tõstke patsient pörandalt üles. Et patsiendi pea vastu masti ei läheks, võib patsienti natuke keerata.

⚠ Kui tõstmisel asub patsiendi pea tõstuki vastas, peavad liikuvtõstuki rattad olema lukustatud.


Tõstmine pörandale

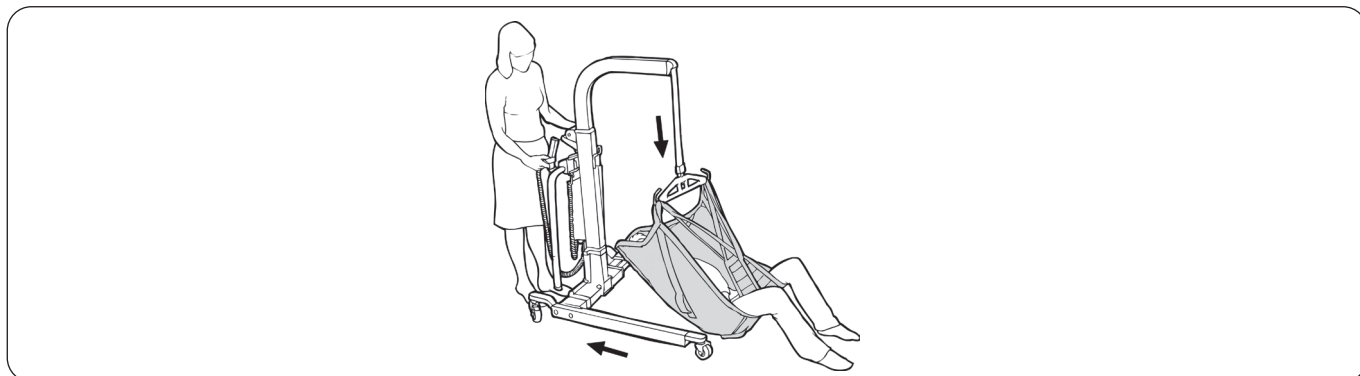

Pörandale langetamisel peavad tõstuki rattad olema lukust lahti. Kui patsient puudutab pörandat, tuleb tõstukit tagasi tõmmata, et teha ruumi patsiendi peale. **NB!** Kui langetamine toimub õhemale võimlemismatile, võib tõstuki lükata mati alla, et matt toimiks pehmendusena tõstuki ja patsiendi vahel. Kui linge on tarvis eemalda, vaadake lõiku „Linge eemaldamine, kui patsient lamab voodil“, lk 10.

Nõuanded sobitamiseks

Erinevad isteasendid

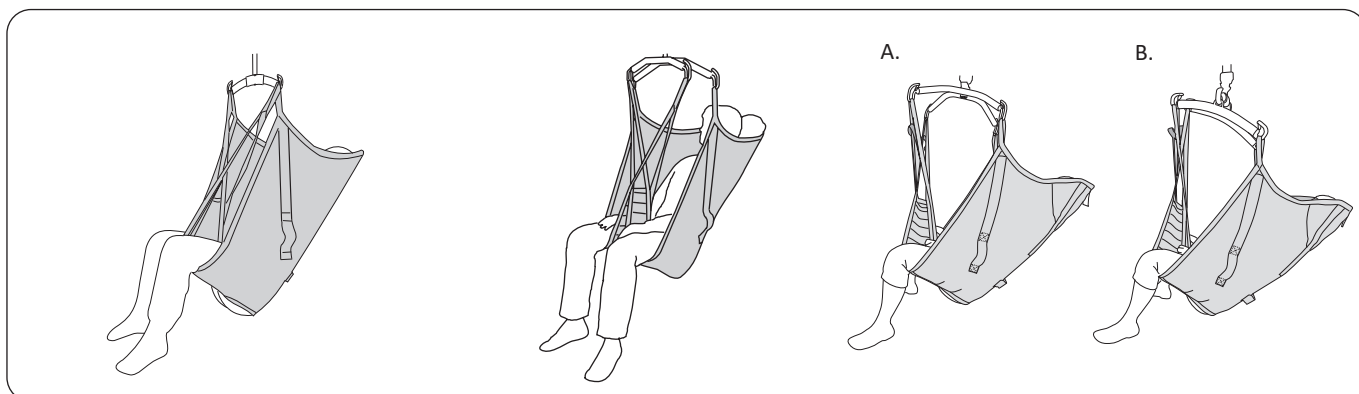

Liko Original HighBack Sling võimaldab kahest punktist tõstmisel kergelt kaldus isteasendi, kus on hea tugi peale ja puusaliiges jääb umbes 90-kraadise nurga alla.

Ling Liko Original HighBack kombinatsioonis lingulatiga **Universal TwinBar 670** võimaldab veidi suurema kaldega asendi ja jalatugede osast suurema laiuse õlgade juures, mis sobib, kui patsient on tundlik õlgadele osutatava surve suhtes.


A. Kombinatsioonis lingulatiga Liko **Cross-bar** saavutatakse veidi suurema kaldega asend ja suurem nurk. Pea alla võib panna väikese padja.

B. Kombinatsioonis lingulatiga **SideBars** saavutatakse veidi suurema kaldega asend ja jalatugede osast suurem laius õlgade juures, mis sobib, kui patsient on tundlik õlgadele osutatava surve suhtes.

Erinevad viisid jalatugede ühendamiseks

Enne, kui valite muu ühendusviisi, tuleb iga juhtumit eraldi hinnata, et ennetada võimalikke riske.

Järgnev on üldine suunis, sest samad põhimõtted kehtivad erinevate lingumudelite puhul.

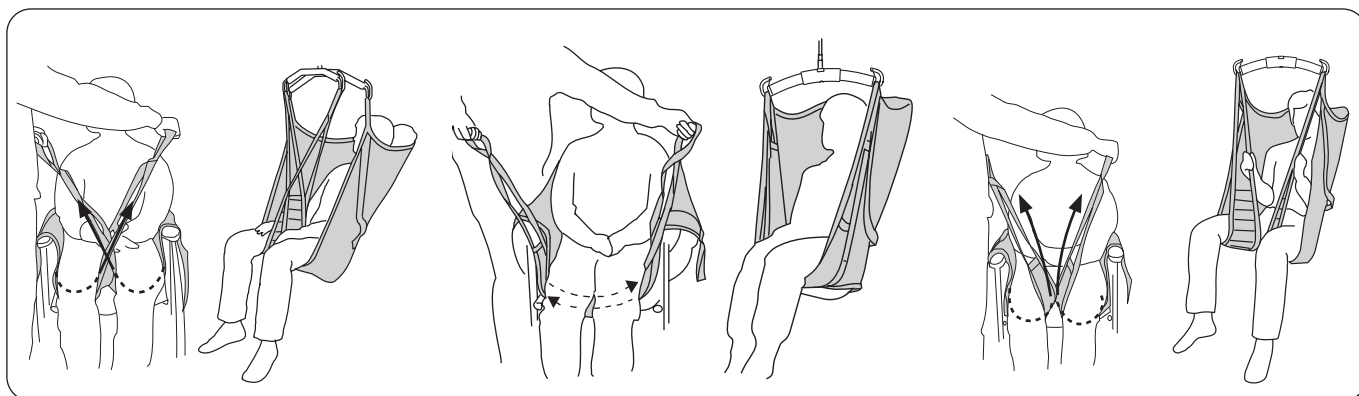

Ristatud jalatoed.

Kõige tavapärasem viis lingul ümberpanemiseks. Üks jalatoe rihma aas asetatakse teisest läbi, enne kui aasad lingulati külge kinnitatakse.

Ülekattuvalt mõlema reie alt.

See võib osutada vajalikuks nt amputeeritud jalgade patsiendi tõstmisel.

NB! Et patsient ei istuks liiga kallutatud asendis on võimalik pikendusaasad kinnitada jalatoe rihmade külge.


Kumbki jalatugi ühendatakse lingulatiga eraldi.

See võib osutada vajalikuks patsientide tõstmisel, kellel on eriti tundlikud suguelundid.

⚠ Suurenenud väljalibisemisoht.

Patsient ei istu lingus hästi – Miks see on nii?

Järgnev on üldine suunis, sest samad põhimõtted kehtivad erinevate lingumudelite puhul.

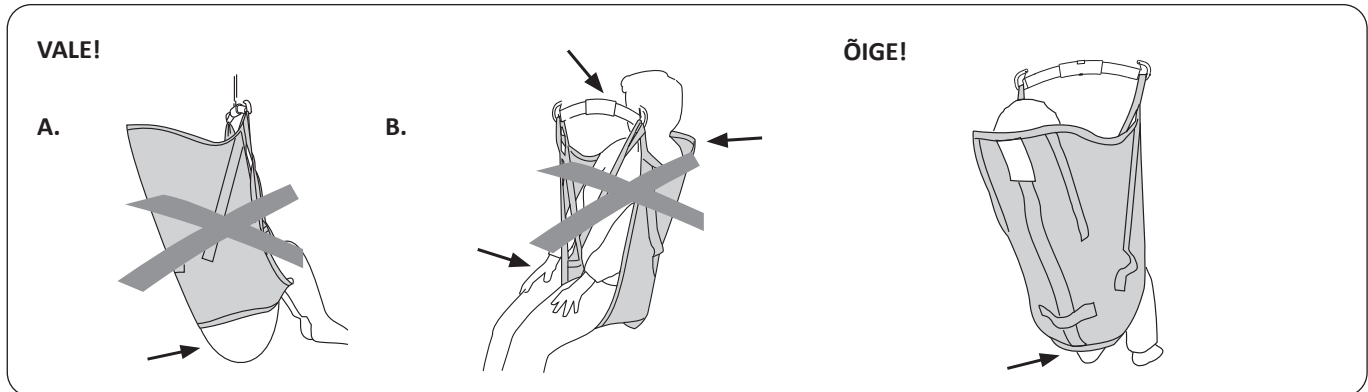


A. Väljalibisemisoht. Istmik on alla vajunud. Ling on ilmselt liiga suur. Samuti võib see olla tingitud sellest, et lingo ei tõmmatud mööda patsiendi selga piisavalt alla.

Enne tõstmist kontrollige, et alumine äär oleks pingul ja materjal ulataks piisavalt ümber jalgade.

B. Liiga väike ling võib tingida järgmist: jalatoed lõikuvad kubemesse ja põhjustavad ebamugavust; lingulatt on näole liiga lähedal; ebapiisav tugi seljale.

Lingu alumine äär on ristluuga samal tasemel. Jalatoed asuvad õigesti reite all.

Lühike asend

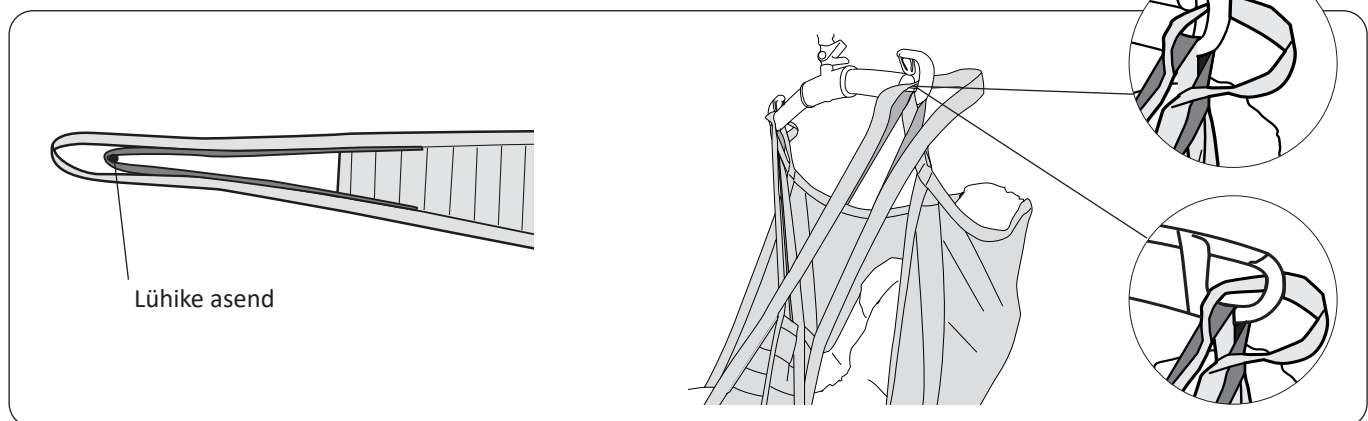

Meie lingude mudelid on hoolikalt kavandatud, et patsiendi raskus jaotuks istumisel ühtlaselt jalgade ja seljaosa vahel ja ling pakuks transportimisel kindlat tuge. Siiski võib olla mõnel juhul tarvis kasutada patsiendi asendi muutmiseks jalatoe rihma alumist aasa, st lühikest asendit.

NB! See ei kehti, kui teil on varasem Original HighBack Sling mudel 20/21 varasema lühikese asendi ehitusega.


Lühendamistoimingu kirjelduse mudelile 20/21 leiате selle mudeli kasutusjuhendist, mille saamiseks võtke ühendust ettevõttega Hill-Rom.

Lühikese asendi kasutamisel soovitame ühendada lingulati haagi külge ka jalatoe rihma ülemise aasa, et aasadest oleks parem ülevaade.

Tarvikud

Pikendussilmus, roheline, 12 cm
Pikendussilmus, roheline, 22 cm
Pikendussilmus, hall, 12 cm
Pikendussilmus, hall, 22 cm

Toote nr 3691102
Toote nr 3691103
Toote nr 3691302
Toote nr 3691303

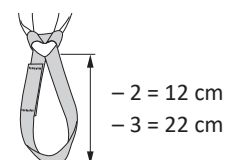


Ülevaade – Liko™ Original HighBack Sling, mudel 200, 210

Toode	Toote nr	Suurus		Patsiendi kaal ¹	Max kandevõime ²
Original HighBack Sling	35200 - - 3	XS	Eriti väike	15-20 kg	200 kg
Original HighBack Sling	35200 - - 4	S	Väike (laps)	20-30 kg	200 kg
Original HighBack Sling	35210 - - 5	MS	Keskmine ja sale (sale täiskasvanu)	30-50 kg	200 kg
Original HighBack Sling	35200 - - 5	M	Keskmine	40-80 kg	200 kg
Original HighBack Sling	35200 - - 6	L	Suur	70-120 kg	200 kg
Original HighBack Sling	35200 - - 7	XL	Eriti suur	110-250 kg	500 kg
Original HighBack Sling	35200 - - 8	XXL	Ülisuur	200- kg	500 kg

¹ Märgitud patsiendi kaal ja pikkus on üksnes üldiseks juhendamiseks – võib esineda kõrvalekaldeid.

² Et tagada maksimaalne kandevõime, peab tõstuki ja tõstetarvikute kandevõime olema sama või suurem.

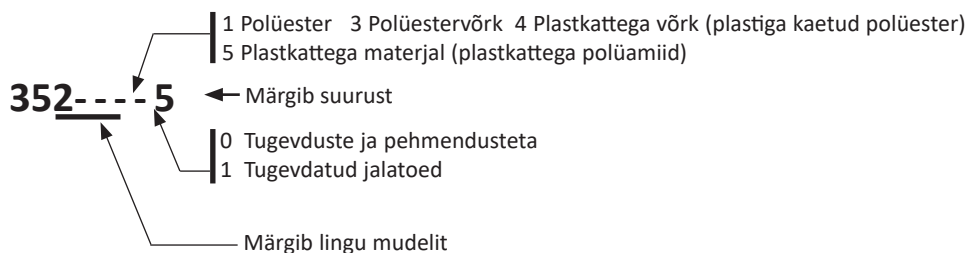

Soovitavad kombinatsioonid

Soovitavad Liko Original HighBack Sling lingude (peale asetatud ristatud jalatugedega) ja Liko lingulattide kombinatsioonid:	Mini 220	Lingulattid 350 ⁴	Standard 450	Lingulattid 450 ²	Lingulattid 600 ⁵	Topelatlattid Twin bars 670 ³	Ling Cross-bar 450	Ling Cross-bar 670	Univ. SideBars + Universal 350	SideBars + Standard 450	Univ. SideBars + Universal 450
Original Highback Sling, XS	2	1	1	1	4	3	1	3	1	2	1
Original Highback Sling, S	2	1	1	1	3 ¹	3	1	3	1	2	1
Original Highback Sling, MS	3	2	1	1	3 ¹	2	1	1	1	2	1
Original Highback Sling, M	3	2	1	1	3 ¹	1	1	1	1	1	1
Original Highback Sling, L	3	3	1	1	3 ¹	1	2	1	1	1	1
Original Highback Sling, XL	4	3	2	1	3 ¹	1	2	1	2	1	1
Original Highback Sling, XXL	4	4	4	3	3 ¹	2	4	1	4	2	2

¹ Võib põhjustada lingu enneaegset kulumist.

² Lingulatt 450 on seotud lingulattiga Universal SlingBar 450, tooted nr 3156075, 3156085 ja 3156095, ja samuti SlingGuard 450, tooted nr 3308020 ja 3308520.

³ 670 seeria topelatlattid on seotud lingulattiga Universal TwinBar 670, tooted nr 3156077 ja 3156087, ja lingulattiga SlingGuard 670 Twin, tooted nr 3308040 ja 3308540.

⁴ Lingulatt 350 on seotud lingulattiga Universal SlingBar 350, tooted nr 3156074, 3156084 ja 3156094, ning samuti toega SlingGuard 350, tooted nr 3308010 ja 3308510.

⁵ Lingulatt 600 on seotud lingulattiga Universal SlingBar 600, tooted nr 3156076 ja 3156086 ning samuti toega SlingGuard 600, tooted nr 3308030 ja 3308530.


Selgitus: 1 = Soovitatav, 2 = Võib toimida, 3 = Pole soovitatav, 4 = Sobimatu

Muud kombinatsioonid

Toodete/tarvikute kombinatsioonid, mis pole Liko poolt soovitatud, võivad ohustada patsiendi turvalisust.



www.hillrom.com

 Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Sweden
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

