

Tuotekuvaus

SeatStrap-takamushihna on avustettavan takamuksen alle asetettava lisävaruste, jolla helpotetaan nostamista noston ensimmäisessä vaiheessa. Se sopii avustettaville, joita on tuettava takamuksesta nostamisen aikana. Tämä estää tukiliiviä liukumasta ylös, mikä voi aiheuttaa epämukavaa painetta kainaloihin.

Sabina SeatStrap -takamushihna on tarkoitettu käytettäväksi vain Liko Sabina™ -seisomanojanostimien kanssa. SeatStrap-takamushihnaa käytetään aina Likon tukiliivin kanssa. Lisäksi nostamisessa on käytettävä Sabina SeatStrap SlingBar -nostokaarta. Mukana toimitettava muovinen vahvistus helpottaa SeatStrap-takamushihnan asettamista. SeatStrap-takamushihnan pohjassa olevaan kangastaskuun laitettava muovinen vahvistus helpottaa takamushihnan viemistä avustettavan takamuksen alle.





















Tässä käyttöohjeessa nostettavaa potilasta kutsutaan avustettavaksi ja auttavaa henkilöä avustajaksi.

TÄRKEÄÄ!

Avustettavan nostamiseen ja siirtämiseen liittyy aina riskejä. Lue nostimen ja nostovaroiteiden käyttöohje ennen käyttöä. On tärkeää ymmärtää käyttöohjeen sisältö täysin. Tätä välinettä saa käyttää vain koulutettu henkilökunta. Varmista, että nostovaroitteet soveltuvat käytettävään nostimeen. Noudata huolellisuutta ja varovaisuutta käytön aikana. Avustajana olet aina vastuussa avustettavan turvallisuudesta. Sinun on oltava tietoinen avustettavan edellytyksistä suoriutua nostotilanteesta. Ota epäselvissä tilanteissa yhteys valmistajaan tai maahantuojaan.

Symbolien kuvaus

Tässä asiakirjassa ja/tai tuotteessa on käytetty seuraavia symboleja.

Symboli	Kuvaus
	Varoitus: tämä tilanne edellyttää erityistä varovaisuutta ja huomiota.
	Lue käyttöohje ennen käyttöä
	CE-merkintä
	Laillinen valmistaja
	Valmistuspäivämäärä
	Tuotetunniste
	Sarjanumero
	Lääkinnällinen laite
	Kemiallinen pesu kielletty
	Silitys kielletty
	Rumpukuivaus
	Rumpukuivaus kielletty
	Pesu Symbolin yhteydessä näkyy aina suositeltu pesulämpötila (°C ja °F).
	Lateksiton
	Määräaikaistarkastus
	Valkaisu kielletty
	Ripusta kuivumaan varjoon
	Suunta ylöspäin; tuotteen ulkopinnalla esiintyvä symboli
	Tuotteen ulkopinnalla esiintyvä symboli
 <small>(01) 0100887761997127 (11) VV6KFP (21) 012345678910</small>	GS1 Data Matrix -viivakoodi, joka voi sisältää seuraavia tietoja: (01) kansainvälinen tuotenumero (11) tuotantopäivä (21) sarjanumero

Turvaohjeet

Huomioi seuraavat asiat ennen nostamista:

- Hoitoyksikön vastuuhenkilön tulee arvioida avustajien tarvittava lukumäärä tapauskohtaisesti.
- Suunnittele nostotilanne ennen nostamista, jotta kaikki tapahtuisi mahdollisimman turvallisesti ja joustavasti.
- Vaikka Likon nostokaarissa on salvat, on erityistä varovaisuutta kuitenkin noudatettava. Ennen avustettavan nostamista alustalta ja ennen kuin hihnat ovat kunnolla kiristyneet, on tärkeää varmistaa, että hihnat on kiinnitetty nostokaaren koukkuihin oikein.
- Älä koskaan jätä avustettavaa ilman valvontaa nostotilanteessa.
- Varmista, että pyörätuolin, sängyn, paarien jne. pyörät ovat lukittuina nosto-/siirtohetkellä.
- Käytä aina ergonomisia työmenetelmiä. Hyödynnä avustettavan kykyä osallistua aktiivisesti toimenpiteisiin.

 Lääkinnällinen luokan I laite

Tuotemuutokset

Likon tuotteita kehitetään jatkuvasti, minkä vuoksi pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin ilman ennakoilmoitusta. Ohjeita ja lisätietoja tuotepäivityksistä saa Hill-Romin edustajalta.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko on laatusertifioitu standardin ISO 9001 ja vastaavan lääkintäteknikan yrityksille tarkoitetun standardin ISO 13485 mukaisesti. Liko on ympäristösertifioitu standardin ISO 14001 mukaisesti.

Huomautus käyttäjille ja/tai avustettaville EU:ssa

Kaikki laitteeseen liittyvät vakavat vaaratilanteet on ilmoitettava valmistajalle ja käyttäjän ja/tai avustettavan asuinmaan asianmukaiselle viranomaiselle.

Hoito ja kunnossapito

Tarkista nostokangas ennen jokaista käyttökertaa. Tarkista seuraavat osat kulumisen ja vaurioiden varalta:

- Kangas
- Hihnat
- Saumat
- Lenkit

Älä käytä vahingoittuneita nostovaruksia.

Epäselvissä tilanteissa on otettava yhteys valmistajaan tai maahantuojaan.

Pesuohteet: Katso SeatStrap-takamushihnan tuotelappu ja mukana oleva liite ”Liko-nostokankaiden hoito ja kunnossapito”. Poista muovinen vahvistus ennen pesua (katso sivu 4). Muovinen vahvistus on puhdistettava desinfiointiaineella.

Määräaikaistarkastus

Tuote on tarkastettava vähintään kuuden kuukauden välein. Jos tuotetta käytetään tai pestään normaalia enemmän, tarkastus on tehtävä tätä useammin. Lisäohjeita saat Hill-Romin edustajalta.

Odotettu käyttöikä

Tuotteen odotettu käyttöikä on 1–5 vuotta. Käyttöiän arviointiperusteena on 10 käyttökertaa päivässä ja yksi pesukerta viikossa pesuohteiden mukaisesti. Hill-Rom suosittelee tuotteen käyttämistä vain sen odotetun käyttöiän ajan.


Kierrätysohjeet

SeatStrap-takamushihna on lajiteltava poltettaviin jätteisiin.

Hill-Rom opastaa käyttäjiä laitteiden turvallisessa käsittelyssä ja hävittämisessä ja auttaa näin ehkäisemään muun muassa viiltoja, pistohaavoja, hiertymiä ja muita vammoja. Lisäksi se opastaa käyttäjiä lääkitsevien laitteiden puhdistamisessa ja desinfiomisessa käytön jälkeen ja ennen hävittämistä. Asiakkaiden on noudatettava kaikkia lääkitsevien laitteiden ja lisävarusteiden turvalliseen hävittämiseen liittyviä kansallisia, alueellisia ja paikallisia säännöksiä.

Epäselvissä tapauksissa laitteen käyttäjän on ensin otettava yhteyttä Hill-Romin tekniseen tukeen ja pyydyttävä ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Käyttö

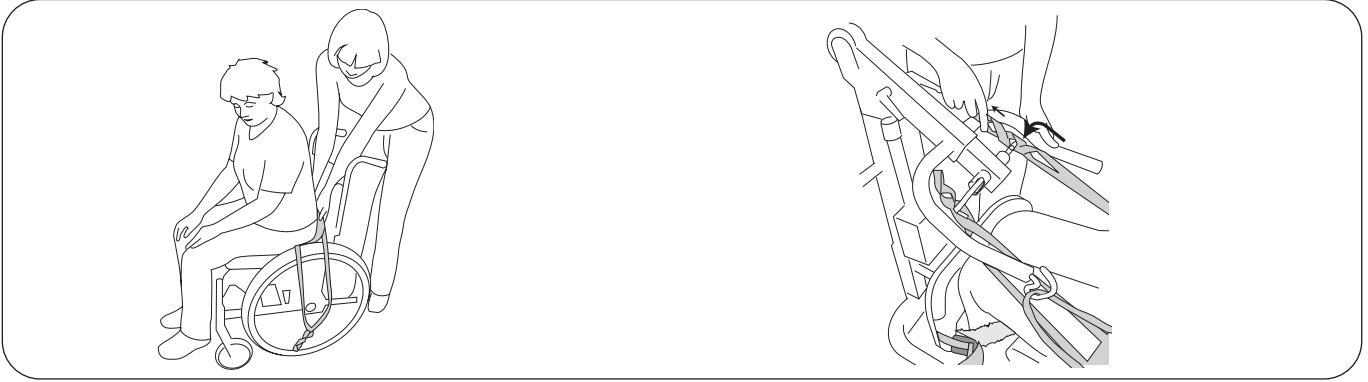


Vie SeatStrap-takamushihna mahdollisimman pitkälle takamuksen alle. **Vinkki:** Muovinen vahvistus helpottaa asettamista.

Aseta tukiliivi paikalleen. Vie avustettava Sabina-seisomanojanostimen lähelle. Kiinnitä liivissä olevat hihnalenkit nostokaareen. Lisätietoja on liivin ja käytettävän nostimen käyttöohjeessa.

Venytä SeatStrap-takamushihnan hihnat pitkiksi ja kiinnitä sopivat hihnalenkit SeatStrap SlingBar -nostokaareen.


Nostaminen

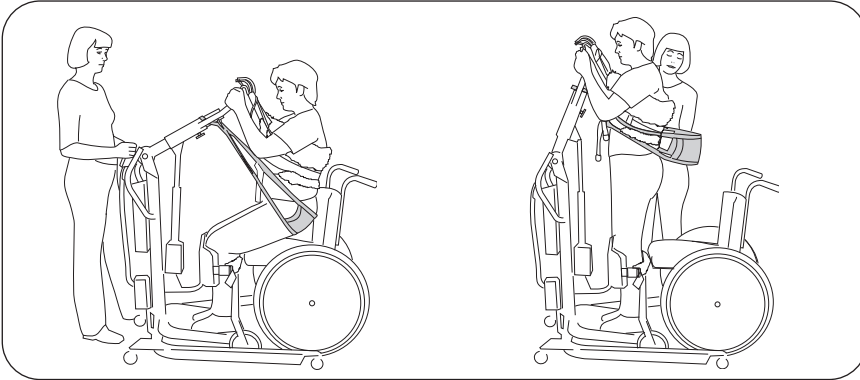

Aloita nostaminen. SeatStrap-takamushihna helpottaa nostamista noston ensimmäisessä vaiheessa.

Pystyasennossa kuorma ei ole SeatStrap-takamushihnan varassa, ja sen voi helposti siirtää sivuun esimerkiksi WC-käyntejä varten.

Palaaminen istuma-asentoon

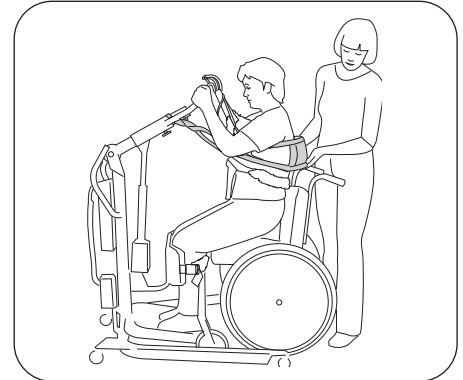


Avustettavan laskeminen pyörätuoliin oikeassa asennossa on helpompaa, jos SeatStrap-takamushihnaa ei käytetä.

Yleiskuvaus: Liko™ Sabina™ SeatStrap

Nimi	Tuotenumero	Materiaali	Pituus (kangasosa)	Enimmäiskuormitus
Sabina SeatStrap -takamushihna	3591115	Polyesteri, muovipinnoitettu kangas	50 cm	200 kg

Muovinen vahvistus

SeatStrap-takamushihnan mukana toimitetaan muovinen vahvistus (polyeteeni), jonka on tarkoitus helpottaa hihnan asettamista.

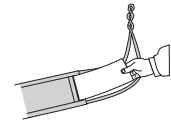

Yhdistelmät

Sabina SeatStrap -takamushihna on tarkoitettu käytettäväksi vain Liko Sabina™ -seisomanojanostimien ja Sabina SeatStrap SlingBar -nostokaaren kanssa.

Muiden kuin Likon suosittelemien lisävarusteiden tai tuotteiden yhdistelmäkäyttö voi vaarantaa avustettavan turvallisuuden.



www.hillrom.com



Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Ruotsi
+46 (0)920 474 700
Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom