

### Descrierea produsului

SeatStrap este un accesoriu amplasat sub șezutul pacientului, pentru a ajuta în prima parte a activității de ridicare. Este potrivit pentru pacienții care au nevoie de ajutor pentru a-și ridica șezutul în timpul ridicării. Acest lucru împiedică alunecarea în sus a SupportVest, ceea ce ar putea cauza o presiune nedorită sub brațe.

Sabina SeatStrap este proiectată pentru a fi utilizată numai cu elevatorul Liko Sabina™ pentru asistență la ridicare. SeatStrap este utilizată întotdeauna împreună cu una dintre vestele SupportVest de la Liko. Mai mult, elevatorul trebuie să fie completat cu Sabina SeatStrap SlingBar.

Întăritură din plastic auxiliară facilitează aplicarea SeatStrap. Întăritura din plastic este introdusă în buzunarul din material din partea inferioară a SeatStrap și facilitează aplicarea acesteia sub șezutul pacientului.





















*În acest document, persoana ridicată este denumită pacient, iar persoana care o ajută este denumită îngrijitor.*

#### **IMPORTANT!**

Ridicarea și transferul unui pacient implică întotdeauna un anumit nivel de risc. Înainte de utilizare, citiți instrucțiunile de utilizare atât pentru elevatorul pentru pacient, cât și pentru accesoriile de ridicare. Este important să înțelegeți în totalitate conținutul instrucțiunilor de utilizare. Echipamentul trebuie să fie utilizat doar de către personalul instruit. Asigurați-vă că accesoriile de ridicare sunt adecvate pentru elevatorul utilizat. Utilizați-le cu grijă și atenție. În calitate de îngrijitor, sunteți întotdeauna responsabil pentru siguranța pacientului. Trebuie să știți dacă pacientul este capabil să facă față ridicării. Dacă există neclarități, vă rugăm să contactați producătorul sau furnizorul.

## Descrierea simbolurilor

Aceste simboluri se pot găsi în acest document și/sau pe produs.

Simbol	Descriere
	Avertisment; această situație necesită un plus de grijă și atenție.
	Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de utilizare
	Marcaj CE
	Producător legal
	Data fabricației
	Identificator de produs
	Număr de serie
	Dispozitiv medical
	Nu curățați prin metode chimice
	Nu călcați cu fierul
	Uscare cu aer cald
	A nu se usca în uscător cu tambur
	Spălare Simbolul apare întotdeauna în combinație cu temperatura recomandată în °C.
	Nu conține latex
	Inspecție periodică
	Nu folosiți înălbitor
	A se usca căptușeala la umbră
	Direcție în sus și simbol la exteriorul produsului.
	Simbol la exteriorul produsului.
 <small>(01) 0100887761997127 (11) AALLZZ (21) 012345678910</small>	Cod de bare matrice de date GS1, care poate conține următoarele informații. (01) Cod articol comercial global (11) Data fabricației (21) Număr de serie

# Instrucțiuni de siguranță

## Înainte de ridicare, rețineți următoarele aspecte:

- O persoană responsabilă din organizația dvs. trebuie să decidă, în funcție de caz, dacă este nevoie de unul sau mai mulți îngrijitori.
- Planificați operațiunea de ridicare, în așa fel încât să fie efectuată cât mai sigur și mai ușor posibil.
- Deși barele de susținere Liko sunt echipate cu încuietori, trebuie să acordați o atenție specială. Înainte de a ridica pacientul de pe suprafața pe care stă, dar după întinderea completă a curelelor, asigurați-vă că acestea sunt conectate corect la cârligele barei de susținere.
- Nu lăsați niciodată pacientul nesupravegheat în timpul ridicării.
- Asigurați-vă că roțile scaunului pe rotile, patului, tării mobile etc., sunt blocate pe durata operațiunii de ridicare/transfer.
- Lucrați întotdeauna în mod ergonomic. Folosiți-vă de capacitatea pacientului de a participa activ la operațiuni.

 Dispozitiv medical Clasa I Produx

## Modificări ale produsului

Produsele Liko sunt în continuă dezvoltare, motiv pentru care ne rezervăm dreptul de a realiza modificări ale produsului fără notificare prealabilă. Contactați reprezentantul dvs. Hill-Rom pentru sfaturi și informații privind upgrade-urile de produse.

## Design and Quality by Liko in Sweden

Liko este certificat din punct de vedere al calității în conformitate cu standardul ISO 9001 și echivalentul acestuia pentru industria dispozitivelor medicale, ISO 13485.

De asemenea, Liko este certificat în conformitate cu standardul de mediu ISO 14001.

## Notificare adresată utilizatorilor și/sau pacienților din UE

Orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul, trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

# Îngrijire și întreținere

Verificați hamul înainte de fiecare utilizare. Verificați următoarele aspecte pentru uzură și deteriorare:

- materialul
- curelele
- cusăturile
- bucele

## Nu utilizați accesoriile de ridicare deteriorate.

Dacă există neclarități, vă rugăm să contactați producătorul sau furnizorul.

**Instrucțiuni de spălare:** Consultați eticheta de produs a produsului SeatStrap și anexa atașată, „Îngrijirea și întreținerea hamurilor Liko” Scoateți întăritură din plastic înainte de spălare (consultați pagina 4). Întăritura din plastic trebuie curățată cu dezinfectanți.

## Inspecție periodică

Produsul trebuie verificat cel puțin o dată la 6 luni. Ar putea fi necesare inspecții mai frecvente dacă produsele sunt utilizate sau spălate mai des decât este normal. Pentru protocoale, contactați reprezentantul Hill-Rom.

## Durata de funcționare estimată

Produsul are o durată de funcționare estimată de 1 - 5 ani. Durata de funcționare estimată se bazează pe o frecvență de utilizare de 10 utilizări pe zi și de spălare o dată pe săptămână, conform instrucțiunilor de spălare. Hill-Rom recomandă utilizarea produsului numai pe perioada de funcționare estimată.


## Instrucțiuni de reciclare

SeatStrap trebuie sortată ca deșeu combustibil.

Hill-Rom evaluează și oferă îndrumări utilizatorilor săi cu privire la manevrarea și eliminarea în siguranță a dispozitivelor sale la deșeuri, pentru a ajuta la prevenirea rănilor, inclusiv, dar fără a se limita la: tăieturi, înțepături la nivelul pielii, excoriații și orice curățare și dezinfectare necesară a dispozitivului medical după utilizare și înainte de eliminarea acestuia la deșeuri. Clienții trebuie să respecte toate legile și reglementările federale, de stat, regionale și/sau locale în ceea ce privește eliminarea în siguranță a dispozitivelor și accesoriilor medicale.

În caz de nelămuriri, utilizatorul dispozitivului trebuie să contacteze, mai întâi, departamentul de Asistență tehnică Hill-Rom pentru îndrumări privind protocoalele de eliminare în condiții de siguranță.

## Aplicare

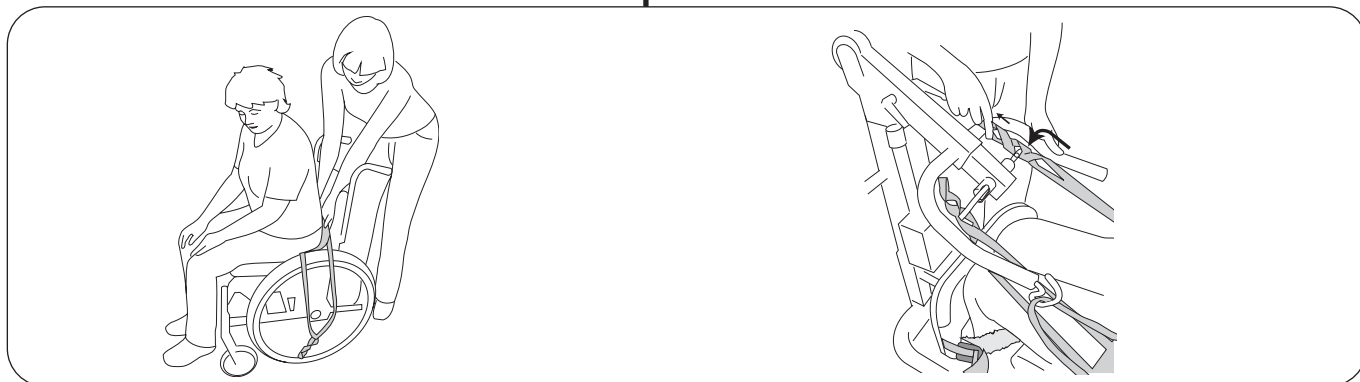


Coborâți SeatStrap cât mai mult posibil sub șezut.  
**Sfat:** Întărirea din plastic facilitează aplicarea.

Aplicați SupportVest. Apropiati elevatorul pentru asistență la ridicare Sabina. Conectați buclele curelelor de pe vestă la bara de susținere. Pentru mai multe instrucțiuni de utilizare, consultați instrucțiunile de utilizare pentru vesta și elevatorul utilizat.

Întindeți curelele de pe SeatStrap și conectați buclele adecvate ale curelei la SeatStrap SlingBar.


## Ridicare

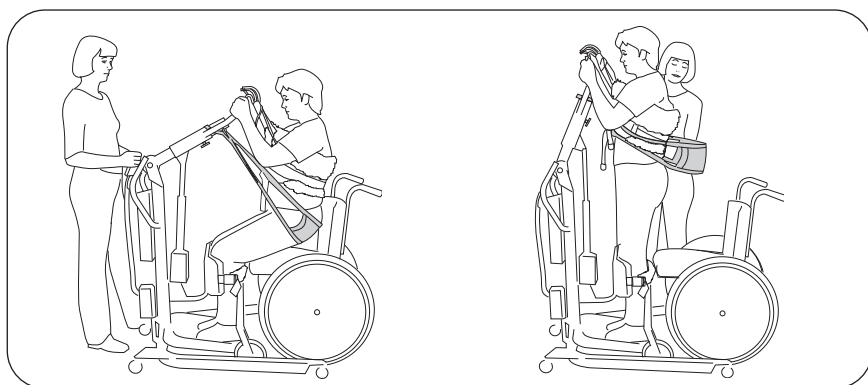

Începeți să ridicați. SeatStrap ajută în prima parte a activității de ridicare.

În poziție ridicată, SeatStrap își pierde sarcina și poate fi împinsă ușor în lateral pentru a facilita, de exemplu, mersul la toaletă.

## Înapoi în poziția așezat

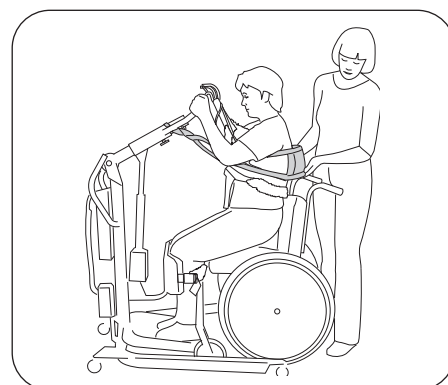


În timpul coborârii, pacientul este așezat mai ușor în poziția corectă în scaunul pe roți, dacă nu se utilizează SeatStrap.

## Prezentarea generală a Liko™ Sabina™ SeatStrap

Nume	Nr. produs	Material	Lungime (porțiunea din material)	Sarcină max.
Sabina SeatStrap	3591115	Material textil cu înveliș de plastic, poliester	50 cm	200 kg

### Întăritură din plastic

O întăritură din plastic (polietilenă) este prevăzută cu SeatStrap și este destinată facilitării aplicării.

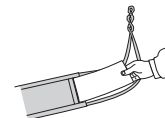

### Combinatii

Sabina SeatStrap este proiectată pentru a fi utilizată numai cu elevatorul Liko Sabina™ pentru asistență la ridicare și Sabina SeatStrap SlingBar.

Alte combinații de accesorii/produse care nu sunt recomandate de Liko pot prezenta riscuri pentru siguranța pacientului.



[www.hillrom.com](http://www.hillrom.com)