

Productbeschrijving

De Liko SilhouetteSling is een plooibare tilband die zich aanpast aan het lichaam. Het ontwerp richt zich op het verminderen van de benodigde ruimte in de rolstoel.

Het zorgt voor een licht-achteroverzittende houding en biedt ondersteuning voor het gehele bovenlichaam; dit is goed voor patiënten met een verminderde stabiliteit van hoofd en romp. De patiënt kan de armen buiten of binnen in de tilband houden. De hoofdsteen is verstelbaar.

Het ontwerp en het materiaal maken de SilhouetteSling bijzonder geschikt voor het tillen naar voorgevormde zitplaatsen, omdat de tilband meestal in de rolstoel achterblijft nadat het tillen is voltooid. Dit maakt de SilhouetteSling zeer populair in zorg- en revalidatiesituaties, waar vaak gebruik wordt gemaakt van stoelkuipen en voorgevormde zitplaatsen.

De SilhouetteSling kan ook worden gebruikt bij baden en douchen.

Een goed passende en zorgvuldig aangebrachte tilband geeft de patiënt een uitstekend gevoel van veiligheid en een hoog niveau van comfort.

Maten

De SilhouetteSling is beschikbaar in verschillende maten. Voor de hoogst mogelijke mate van comfort en veiligheid is het belangrijk dat de juiste maat wordt gekozen. Bij een te grote tilband bestaat meer kans dat de patiënt eruit glijdt, en een te kleine tilband kan in de liesstreek snijden en ongemak veroorzaken.

Materialen

De SilhouetteSling is gemaakt van comfortabel, plooibaar netpolyester dat warmte en vocht van het lichaam gemakkelijk doorlaat.

In dit document wordt de persoon die wordt opgetild, de patiënt genoemd en de persoon die hierbij helpt, de zorgverlener.

BELANGRIJK!





















Het optillen en verplaatsen van een patiënt gaat altijd met enig risico gepaard. Lees vóór het gebruik de gebruiksaanwijzingen voor zowel de patiëntlift als de tilaccessoires. Het is belangrijk dat u de volledige inhoud van de gebruiksaanwijzingen begrijpt. De apparatuur mag alleen worden gebruikt door getraind personeel. Controleer of de tilaccessoires geschikt zijn voor de lift die u wilt gebruiken. Wees voorzichtig en ga zorgvuldig te werk tijdens het gebruik. Als zorgverlener bent u altijd verantwoordelijk voor de veiligheid van de patiënt. U moet weten of de patiënt het tillen aankan. Neem contact op met de fabrikant of leverancier als er iets onduidelijk is.

Inhoudsopgave

Symboolbeschrijving	3
Veiligheidsinstructies	4
Verzorging en onderhoud.....	5
Definities	5
Instructies voor het bevestigen van een tilband aan verschillende tiljukken	6
Instructies voor het bevestigen van een SilhouetteSling aan een tiljuk met 4 haken (Twin-Bars en Cross-Bars).....	7
Tillen vanuit een zittende positie	8
Tillen naar een zittende positie	9
Verwijderen van de tilband in een stoel/rolstoel	9
Tillen vanuit het bed.....	10
Tillen naar het bed	11
Verwijderen van de tilband terwijl de patiënt in bed zit	11
Verwijderen van de tilband terwijl de patiënt in bed ligt.....	11
Passingsadvies	12
Verschillende manieren van aanbrengen van beensteunen	12
Bijstelling van de hoofdondersteuning.....	12
Verschillende zitposities, afhankelijk van het type tiljuk.....	12
De patiënt zit niet goed in de tilband - hoe komt dit?.....	13
Ingekorte maat	13
Accessoires	14
Overzicht Liko™ SilhouetteSling, mod. 22	14
Aanbevolen combinaties	14

Symboolbeschrijving

Deze symbolen komen voor in dit document en/of op het product.

Symbool	Beschrijving
	Waarschuwing. Wordt gebruikt waar extra zorg en aandacht nodig zijn.
	Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing
	CE-markering
	Juridisch fabrikant
	Productiedatum
	Referentienummer
	Serienummer
	Medisch hulpmiddel
	Niet stomen
	Niet strijken
	Drogen in de droogtrommel
	Niet drogen in de droogtrommel
	Wassen Het symbool komt altijd voor in combinatie met de aanbevolen temperatuur in °C en °F.
	Latexvrij
	Periodieke inspectie
	Niet bleken
	Drogen aan de waslijn in de schaduw
	Omhoog gericht en symbool aan de buitenkant van de apparatuur.
	Symbool aan de buitenkant van de apparatuur.
	GS1 Data Matrix-barcode die de volgende informatie kan bevatten. (01) Global Trade Item Number (internationaal uniek artikelnummer) (11) Productiedatum (21) Serienummer

Veiligheidsinstructies

Bedenk vóór het tillen het volgende:

- een verantwoordelijke persoon binnen uw organisatie moet per geval besluiten of er een of meerdere zorgverleners nodig zijn.
- zorg ervoor dat de gekozen tilband qua model, maat, materiaal en ontwerp voldoet aan de behoeftes van de patiënt.
- gebruik om veiligheidsredenen en voor de hygiëne individuele tilbanden.
- plan het tillen voordat het wordt uitgevoerd, zodat het zo veilig en soepel mogelijk verloopt.
- controleer of het tilaccessoire verticaal hangt en vrij kan bewegen.
- hoewel de tiljukken van Liko zijn uitgerust met clips, moet er extra voorzichtig te werk worden gegaan. Controleer voordat de patiënt daadwerkelijk getild wordt maar terwijl de banden volledig gestrekt zijn, of de banden correct aan de haken van het tiljuk zijn bevestigd.
- zorg ervoor dat de patiënt goed in de tilband zit voordat deze naar een andere plaats wordt gebracht.
- til een patiënt nooit hoger dan nodig is voor het volledig tillen en verplaatsen.
- laat een opgetilde patiënt nooit zonder toezicht.
- controleer of de wielen van de rolstoel, het bed, de brancard, enz., tijdens het tillen/verplaatsen op de rem staan.
- werk altijd ergonomisch. Gebruik de mogelijkheden van de patiënt om actief aan de verplaatsing mee te werken.
- stel de tilband niet bloot aan direct zonlicht als deze niet wordt gebruikt.

 **Een onjuiste bevestiging van de tilband aan het tiljuk kan ernstig letsel bij de patiënt veroorzaken.**

 **Handmatig draaien van de patiënt in bed kan letsel bij de zorgverlener veroorzaken.**

 Medisch hulpmiddel, productklasse I

OCTROOI www.hillrom.com/patents

Kan beschermd zijn door één of meer octrooien. Raadpleeg de bovenstaande website.

De Hill-Rom-ondernemingen zijn eigenaar van Europese, Amerikaanse of andere octrooien en aangevraagde octrooien.

Productwijzigingen

De producten van Liko worden continu verder ontwikkeld. Daarom behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving productwijzigingen aan te brengen. Neem contact op met uw vertegenwoordiger van Hill-Rom voor advies en informatie over productverbeteringen.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko is gecertificeerd volgens ISO 9001 en de variant voor producenten van medische hulpmiddelen ISO 13485. Liko is ook gecertificeerd volgens de milieunorm ISO 14001.

Kennisgeving voor gebruikers en/of patiënten in de EU

Elk ernstig incident dat heeft plaatsgevonden met betrekking tot het hulpmiddel, dient te worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde instantie van de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

Verzorging en onderhoud

Controleer de tilband vóór elk gebruik. Controleer de volgende punten op slijtage en beschadigingen:

- materiaal
- banden
- zomen
- lussen

⚠ Gebruik geen beschadigde tilaccessoires.

Neem contact op met de fabrikant of leverancier als er iets onduidelijk is.

Wasinstructies: zie hiervoor het productlabel van de tilband en de bijgevoegde bijlage 'Verzorging en onderhoud Liko-tilbanden'.

Periodieke inspectie

Het product moet minstens om de 6 maanden worden geïnspecteerd. Frequentere inspectie is mogelijk nodig als het product vaker dan normaal wordt gebruikt of gewassen. Zie het Liko-protocol 'Periodieke inspectie Liko-textielproducten'. Voor protocollen kunt u contact opnemen met uw Hill-Rom-vertegenwoordiger.

Verwachte levensduur

Het product heeft een verwachte levensduur van 1-3 jaar bij normaal gebruik. De verwachte levensduur is afhankelijk van het materiaal, de gebruiksfrequentie, de wasprocedure en het vervoerde gewicht.


Recyclinginstructies

De hele tilband, inclusief baleinen, vulmateriaal, enz., moet gescheiden worden afgevoerd als brandbaar afval.

Hill-Rom voert beoordelingen uit en biedt gebruikers richtlijnen voor het veilig hanteren en afvoeren van de apparatuur om letsel zoals (maar niet beperkt tot) snijwonden, doorboring van de huid en schaafwonden te voorkomen, en voor de vereiste reiniging en desinfectie van het medische hulpmiddel na gebruik en voorafgaand aan het afvoeren. Klanten moeten zich houden aan alle federale, landelijke, regionale en/of lokale wetten en voorschriften zoals deze gelden voor het veilig afvoeren van medische hulpmiddelen en accessoires.







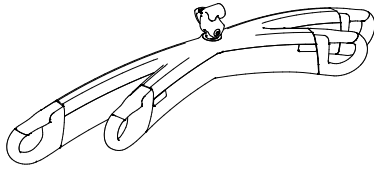
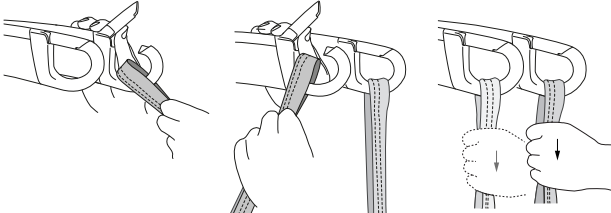
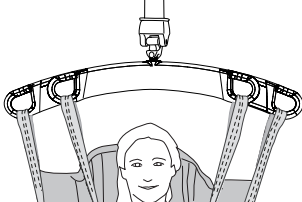
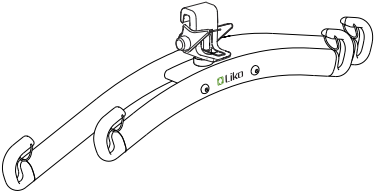
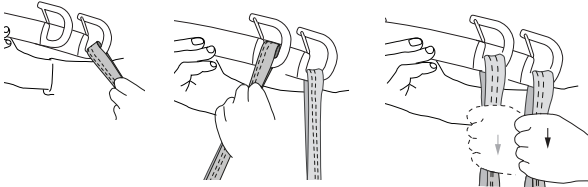
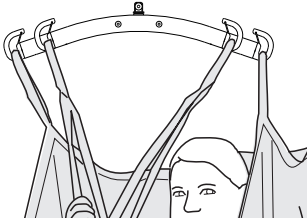
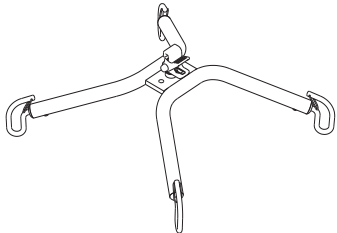
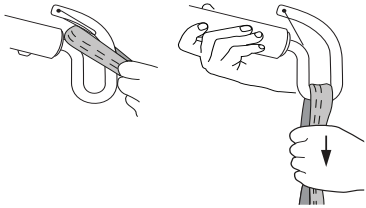
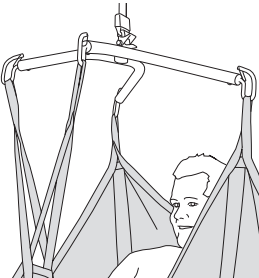
In geval van twijfel dient de gebruiker van het hulpmiddel eerst contact op te nemen met de technische ondersteuning van Hill-Rom voor advies over protocollen voor veilig afvoeren

Definities

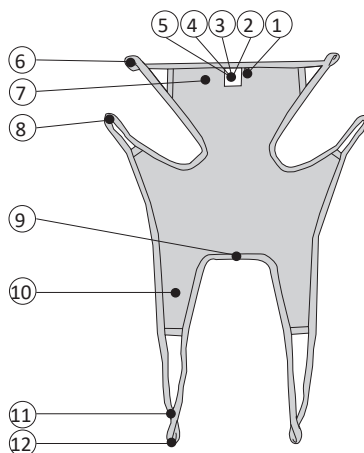


1. Maataanduiding
2. Productlabel
3. Serienummer
4. Label: periodieke inspectie
5. Label: individuele markering (Belongs to)
6. Bovenste bandlus
7. Hoofdsteun
8. Torso-lus
9. Onderrand
10. Beensteunen
11. Ingekorte maat
12. Beensteunlus


Instructies voor het bevestigen van een tilband aan verschillende tiljukken

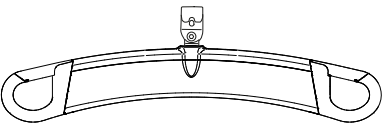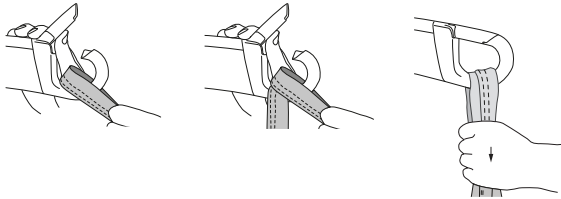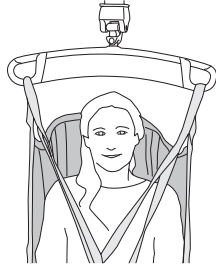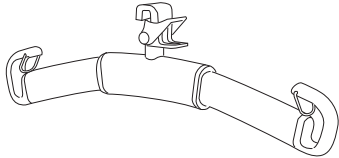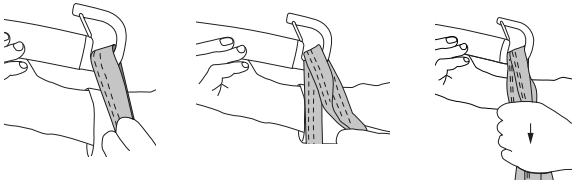Tiljuk	Tilbandlussen aan tiljukhaken	Goed
 <p>SlingGuard™</p>		
 <p>Universal</p>		
 <p>SlingGuard™ Twin</p>		
 <p>Universal Twin</p>		
 <p>Cross-Bar</p>		

Fout!

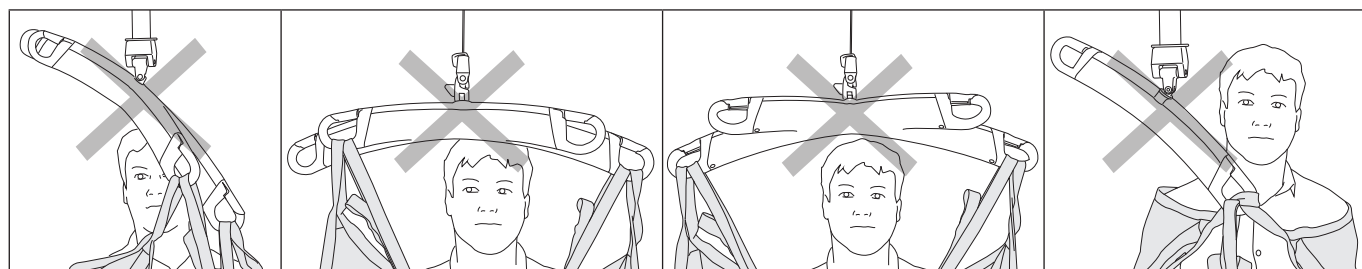


Instructies voor het bevestigen van een SilhouetteSling aan een tiljuk met 4 haken (Twin-Bars en Cross-Bars)

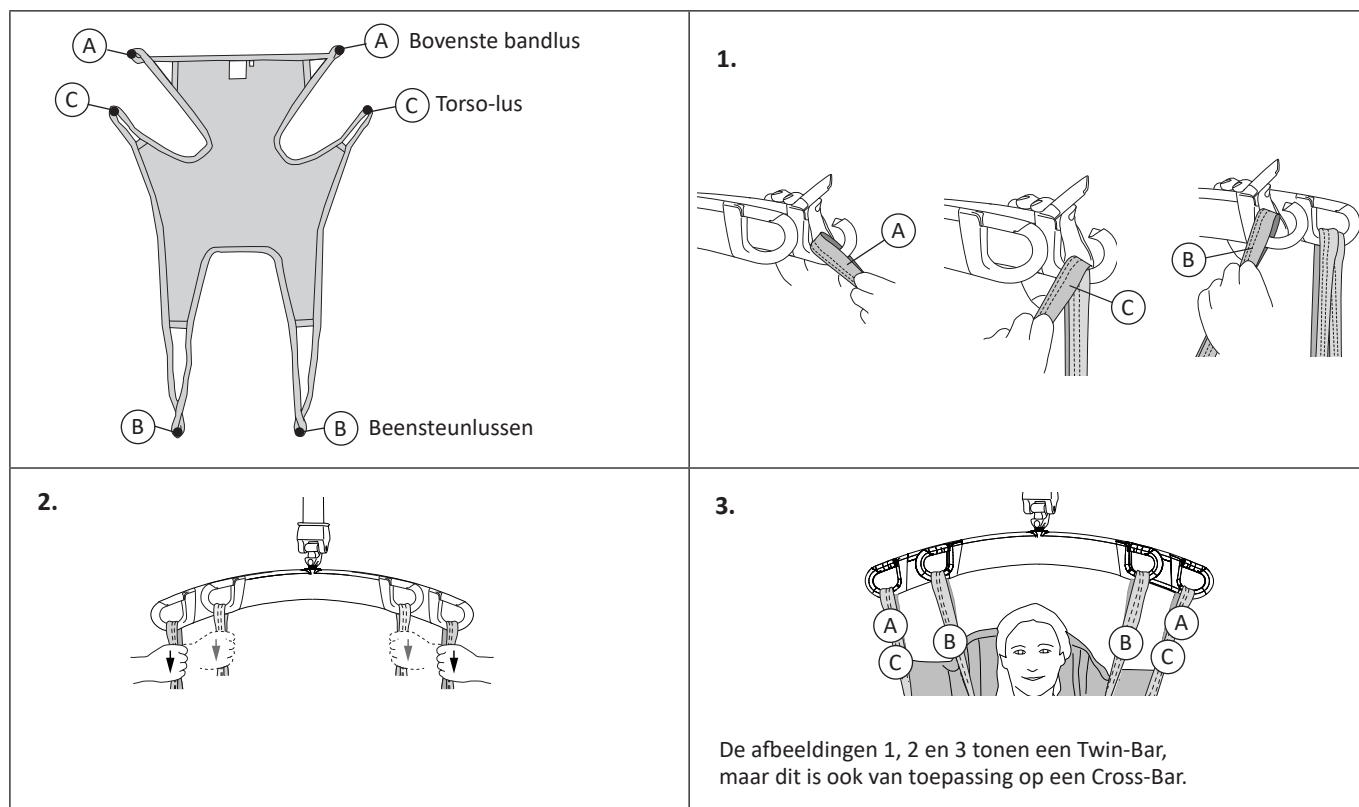


Tillen vanuit een zittende positie

De patiënt wordt tijdens het aanbrengen gewoonlijk voorover gehouden, en is het belangrijk dat een zorgverlener dan voor de patiënt staat om te voorkomen dat deze voorover valt.

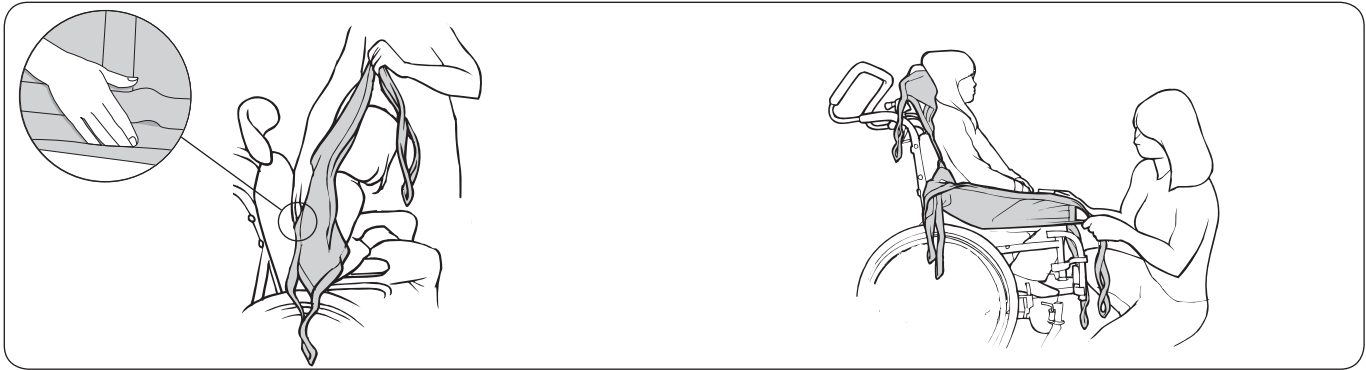


Plaats de tilband achter de rug van de patiënt, met het productlabel naar buiten. Vouw de onderrand van de tilband om uw vingertoppen om de tilband goed op zijn plaats te leiden. Druk de onderrand van de tilband met uw handpalm naar beneden tot de hoogte van het stuitbeen van de patiënt - **dit is zeer belangrijk**. **Tip:** goede positionering gaat makkelijker als de patiënt iets naar voren leunt of naar voren wordt gebracht.

Trek de beensteunen van de tilband naar voren langs de buitenkant van de dijen van de patiënt. Plaats uw handpalm tussen het lichaam van de patiënt en de tilband en duw de onderrand van de beensteun naar beneden in de richting van het zitgedeelte. Trek tegelijkertijd de beensteun naar voren met uw andere hand om deze uit te rekken.

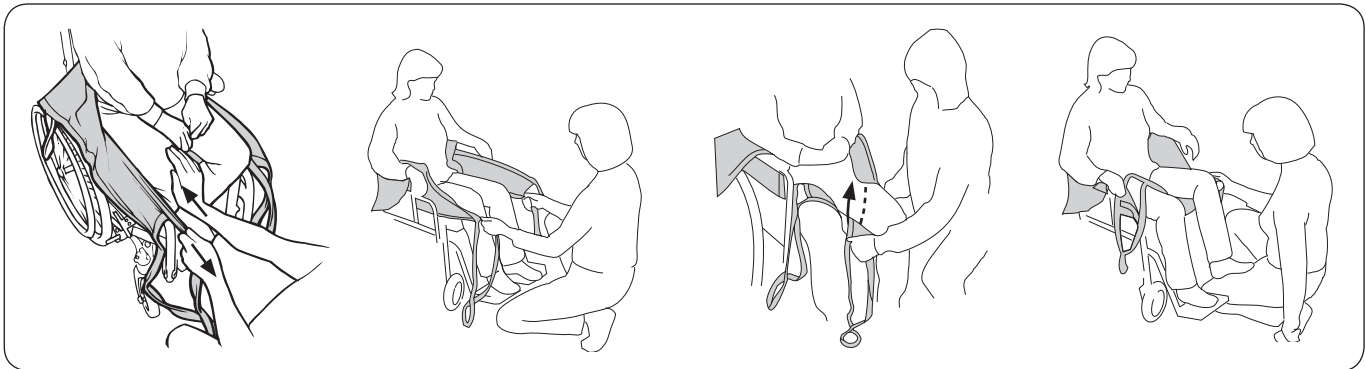

Trek de beensteunen naar voren om eventuele vouwen aan de achterkant glad te krijgen. **Tip:** met een beetje steun onder de knieholte kunnen de beensteunen eenvoudiger voorwaarts worden getrokken. Controleer of beide beensteunen even ver uitsteken.

Plaats de beensteunen onder beide dijen. **Tip:** het aanbrengen van de beensteunen is makkelijker als de benen van de patiënt iets hoger zijn dan de stoel. Dit kan worden bereikt door de voeten van de patiënt op de voetensteunen of op uw eigen been te plaatsen, zoals op de afbeelding te zien is.

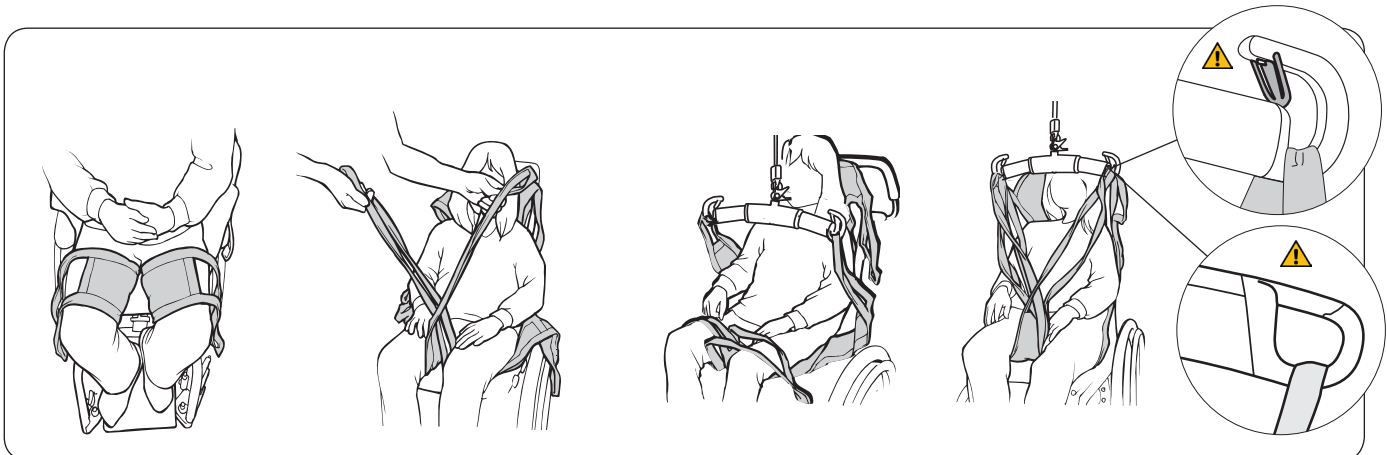


Zorg ervoor dat het materiaal plat ligt en goed rond het been zit. Bereid de bevestiging van de beensteunen voor. De meest gebruikelijke manier om de tilband aan te brengen is met gekruiste beensteunen. Zie pagina 12 voor alternatieve methoden.

Bevestig eerst de torso-lussen aan het tiljuk. De armen van de patiënt kunnen binnen of buiten de tilband worden geplaatst. Bevestig vervolgens de bovenste bandlussen aan het tiljuk. Kies lussen op basis van de behoeften van de patiënt, zie **Bijstelling van de hoofdondersteuning**, pagina 12. Tot slot bevestigt u de beensteunlussen aan het tiljuk. Zie pagina 6-7 voor instructies voor het bevestigen van de tilbandlussen aan verschillende tiljukken. Til de patiënt.

Tillen naar een zittende positie

Als de patiënt in een rolstoel moet worden geplaatst, is het belangrijk dat hij/zij ver achterin de stoel komt om goed te kunnen zitten. Dit kunt u op verschillende manieren bereiken.

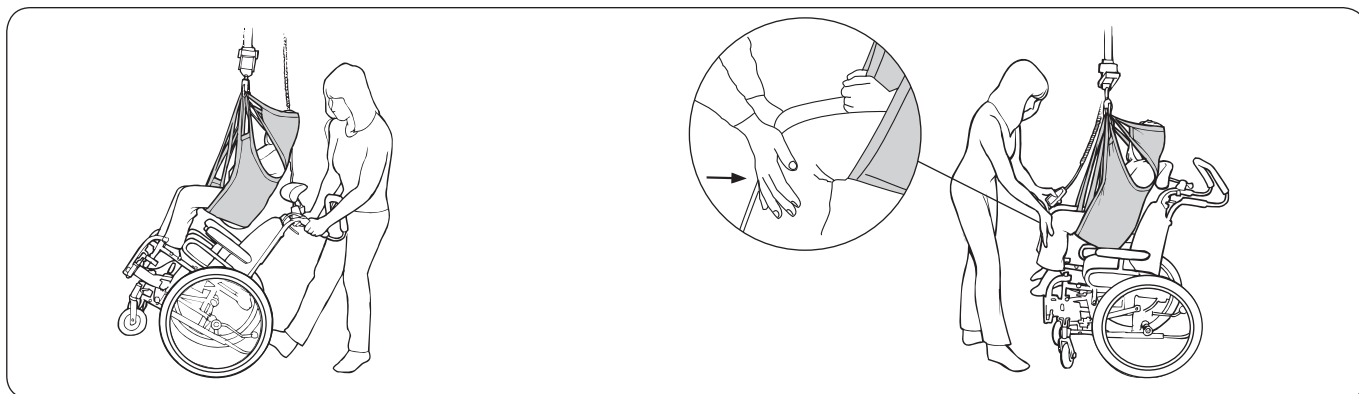

Wanneer u een patiënt in een rolstoel plaatst: laat de rolstoel naar achteren leunen tijdens het laten zakken van de patiënt. Laat de billen tijdens het laatste gedeelte tegen de rugleuning naar beneden schuiven. Bepaal de hoek van de rolstoel met uw voet op de kantelsteun.

Alternatief: druk bij het neerlaten van de patiënt licht onder de knieën van de patiënt zodat het zitvlak richting rugsteun wordt geduwd.

De SilhouetteSling blijft na het tillen vaak in de stoel; de bandlussen en ook de beensteunen kunnen dan worden weggevouwen en in de stoel worden ingestopt.

Verwijderen van de tilband in een stoel/rolstoel



Verwijder de beensteun zorgvuldig. Dit gaat het prettigst door de beensteunlussen onder het stoffen gedeelte van de beensteun door te trekken.


Verwijder de tilband door deze voorzichtig omhoog te trekken.

Tillen vanuit het bed

Wij raden aan de tilband aan te brengen wanneer de patiënt horizontaal ligt. Dit is de gemakkelijkste procedure. In sommige gevallen, bijvoorbeeld als de patiënt niet horizontaal kan liggen, kan de tilband worden aangebracht terwijl de patiënt in bed zit (zie **Alternatieve methode voor het aanbrengen van de tilband** hieronder).

Denk aan uw eigen lichaamshouding en het comfort van de patiënt. Gebruik de functies voor het omhoog- en omlaagbrengen van het bed.

⚠ Als het bed geen in hoogte verstelbaar hoofdeinde heeft, moet er bij het eerste deel van het tillen goed op worden gelet dat de patiënt zijn nek niet overstrekt. De zorgverlener moet de nek dan handmatig ondersteunen.

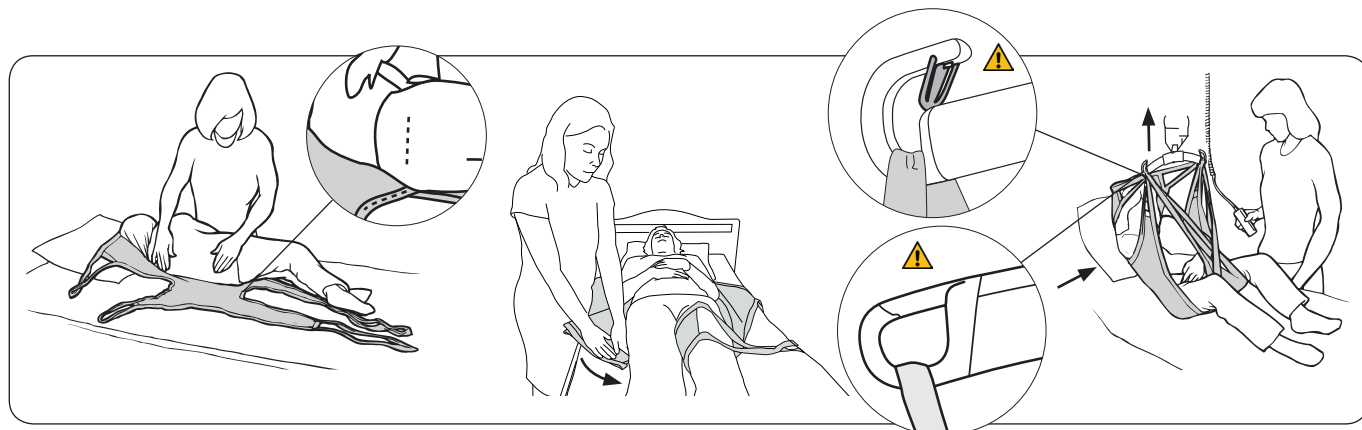

Draai de patiënt naar u toe om te voorkomen dat hij/zij uit het bed valt. Plaats de rand van de tilband onder de patiënt met de onderrand **op gelijke hoogte met het stuitbeen**. De bovenste rand van de hoofdsteen mag vervolgens niet lager liggen dan het hoofd om voldoende hoofdondersteuning te bieden tijdens het tillen. Vouw de tilband zo dat de het midden achter de ruggengraat van de patiënt ligt wanneer de patiënt weer voorzichtig wordt teruggedraaid. Trek de tilband voorzichtig aan vanaf de andere kant.

Plaats de beensteunen onder de benen. U kunt dit het beste doen door de beensteun omlaag tegen de matras te drukken terwijl u deze onder het dijbeen plaatst. Zorg ervoor dat het materiaal plat ligt en goed rond het been zit. De beensteunen kunnen op verschillende manieren worden bevestigd; zie pagina 12.

Verhoog het hoofdeinde van het bed. Bevestig eerst de torso-lussen aan het tiljuk en vervolgens de bovenste bandlussen. Kies lussen op basis van de behoeften van de patiënt, zie **Bijstelling van de hoofdondersteuning**, pagina. 12. Tot slot bevestigt u de beensteunlussen aan het tiljuk. Zie pagina 6-7 voor instructies voor het bevestigen van de tilbandlussen aan verschillende tiljukken. Til de patiënt.


Alternatieve methode voor het aanbrengen van de tilband: verhoog het hoofdeinde van het bed achter de patiënt. Leg de tilband op het bed met het productlabel naar beneden richting de matras. Schuif de tilband naar beneden achter de rug van de patiënt, zodat de onderrand **op gelijke hoogte is met het stuitbeen**. **Tip!** Het aanbrengen gaat makkelijker als de patiënt naar voren leunt of naar voren wordt gebracht.

Tillen naar het bed

Denk aan uw eigen lichaamshouding en het comfort van de patiënt. Gebruik de functies voor het omhoog- en omlaagbrengen van het bed.

⚠ Als het bed geen in hoogte verstelbaar hoofdeind heeft, moet er bij het laatste deel van het neerlaten goed op worden gelet dat de patiënt zijn nek niet overstrekt. De zorgverlener moet de nek dan handmatig ondersteunen.

Verwijderen van de tilband terwijl de patiënt in bed zit

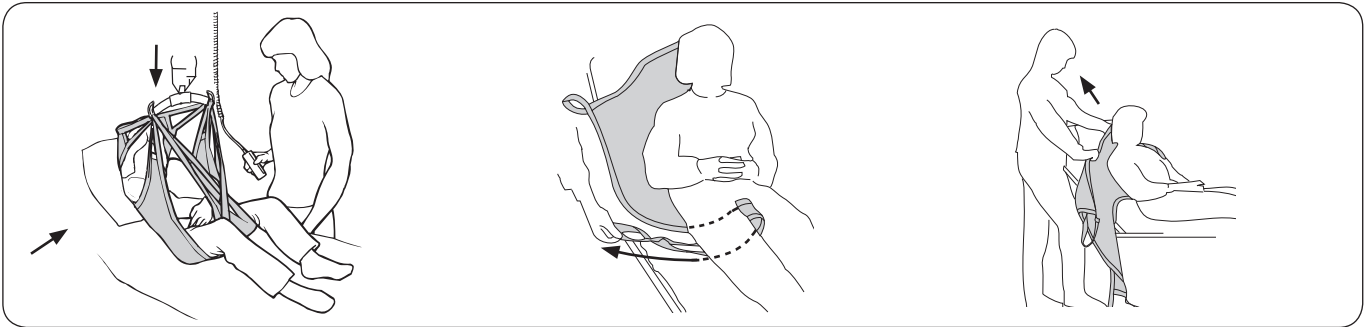


Positioneer de patiënt boven het bed. Verhoog het hoofdeinde van het bed. Laat de patiënt op het bed zakken.

Verwijder de beensteunen door de beensteunlussen onder het stoffen gedeelte van de beensteun door te trekken. **Tip:** dit gaat gemakkelijker als de benen van de patiënt gebogen zijn.


Verwijder de tilband door deze voorzichtig omhoog te trekken.

Verwijderen van de tilband terwijl de patiënt in bed ligt

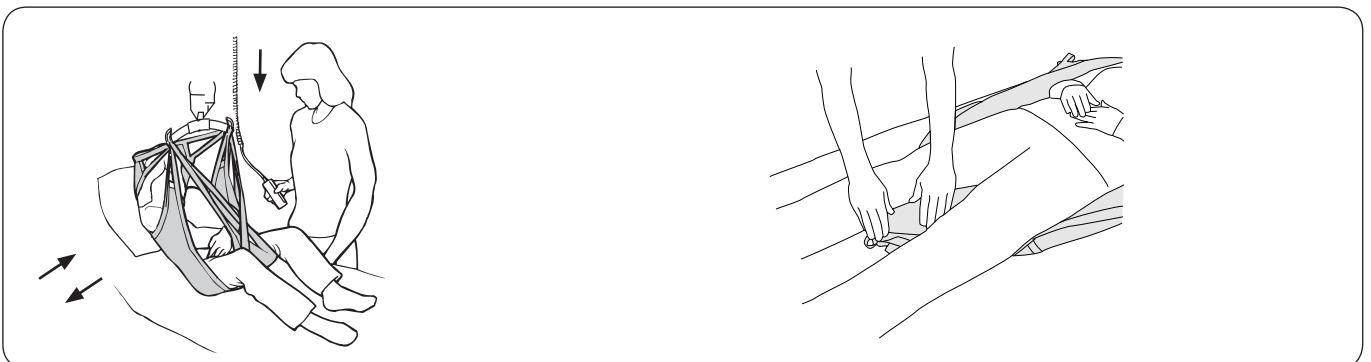

Positioneer de patiënt boven het bed. Verhoog het hoofdeinde van het bed. Laat de patiënt op het bed zakken. Verlaag het hoofdeind van het bed.

Plaats de beensteunlussen onder de beensteunen tussen de benen van de patiënt.

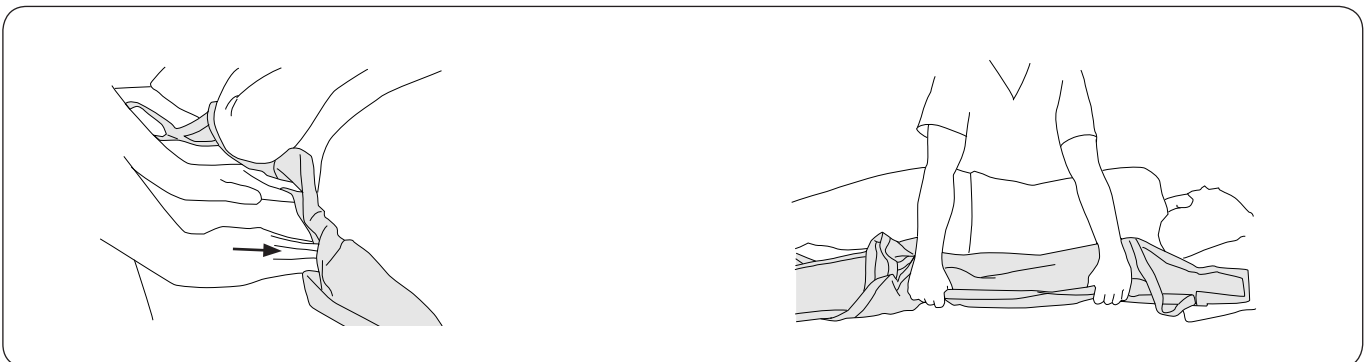


Pak de rand van de tilband vast. Duw de tilband onder zichzelf naar binnen. Druk de tilband tegen de matras en onder de patiënt naar binnen.

Draai de patiënt voorzichtig op de zij. Pak de tilband van onderaf vast en verwijder deze voorzichtig.

Passingsadvies

Verschillende manieren van aanbrengen van beensteunen

Voordat een alternatieve bevestiging wordt gekozen, moet deze individueel worden beoordeeld op mogelijke risico's. Hieronder staan algemene adviezen omdat dezelfde principes gelden voor meerdere tilbandmodellen.

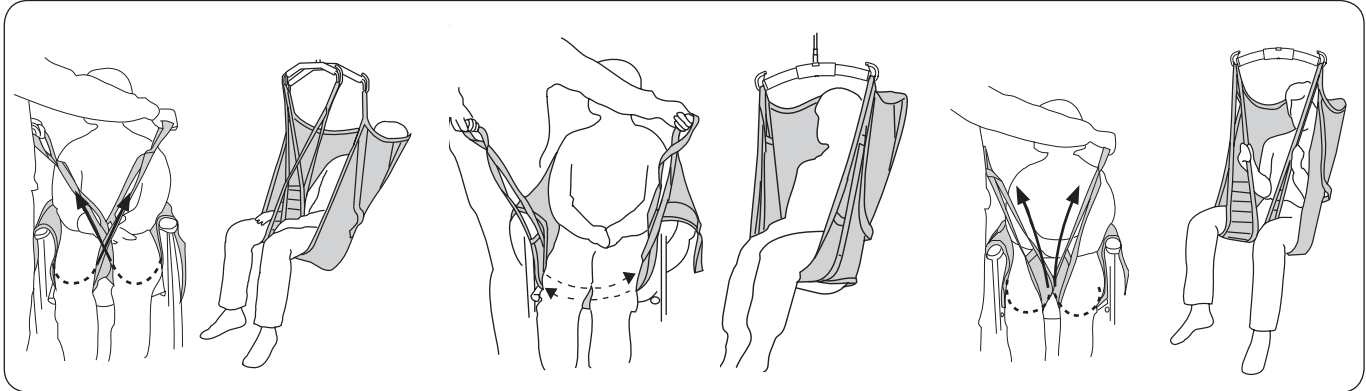

Gekruiste beensteunen.

Dit is de meest gebruikelijke manier van aanbrengen van de tilband. Eén beensteunlus wordt door de andere gevoerd voordat de lussen aan het tiljuk worden bevestigd.

Overlappend onder beide dijën.

Dit kan de juiste manier zijn bij bijvoorbeeld het tillen van een patiënt met geamputeerde benen. **Tip:** om te voorkomen dat de patiënt te veel achterover komt te zitten, kunnen er Extension Loops aan de beensteunlussen worden bevestigd.

Elke beensteun wordt afzonderlijk aan het tiljuk bevestigd.

Dit kan de juiste manier zijn bij het tillen van patiënten met bijzonder gevoelige geslachtsorganen.

⚠ Verhoogd risico op uit de tilband glijden.


Bijstelling van de hoofdondersteuning

De hoofdondersteuning van de SilhouetteSling kan worden bijgesteld voor twee verschillende standen.

Alternatief 1: De buitenste lus van de bovenste bandlus is bevestigd aan het tiljuk. Het hoofd van de patiënt bevindt zich dan in een ietwat achterovergekatelde houding.

Alternatief 2: De binnenste lus van de bovenste bandlus is bevestigd aan het tiljuk. Het hoofd van de patiënt bevindt zich in een meer rechtopstaande positie.

Verschillende zitposities, afhankelijk van het type tiljuk

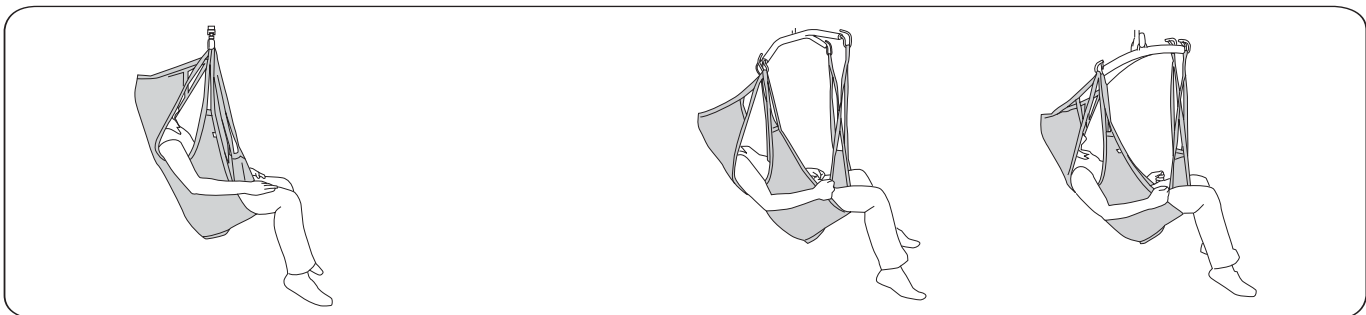


De SilhouetteSling in combinatie met **Liko Universal SlingBar 350/450** of **SlingGuard 450** zorgt voor een ietwat achteroverzittende houding.

De SilhouetteSling in combinatie met het **Liko Sling Cross-Bar 450/670** zorgt voor een meer achteroverzittende houding.

De Universal SlingBar 350/450 in combinatie met **SideBars** geeft eenzelfde mate van achteroverzittende houding.

De patiënt zit niet goed in de tilband - hoe komt dit?

Hieronder staan algemene adviezen omdat dezelfde principes gelden voor meerdere tilbandmodellen.

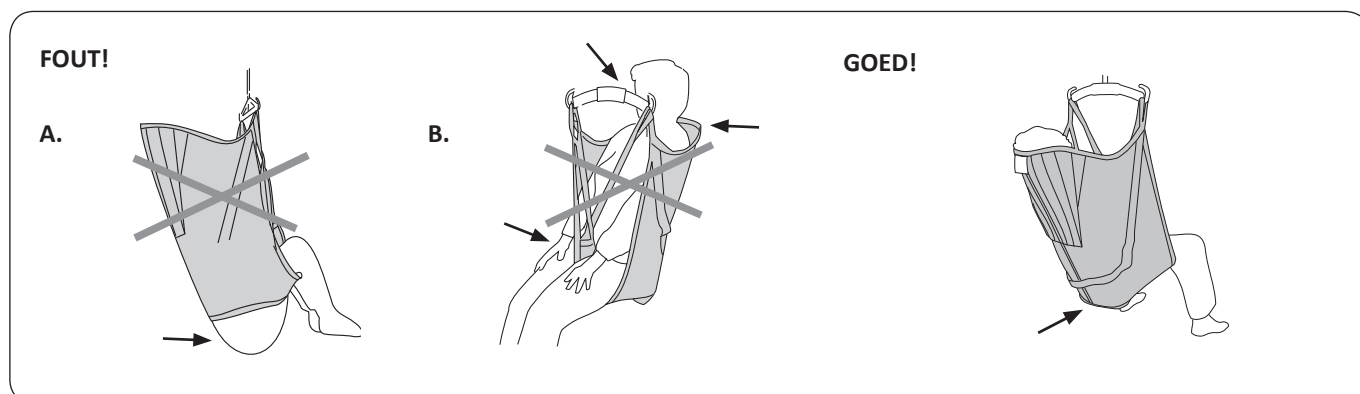

A. Risico op uit de tilband glijden. De billen hangen naar beneden.

De tilband is mogelijk te groot. Het kan ook komen doordat de tilband niet voldoende over de rug van de patiënt naar beneden is getrokken.

Controleer vóór het tillen of de onderrand gestrekt is en of het materiaal goed rond de benen ligt.

B. Door een te kleine tilband kunnen de beensteunen de liezen beknellen; dit kan ongemak veroorzaken, en het tiljuk kan te dicht bij het gezicht komen en/of het hoofd krijgt onvoldoende ondersteuning.

De onderrand van de tilband bevindt zich op dezelfde hoogte als het stuitbeen.
De beensteunen zijn correct onder de benen gepositioneerd.


Ingekorte maat

In bepaalde gevallen is het voor een goede zitpositie van de patiënt in de tilband beter om de beensteunlussen in te korten. De ingekorte maat kan tijdelijk worden gebruikt om de juiste lengte te testen, maar bij langdurig gebruik kunnen de bartacks beschadigd raken. Als u de beensteunlus echter wilt verkorten voor langdurig gebruik, raden wij aan een knoop in de lus te leggen om deze ongeveer 10 cm in te korten. In dit geval moet de buitenste beensteunlus op het tiljuk worden aangesloten.

Accessoires

Extension Loop, groen, 12 cm
 Extension Loop, groen, 22 cm
 Extension Loop, grijs, 12 cm
 Extension Loop, grijs, 22 cm

productnr. 3691102
 productnr. 3691103
 productnr. 3691302
 productnr. 3691303

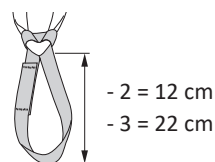

Overzicht Liko™ SilhouetteSling, mod. 22

Product	Productnr.	Maat		Gewicht patiënt	Max. belasting ²
Liko SilhouetteSling	3522603	XS	Extra klein	20 - 28 kg	200 kg
Liko SilhouetteSling	3522604	S	Klein	25 - 50 kg	200 kg
Liko SilhouetteSling	3522605	M	Gemiddeld	45 - 75 kg	200 kg
Liko SilhouetteSling	3522306	L	Groot	65 - 100 kg	200 kg

¹Het aangegeven patiëntgewicht is slechts een richtlijn – afwijkingen zijn mogelijk.

²De maximale belasting van het geheel wordt bepaald door de lift of het accessoire met de laagste maximale belasting.

Materiaal: de SilhouetteSling is verkrijgbaar in netpolyester.

Aanbevolen combinaties

Aanbevolen combinaties van de Liko SilhouetteSling met Liko-tiljucken:	Mini 220	Tiljuk 350 ⁴	Tiljuk 450 ²	Tiljuk 600 ⁵	Twin-Bar 670 ³	Sling Cross-Bar 450	Sling Cross-Bar 670	Univ. SideBars + Universal 350	Univ. SideBars + Universal 450
	SilhouetteSling, XS	1	1	2	4	3	1	3	1
SilhouetteSling, S	2	1	1	3	3	1	3	1	1
SilhouetteSling, M	2 ¹	1	1	3	2	1	2	1	1
SilhouetteSling, L	2 ¹	1 ¹	1	3	1	1	2	1 ¹	1

¹ Armen buiten de tilband

² Tiljuk 450 staat voor de Universal SlingBar 450 productnr. 3156075, 3156085 en 3156095, voor de SlingBar Standard 450 productnr. 3156001, 3156003, 3156007 en 3156016 en voor de SlingGuard 450 productnr. 3308020 en 3308520.

³ Twin-Bar 670 staat voor de Universal TwinBar 670 productnr. 3156077 en 3156087 en voor de SlingGuard 670 Twin productnr. 3308040 en 3308540.

⁴ Tiljuk 350 staat voor de Universal SlingBar 350 productnr. 3156074, 3156084 en 3156094.

⁵ Tiljuk 600 staat voor de Universal SlingBar 600, productnr. 3156076 en 3156086.

Toelichting: 1 = Aanbevolen, 2 = Mogelijk, 3 = Afgeraden, 4 = Ongeschikt

Andere combinaties

Combinaties van accessoires/producten die anders zijn dan de combinaties die worden aanbevolen door Liko, kunnen leiden tot risico's voor de veiligheid van de patiënt.



www.hillrom.com

Liko AB
 Nedre vägen 100
 975 92 Luleå, Zweden
 +46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

