

Křížové závěsné hrazdy Liko™ Sling Cross-bar




Návod k použití


Platí pro následující modely:

Sling Cross-bar 450
Sling Cross-bar 450 s rychloupínacím hákem Quick-release Hook
Sling Cross-bar 670
Sling Cross-bar 670 s rychloupínacím hákem Quick-release Hook

Č. výrobku 3156021
Č. výrobku 3156022
Č. výrobku 3156018
Č. výrobku 3156019

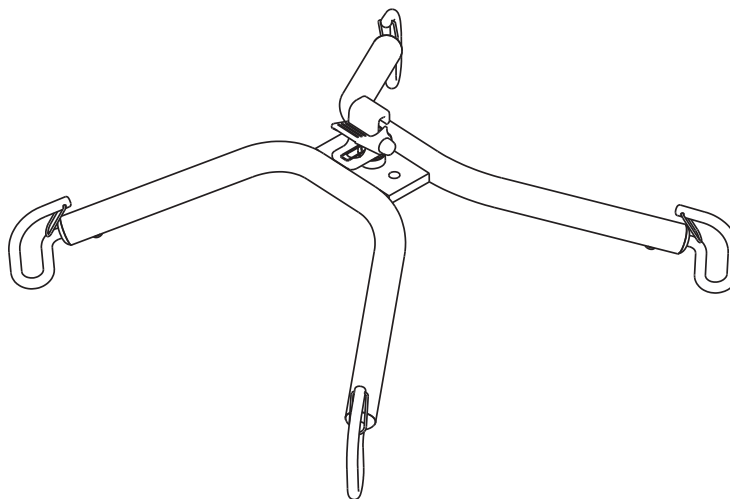

Sling Cross-bar 450

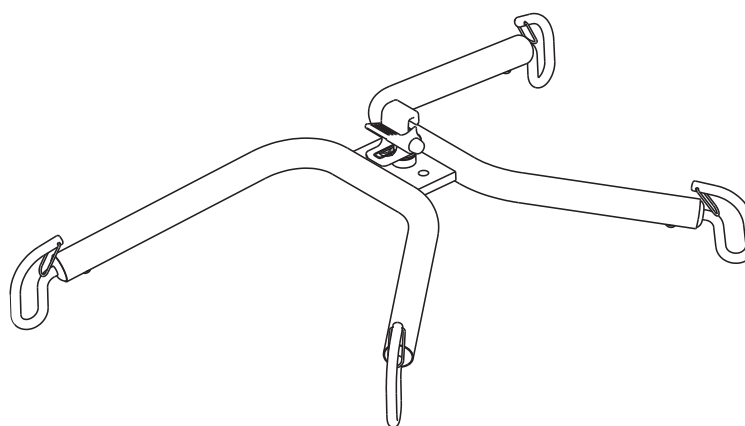

Sling Cross-bar 670

Popis výrobku

Křížové závěsné hrazdy Liko jsou k dispozici ve dvou modelech, z nichž každý má dvě verze, všechny jsou vybaveny čtyřmi háky závěsné hrazdy pro upevnění patientského vaku a poskytují tak při zdvihu relaxační polohu s nakloněním dozadu. Křížová závěsná hrazda je buď trvale připevněna ke zvedáku, nebo je upevněna pomocí rychloupínacího háku. Systém rychloupínacího háku Liko lze dodávat předem namontovaný na všech modelech křížové závěsné hrazdy.














DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Zvedání a přenášení pacientů vždy znamená určitou míru rizika. Před použitím si přečtěte návod k použití zvedáku i zvedacího příslušenství. Je důležité úplně porozumět obsahu návodu k použití. Toto zařízení smí obsluhovat pouze vyškolený personál. Ověřte si, že zvedací příslušenství je vhodné pro použitý zvedák. Při používání dbejte opatrnosti. Jako ošetřující personál vždy zodpovídáte za bezpečnost pacienta. Musíte být vždy dobře informováni o stavu pacienta a jeho schopnosti zvládnout situace zahrnující zvedání. Pokud je vám něco nejasné, kontaktujte výrobce nebo dodavatele výrobku.

Popis symbolů

V tomto dokumentu nebo na výrobku se můžete setkat s těmito symboly.

Symbol	Popis
	Výstraha: Tato situace vyžaduje zvláštní péči a pozornost.
	Značka CE
	Zákonný výrobce.
	Před použitím si prostudujte návod k použití.
	Datum výroby.
	Upozornění! Prostudujte si návod k obsluze.
	Před použitím si prostudujte návod k použití.
	Identifikátor produktu.
	Sériové číslo.
	Zdravotnický prostředek.
 (01) 0100887761997127 (11) RMMDD (21) 012345678910	Čárový kód datové matice GS1, který může obsahovat následující informace. (01) Číslo globální obchodní položky (11) Datum výroby (21) Sériové číslo

Bezpečnostní pokyny





Různé maximální nosnosti se mohou na sestaveném zvedacím systému vztahovat na různé výrobky: zvedák, závěsnou hrazdu, závěs a jiné použité příslušenství. Pro sestavený zvedací systém je maximální nosnost vždy nejnižší maximální nosnost kterékoli z použitých součástí. Například: Křížové závěsné hrazdy mají max. zatížení 300 kg. V kombinaci se stropním zvedákem Likorall™ s max. nosností 200 kg platí pro sestavený zvedací systém maximální nosnost 200 kg.

Prostudujte si označení na zvedáku a zvedacím příslušenství a máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte autorizovaného zástupce společnosti Hill-Rom.

Křížové závěsné CrossBar hrazdy lze použít v kombinaci s patientskými vaky Liko, které se připevňují k závěsné hrazdě pomocí smyček. Křížové závěsné hrazdy CrossBar lze použít v kombinaci s patientskými vaky Liko určenými pro čtyři připojovací body na závěsné hrazdě.

Pro další pokyny ohledně výběru smyčky si prostudujte návody k použití pro příslušné modely patientských vaků. Tam můžete také najít doporučení ke kombinaci závěsných hrazd Liko™ s patientskými vaky Liko.

Pozor! Vždy si přečtěte návod k použití dodávaný s různými modely patientských vaků Liko pro správné a bezpečné používání vaků.

-  **Předtím než pacienta zvednete z podkladové plochy, ale až ve chvíli, kdy jsou plně napnuty popruhy patientského vaku, zkontrolujte, zda jsou popruhy správně připevněny k hákům závěsné hrazdy.**
-  **Z bezpečnostních důvodů musí být břemeno při zvedání neseno společně všemi háky závěsné hrazdy!**
-  **Použití jiného než zde doporučeného zvedacího příslušenství může představovat riziko.**
-  **Nesprávné připevnění patientského závěsného vaku k závěsné hrazdě by mohlo pacientovi způsobit zranění.**


Maximální nosnost: 300 kg

 Zdravotnický prostředek třídy I

Sestavení

Pevné sestavení pro zvedání

Platí pro následující modely závěsné hrazdy: Sling Cross-bar 450 a 670 (č. výrobku 3156021 a 3156018)

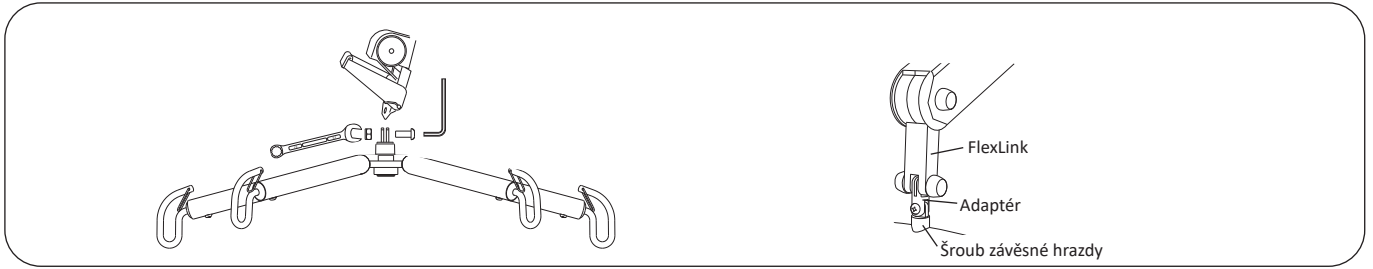


Platí pro: Stropní zvedák Likorall™ 242 S/ES, stropní zvedák Likorall™ 243 ES, mobilní zvedák Golvo™, mobilní zvedák Uno™ 100/102* a mobilní zvedák Viking™*

Pro pevné sestavení použijte k připevnění křížové závěsné hrazdy dodaný (speciální) šroub M10 x 25 a pojistnou matici M10. Zkontrolujte, zda šroub vyčnívá skrz matici o 2 mm a zda se může šroub závěsné hrazdy pohybovat (přízpusobením funguje tak, jak by mělo).

*Pro pevnou montáž na mobilní zvedáky pomocí FlexLink musí být vždy namontován adaptér pro příslušný zvedák, viz níže.


Adaptér 8 mm, (č. výrobku 2016502)

Platí pro: Řadu mobilních zvedáků Uno až do sériového č. 31824 (včetně). Viz příslušné pokyny k sestavení.

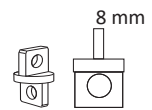

Adaptér 12 mm, (č. výrobku 2016504)


Platí pro: Řadu mobilních zvedáků Uno až do sériového č. 31825 (včetně). a Viking™. Viz příslušné pokyny k sestavení.

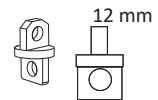

Pevná souprava 4 (č. výrobku 3308860)


hodí se pro: č. výrobku 3156018 a 3156021 v kombinaci se stropním zvedákem LikoGuard™ L, XL.

POZNÁMKA! Montáž smí provádět pouze osoby s oprávněním od společnosti Hill-Rom!

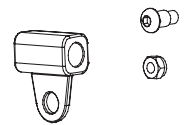


Sestavení pomocí rychloupínacího háku

Platí pro následující modely závěsné hrazdy: Křížová závěsná hrazda 450 a 670 (č. výrobku 3156022 a 3156019)

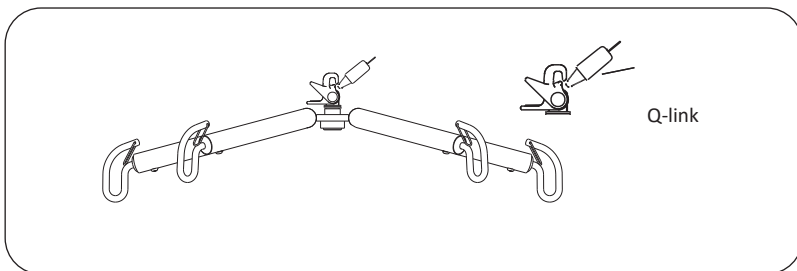


Platí pro: mobilní zvedák Golvo™*, stropní zvedák Likorall™ 242 S/ES R2R, stropní zvedák Likorall™ 243*, stropní zvedák Likorall™ 250* a stropní zvedák Multirall™. *Pokud je vybaven rychloupínacím adaptérem Q-link (č. výrobku 31590005). Viz příslušné pokyny k sestavení.

Instalace západek

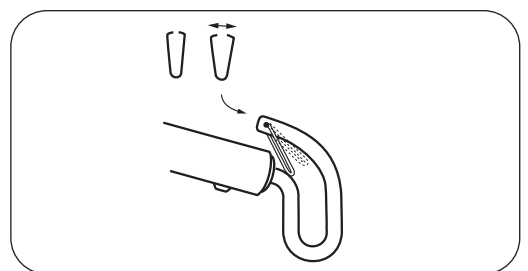

Po instalaci zkontrolujte, zda západka zapadla do háku závěsné hrazdy a zda se v něm volně pohybuje.

Způsob upevnění patientského závěsného vaku k závěsným křížovým hrazdám

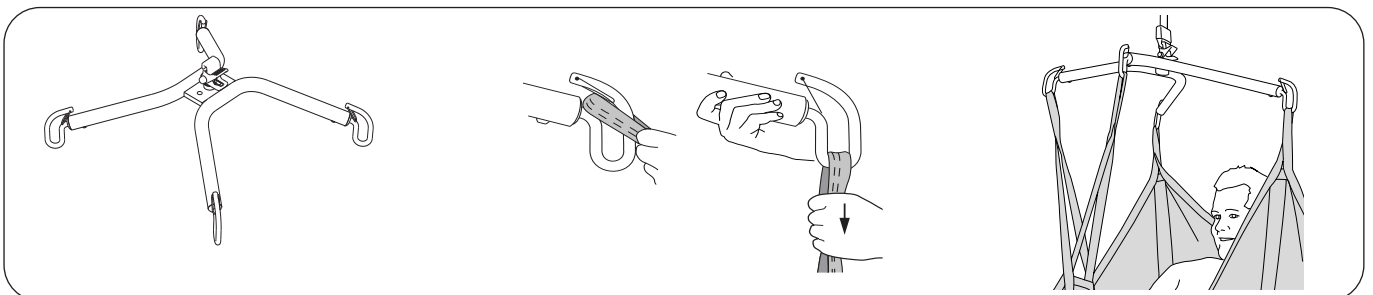

POZNÁMKA! Širší část křížové hrazdy je určena pro použití s horními smyčkami popruhu patientského vaku a užší část křížové hrazdy pro smyčky popruhu podpěry nohou.

Péče a údržba

Pro bezporuchové použití je třeba před každým použitím zkontrolovat některé detaily:

- Zkontrolujte šroub a pojistnou matici křížové závěsné hrazdy
- Zkontrolujte, zda jsou západky na svém místě, neporušené a správně fungují; chybějící nebo poškozené západky musí být vždy nahrazeny novými
- Při používání systému rychloupínacího háku Quick-release zkontrolujte, zda je rychloupínací hák správně připojen ke zvedáku a závěsné křížové hrazdě
- Před zvednutím pacienta zkontrolujte, zda zvedací příslušenství visí svisle a zda se může volně pohybovat.

V případě potřeby očistěte výrobek vlhkým hadříkem. Podrobnější informace týkající se čištění a dezinfekce vašeho výrobku Liko najdete v kapitole „Čištění a dezinfekce“ pro použitý zvedák. **POZNÁMKA! Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem fenolu ani chloru, neboť mohou poškodit hliník a plast.**

⚠ Výrobek nesmí být vystaven tekoucí vodě.

Servis

Pravidelné kontroly křížových závěsných hrazd se musí provádět nejméně jednou ročně.

⚠ Pravidelné kontroly, opravy a údržbu smí provádět pouze autorizovaní servisní pracovníci společnosti Liko za použití originálních náhradních dílů Liko a podle servisních příruček společnosti Hill-Rom.

Předpokládaná životnost

Při správném zacházení, servisu a pravidelných prohlídkách podle pokynů společnosti Liko je předpokládaná životnost zařízení 10 let.

Pokyny pro recyklaci

Výrobek by měl být recyklován jako kovový odpad.

Společnost Hill-Rom poskytuje svým uživatelům vyhodnocení a pokyny k bezpečné manipulaci a likvidaci jejich zařízení a pomáhá tak s prevencí poranění, mimo jiné pořezání, propíchnutí kůže, odřenin. Poskytuje také pokyny k požadovanému čištění a dezinfekci zdravotnického prostředku po použití a před jeho likvidací. Zákazníci by se měli řídit všemi místními a národními zákony a směrnici, které se týkají bezpečné likvidace zdravotnických prostředků a příslušenství.

V případě pochybnosti má uživatel nejprve kontaktovat technickou podporu společnosti Hill-Rom a vyžádat si protokoly bezpečné likvidace.

Změny výrobku

Výrobky Liko prochází neustálým vývojem, a proto si vyhrazujeme právo na změnu výrobku bez předchozího upozornění. Informace o aktualizaci produktů Liko™ poskytne autorizovaný zástupce společnosti Hill-Rom.

Design a kvalita společnosti Liko ve Švédsku.

Systém správy výroby i vývoje výrobku je certifikován v souladu s normou ISO9001 a jeho ekvivalentem pro odvětví zdravotnických prostředků, ISO13485. Systém správy také splňuje požadavky normy pro ochranu životního prostředí ISO14001.

Upozornění pro uživatele a/nebo pacienty v EU

Všechny závažné příhody, ke kterým dojde v souvislosti s tímto zdravotnickým prostředkem, musí být hlášeny výrobcem a příslušnému úřadu členského státu, ve kterém uživatel a/nebo pacient sídlí.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Švédsko
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom