

Käyttöohje

Koskee seuraavia malleja:

Sling Cross-bar 450

Sling Cross-bar 450, jossa Quick-Release Hook -pikaliitin

Sling Cross-bar 670


Sling Cross-bar 670, jossa Quick-Release Hook -pikaliitin

Tuotenro 3156021


Tuotenro 3156022

Tuotenro 3156018

Tuotenro 3156019

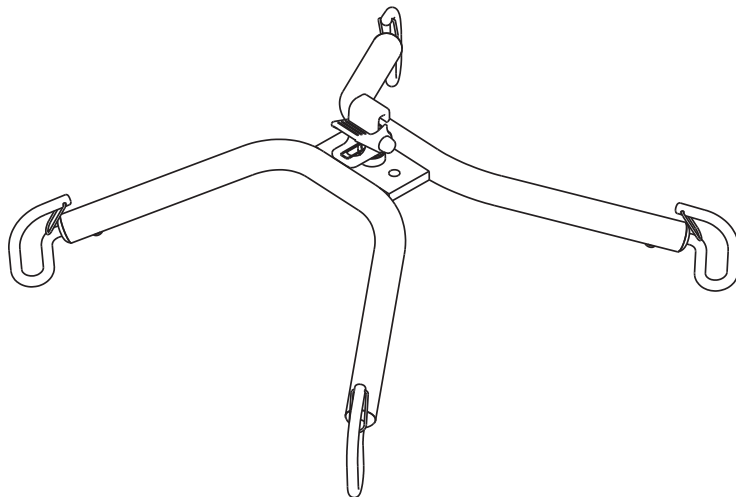

Sling Cross-bar 450

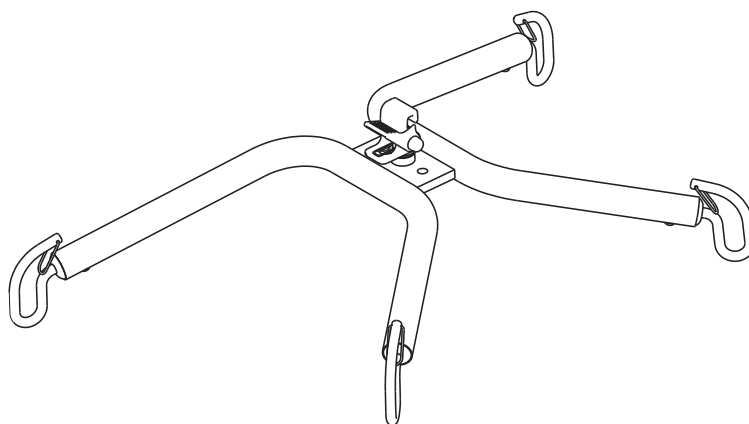

Sling Cross-bar 670

Tuotekuvaus

Likon Sling Cross-bar -ristikkonostokaarista on saatavana kaksi mallia, joista kummastakin on kaksi versiota. Kaikissa on neljä nostokaaren koukkuja, joihin nostokankaan voi kiinnittää. Ne takaavat miellyttävän, taakse nojaavan nostoasennon. Sling Cross-bar -ristikkonostokaari on joko pysyvästi kiinnitetty nostimeen, tai se kiinnitetään Quick-Release Hook -pikaliittimellä. Likon Quick-Release Hook -pikaliitinjärjestelmä voidaan toimittaa esiasennettuna kaikkiin Sling Cross-bar -ristikkonostokaarimalleihin.














TÄRKEÄÄ!

Avustettavan nostamiseen ja siirtämiseen liittyy aina riskejä. Lue nostimen ja nostovaruusteiden käyttöohje ennen käyttöä. On tärkeää ymmärtää käyttöohjeen sisältö täysin. Laitetta saa käyttää vain koulutettu henkilökunta. Varmista, että nostovaruusteet soveltuvat käytettävään nostimeen. Noudata huolellisuutta ja varovaisuutta käytön aikana. Avustajana olet aina vastuussa avustettavan turvallisuudesta. Sinun on oltava tietoinen avustettavan edellytyksistä suoritua nostotilanteesta. Ota epäselvissä tilanteissa yhteys valmistajaan tai maahantuojaan.

Symbolien kuvaus

Tässä asiakirjassa ja/tai tuotteessa on käytetty seuraavia symboleja.

Symboli	Kuvaus
	Varoitus: tämä tilanne edellyttää erityistä varovaisuutta ja huomiota.
	CE-merkintä
	Laillinen valmistaja.
	Lue käyttöohje ennen käyttöä.
	Valmistuspäivämäärä.
	Huomio! Lue käyttöohje.
	Lue käyttöohje ennen käyttöä.
	Tuotetunniste.
	Sarjanumero.
	Lääkinnällinen laite.
 <small>(01) 0100887761997127 (11) VVKKPP (21) 012345678910</small>	GS1 Data Matrix -viivakoodi, joka voi sisältää seuraavia tietoja: (01) kansainvälinen tuotenumero (11) tuotantopäivä (21) sarjanumero





Turvaohjeet

Nostojärjestelmään asennettavilla tuotteilla (nostin, nostokaari, nostokangas ja muut mahdollisesti käytettävät lisävarusteet) saattaa olla erisuuruisia enimmäiskuormituksia. Tällöin koko nostojärjestelmän enimmäiskuormitus vastaa aina pienintä tuotekohtaista enimmäiskuormitusta. Esimerkiksi: Sling Cross-bar -ristikkonostokaarten enimmäiskuormitus on 300 kg. Kun nostojärjestelmään sisältyy lisäksi Likorall™-katonostin, jonka enimmäiskuormitus on 200 kg, koko nostojärjestelmän enimmäiskuormitus on 200 kg. Tarkista nostimen ja nostovarusteiden merkinnät tai ota yhteyttä Hill-Romin edustajaan, jos kysyttävää ilmenee.

Cross-Bar-ristikkonostokaarta voi käyttää yhdessä sellaisten Likon nostokankaiden kanssa, jotka kiinnitetään nostokaaren nostokankaan lenkeillä. Cross-Bar-ristikkonostokaarta voi käyttää yhdessä sellaisten Likon nostokankaiden kanssa, jotka kiinnitetään nostokaaren neljään liitäntäkohtaan.

Lisätietoja sopivan nostokankaan valinnasta on kunkin nostokangasmallin käyttöohjeessa. Siinä on myös ohjeita Liko™-nostokaarien ja Liko-nostokankaiden yhdistämiseen.

Huomautus! Lue aina Likon eri nostokangasmallien mukana toimitettu käyttöohje. Näin varmistat nostokankaan oikean ja turvallisen käytön.

-  Ennen avustettavan nostamista alustalta ja nostokankaan hihnojen kiristämistä on tärkeää varmistaa, että hihnat on kiinnitetty nostokaaren koukkuihin oikein.
-  Turvallisuussyistä kaikkien nostokaaren koukkujen on kannateltava kuormaa noston aikana!
-  Muiden kuin hyväksytyjen nostovarusteiden käyttöön saattaa liittyä riskejä.
-  Nostokankaan puutteellinen kiinnitys nostokaareen voi aiheuttaa avustettavalle vakavia vammoja.


Enimmäiskuormitus: 300 kg

 Lääkinnällinen luokan I laite

Asennus

Kiinteä asennus nostimeen

Pätee seuraaviin nostokaariin: Sling Cross-bar 450- ja 670-ristikkonostokaaret (tuotenro 3156021 ja 3156018)

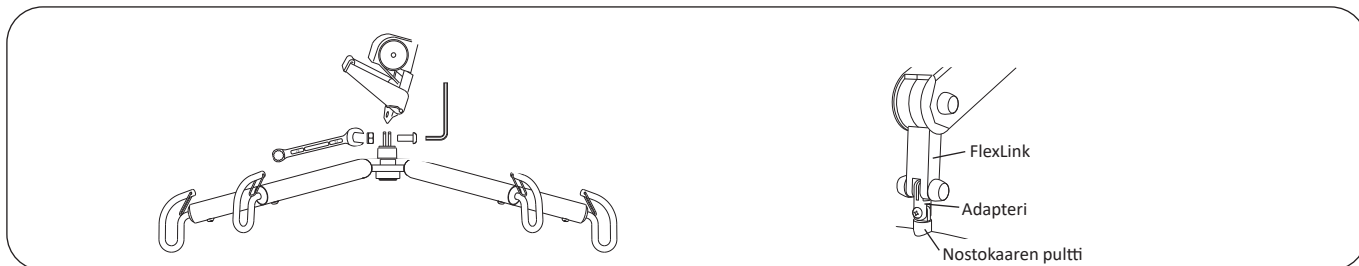

Pätee seuraaviin: Likorall™ 242 S/ES -kattostonin, Likorall™ 243 ES -kattostonin, liikuteltava Golvo™-nostin, liikuteltava Uno™ 100/102 -nostin* ja liikuteltava Viking™-nostin*

Käytä kiinteässä asennuksessa toimitukseen kuuluvaa M10 x 25 -koon (erikois)pulttia ja M10-lukkomutteria Sling Cross-bar -ristikkonostokaaren kiinnittämiseen. Tarkista, että pultti työntyy 2 mm mutterin läpi ja että nostokaaren pultti pääsee liikkumaan (mukautuu kuten pitääkin).

*Kun nostokaari asennetaan liikuteltaviin nostimiin kiinteästi FlexLink-varrella, asennuksessa on aina käytettävä kyseiseen nostimeen sopivaa adapteria, katso alla.

Adapteri 8 mm (tuotenro 2016502)

Pätee seuraaviin: Uno-tuotteet sarjanumeroon 31824 asti. Lue soveltuvat asennusohjeet.


Adapteri 12 mm (tuotenro 2016504)

Pätee seuraaviin: Uno-tuotteet sarjanumeroon 31825 asti ja liikuteltavat Viking™-nostimet. Lue soveltuvat asennusohjeet.

Asennussarja 4 (tuotenro. 3308860)


Sopii seuraaviin: tuotenumerot 3156018 ja 3156021 yhdistettynä LikoGuard™-kattostonimeen (L, XL).

HUOMAUTUS! Tuotteen saa asentaa vain Hill-Romin valtuuttama henkilökunta!

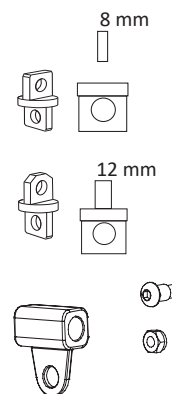


Asennus pikaliittimen avulla

Pätee seuraaviin nostokaariin: Sling Cross-bar 450- ja 670-ristikkonostokaaret (tuotenro 3156022 ja 3156019)

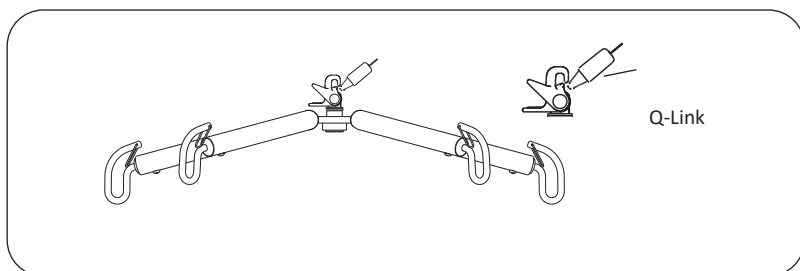


Pätee seuraaviin: Liikuteltava Golvo™-nostin*, Likorall™ 242 S/ES R2R -kattostonin, Likorall™ 243 -kattostonin*, Likorall™ 250 -kattostonin* ja Multirall™-kattostonin. *Jos tuotteessa on Q-link-liitin (tuotenro 31590005). Lue soveltuvat asennusohjeet.

Salpojen asennus

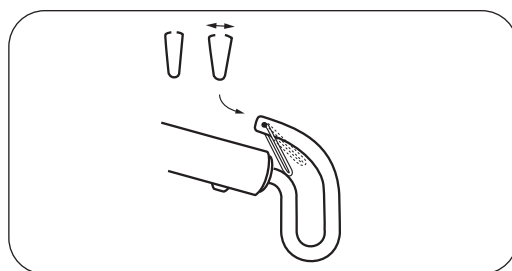

Tarkista asentamisen jälkeen, että salpa lukittuu ja pääsee liikkumaan vapaasti nostokaaren koukussa.

Nostokankaan kiinnittäminen Sling Cross-bar -ristikkonostokaariin

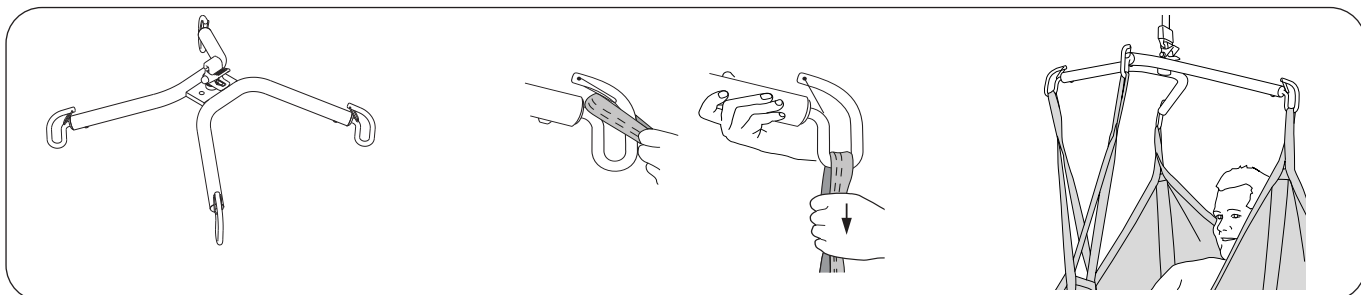

HUOMAUTUS! Cross-Bar-ristikkonostokaaren leveämpi osa on tarkoitettu käytettäväksi nostokankaan ylempien hihnalenkien kanssa ja Cross-Bar-ristikkonostokaaren kapeampi osa on tarkoitettu käytettäväksi jalkatuen hihnalenkien kanssa.

Hoito ja kunnossapito

Ongelmatonta käyttöä varten tietyt kohdat on tarkistettava ennen jokaista käyttökertaa.

- Tarkista Sling Cross-bar -ristikkonostokaaren pultti ja lukkomutteri.
- Tarkista, että salvat ovat paikoillaan ja ehjät ja että ne toimivat oikein. Puuttuvat tai vahingoittuneet salvat on aina vaihdettava uusiin.
- Käytettäessä pikaliitinjärjestelmää tarkista, että Quick-Release Hook -pikaliitin on kiinnitetty oikein nostimeen ja Sling Cross-bar -ristikkonostokaareen.
- Tarkista ennen nostoa, että nostovaruusteet riippuvat pystysuorassa ja pääsevät liikkumaan esteettömästi.

Puhdista tuote tarvittaessa kostealla liinalla. Katso tarkempia tietoja Liko-tuotteesi puhdistuksesta ja desinfiointista käytettävän nostimen käyttöohjeen luvusta *Puhdistus ja desinfiointi*. **HUOMAUTUS! Älä käytä fenolia tai klooria sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa alumiini- ja muoviosia.**

⚠ Tuotetta ei saa kastella juoksevilla vedellä.

Huolto

Sling Cross-Bar -ristikkonostokaaret on tarkistettava säännöllisesti vähintään kerran vuodessa.

⚠ Määräaikaistarkastuksia, korjauksia ja huoltoja saavat suorittaa vain Hill-Romin valtuuttamat henkilöt, jotka työskentelevät Likon huolto-ohjeiden mukaisesti. Vain alkuperäisiä varaosia saa käyttää.

Odotettu käyttöikä

Tuotteen odotettu käyttöikä on 10 vuotta, kun tuotetta käsitellään ja huolletaan oikein ja se tarkastetaan säännöllisesti Likon ohjeiden mukaisesti.

Kierrätysohjeet

Tuote on lajiteltava metallijätteisiin.

Hill-Rom opastaa käyttäjiä laitteiden turvallisessa käsittelyssä ja hävittämisessä ja auttaa näin ehkäisemään muun muassa viiltoja, pistohaavoja, hiertymiä ja muita vammoja. Lisäksi se opastaa käyttäjiä lääkinällisten laitteiden puhdistamisessa ja desinfiomisessa käytön jälkeen ja ennen hävittämistä. Asiakkaiden on noudatettava kaikkia lääkinällisten laitteiden ja lisävarusteiden turvalliseen hävittämiseen liittyviä kansallisia, alueellisia ja paikallisia säännöksiä.

Epäselvissä tapauksissa laitteen käyttäjän on ensin otettava yhteyttä Hill-Romin tekniseen tukeen ja pyydettävä ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Tuotemuutokset

Likon tuotteita kehitetään jatkuvasti, minkä vuoksi pidämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin ilman ennakoilmoitusta. Ohjeita ja lisätietoja tuotepäivityksistä saa Hill-Romin edustajalta.

Design and Quality by Liko in Sweden

Laitteen valmistuksen ja kehityksen hallintajärjestelmä on sertifioitu standardin ISO9001 ja vastaavan lääkintäteknikan yrityksille tarkoitetun standardin ISO13485 mukaisesti. Hallintajärjestelmä on sertifioitu myös ympäristöstandardin ISO14001 mukaisesti.

Huomautus käyttäjille ja/tai avustettaville EU:ssa

Kaikki laitteeseen liittyvät vakavat vaaratilanteet on ilmoitettava valmistajalle ja käyttäjän ja/tai avustettavan asuinmaan asianmukaiselle viranomaiselle.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Ruotsi
+46 (0)920 474 700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom