

Návod na použitie

Popruhy Straps, mod. 600 IC sú určené na zdvíhanie a presun pacientov v horizontálnej polohe. Smieša používať iba s príslušenstvom LikoStretch™, mod. 600 IC, č. prod. 3156065B. Tieto popruhy sú uložené pohodlne pod pacientom, ktorého tak netreba otáčať ani prevaľovať. Max. nosnosť 250 kg bez ohľadu na počet použitých popruhov (6 – 8 ks).

DÔLEŽITÉ!

Zdvíhanie a prenášanie pacienta vždy so sebou prináša určitú úroveň rizika. Pred použitím si prečítajte návod na použitie zdvíhaka pacienta aj príslušenstva LikoStretch, mod. 600 IC. Je dôležité, aby ste úplne pochopili obsah návodu na použitie. Toto vybavenie by mal používať iba vyškolený personál. Počas používania postupujte dôkladne a opatrne. Ako ošetrovateľ ste vždy zodpovedný za bezpečnosť pacienta. Ak vám niečo nie je jasné, obráťte sa na výrobcu alebo dodávateľa.

Popis symbolov

V tomto dokumente a/alebo na produkte je možné nájsť tieto symboly.

Symbol	Popis
	Varovanie; táto situácia si vyžaduje mimoriadnu opatrnosť a pozornosť.
	Označenie CE
	Zákonný výrobca
	Dátum výroby
	Pred použitím si prečítajte návod na použitie
	Identifikátor produktu
	Sériové číslo
	Zdravotnícka pomôcka
	Nečistite chemicky
	Nežehlite
	Nesušit v bubnovej sušičke
	Pranie Symbol je uvedený vždy spolu s odporúčanou teplotou v °C a °F.
	Bez latexu
	Nepoužívajte bielidlo
	Pravidelná kontrola
	Smer nahor a symbol na vonkajšej strane produktu.
	Symbol na vonkajšej strane produktu.
	Čiarový kód dátovej matice GS1, ktorý môže obsahovať nasledovné informácie. (01) Globálne číslo obchodnej položky (11) Dátum výroby (21) Sériové číslo

Produkt – Zdravotnícka pomôcka triedy Produkt I

Bezpečnostné pokyny

Zmeny produktu

Produkty Liko sa neustále vyvíjajú a z tohto dôvodu si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien produktov bez predchádzajúceho upozornenia. Rady a informácie týkajúce sa inovácií produktov vám poskytne zástupca spoločnosti Hill-Rom.

Design and Quality by Liko in Sweden

Systém riadenia výroby a vývoja produktu je certifikovaný v súlade s normou ISO9001 a je ekvivalentný s normou ISO13485 pre zdravotnícke pomôcky. Systém riadenia je certifikovaný aj v súlade s environmentálnou normou ISO14001.

Upozornenie pre používateľov a/alebo pacientov v EÚ

Akákoľvek vážna nehoda, ktorá nastala v súvislosti so zariadením, by mala byť oznámená výrobcom a príslušným orgánom členského štátu, kde má používateľ a/alebo pacient trvalé bydlisko.

Starostlivosť a údržba

Pred každým použitím skontrolujte produkt. Skontrolujte nasledujúce miesta, či nedošlo k opotrebovaniu a poškodeniu:

- tkaninu
- švy

⚠ Poškodené zdvíhacie príslušenstvo nepoužívajte.

Ak vám niečo nie je jasné, obráťte sa na výrobcu alebo dodávateľa.

Pokyny k praniu

Pozri štítok produktu zdvíhacieho príslušenstva a priložený dodatok „Starostlivosť a údržba“ o vaky Liko.

Pravidelná kontrola

Produkt sa musí kontrolovať minimálne raz za 6 mesiacov. Ak sa výrobok používa alebo perie častejšie ako normálne, môže sa vyžadovať častejšia kontrola. Ak chcete získať protokoly, obráťte sa na zástupcu spoločnosti Hill-Rom.

Očakávaná životnosť

Produkt má očakávanú životnosť 3 roky. Očakávaná životnosť je založená na 10 použitíach denne a praní raz týždenne podľa pokynov na pranie. Spoločnosť Hill-Rom odporúča, aby sa produkt používal len počas jeho očakávanej životnosti.

Pokyny na recykláciu


Popruhy by sa mali likvidovať ako horľavý odpad.

Spoločnosť Hill-Rom vyhodnocuje a používateľom poskytuje návod na bezpečné zaobchádzanie a likvidáciu svojich zariadení na pomoc pri prevencii zranení, okrem iného vrátane: porezania a prepichnutia kože, odrenín, a akéhokoľvek požadovaného čistenia a dezinfekcie zdravotníckeho zariadenia po použití a pred jeho likvidáciou. Zákazníci by mali dodržiavať všetky federálne, štátne, regionálne a/alebo miestne zákony a predpisy týkajúce sa bezpečnej likvidácie zdravotníckych zariadení a príslušenstva.

V prípade pochybností sa musí používateľ zariadenia najskôr obrátiť na technickú podporu spoločnosti Hill-Rom a získať pokyny k protokolom o bezpečnej likvidácii.

Popruhy Overview Liko™ Straps, mod. 600 IC, 8 ks

Názov	Č. prod.	Materiál	Dĺžka	Max. záťaž
Popruhy Straps, mod. 600 IC, 8 ks	3684001	Polyester	140 cm	250 kg

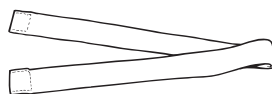

www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Švédsko
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom