

Περιγραφή προϊόντος

Το Liko SupportVest είναι ένα εύχρηστο γιλέκο για ανύψωση από την καθιστή θέση που απαιτεί ελάχιστη ατομική προσαρμογή. Είναι κατάλληλο για ασθενείς που χρειάζονται σημαντική βοήθεια για να σηκωθούν όρθιοι, αλλά μπορούν να σταθούν σταθερά από μόνοι τους από τη στιγμή που θα σηκωθούν.

Το SupportVest παρέχει στον ασθενή υποστήριξη γύρω από την πλάτη και κάτω από τους βραχίονες. Το εσωτερικό διαθέτει επένδυση με κοτλέ ύφασμα, το οποίο αποτρέπει την ολίσθηση του γιλέκου πάνω στο σώμα.

Το SupportVest προορίζεται κυρίως για χρήση σε συνδυασμό με την κρεμάστρα 350 SlingBar στον γερανό για ανύψωση από την καθιστή θέση Sabina™. Το SupportVest μεγέθους XL μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την κρεμάστρα Comfort SlingBar στον γερανό για ανύψωση από την καθιστή θέση Sabina.

Σε συνδυασμό με τον γερανό για ανύψωση από την καθιστή θέση Sabina, το SupportVest αποτελεί μια λειτουργική μονάδα. Για ολοκληρωμένες πληροφορίες και καλύτερα αποτελέσματα, διαβάστε τα εγχειρίδια χρήσης και των δύο προϊόντων.

Μεγέθη

Το SupportVest διατίθεται σε διάφορα μεγέθη. Είναι σημαντικό να επιλέξετε το σωστό μέγεθος προκειμένου να επιτευχθεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο άνεσης και ασφάλειας.

Ζώνη μέσης

Το γιλέκο SupportVest είναι εξοπλισμένο με μια ζώνη μέσης που διατηρεί το γιλέκο στη θέση του γύρω από το επάνω μέρος του σώματος κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Επένδυση

Είναι διαθέσιμη μια επένδυση συνθετικού δέρματος προβάτου ως παρελκόμενο. Η επένδυση ασφαλίζει με φερμουάρ.

Το SupportVest με την επένδυση προσφέρει μια πιο απαλή επιφάνεια που κατανέμει την πίεση πιο ομοιόμορφα.

Σε αυτό το έγγραφο, το άτομο που ανυψώνεται αναφέρεται ως ασθενής και το άτομο που τον βοηθάει αναφέρεται ως φροντιστής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!





















Η ανύψωση και μεταφορά ενός ασθενούς ενέχει πάντα κάποιον βαθμό κινδύνου. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για τον γερανό και τα εξαρτήματα ανύψωσης ασθενούς πριν από τη χρήση. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε πλήρως τα περιεχόμενα του εγχειριδίου χρήσης. Ο εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα ανύψωσης είναι κατάλληλα για τον γερανό που χρησιμοποιείται. Απαιτείται προσοχή κατά τη χρήση. Ως φροντιστές, είστε πάντα υπεύθυνοι για την ασφάλεια του ασθενούς. Θα πρέπει να γνωρίζετε την ικανότητα του ασθενούς να ανταπεξέρχεται στην κατάσταση ανύψωσης. Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή.

Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή συμβόλων.....	3
Οδηγίες ασφάλειας	4
Φροντίδα και συντήρηση	5
Ορισμοί	5
Περιγραφή λειτουργίας της ζώνης μέσης	6
Περιγραφή λειτουργίας των θηλιών ιμάντα	6
Ανύψωση ατόμου κατά τη διάρκεια της ενεργητικής ανύψωσης με τον γερανό για ανύψωση από την καθιστή θέση Sabina και το γιλέκο Liko SupportVest	7
Συμβουλές τοποθέτησης	8
Αξεσουάρ για το γιλέκο Liko SupportVest	9
Επισκόπηση γιλέκου Liko™ SupportVest™ μοντ. 91.....	10

Περιγραφή συμβόλων

Τα σύμβολα αυτά εμφανίζονται σε αυτό το έγγραφο ή/και στο προϊόν.

Σύμβολο	Περιγραφή
	Προειδοποίηση: σε αυτήν την κατάσταση απαιτείται ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή.
	Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση
	Σήμανση CE
	Νόμιμος κατασκευαστής
	Ημερομηνία κατασκευής
	Αναγνωριστικό προϊόντος
	Σειριακός αριθμός
	Ιατροτεχνολογικό προϊόν
	Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα
	Απαγορεύεται το σιδέρωμα
	Στέγνωμα σε στεγνωτήριο
	Απαγορεύεται το στέγνωμα σε στεγνωτήριο ρούχων
	Πλύσιμο Το σύμβολο εμφανίζεται πάντα σε συνδυασμό με συνιστώμενη θερμοκρασία σε °C και °F.
	Χωρίς λατέξ
	Περιοδικός έλεγχος
	Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικό
	Στέγνωμα σε σχοινί υπό σκιά
	Κατεύθυνση προς τα επάνω και σύμβολο στο εξωτερικό του εξοπλισμού.
	Σύμβολο στο εξωτερικό του εξοπλισμού.
 <small>(01) 0100887761997127 (11) YYMMDD (21) 012345678910</small>	Γραμμωτός κώδικας μήτρας δεδομένων GS1 που μπορεί να περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες. (01) Διεθνής κωδικός μονάδων εμπορίας (11) Ημερομηνία παραγωγής (21) Σειριακός αριθμός

Οδηγίες ασφάλειας

Πριν από την ανύψωση, λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

- Ένα υπεύθυνο άτομο στο ίδρυμα που εργάζεστε θα αποφασίσει, εξετάζοντας κάθε περίπτωση ξεχωριστά, εάν απαιτείται ένας ή περισσότεροι φροντιστές.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σάκος που έχει επιλεγεί καλύπτει τις ανάγκες του ασθενούς όσον αφορά το μοντέλο, το μέγεθος, το ύφασμα και τον σχεδιασμό.
- Χρησιμοποιείτε ξεχωριστό σάκο για κάθε ασθενή, για λόγους ασφάλειας και υγιεινής.
- Σχεδιάστε τον τρόπο ανύψωσης, έτσι ώστε να γίνει όσο το δυνατόν ασφαλέστερα και ομαλά
- Παρόλο που οι κρεμάστρες της Liko διαθέτουν μάνταλα, θα πρέπει να υπάρχει η δέουσα προσοχή. Πριν από την ανύψωση του ασθενούς από την επιφάνεια που βρίσκεται και μετά την πλήρη επέκταση των ιμάντων, βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντες έχουν συνδεθεί σωστά στα άγκιστρα της κρεμάστρας.
- Το ύψος μέχρι το οποίο πρέπει να συνεχιστεί η ανύψωση διαφέρει από άτομο σε άτομο.
- Ποτέ μην αφήνετε τον ασθενή χωρίς επιτήρηση κατά τη διάρκεια της ανύψωσης.
- Βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί στο αναπηρικό αμαξίδιο, στο κρεβάτι, στο φορείο, κ.λπ. είναι ασφαλισμένοι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ανύψωσης/μεταφοράς.
- Φροντίστε να εργάζεστε πάντα εργονομικά. Αξιοποιήστε την ικανότητα ενεργής συμμετοχής του ασθενούς στις λειτουργίες.
- Όταν ο σάκος δεν χρησιμοποιείται, μην τον αφήνετε εκτεθειμένο στο άμεσο ηλιακό φως.

Η λανθασμένη τοποθέτηση του σάκου στην κρεμάστρα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στον ασθενή.

 Ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης I

Αλλαγές προϊόντων

Τα προϊόντα της Liko αναπτύσσονται συνεχώς και για τον λόγο αυτό διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών σε αυτά χωρίς προειδοποίηση. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Hill-Rom της περιοχής σας για συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τις αναβαθμίσεις των προϊόντων.

Design and Quality by Liko in Sweden

Η Liko διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001 και κατά το αντίστοιχο πρότυπο για τη βιομηχανία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ISO 13485. Η Liko διαθέτει, επίσης, πιστοποίηση κατά το περιβαλλοντικό πρότυπο ISO 14001.

Ειδοποίηση προς χρήστες ή/και ασθενείς στην ΕΕ

Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό που έχει προκύψει σε σχέση με αυτήν τη συσκευή θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Φροντίδα και συντήρηση

Ελέγχετε τον σάκο πριν από κάθε χρήση. Ελέγχετε τα παρακάτω σημεία για φθορά και ζημιά:

- Ύφασμα
- Ιμάντες
- Ραφές
- Θηλιές
- Κούμπωμα

⚠ Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα ανύψωσης που έχουν υποστεί βλάβη.

Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή.

Οδηγίες πλυσίματος: Ανατρέξτε στην ετικέτα προϊόντος του σάκου και στο εσωκλειόμενο παράρτημα "Φροντίδα και συντήρηση των σάκων της Liko".

Περιοδικός έλεγχος

Το προϊόν θα πρέπει να επιθεωρείται τουλάχιστον μία φορά κάθε 6 μήνες. Εάν τα προϊόντα χρησιμοποιούνται ή πλένονται σε μεγαλύτερη συχνότητα από την κανονική, ενδέχεται να απαιτούνται συχνότεροι έλεγχοι. Για πρωτόκολλα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Hill-Rom στην περιοχή σας.

Αναμενόμενη διάρκεια ζωής

Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 1-5 έτη με κανονική χρήση. Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής εξαρτάται από το ύφασμα, τη συχνότητα χρήσης, τη διαδικασία πλυσίματος και το βάρος των ασθενών που μεταφέρονται.


Οδηγίες ανακύκλωσης

Ολόκληρος ο σάκος, συμπεριλαμβανομένων ενισχύσεων, υλικού επένδυσης κ.λπ., θα πρέπει να ταξινομηθεί ως καύσιμο απόβλητο.

Η Hill-Rom αξιολογεί και παρέχει καθοδήγηση στους χρήστες των προϊόντων της σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό και την ασφαλή απόρριψη των συσκευών της ώστε να συμβάλει στην αποτροπή τραυματισμών όπως (αναφέρονται ενδεικτικά): εγκοπές, διατρήσεις του δέρματος, γδαρσίματα, αλλά και σχετικά με τον καθαρισμό και την απολύμανση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος που απαιτούνται μετά τη χρήση και πριν από την απόρριψή του. Οι πελάτες θα πρέπει να τηρούν το σύνολο των ομοσπονδιακών, πολιτειακών, περιφερειακών ή/και τοπικών νομοθεσιών και κανονισμών όσον αφορά την ασφαλή απόρριψη των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και εξαρτημάτων.


Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο χρήστης της συσκευής θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Hill-Rom για οδηγίες σχετικά με πρωτόκολλα ασφαλούς απόρριψης

Ορισμοί

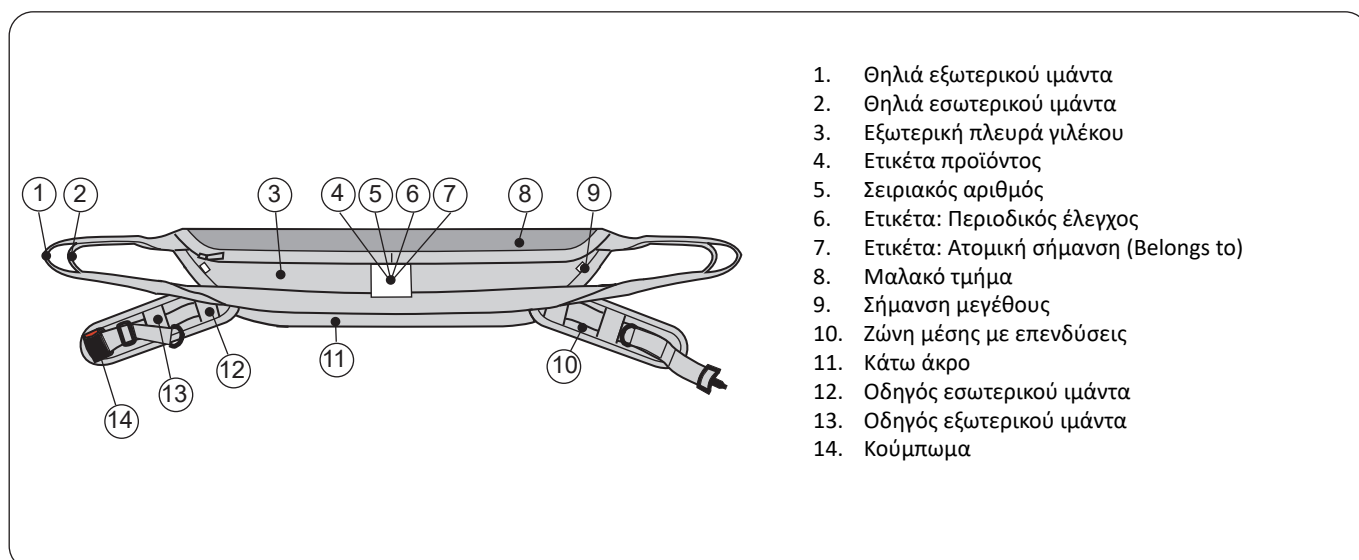

Περιγραφή λειτουργίας της ζώνης μέσης

Η ζώνη μέσης στο SupportVest προορίζεται για τη συγκράτηση του γιλέκου στη θέση του γύρω από τον ασθενή, αλλά δεν προορίζεται για χρήση ανύψωσης του ασθενούς ή την ασφάλιση του ασθενούς μέσα στο γιλέκο. Εάν ο ασθενής χρειάζεται μια ζώνη μέσης για λόγους ασφαλείας, συνιστάται η αλλαγή σε γιλέκο Liko SafetyVest™ ή Liko ComfortVest™.

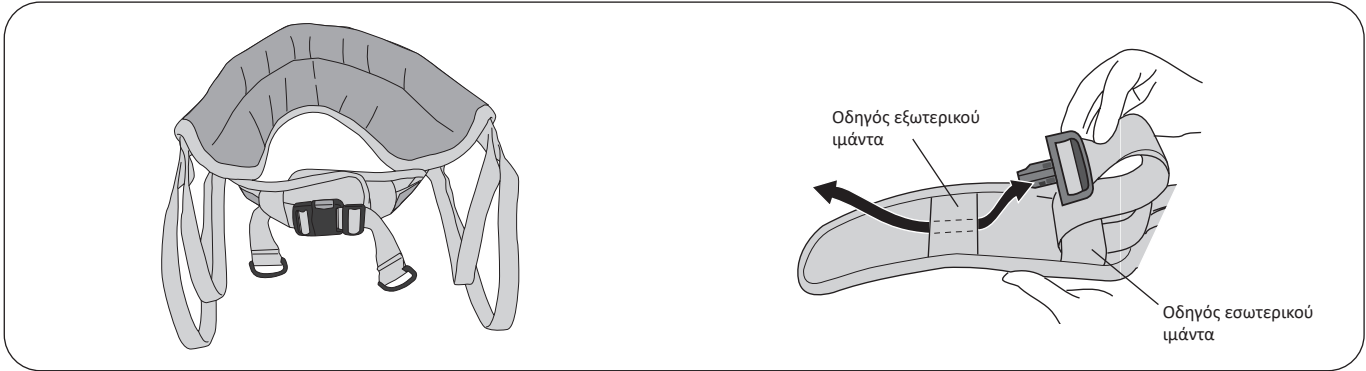

Η ζώνη μέσης στο γιλέκο SupportVest προορίζεται για να συγκρατεί το γιλέκο στη θέση του γύρω από τον ασθενή, αρχικά κατά την ανύψωση σε όρθια θέση.


Κατά την ανύψωση, το επάνω μέρος του σώματος τείνει να γίνεται πιο στενό, προκαλώντας τη χαλάρωση της ζώνης μέσης με αποτέλεσμα να κρέμεται γύρω από το επάνω μέρος του σώματος. Πρόκειται για μια φυσιολογική τάση και δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση την ανύψωση.

⚠ Εάν η ζώνη μέσης συσφιχθεί ξανά αφού ο ασθενής ανυψωθεί σε όρθια θέση, θυμηθείτε να χαλαρώσετε την τάση πριν από το χαμήλωμα ώστε να αποφύγετε την πίεση στη ζώνη μέσης όταν εκτείνεται το επάνω μέρος του σώματος.

Σε περίπτωση που είναι δύσκολη η ρύθμιση της ζώνης μέσης, επειδή είναι πιο φαρδιά από τη μέση του ασθενούς, περάστε το κούμπωμα μέσα από έναν ή και τους δύο οδηγούς ιμάντα, βλ. εικόνα.

Περιγραφή λειτουργίας των θηλιών ιμάντα

Θηλιές ιμάντα εξωτερικής πλευράς του γιλέκου

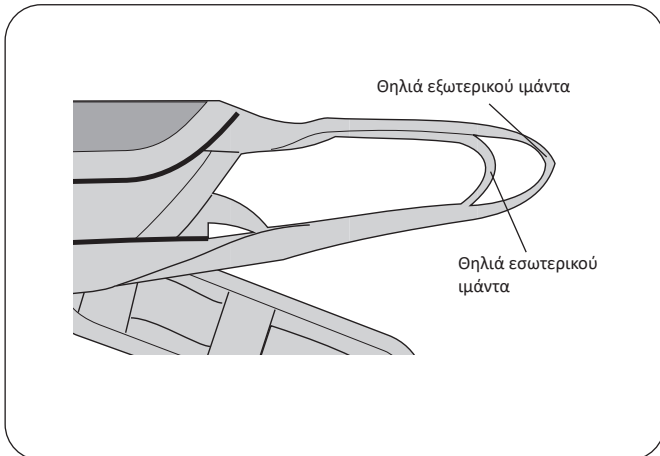


Η εξωτερική πλευρά του γιλέκου διαθέτει δύο θηλιές ιμάντα: θηλιά ιμάντα στην εξωτερική και στην εσωτερική πλευρά του γιλέκου, για μέγιστη ευελιξία κατά τη χρήση. Γενικά, συνιστάται να χρησιμοποιείτε την εσωτερική θηλιά ιμάντα, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη όρθια θέση και να μπορεί ο ασθενής να φτάσει την κρεμάστρα, προκειμένου να συμμετέχει στην ανύψωση.

Η θηλιά εξωτερικού ιμάντα χρησιμοποιείται όταν η περιφέρεια του ασθενούς το απαιτεί ή εάν ο ασθενής έχει μικρότερο ύψος σε σχέση με το ύψος των άγκιστρων της κρεμάστρας σε έναν γερανό για ανύψωση από την καθιστή θέση Sabina™.


Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται η θηλιά εσωτερικού ιμάντα, συνιστούμε να συνδέετε και τη θηλιά εξωτερικού ιμάντα στο άγκιστρο της κρεμάστρας, για να έχετε καλύτερο οπτικό έλεγχο των ιμάντων.

Κλιπ θηλιών

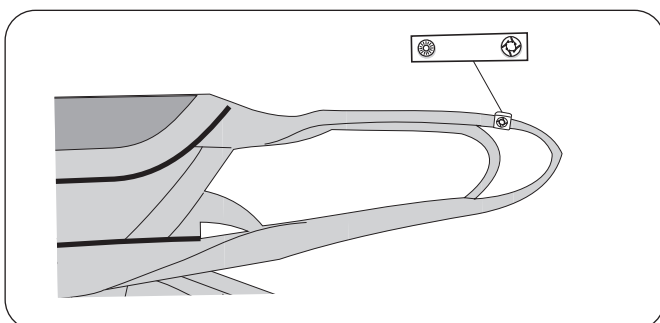

Τα κλιπ θηλιών είναι ένα πρακτικό εξάρτημα που χρησιμοποιούνται για την επισήμανση των θηλιών που επιλέχθηκαν για έναν συγκεκριμένο ασθενή. Διευκολύνει τους φροντιστές να επιλέξουν τη σωστή θηλιά για να συνδέσουν την κρεμάστρα.


Ανύψωση ατόμου κατά τη διάρκεια της ενεργητικής ανύψωσης με τον γερανό για ανύψωση από την καθιστή θέση Sabina και το Liko SupportVest

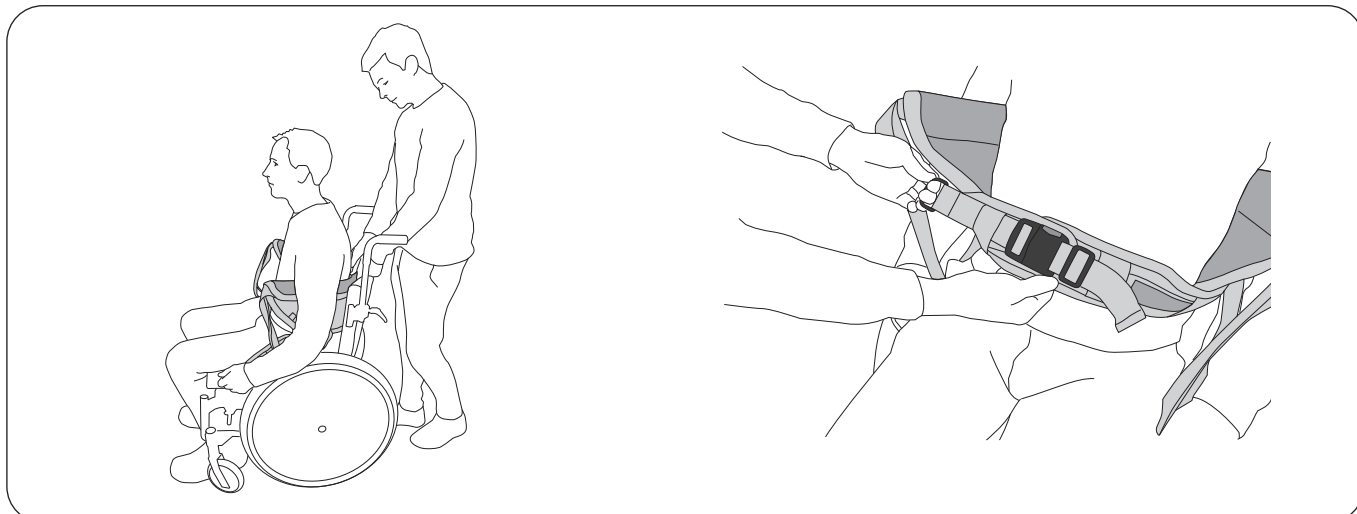

Τοποθετήστε το γιλέκο πίσω από την πλάτη του ασθενούς με την ετικέτα προϊόντος προς τα έξω. Το κάτω άκρο του γιλέκου πρέπει να βρίσκεται στο ύψος της μέσης του ασθενούς.

⚠ Οι βραχίονες του ασθενούς πρέπει να βρίσκονται **πάντα** εκτός του γιλέκου, ώστε να αποτρέπουν την ολίσθησή του προς τα επάνω.


Προσαρμόστε ομαλά τη ζώνη μέσης στην περιφέρεια του επάνω μέρους του σώματος του ασθενούς. Δέστε το κούμπωμα της ζώνης μέσης.

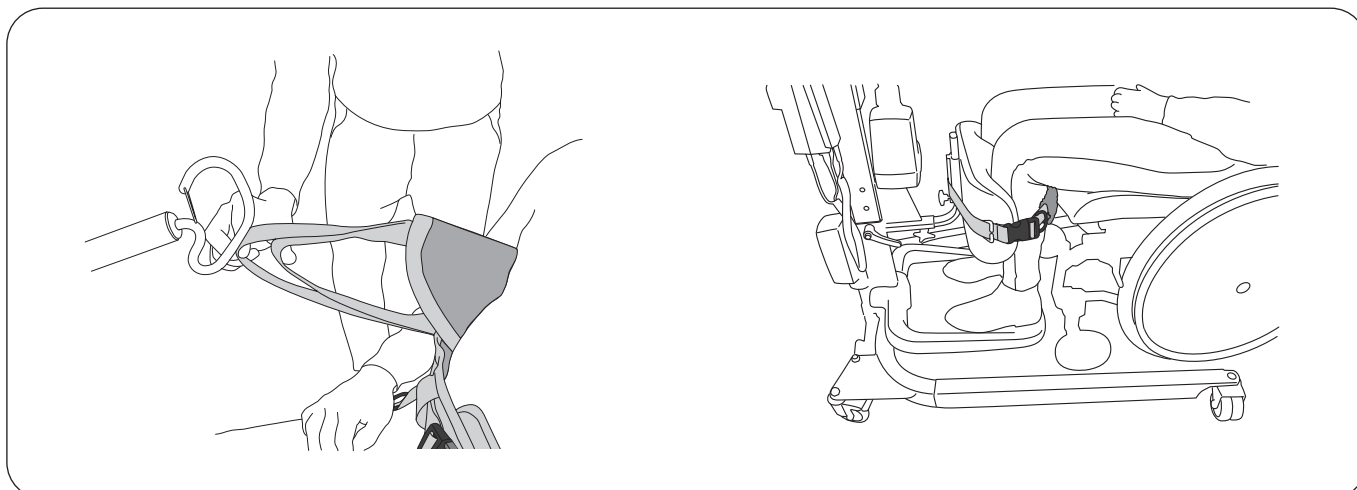

Ορίστε ποια από τις θηλιές ιμάντα πρέπει να συνδέσετε με τα άγκιστρα της κρεμάστρας. Χρησιμοποιήστε τα κλιπ θηλιών για να σημαδέψετε τις θηλιές. Ανατρέξτε στη σελίδα 6, "Περιγραφή λειτουργίας των θηλιών ιμάντα".

Τοποθετήστε τον γερανό για ανύψωση από την καθιστή θέση Sabina™ και προσαρμόστε το πλάτος της βάσης, έτσι ώστε τα πόδια του ασθενούς να βρίσκονται στο κέντρο της βάσης ποδιών. Το κάτω μέρος των ποδιών πρέπει να είναι σε παράλληλη θέση με το υποστήριγμα για το κάτω μέρος των ποδιών στον γερανό. Ρυθμίστε το ύψος και το βάθος του υποστηρίγματος όπως πρέπει, για να στηρίζεται άνετα το τμήμα κάτω από τις επιγονατίδες. Εάν ισχύει: Δέστε και σφίξτε τον ιμάντα κνήμης γύρω από το κάτω μέρος των ποδιών.



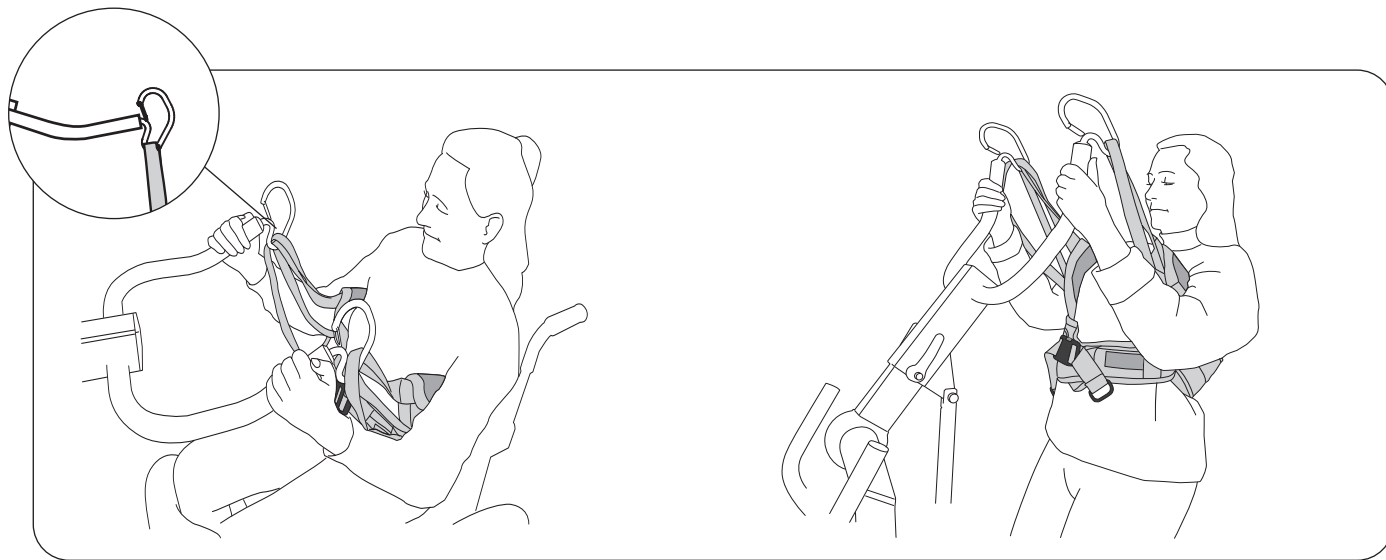


Συνδέστε τις θηλιές μιάνα στα άγκιστρα της κρεμάστρας.

⚠ Πριν από την ανύψωση, βεβαιωθείτε ότι οι μιάνες είναι καλά τοποθετημένοι στα άγκιστρα της κρεμάστρας.

Ανύψωση: Χειριστείτε τον γεράνο πιέζοντας τα επάνω και κάτω κουμπιά (δύο πιθανές ταχύτητες). Εάν είναι δυνατό, πρέπει να ενθαρρύνετε την ενεργή συμμετοχή του ασθενούς πιάνοντας την κρεμάστρα και τραβώντας τον εαυτό του προς τα επάνω.

Συμβουλή: Λάβετε υπόψη ότι είναι ευκολότερο για έναν ασθενή να σηκωθεί από καθιστή σε όρθια θέση εάν κάθεται σχετικά όρθια, δηλ. οι αρθρώσεις των γοφών βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο ή κατά προτίμηση ψηλότερα από τις αρθρώσεις των γονάτων.

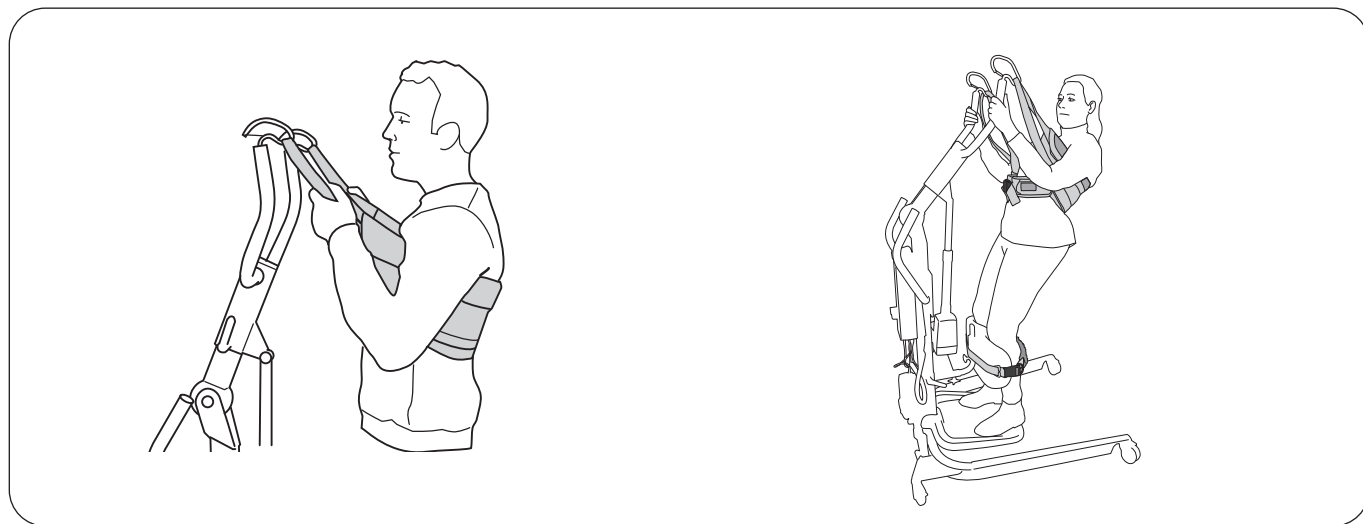

Συμβουλή: Σε περίπτωση που το γιλέκο ολισθήσει προς τα επάνω κατά την ανύψωση, ο ασθενής μπορεί να πιάσει τις θηλιές μιάνα αντί για την κρεμάστρα. Αυτό θα βοηθήσει στη συγκράτηση του γιλέκου στη θέση του και θα προσφέρει καλή υποστήριξη κατά την ανύψωση.

Συνιστούμε ο ασθενής να γείρει το επάνω μέρος του σώματός του λίγο προς τα πίσω, ώστε να αντισταθμιστεί η αδυναμία των μυών στο κάτω μέρος του σώματος. Αυτό διευκολύνει την όρθια θέση, ενισχύει την άνεση και εμποδίζει την ολίσθηση του γιλέκου προς τα επάνω.

Συμβουλές τοποθέτησης

Προσαρμογή για την επίτευξη της υψηλότερης δυνατής ανύψωσης

Το μέγιστο ύψος ανύψωσης μπορεί να προσαρμοστεί ως εξής:

- Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις στον γεράνο για ανύψωση από την καθιστή θέση Sabina™ έτσι ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες του ασθενούς. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για τον γεράνο για ανύψωση από την καθιστή θέση Sabina.
- Επιλέξτε τη θηλιά εσωτερικού ή εξωτερικού μιάνα στην εξωτερική πλευρά του γιλέκου. Ανατρέξτε στη σελίδα 6, "Περιγραφή λειτουργίας των θηλιών μιάνα".
- Ένα γιλέκο μικρότερου μεγέθους καθιστά δυνατό να επιτευχθεί μεγαλύτερο ύψος ανύψωσης.

Συμβουλές για επιλογή μεγέθους

Για μέγιστη άνεση, το μαλακό τμήμα του γιλέκου πρέπει να φτάνει σωστά γύρω από τη μέση και κάτω από τους βραχίονες. Εάν το γιλέκο είναι υπερβολικά μεγάλο, ο ασθενής ενδέχεται να μην μπορεί να πιάσει την κρεμάστρα.

Εναλλακτικά γιλέκα για ανύψωση από την καθιστή στην όρθια θέση

Εάν ο ασθενής χρειάζεται μια ζώνη μέσης για λόγους ασφαλείας, συνιστάται η αλλαγή σε γιλέκο Liko SafetyVest™ ή Liko ComfortVest™.


Αξεσουάρ για Liko SupportVest

Ιμάντας καθίσματος Sabina™ SeatStrap

Αρ. προϊόντος 3591115

Ο ιμάντας καθίσματος SeatStrap είναι ένα εξάρτημα που διευκολύνει το πρώτο στάδιο της κίνησης ανύψωσης. Ο ιμάντας καθίσματος SeatStrap είναι συνδεδεμένος με μια κρεμάστρα για το SeatStrap, η οποία βοηθά στην υποστήριξη της θέσης του ασθενούς κατά την ανύψωση. Στην όρθια θέση, ο ιμάντας καθίσματος SeatStrap μπορεί εύκολα να αποσυνδεθεί για να μην εμποδίζει π.χ. κατά τη μετάβαση στην τουαλέτα.


Ο ιμάντας καθίσματος SeatStrap απαιτεί ειδικό αξεσουάρ: Κρεμάστρα για SeatStrap (Αρ. προϊόντος 2027006-07). Φροντίστε να μελετήσετε καλά το εγχειρίδιο χρήσης για τον ιμάντα καθίσματος SeatStrap πριν από τη χρήση.

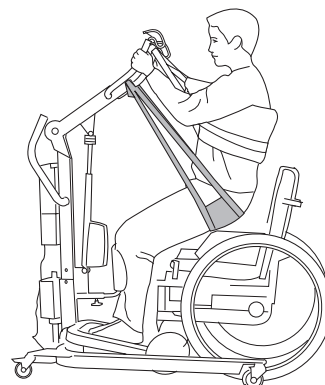

Ιμάντας επέκτασης III

Αρ. προϊόντος 3691107


Εάν είναι απαραίτητο, η ζώνη μέσης του SupportVest μπορεί να επεκταθεί με τον ιμάντα επέκτασης. Με αυτόν τον τρόπο, η ζώνη μέσης θα μεγαλώσει κατά 7-48 cm.

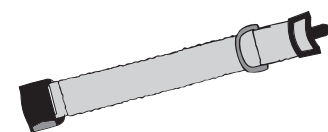

Επένδυση για γιλέκο, μοντ. 91 και 93

Επένδυση για γιλέκο, Small
Επένδυση για γιλέκο, Medium
Επένδυση για γιλέκο, Large
Επένδυση για γιλέκο, XL


Αρ. προϊόντος 3691034
Αρ. προϊόντος 3691035
Αρ. προϊόντος 3691036
Αρ. προϊόντος 3691037

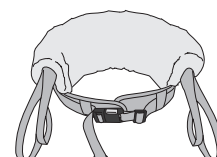


Κλιπ θηλιών

Κλιπ θηλιών, κόκκινα, 4 τεμ.
Κλιπ θηλιών, πορτοκαλί, 4 τεμ.
Κλιπ θηλιών, κίτρινα, 4 τεμ.
Κλιπ θηλιών, μπλε, 4 τεμ.
Κλιπ θηλιών, μαύρα, 4 τεμ.

Αρ. προϊόντος 3666033
Αρ. προϊόντος 3666034
Αρ. προϊόντος 3666035
Αρ. προϊόντος 3666036
Αρ. προϊόντος 3666037

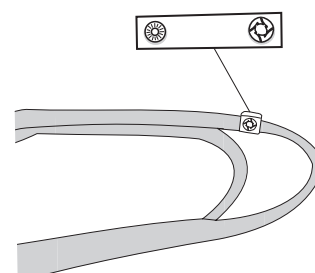

Επισκόπηση γιλέκου Liko™ SupportVest™ μοντ. 91

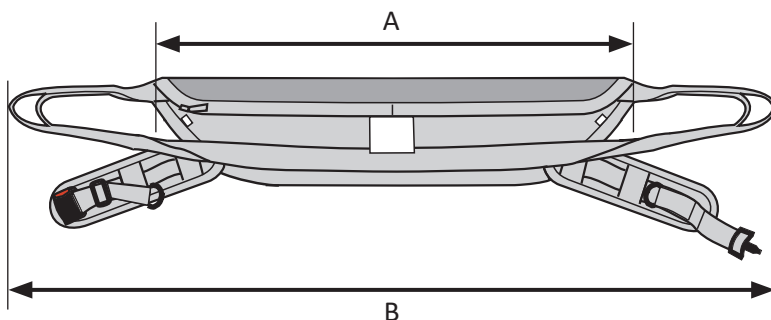

Προϊόν	Αρ. προϊόντος	Μέγεθος		Εύρος γιλέκου cm		Βάρος ασθενούς ¹	Μέγιστο φορτίο ²
Liko SupportVest	3591134	S	Small	A: 80	B: 130	< 60 kg	200 kg
Liko SupportVest	3591135	M	Medium	A: 90	B: 140	50-80 kg	200 kg
Liko SupportVest	3591136	L	Large	A: 105	B: 155	70-100 kg	200 kg
Liko SupportVest	3591137	XL	Extra Large	A: 120	B: 160	> 100 kg	200 kg

¹ Το ενδεικνυόμενο βάρος ασθενούς αποτελεί μια απλή οδηγία – ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις.

² Για διατήρηση του μέγιστου φορτίου, απαιτείται γερανός/εξαρτήματα που προορίζονται για το ίδιο ή μεγαλύτερο φορτίο.

Συνδυασμοί

Το γιλέκο SupportVest προορίζεται μόνο για χρήση με γερανούς για ανύψωση από την καθιστή θέση Sabina™ της Liko (διατίθενται διαφορετικά μοντέλα). Συνιστούμε τον γερανό για ανύψωση από την καθιστή θέση Sabina με κρεμάστρα 350 SlingBar (στενή).

Άλλοι συνδυασμοί

Οι συνδυασμοί εξαρτημάτων/προϊόντων διαφορετικών από αυτά που συνιστά η Liko μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για την ασφάλεια του ασθενούς.



www.hillrom.com



Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Σουηδία
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom