

Productbeschrijving

Het Liko SupportVest is een comfortabel opstaveest dat eenvoudig in gebruik is en minimale individuele aanpassingen vereist. Het is geschikt voor patiënten die veel ondersteuning nodig hebben bij het opstaan, maar die in staat zijn om zelfstandig te staan wanneer ze eenmaal overeind staan.

Het SupportVest ondersteunt de patiënt rondom de rug en onder de armen. De binnenkant is bekleed met corduroy, waardoor het vest niet omhoog glijdt.

Het SupportVest is hoofdzakelijk bedoeld voor gebruik in combinatie met het 350-tiljuk op de Sabina™-opstaliift. Het SupportVest in maat XL kan worden gebruikt in combinatie met het Comfort-tiljuk op de Sabina-opstaliift.

In combinatie met de Sabina-opstaliift vormt het SupportVest een functionele eenheid. Lees de gebruiksaanwijzingen van beide producten voor volledige informatie en de beste resultaten.

Maten

Het SupportVest is beschikbaar in verschillende maten. Voor de hoogst mogelijke mate van comfort en veiligheid is het belangrijk dat de juiste maat wordt gekozen.

Tailleband

Het SupportVest is voorzien van een tailleband die het vest tijdens het gebruik op zijn plaats houdt rond het bovenlichaam.

Voering

Er is een voering van synthetische schapenvacht beschikbaar als accessoire. De voering wordt vastgezet met een rits.

Een SupportVest met voering zorgt voor een zachter oppervlak dat de druk gelijkmatiger verdeelt.

In dit document wordt de persoon die wordt opgetild de patiënt genoemd en de persoon die hierbij helpt de zorgverlener.

BELANGRIJK!














Het optillen en verplaatsen van een patiënt gaat altijd met enig risico gepaard. Lees vóór het gebruik de gebruiksaanwijzingen voor zowel de patiëntlift als de tilaccessoires. Het is belangrijk dat u de volledige inhoud van de gebruiksaanwijzingen begrijpt. De apparatuur mag alleen worden gebruikt door getraind personeel. Controleer of de tilaccessoires geschikt zijn voor de lift die u wilt gebruiken. Wees voorzichtig en ga zorgvuldig te werk tijdens het gebruik. Als zorgverlener bent u altijd verantwoordelijk voor de veiligheid van de patiënt. U moet weten of de patiënt het tillen aankan. Neem contact op met de fabrikant of leverancier als er iets onduidelijk is.

Inhoudsopgave

| | |
|---|----|
| Symboolbeschrijving | 3 |
| Veiligheidsinstructies | 4 |
| Verzorging en onderhoud | 5 |
| Definities | 5 |
| Beschrijving van de taillebandfunctie..... | 6 |
| Beschrijving van de bandlusfunctie | 6 |
| Een persoon optillen tijdens actief tillen met gebruik van de Sabina-opstalift en het Liko SupportVest..... | 7 |
| Passingsadvies | 8 |
| Accessoires voor het Liko SupportVest..... | 9 |
| Overzicht Liko™ SupportVest™ Mod. 91..... | 10 |

Symboolbeschrijving

Deze symbolen komen voor in dit document en/of op het product.

| Symbool | Beschrijving |
|---|---|
|  | Waarschuwing: deze situatie vereist extra zorg en aandacht. |
|  | Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing |
|  | CE-markering |
|  | Juridisch fabrikant |
|  | Productiedatum |
|  | Productidentificatie |
|  | Serienummer |
|  | Medisch hulpmiddel |
|  | Niet stomen |
|  | Niet strijken |
|  | Drogen in de droogtrommel |
|  | Niet drogen in de droogtrommel |
|  | Wassen Het symbool komt altijd voor in combinatie met de aanbevolen temperatuur in °C en °F. |
|  | Latexvrij |
|  | Periodieke inspectie |
|  | Niet bleken |
|  | Drogen aan de waslijn in de schaduw |
|  | Omhoog gericht en symbool aan de buitenkant van de apparatuur. |
|  | Symbool aan de buitenkant van de apparatuur. |
|  (01) 0100887761997127 (11) JJMDD (21) 012345678910 | GS1 Data Matrix-barcode die de volgende informatie kan bevatten. (01) Global Trade Item Number (internationaal uniek artikelnummer) (11) Productiedatum (21) Serienummer |

Veiligheidsinstructies

Bedenk vóór het tillen het volgende:

- een verantwoordelijk persoon binnen uw organisatie moet per geval besluiten of er een of meerdere zorgverleners nodig zijn.
- zorg ervoor dat de gekozen tilband qua model, maat, materiaal en ontwerp voldoet aan de behoeftes van de patiënt.
- gebruik om veiligheidsredenen en voor de hygiëne individuele tilbanden.
- plan het tillen voordat het wordt uitgevoerd, zodat het zo veilig en soepel mogelijk verloopt.
- hoewel de tiljucken van Liko zijn uitgerust met clips, moet er extra voorzichtig te werk worden gegaan. Controleer voordat de patiënt daadwerkelijk getild wordt maar terwijl de banden gestrekt zijn, of de banden correct aan de haken van het tiljuk zijn bevestigd.
- de uiteindelijke tilhoogte is individueel verschillend.
- laat een opgetilde patiënt nooit zonder toezicht.
- controleer of de wielen van de rolstoel, het bed, de brancard, enz., tijdens het tillen/verplaatsen op de rem staan.
- werk altijd ergonomisch. Gebruik de mogelijkheden van de patiënt om actief aan de verplaatsing mee te werken.
- stel de tilband niet bloot aan direct zonlicht als deze niet wordt gebruikt.

Een onjuiste bevestiging van de tilband aan het tiljuk kan ernstig letsel bij de patiënt veroorzaken.

 Medisch hulpmiddel, productklasse I

Productwijzigingen

De producten van Liko worden continu verder ontwikkeld. Daarom behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving productwijzigingen aan te brengen. Neem contact op met uw vertegenwoordiger van Hill-Rom voor advies en informatie over productverbeteringen.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko is gecertificeerd conform de ISO 9001-kwaliteitscertificatie en de daaraan gelijkwaardige ISO 13485-kwaliteitscertificatie voor de medische-hulpmiddelenindustrie. Liko is ook gecertificeerd conform de milieustandaard ISO 14001.

Kennisgeving voor gebruikers en/of patiënten in de EU

Elk ernstig incident dat heeft plaatsgevonden met betrekking tot het hulpmiddel dient te worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde instantie van de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

Verzorging en onderhoud

Controleer de tilband vóór elk gebruik. Controleer de volgende punten op slijtage en beschadigingen:

- materiaal
- banden
- zomen
- lussen
- gesp

⚠ Gebruik geen beschadigde tilaccessoires.

Neem contact op met de fabrikant of leverancier als er iets onduidelijk is.

Wasinstructies: zie hiervoor het productlabel van de tilband en de bijgevoegde bijlage 'Verzorging en onderhoud Liko-tilbanden'.

Periodieke inspectie

Het product moet minstens om de 6 maanden worden geïnspecteerd. Frequentere inspectie is mogelijk nodig als het product vaker dan normaal wordt gebruikt of gewassen. Voor protocollen kunt u contact opnemen met uw Hill-Rom-vertegenwoordiger.

Verwachte levensduur

Het product heeft een verwachte levensduur van 1-5 jaar bij normaal gebruik. De verwachte levensduur is afhankelijk van het materiaal, de gebruiksfrequentie, de wasprocedure en het vervoerde gewicht.


Recyclinginstructies

De hele tilband, inclusief baleinen, vulmateriaal, enz., moet gescheiden worden afgevoerd als brandbaar afval.

Hill-Rom voert beoordelingen uit en biedt gebruikers richtlijnen voor het veilig hanteren en afvoeren van de apparatuur om letsel zoals (maar niet beperkt tot) snijwonden, doorboring van de huid en schaafwonden te voorkomen, en voor de vereiste reiniging en desinfectie van het medische hulpmiddel na gebruik en voorafgaand aan het afvoeren. Klanten moeten zich houden aan alle federale, landelijke, regionale en/of lokale wetten en voorschriften zoals deze gelden voor het veilig afvoeren van medische hulpmiddelen en accessoires.

In geval van twijfel dient de gebruiker van het hulpmiddel eerst contact op te nemen met de technische ondersteuning van Hill-Rom voor advies over protocollen voor veilig afvoeren


Definities

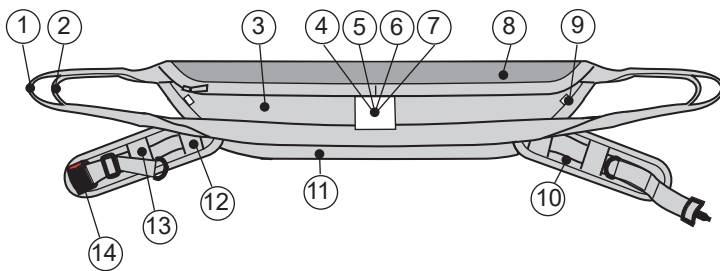

1. Buitenste bandlus
2. Binnenste bandlus
3. Buitenste vest
4. Productlabel
5. Serienummer
6. Label: periodieke inspectie
7. Label: individuele markering (Belongs to)
8. Zacht gedeelte
9. Maataanduiding
10. Tailleband met pads
11. Onderrand
12. Binnenste bandgeleiding
13. Buitenste bandgeleiding
14. Gesp

Beschrijving van de taillebandfunctie

De tailleband op het SupportVest is bedoeld om het vest op zijn plaats te houden rondom de patiënt, maar is niet bedoeld om de patiënt aan op te tillen of om de patiënt mee vast te zetten in het vest. Als de patiënt om veiligheidsredenen een tailleband nodig heeft adviseren wij het Liko SafetyVest™ of Liko ComfortVest™ te gebruiken.

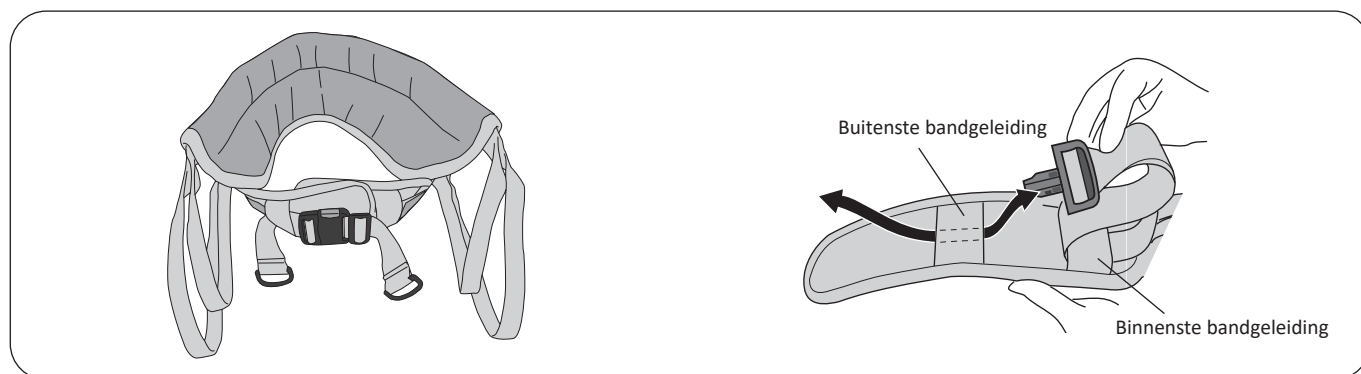

De tailleband van het SupportVest is bedoeld om het vest op zijn plaats te houden rondom de patiënt, allereerst bij het gaan staan.


Tijdens het optillen kan het bovenlichaam iets smaller worden, waardoor de tailleband losser komt te zitten en los om het bovenlichaam komt te hangen. Dit is een natuurlijke neiging en heeft geen invloed op het optillen.

⚠ Als de tailleband strakker wordt gemaakt nadat de patiënt is gaan staan moet de band losser worden gemaakt voordat de patiënt wordt neergelaten, omdat de tailleband anders gaat knellen als de omvang van het bovenlichaam groter wordt.

Als de tailleband te wijd is voor de taille van de patiënt steekt u de gesp door één of beide bandgeleidingen, zie illustratie.

Beschrijving van de bandlusfunctie

Bandlussen van het buitenvest

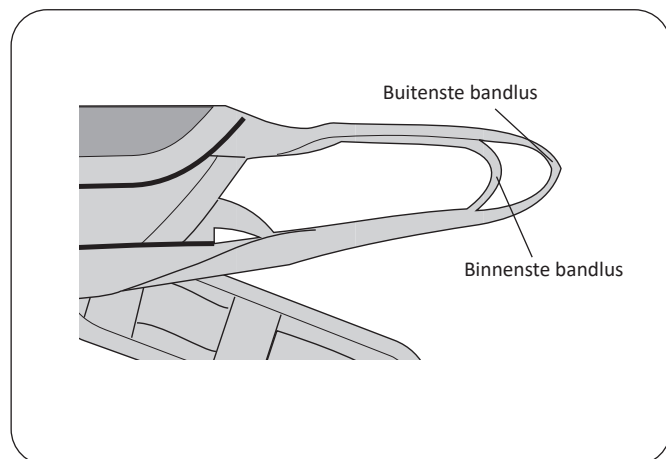


Het buitenste vest is voorzien van twee bandlussen: een bandlus aan de binnenkant en een bandlus aan de buitenkant, voor maximale flexibiliteit tijdens het gebruik. In het algemeen wordt aanbevolen om voor een zoveel mogelijk staande positie de binnenste bandlus te gebruiken, en er ook voor te zorgen dat de patiënt het tiljuk kan vastpakken zodat hij kan meewerken aan het opstaan.

De buitenste bandlus wordt gebruikt als dat vanwege de omvang van de patiënt nodig is, of als de patiënt klein is in verhouding tot de hoogte van de tiljukhaken van de Sabina™-opstalift.


Als de binnenste bandlus wordt gebruikt adviseren we om ook de buitenste bandlus aan de tiljukhaak te bevestigen zodat er beter zicht is op de banden.

Lusclips

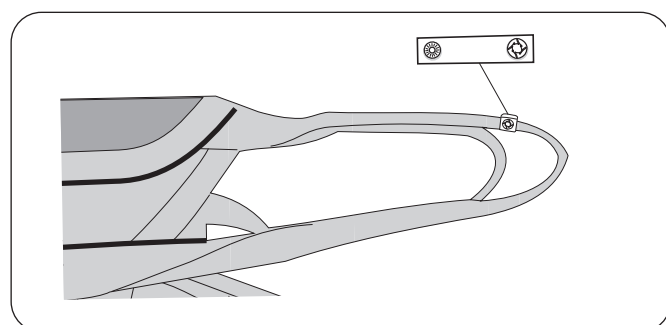

Lusclips zijn praktische accessoires die worden gebruikt om de lussen te markeren die voor een bepaalde patiënt zijn geselecteerd. Hiermee kunnen zorgverleners gemakkelijker de juiste lus kiezen om aan het tiljuk te bevestigen.


Een persoon tijdens actief tillen optillen met gebruik van de Sabina-opstaliift en het Liko SupportVest

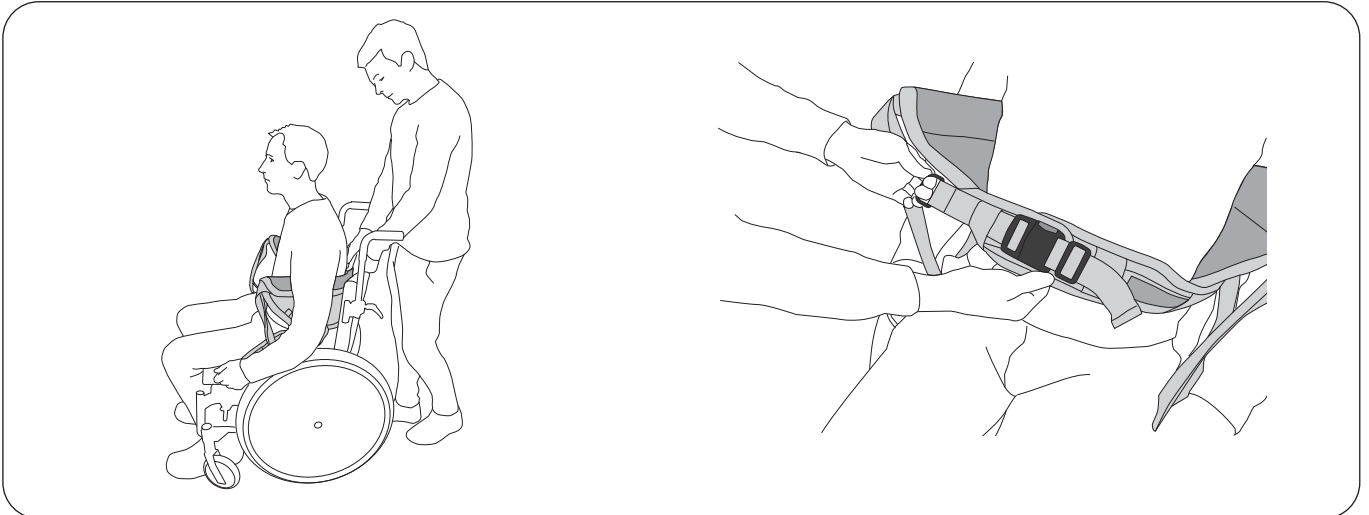

Plaats het vest achter de rug van de patiënt, met het productlabel naar buiten. De onderrand van het vest moet zich op gelijke hoogte bevinden met de taille van de patiënt.

⚠ De armen van de patiënt moeten **altijd** buiten het vest worden gehouden zodat het vest niet omhoog kan glijden.


Pas de tailleband voorzichtig aan aan de omvang van het bovenlichaam van de patiënt. Maak de gesp van de tailleband vast.

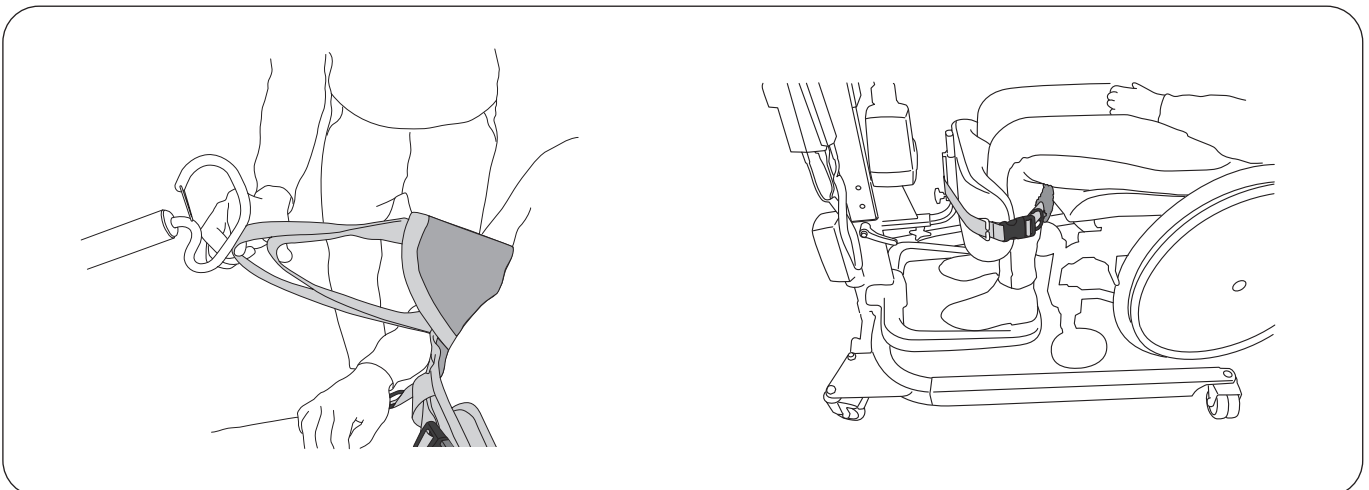

Bepaal welke van de bandlussen aan de haken van het tiljok moeten worden bevestigd. Gebruik de meegeleverde lusclips om de lussen te markeren. Zie pagina 6, 'Beschrijving van de bandlusfunctie'.

Positioneer de Sabina™-opstaliift en pas de breedte van het onderstel aan, zodat de voeten van de patiënt gecentreerd kunnen worden op de voetsteun. De onderbenen moeten parallel lopen aan de onderbeensteun op de lift. Pas de hoogte en de diepte van de steun zodanig aan dat deze comfortabele ondersteuning biedt onder de knieschijven. Indien van toepassing: maak de kuitband vast rond de onderbenen en trek de band aan.



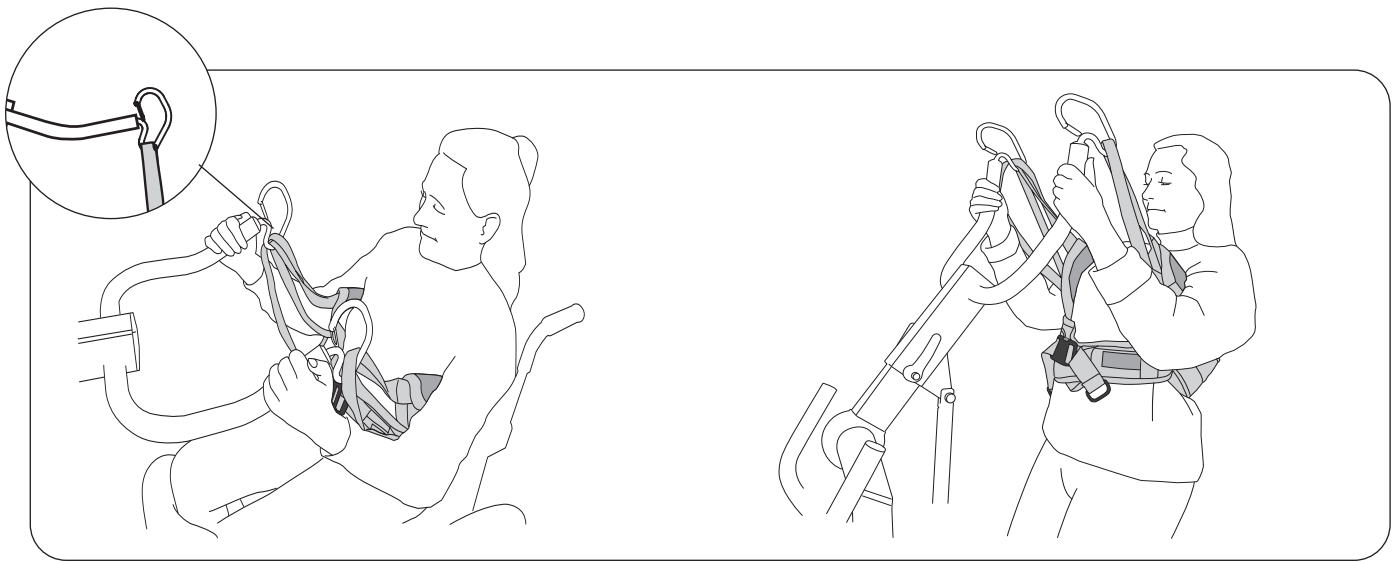


Bevestig de bandlussen aan de tiljukkaken van de tilband.

⚠ Controleer of de banden goed zijn aangesloten op de haken van het tiljuk, voordat u begint met tillen.

Tillen: bedien de lift door op de knoppen voor omhoog en omlaag te drukken (twee mogelijke snelheden). De patiënt moet wanneer mogelijk worden aangemoedigd om actief deel te nemen door de tilband vast te pakken en zichzelf omhoog te trekken.

Tip: de patiënt kan gemakkelijker van een zittende naar een staande stand komen als hij relatief rechtop zit. Dat wil zeggen: de heupgewrichten zijn op dezelfde hoogte, of liever hoger, dan de kniegewrichten.

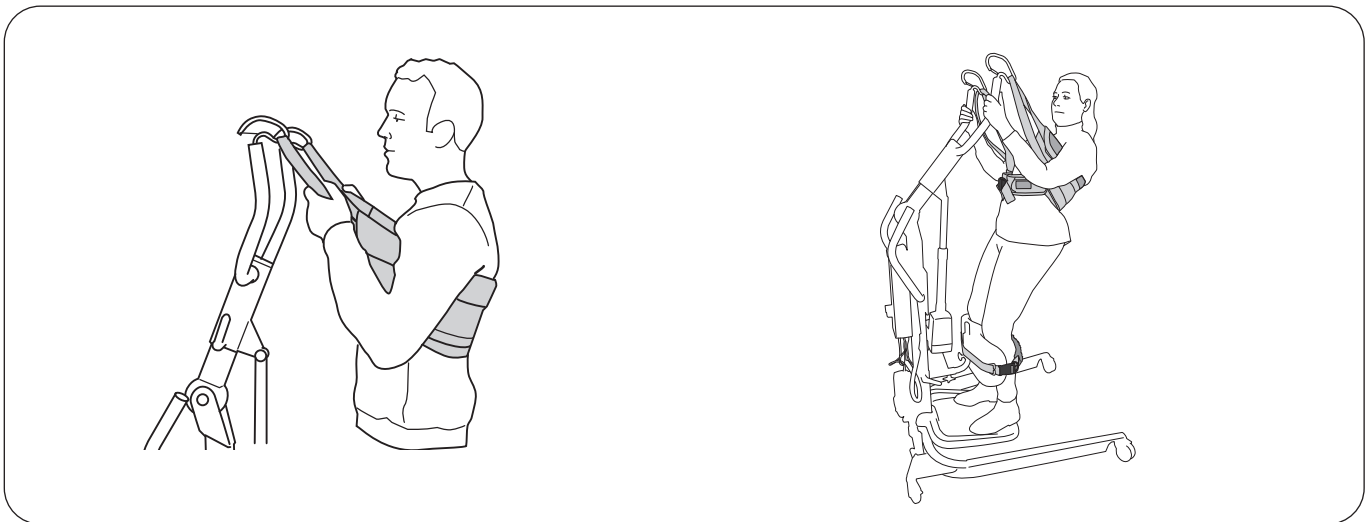

Tip: als het vest tijdens het tillen omhoog schuift, kan de patiënt de bandlussen vastpakken in plaats van het tiljuk. Dit helpt om het vest op zijn plaats te houden en biedt goede ondersteuning voor de rug tijdens het tillen.

Het wordt aanbevolen dat de patiënt met het bovenlichaam enigszins naar achteren leunt ter compensatie van zwakke spieren in het onderlichaam. Dit vergemakkelijkt het staan, verhoogt het comfort en voorkomt dat het vest omhoog glijdt.

Passingsadvies

Aanpassing om zo hoog mogelijk te tillen

De maximale tilhoogte kan als volgt worden aangepast:

- Pas de instellingen op de Sabina™-opstalift aan om te voldoen aan de individuele behoeften van de patiënt. Raadpleeg de handleiding van de Sabina-opstalift.
- Kies de binnenste of de buitenste bandlus op het buitenste vest. Zie pagina 6, 'Beschrijving van de bandlusfunctie'.
- Met een vest in een kleinere maat is het mogelijk om hoger te tillen.

Adviezen voor de keuze van de maat

Voor maximaal comfort moet het zachte deel van het vest goed langs de rug en onder de armen reiken. Als het vest te groot is kan de patiënt het tiljuk mogelijk niet vastpakken.

Alternatieve opstaven

Als de patiënt om veiligheidsredenen een tailleband nodig heeft adviseren wij het Liko SafetyVest™ of Liko ComfortVest™ te gebruiken.


Accessoires voor het Liko SupportVest

Sabina™ SeatStrap

Productnr. 3591115

De SeatStrap is een accessoire dat het eerste deel van de tilbeweging gemakkelijker maakt. De SeatStrap wordt verbonden met een SeatStrap SlingBar waardoor de positie van de patiënt wordt ondersteund tijdens het tillen. De SeatStrap kan in staande positie eenvoudig worden losgekoppeld, zodat deze niet in de weg zit als de patiënt bijvoorbeeld naar het toilet gaat.


Voor de SeatStrap is een speciale accessoire vereist: SeatStrap SlingBar (productnr. 2027006-07). Zorg ervoor dat u de gebruiksaanwijzing van de SeatStrap vóór gebruik bestudeert.

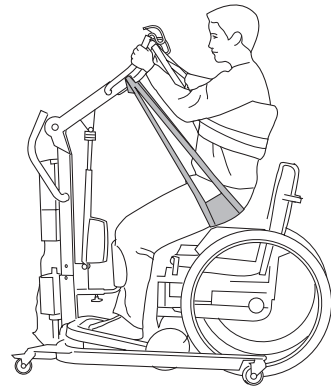

Verlengband III

Productnr. 3691107


Indien nodig kan de tailleband van het SupportVest worden verlengd met een verlengband. Hierdoor wordt de tailleband met 7-48 cm verlengd.

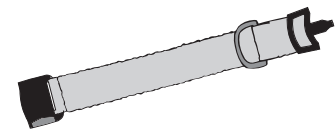

Voering voor vest, mod. 91 & 93

Voering voor vest, S
Voering voor vest, M
Voering voor vest, L
Voering voor vest, XL


Productnr. 3691034
Productnr. 3691035
Productnr. 3691036
Productnr. 3691037

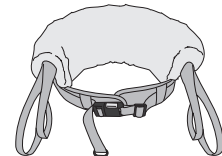


Lusclips

Lusclips, rood, 4 stuks
Lusclips, oranje, 4 stuks
Lusclips, geel, 4 stuks
Lusclips, blauw, 4 stuks
Lusclips, zwart, 4 stuks

productnr. 3666033
productnr. 3666034
productnr. 3666035
productnr. 3666036
productnr. 3666037

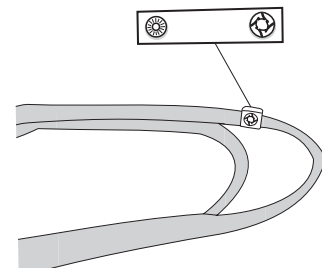

Overzicht Liko™ SupportVest™ Mod. 91

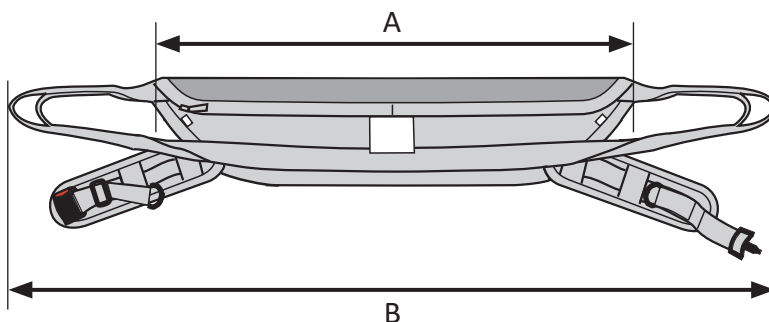

| Product | Productnr. | Maat | | | Breedte vest cm | Gewicht patiënt ¹ | Max. belasting ² |
|------------------|------------|------|-------------|--------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| Liko SupportVest | 3591134 | S | Small | A: 80 | B: 130 | < 60 kg | 200 kg |
| Liko SupportVest | 3591135 | M | Medium | A: 90 | B: 140 | 50-80 kg | 200 kg |
| Liko SupportVest | 3591136 | L | Large | A: 105 | B: 155 | 70-100 kg | 200 kg |
| Liko SupportVest | 3591137 | XL | Extra Large | A: 120 | B: 160 | > 100 kg | 200 kg |

¹ Het aangegeven patiëntgewicht is slechts een richtlijn – afwijkingen zijn mogelijk.

² Om de maximale belasting te behouden zijn liften/accessoires vereist met dezelfde of hogere belasting.

Combinaties

Het SupportVest is alleen bedoeld voor gebruik met de Liko Sabina™-opstalift (verschillende modellen beschikbaar). We raden de Sabina-opstalift met Sabina 350 SlingBar (smal) aan.

Andere combinaties

Combinaties van accessoires/producten die anders zijn dan de combinaties die worden aanbevolen door Liko, kunnen leiden tot risico's voor de veiligheid van de patiënt.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Zweden
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom