


# Imbragatura **Liko Ultra LiftPants Mod. 920**

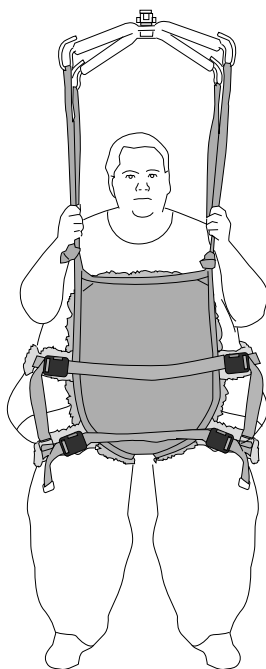

## Istruzioni per l'uso



### Descrizione del prodotto

Il sollevamento di pazienti molto pesanti richiede tecniche speciali e attrezzature di sollevamento appositamente progettate. Liko ha sviluppato la serie di prodotti Ultra per facilitare il sollevamento di questo tipo di pazienti in modo sicuro e confortevole.

#### Uso previsto

L'imbragatura **Liko Ultra LiftPants**, se utilizzata in conformità con le istruzioni per l'uso, offre ai pazienti molto pesanti la possibilità di esercitarsi ad assumere la posizione eretta e nella deambulazione senza il rischio di cadute. Riduce inoltre il rischio di lesioni per gli operatori.

Le imbragature **Liko Ultra LiftPants** sono destinate all'uso nei seguenti ambienti: assistenza sanitaria, terapia intensiva, pronto soccorso, riabilitazione, abilitazione e assistenza sanitaria domiciliare.

L'imbragatura **Liko Ultra LiftPants** aiuta i pazienti con poco equilibrio e scarsa funzionalità delle gambe a mantenere la posizione eretta e ad esercitarsi nella deambulazione in tutta sicurezza. È essenziale che il paziente sia in grado di sostenere il peso sulle gambe.

L'imbragatura **Liko Ultra LiftPants** consente al paziente di muoversi alleviando una parte più o meno elevata del carico dovuto al peso corporeo.

#### Taglie

L'imbragatura **Liko Ultra LiftPants** è dotata di due cinghie per i fianchi su entrambi i lati, per una migliore distribuzione del peso. Sono disponibili due taglie diverse.

#### Selezione di un sollevatore adatto

Si raccomanda la presenza di almeno due operatori durante il trasferimento di un paziente.

L'imbragatura **Liko Ultra LiftPants** può essere utilizzata in combinazione con i sollevatori mobili e a soffitto di Liko. Un sollevatore a soffitto può essere utilizzato dal paziente per un movimento libero all'interno dell'area di sollevamento coperta dal sollevatore. È possibile scegliere tra:

- Sistema **Liko UltraTwin** con due sollevatori. Il carico massimo è di 500 kg (1100 libbre), a seconda dei singoli prodotti inclusi nel sistema di sollevamento assemblato. Il sistema UltraTwin è disponibile sia per l'installazione fissa che indipendente nel sistema UltraTwin FreeSpan.
- Sollevatore a soffitto **LikoGuard L** per il sollevamento di un massimo di 272 kg (600 libbre) oppure il sollevatore a soffitto **LikoGuard XL** per il sollevamento di un massimo di 363 kg (800 libbre).
- Sollevatore mobile **Viking XL** per il sollevamento di un massimo di 300 kg (660 libbre).

Può essere equipaggiato con bracci di sostegno, per un ulteriore supporto durante le esercitazioni per l'acquisizione della posizione eretta e la deambulazione.

#### Alternative

Come alternativa a un'imbragatura **Liko Ultra LiftPants**, consigliamo:

- **Liko MasterVest Mod. 60** (taglia XXL).
- **Liko LiftPants Mod. 92** (taglia XL).

*Nel presente documento verranno definiti "pazienti" le persone sollevate e "operatori" le persone che le aiutano.*



#### IMPORTANTE!

Il sollevamento e il trasferimento di un paziente comportano sempre un certo livello di rischio. Leggere le istruzioni per l'uso del sollevatore e degli accessori di sollevamento prima dell'uso. È importante comprendere appieno il contenuto delle istruzioni per l'uso. L'apparecchiatura deve essere utilizzata esclusivamente da un operatore addestrato. Per essere addestrato, l'operatore deve leggere e comprendere le istruzioni per l'uso. Accertarsi che gli accessori di sollevamento siano adatti al sollevatore in uso. Durante l'uso, procedere con la massima cura e prudenza. L'operatore è sempre responsabile della sicurezza del paziente. L'operatore deve essere in grado di valutare la capacità del paziente di affrontare il sollevamento. In caso di dubbi, contattare il produttore o il fornitore.

# Sommario

|  |    |
|--|----|
| Uso previsto.....  | 1  |
| Informazioni di sicurezza .....  | 3  |
| Descrizione dei simboli.....   | 4  |
| Cura e ispezione .....   | 5  |
| Definizioni.....   | 5  |
| Come collegare un'imbragatura a bilancini diversi.....   | 6  |
| Come collegare un'imbragatura Ultra LiftPants a un bilancino con 4 ganci<br>(bilancini con doppio aggancio e bilancini a croce)..... | 7  |
| Come selezionare la taglia.....  | 7  |
| Dimensioni .....   | 8  |
| Applicazione di Ultra LiftPants.....   | 9  |
| Regolazione della cinghia con occhielli .....  | 10 |
| Rimozione di Ultra LiftPants .....   | 11 |
| Componenti opzionali .....   | 11 |
| Panoramica di <b>Liko</b> Ultra LiftPants Mod. 920 .....   | 12 |
| Combinazioni raccomandate.....   | 12 |

## Informazioni di sicurezza


### **Prima del sollevamento, tenere presenti i seguenti punti:**

- Un responsabile all'interno dell'organizzazione deve decidere caso per caso se è sufficiente un solo operatore o se sono necessari più operatori.
- Verificare che l'imbragatura scelta sia effettivamente adatta al paziente in termini di modello, taglia, tessuto e realizzazione.
- Il carico massimo totale per il sistema di sollevamento è sempre stabilito dal prodotto nel sistema con il carico massimo più basso specificato.
- Per proteggere la sicurezza e l'igiene del paziente, lavare l'imbragatura tra un paziente e l'altro.
- Pianificare l'operazione di sollevamento al fine di eseguirla nel modo più corretto e sicuro possibile.
- Verificare che l'accessorio di sollevamento sia in posizione verticale e si muova liberamente.
- Anche se i bilancini Liko sono dotati di chiusure, prestare particolare attenzione. Prima di sollevare il paziente dalla superficie sottostante, ma dopo aver disteso completamente le cinghie, accertarsi che queste siano correttamente agganciate ai ganci del bilancino.
- Non sollevare mai un paziente dalla superficie sottostante a un'altezza superiore a quella necessaria per terminare la procedura di sollevamento e di trasferimento.
- Accertarsi che le ruote della sedia a rotelle, del letto, della barella, ecc., siano bloccate durante il sollevamento o il trasferimento.
- Lavorare tenendo sempre conto dell'ergonomia. Sfruttare le capacità del paziente di partecipare attivamente alle operazioni.
- Quando non è utilizzata, non esporre l'imbragatura alla luce diretta del sole.

 **Un fissaggio errato dell'imbragatura sul bilancino può causare lesioni gravi al paziente.**


 **Non lasciare mai un paziente da solo durante un sollevamento.**


 **Non lasciare mai bambini non sorvegliati nelle vicinanze dell'imbragatura.**


 **Non riporre l'imbragatura in luoghi in cui potrebbe essere esposta alla luce solare diretta o a fonti di calore, come un calorifero, un caminetto o un piano cottura/forno.**

 **Non utilizzare, conservare o trasportare l'imbragatura in prossimità di animali domestici, animali infestanti o bambini non sorvegliati.**

 **Assicurarsi che il paziente e l'operatore rimangano lontani dai punti di schiacciamento e dalle parti mobili durante il sollevamento. Potrebbero verificarsi lesioni.**

 **Valutare i pazienti per il rischio di intrappolamento e monitorarli in modo appropriato. Assicurarsi che la testa e gli arti del paziente non si trovino all'interno o tra gli occhielli dell'imbragatura durante il sollevamento. La mancata esecuzione di una di queste operazioni potrebbe causare lesioni gravi o mortali.**

 **Ultra LiftPants non è stata testata per l'uso in ambiente di risonanza magnetica (RM). Trasferire il paziente su una superficie compatibile per eseguire una RM e rimuovere l'imbragatura dalla sala RM.**

 Dispositivo medico di classe I

**BREVETTO [www.hillrom.com/patents](http://www.hillrom.com/patents)**

**Il prodotto potrebbe essere coperto da uno o più brevetti. Vedere l'indirizzo Internet sopra riportato.**

Le società Hillrom sono proprietarie di brevetti in Europa, negli Stati Uniti e di altri brevetti, nonché di richieste di brevetto in corso.

### **Modifiche ai prodotti**

I prodotti Liko sono in continuo sviluppo e questo è il motivo per cui ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso. Contattare il rappresentante Hillrom per consigli e informazioni sugli aggiornamenti dei prodotti.

### **Design and Quality by Liko in Sweden**


























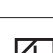



Liko ha ottenuto la certificazione qualitativa ISO 9001 e la certificazione qualitativa specifica del settore dei dispositivi medici ISO 13485. Liko ha anche ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001.

### **Avviso per gli utenti e/o i pazienti nell'UE**

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utente e/o il paziente.

## Descrizione dei simboli

È possibile trovare i seguenti simboli in questo documento e/o sul prodotto.

| Simbolo   | Descrizione  | Simbolo   | Descrizione  |
|---|--|---|--|
|    | Avvertenza: questa situazione necessita di un livello maggiore di cura e attenzione. Questo simbolo è un triangolo giallo con un bordo nero e un punto esclamativo nero al centro. |   |  |
|    | Riciclabile  |   |  |
|    | Leggere le istruzioni per l'uso prima dell'uso. Questo simbolo è un cerchio blu con l'immagine bianca di una persona che legge un libro.   |   |  |
|    | Leggere le istruzioni per l'uso prima dell'uso.  |    | <b>Attenzione:</b> consultare le istruzioni per l'uso. |
|    | Marchio CE. Marchio di conformità dei dispositivi medici nell'Unione europea, dispositivo medico di classe I.  |   |  |
|    | Rappresentante autorizzato per la Svizzera.  |   |  |
|    | Produttore legale  |    | Data di produzione                                     |
|    | Identificatore del prodotto  |    | Dispositivo medico                                     |
|    | Numero di serie  |    | Identificazione univoca del dispositivo                |
|    | Non lavare a secco   |    | Asciugatura su filo all'ombra                          |
|    | Non stirare  |    | Non candeggiare  |
|   | Asciugatura a macchina   |   | Non lavare   |
|  | Non asciugare a macchina   |   |  |
|  | Lavaggio<br>Questo simbolo è sempre accompagnato dalla temperatura consigliata espressa in °C e °F.  |   |  |
|  | Senza lattice  |   |  |
|  | Ispezione periodica  |   |  |
|  | Non utilizzare il prodotto (esclusivamente su prodotti Solo e visibile unicamente dopo il lavaggio quando l'uso è vietato).  |  | Nome del paziente                                      |
|  | Usato per un unico paziente (esclusivamente su prodotti Solo).   |   |  |
|  | Direzione verso l'alto e simbolo all'esterno dell'attrezzatura.  |  | Simbolo all'esterno dell'attrezzatura.                 |
|   | Codice a barre Data Matrix GS1 che può contenere le seguenti informazioni.<br>(01) Global Trade Item Number<br>(11) Data di produzione<br>(21) Numero di serie                     |   |  |

## Cura e ispezione

Controllare l'imbragatura prima di ogni uso. Ispezionare i seguenti punti al fine di riscontrare eventuali segni di usura o danneggiamento:

- Tessuto
- Cinghie
- Cuciture
- Occhielli
- Fibbia

**⚠ Non utilizzare accessori di sollevamento danneggiati.**

In caso di dubbi, contattare il produttore o il fornitore.

### Istruzioni di lavaggio e disinfezione

Consultare l'etichetta del prodotto e l'appendice "Cura e manutenzione delle imbragature Liko".

### Materiale

L'imbragatura Ultra LiftPants è realizzata al 100% in poliestere.

### Se l'imbragatura viene utilizzata per il bagno o la doccia

Dopo l'uso durante il bagno o la doccia, l'imbragatura deve essere stesa in modo che asciughi più rapidamente possibile.

### Ispezione periodica

Il prodotto deve essere ispezionato almeno una volta ogni 6 mesi. Potrebbero essere necessarie ispezioni più frequenti nel caso in cui il prodotto sia usato o lavato con una frequenza maggiore del previsto. Per i protocolli, contattare il rappresentante Hillrom.

### Durata stimata

Ultra LiftPants ha una durata stimata di 3 anni con un utilizzo normale. La durata stimata varia a seconda del tessuto, della frequenza d'uso, della procedura di lavaggio, della temperatura di asciugatura e del peso sostenuto. Hillrom consiglia di utilizzare il prodotto solo entro la sua durata stimata.




### Istruzioni di riciclaggio

L'intera imbragatura, inclusi stecche di rinforzo, materiale di imbottitura e così via, deve essere classificata come rifiuto combustibile.

Hillrom valuta e fornisce indicazioni agli utenti in merito alla manipolazione e allo smaltimento sicuri dei propri dispositivi per contribuire alla prevenzione delle lesioni, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tagli e punture della pelle, abrasioni, nonché in merito alla pulizia e alla disinfezione del dispositivo medico necessarie dopo l'uso e prima dello smaltimento. I clienti devono attenersi a tutte le leggi e normative federali, statali, regionali e/o locali in materia di smaltimento sicuro di dispositivi e accessori medicali.







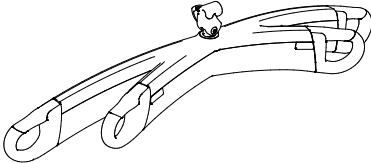
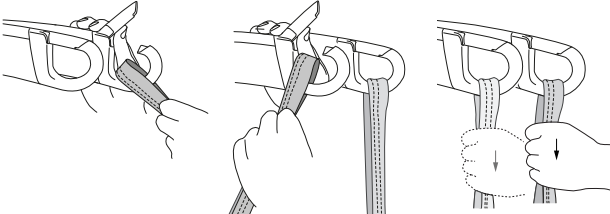
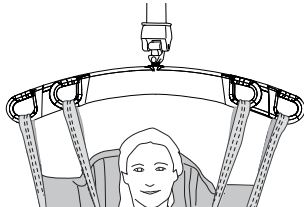
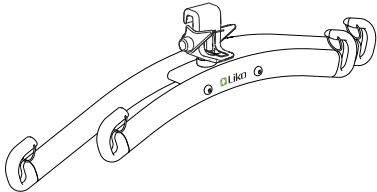
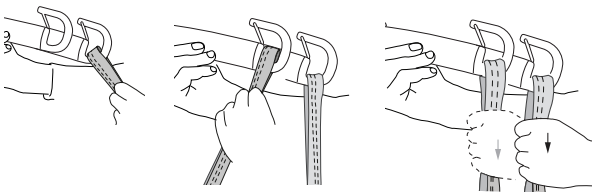
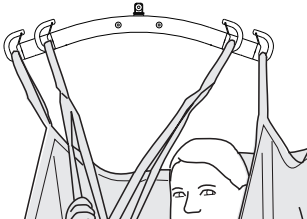
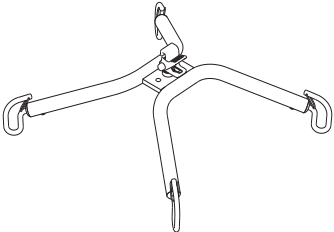
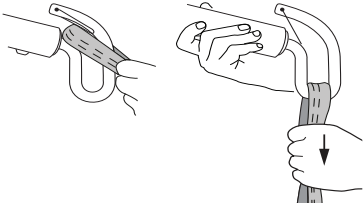
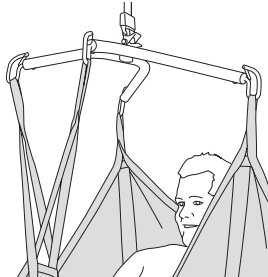
In caso di dubbi, l'utilizzatore del dispositivo dovrà prima contattare l'assistenza tecnica Hillrom per indicazioni sui protocolli di smaltimento sicuri.

## Definizioni

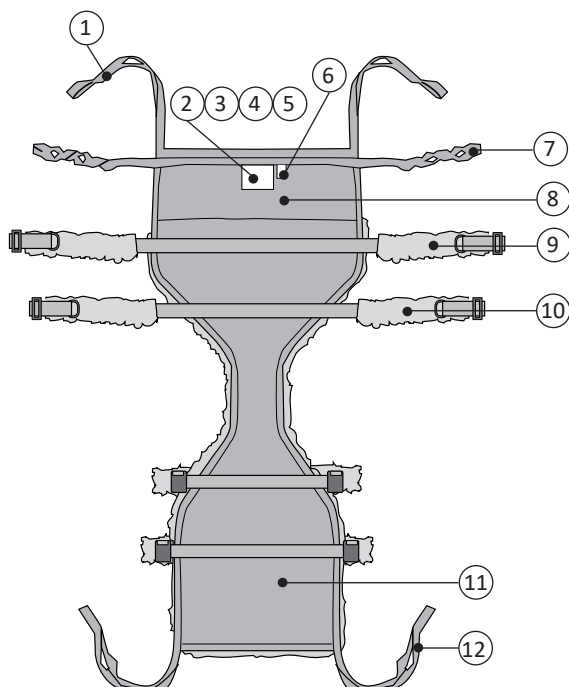


1. Cinghie di sospensione posteriori
2. Etichetta del prodotto
3. Numero di serie
4. Etichetta: ispezione periodica
5. Etichetta: demarcazione individuale (Belongs to)
6. Indicazione della taglia (solo per XXL)
7. Cinghie con occhielli
8. Parte posteriore
9. Cinghia per fianchi superiore
10. Cinghia per fianchi inferiore
11. Parte anteriore
12. Cinghia di sospensione anteriore

## Come collegare un'imbragatura a bilancini diversi
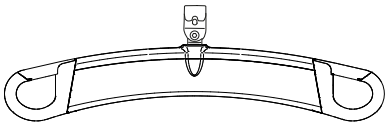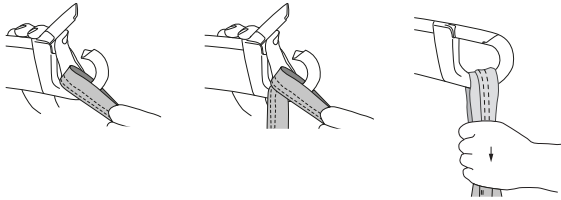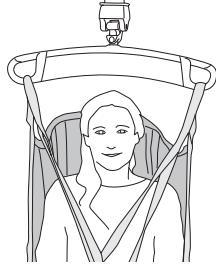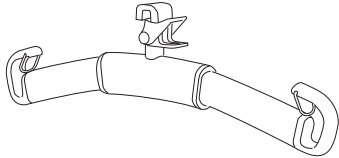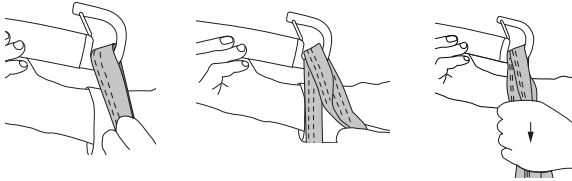
| Bilancino  | Occhielli dell'imbragatura ai ganci del bilancino                                    | Corretto  |
|--|--|---|
|  <p>SlingGuard</p>           |    |    |
|  <p>Universal SlingBar</p>  |    |    |
|  <p>SlingGuard Twin</p>     |   |   |
|  <p>Universal Twin</p>     |  |  |
|  <p>Bilancino a croce</p> |  |  |

### Errato

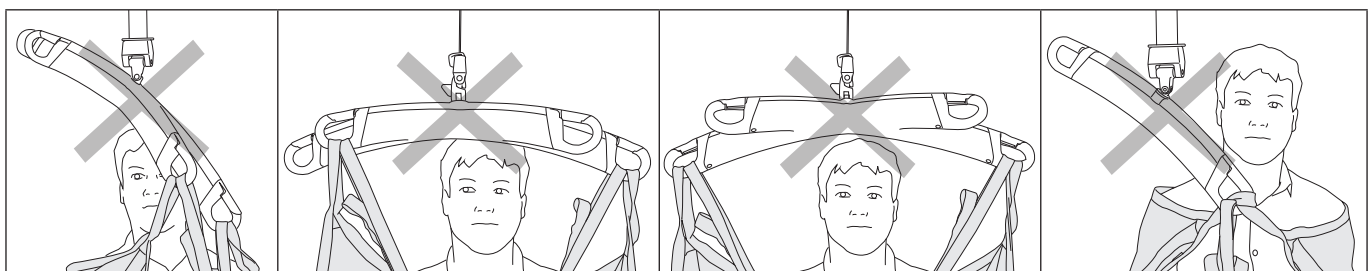

## Come collegare un'imbragatura Ultra LiftPants Sling a un bilancino con 4 ganci (bilancini con doppio aggancio e bilancini a croce)

**1.**

**2.**



**3.**

Le illustrazioni 1, 2 e 3 mostrano un bilancino con doppio aggancio ma si applicano anche a un bilancino a croce.


## Come selezionare la taglia

- ⚠ **Non scegliere taglie troppo grandi, in quanto potrebbero impedire il raggiungimento dell'altezza desiderata.**
- ⚠ **Utilizzare esclusivamente un'imbragatura della taglia corretta per il paziente. La taglia corretta deve essere valutata da un operatore qualificato. Potrebbero verificarsi l'intrappolamento o l'asfissia del paziente.**

La scelta della taglia giusta è importante per un sollevamento sicuro e per il raggiungimento dell'altezza di sollevamento desiderata. L'imbragatura Liko Ultra LiftPants deve superare l'altezza della vita, ma senza essere così alta che le cinghie con occhielli tocchino le ascelle. Misurare con un metro a nastro dalla schiena del paziente, sotto il cavallo e al livello del girovita. Fare riferimento alla tabella delle misure riportata di seguito per indicazioni. La taglia XXXL presenta sezioni in tessuto più alte e cinghie per i fianchi più lunghe, per poter accogliere una pancia più voluminosa. Fare riferimento alla circonferenza del torace del paziente e del prodotto in "Dimensioni" a pagina 8.

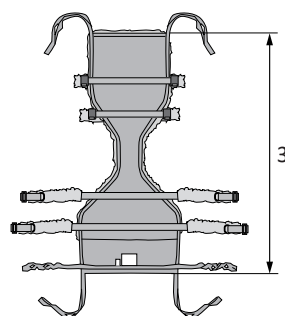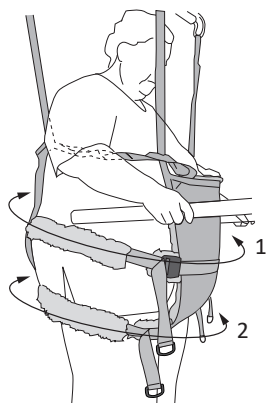


### Misurare la circonferenza del torace del paziente come segue:

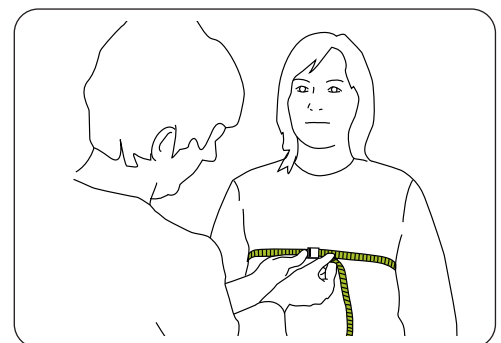

Misurare la circonferenza attorno al torace del paziente (sotto il seno per le donne).

| Misurazione | 1                           | 2                          | 3                   | Torace                     |
|-------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| XXL         | 185-260 cm (73-102 pollici) | 150-210 cm (59-83 pollici) | 140 cm (55 pollici) | 128-185 cm (50-73 pollici) |
| XXXL        | 185-300 cm (73-118 pollici) | 150-250 cm (59-98 pollici) | 150 cm (59 pollici) | 172-222 cm (67-87 pollici) |

## Dimensioni

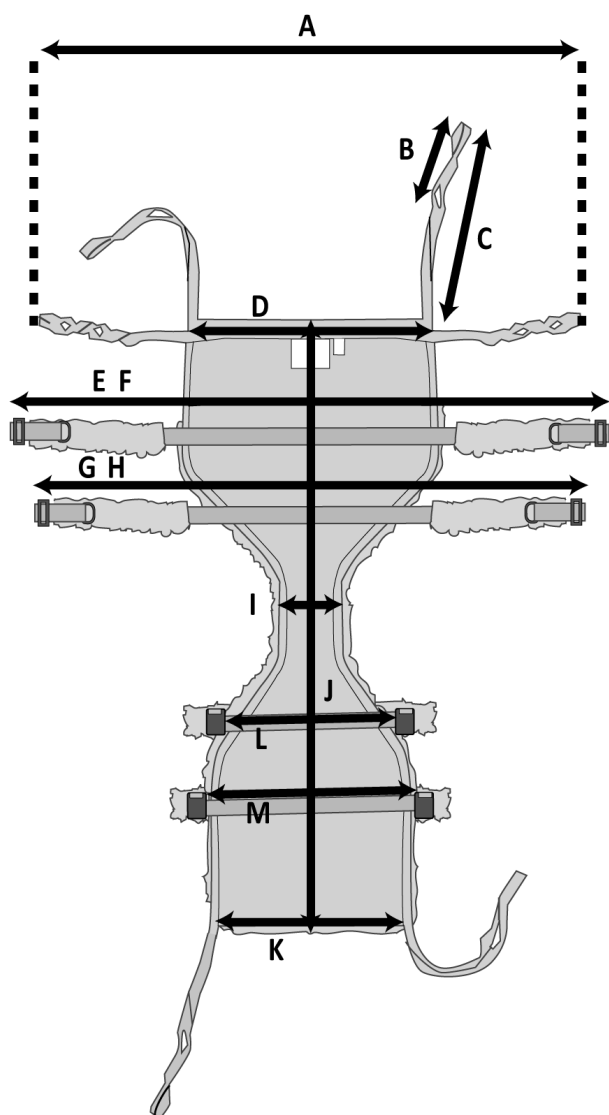

- A: Cinghia con occhielli posteriori dell'imbragatura distese
- B: Lunghezza occhiello di accorciamento (anteriore e posteriore)
- C: Lunghezza cinghia di sospensione (anteriore e posteriore)
- D: Ampiezza toracica posteriore
- E: Cinghia per fianchi superiore distesa (valore min)
- F: Cinghia per fianchi superiore distesa (valore max)
- G: Cinghia per fianchi inferiore distesa (valore min)
- H: Cinghia per fianchi inferiore distesa (valore max)
- I: Larghezza cavallo
- J: Lunghezza pannello principale
- K: Ampiezza toracica anteriore
- L: Lunghezza cinghia per fianchi inferiore anteriore
- M: Lunghezza cinghia per fianchi superiore anteriore

Misure delle taglie in centimetri


| TAGLIA | A   | B  | C  | D  | E   | F   | G   | H   | I  | J   | K  | L  | M  | Carico massimo (kg) | Art. n.  |
|--------|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|---------------------|----------|
| XXL    | 147 | 10 | 56 | 60 | 132 | 205 | 110 | 165 | 10 | 140 | 45 | 45 | 54 | 500                 | 35920328 |
| XXXL   | 185 | 10 | 56 | 60 | 132 | 245 | 107 | 205 | 10 | 150 | 45 | 45 | 54 | 500                 | 35920329 |

Misure delle taglie in pollici

| TAGLIA | A  | B | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I | J  | K  | L  | M  | Carico massimo (libbre) | Art. n.  |
|--------|----|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|-------------------------|----------|
| XXL    | 58 | 4 | 22 | 24 | 52 | 81 | 43 | 65 | 4 | 55 | 18 | 18 | 21 | 1100                    | 35920328 |
| XXXL   | 73 | 4 | 22 | 24 | 52 | 97 | 42 | 81 | 4 | 59 | 18 | 18 | 21 | 1100                    | 35920329 |



## Applicazione di Ultra LiftPants

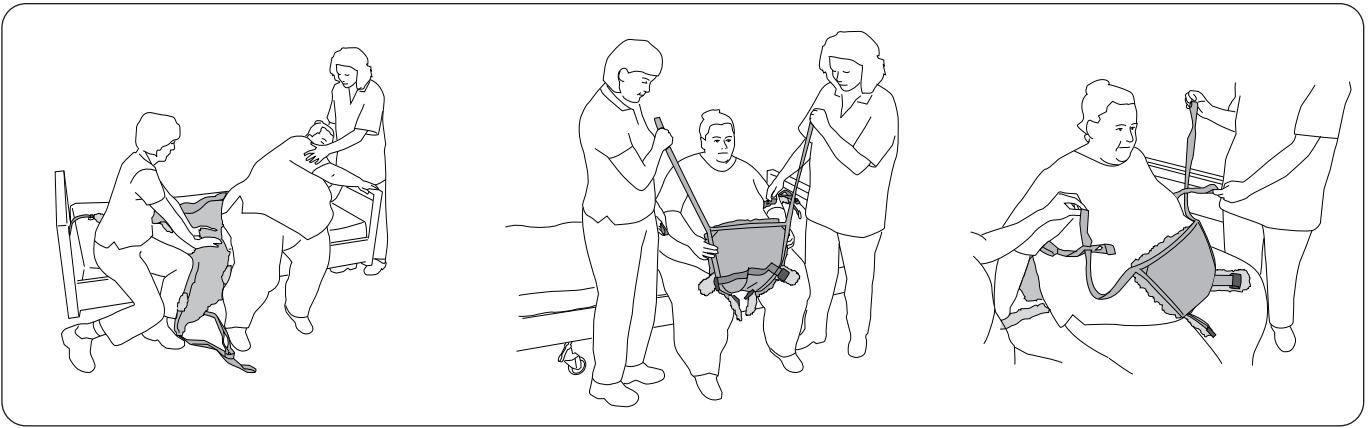


La posizione iniziale per l'utilizzo dell'imbragatura **Liko Ultra LiftPants** è la posizione seduta. Il paziente si appoggia lateralmente in modo che l'imbragatura Ultra LiftPants possa scivolare sotto i glutei. Posizionare l'imbragatura Ultra LiftPants quanto più possibile sotto il paziente, con l'etichetta del prodotto rivolta verso l'esterno dal retro. Accertarsi che l'imbragatura Ultra LiftPants sia centrata e in una posizione ottimale con la stessa quantità di materiale sul retro e sul davanti. Regolare secondo necessità.

Tirare la parte anteriore dell'imbragatura Ultra LiftPants in su tra le gambe in modo che le cinghie per i fianchi siano accessibili dalla parte anteriore.

Inserire le cinghie di sospensione anteriori attraverso le cinghie con occhielli usando l'occhiello adatto (vedere "Regolazione delle cinghie con occhielli" a pagina 10).

**Applicazione alternativa dell'imbragatura LIKO Ultra LiftPants:** è possibile sollevare il paziente in un'imbragatura normale e abbassarlo quindi nell'imbragatura Ultra LiftPants posizionata su una sedia o sul bordo del letto. L'imbragatura utilizzata può, ad esempio, essere l'imbragatura **Liko UltraSling Mod. 06**, **Liko Original HighBack Sling Mod. 200** o **Liko Soft Original HighBack Sling Mod. 26**. Questa applicazione risulta più facile quando per qualche motivo il paziente non riesce a piegarsi lateralmente o se non c'è spazio per applicare l'imbragatura Ultra LiftPants lateralmente.

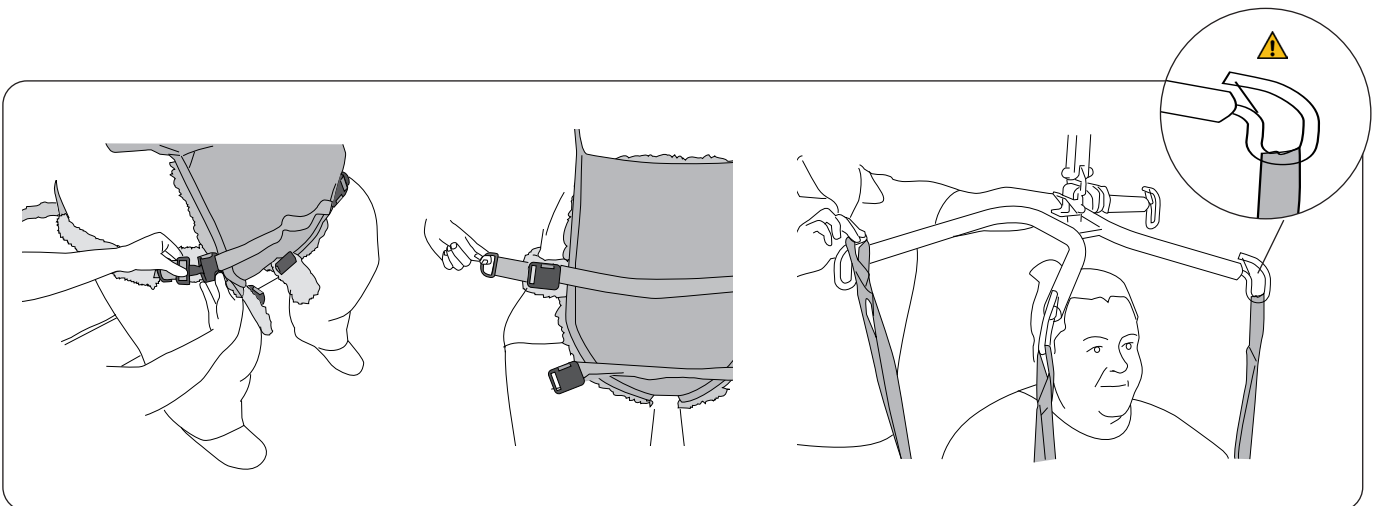


Allacciare le fibbie della cinghia per i fianchi e tirare. A seconda della taglia del paziente, è possibile stringere una o due cinghie per i fianchi dalla posizione eretta.

**⚠ Assicurarsi che il paziente e l'operatore rimangano lontani dai punti di schiacciamento quando vengono allacciate le fibbie. Potrebbero verificarsi lesioni.**

Collegare le cinghie di sospensione posteriori ai ganci posteriori sul bilancino o sul bilancino posteriore. Collegare le cinghie di sospensione anteriori ai ganci anteriori sul bilancino o sul bilancino anteriore. Utilizzare la cinghia con occhielli all'estremità delle cinghie di sospensione. Se il paziente non riesce a stare in piedi sotto il sollevatore, accorciare le cinghie (vedere "Posizione più corta" a pagina 10). Vedere pagina 6 e pagina 7 per le istruzioni su come collegare gli occhielli dell'imbragatura ai diversi bilancini.



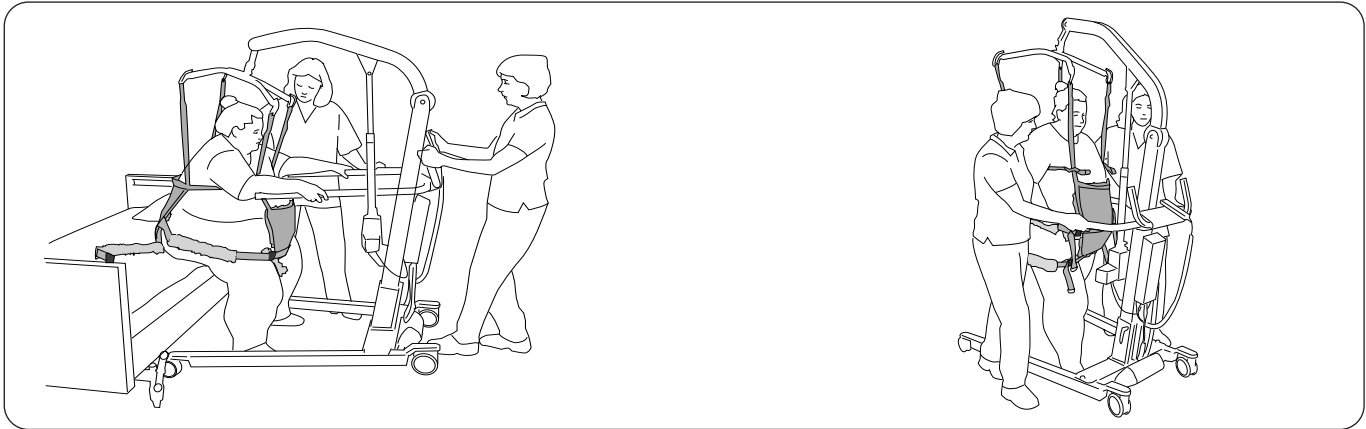

**Prima di assistere il paziente a rimettersi in piedi:** assicurarsi che i piedi del paziente siano posizionati sul pavimento in modo che il paziente sia in grado di sostenere il proprio peso. In questo modo si riduce il carico sul sollevatore. Far scorrere il sollevatore leggermente verso l'alto fino ad applicare una tensione alle cinghie di sospensione senza sollevare i glutei, quindi assicurarsi che le cinghie con occhielli forniscano un supporto adeguato intorno alla parte superiore del corpo del paziente.

Quando il paziente ha raggiunto l'equilibrio in piedi, regolare l'altezza di sollevamento per offrire un sollievo adeguato con l'aiuto dell'imbragatura Ultra LiftPants. Ora può iniziare l'esercizio alla deambulazione!


**Durante il sollevamento:** tirare il sollevatore in avanti nella direzione del movimento, in modo da garantire il corretto trasferimento del peso finché il paziente non è completamente in piedi e in equilibrio.

### Posizione più corta

In alcuni casi, è vantaggioso accorciare le cinghie di sospensione per consentire a un paziente più alto di avere abbastanza spazio per stare in piedi.

La posizione più corta può essere utilizzata provvisoriamente per trovare la lunghezza corretta; tuttavia, un uso prolungato può danneggiare le cuciture. Se si desidera accorciare le cinghie di sospensione per l'uso a lungo termine, si consiglia di fare un nodo nella cinghia di sospensione per accorciarla di circa 10 cm (4 pollici). Utilizzare l'occhiello all'estremità della cinghia di sospensione per collegare la cinghia di sospensione al bilancino.

## Regolazione delle cinghie con occhielli

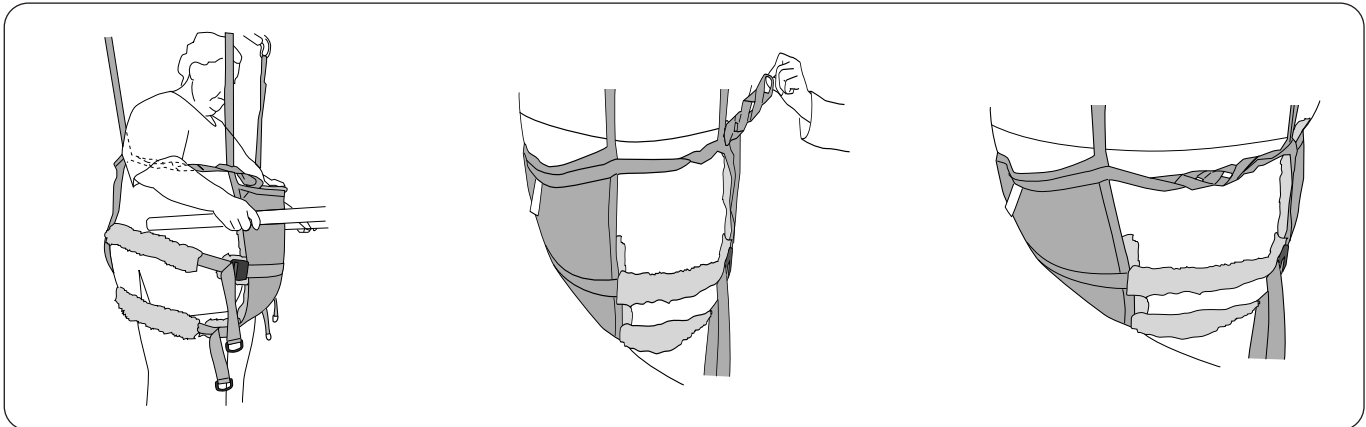


Le cinghie con occhielli non devono essere né troppo allentate né troppo strette attorno alla parte superiore del corpo. Devono esercitare resistenza senza però stringere.

Le persone di statura più piccola possono inserire le cinghie di sospensione attraverso l'occhiello più interno.


Le persone di statura più grande possono inserire le cinghie di sospensione attraverso l'occhiello più esterno.

### Clip per occhielli

Un pratico componente per indicare gli occhielli ideali per una determinata persona. Questo consente agli operatori di scegliere più facilmente l'occhiello adatto da utilizzare per l'applicazione dell'imbragatura Ultra LiftPants.

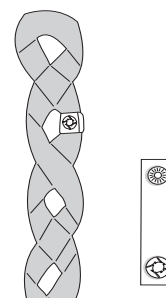

## Rimozione di Ultra LiftPants

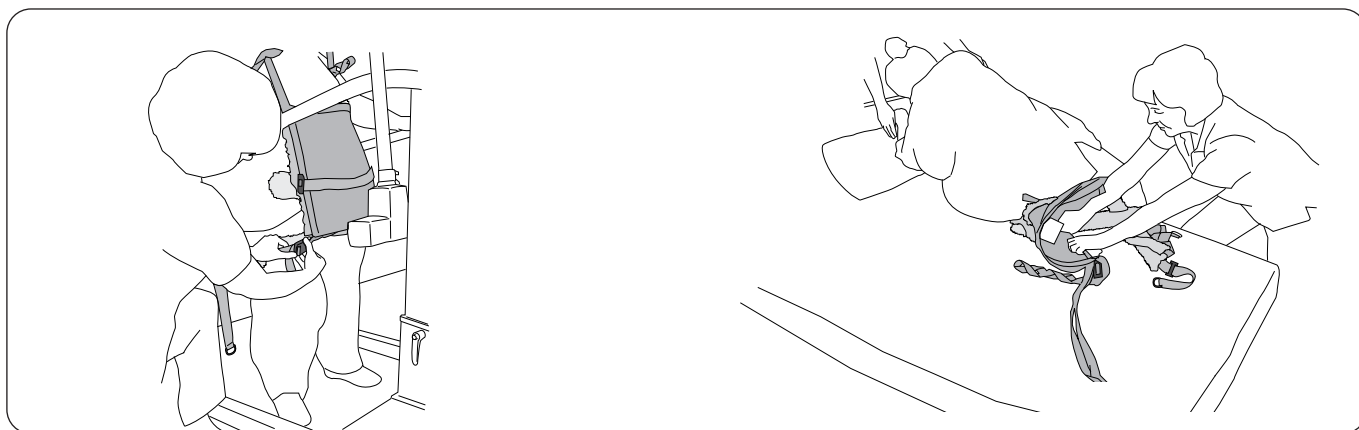

Allentare le cinghie per i fianchi prima di abbassare il paziente in posizione seduta, al fine di evitare una pressione inutile.

Il paziente si inclina lateralmente. Afferrare l'angolo esterno della parte posteriore dell'imbragatura Ultra LiftPants. Ora piegare l'imbragatura Ultra LiftPants sotto se stessa e tirare.

## Accessori

### Extension Loop

Gli Extension Loop sono disponibili in due lunghezze diverse e nei colori verde o grigio. La scelta della lunghezza dipende dalla misura occorrente per regolare l'imbragatura.

Extension Loop, verde, 12 cm (5 pollici)

Art. n. 3691102

Extension Loop, verde, 22 cm (9 pollici)


Art. n. 3691103

Extension Loop, grigio, 12 cm (5 pollici)

Art. n. 3691302

Extension Loop, grigio, 22 cm (9 pollici)

Art. n. 3691303

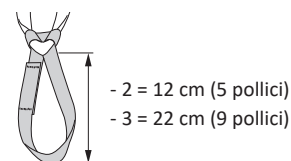


## Componenti opzionali

### Imbottiture per bretella

Art. n. 3666021


Imbottiture da applicare alle cinghie di sospensione anteriori o posteriori per alleviare la pressione. Le imbottiture sono dotate di **velcro** in senso longitudinale per una facile applicazione.

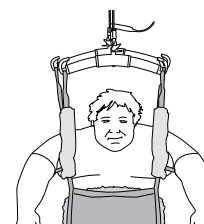

### Fodera Solo per imbragatura Ultra LiftPants (XXL/XXXL), 20 pz

Art. n. 3692908-2

La fodera Solo per l'imbragatura Ultra LiftPants (XXL e XXXL) è una copertura protettiva realizzata in materiale monouso. Si utilizza per evitare di sporcare l'imbragatura Ultra LiftPants e per prevenire il contagio.

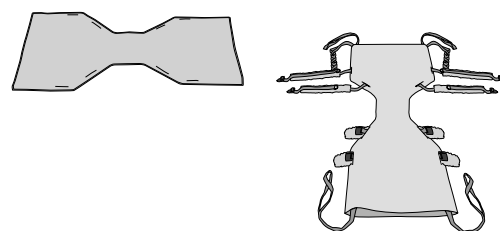

Clip per occhielli, rosso, 4 pz.

Art. n. 3666033

Clip per occhielli, arancione, 4 pz.

Art. n. 3666034

Clip per occhielli, giallo, 4 pz.


Art. n. 3666035

Clip per occhielli, blu, 4 pz.

Art. n. 3666036

Clip per occhielli, nero, 4 pz.

Art. n. 3666037

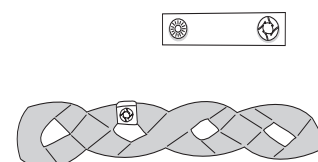

## Panoramica di LIKO Ultra LiftPants Mod. 920

| Prodotto             | Art. n.  | Taglia | Peso del paziente <sup>1</sup> | Altezza del paziente <sup>1</sup> | Carico massimo <sup>2</sup> | Materiale  |
|----------------------|----------|--------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Liko Ultra LiftPants | 35920328 | XXL    | 200-500 kg (440-1100 libbre)   | 170-210 cm (67-83 pollici)        | 500 kg (1100 libbre)        | Poliestere |
| Liko Ultra LiftPants | 35920329 | XXXL   | 200-500 kg (440-1100 libbre)   | 170-210 cm (67-83 pollici)        | 500 kg (1100 libbre)        | Poliestere |

<sup>1</sup> Il peso e l'altezza del paziente sono valori puramente indicativi, pertanto, potrebbero esservi differenze.

<sup>2</sup> Per attenersi al carico massimo ammesso, occorre usare sollevatore e accessori adatti allo stesso carico o a un carico superiore.

Per scegliere la taglia giusta, consultare "Come selezionare la taglia" a pagina 7.

### Combinazioni raccomandate

Quando si utilizza un sistema di sollevamento (sollevatori a soffitto LIKOGUARD L e XL, sollevatori a soffitto LIKORALL 243 e 250, sollevatori mobili VIKING L e XL). Il carico massimo totale per il sistema di sollevamento è sempre stabilito dal prodotto nel sistema con il carico massimo più basso specificato.

| Combinazioni raccomandate dell'imbragatura LIKO Ultra LiftPants con i bilancini Liko: | Universal SlingBar 350 | Standard SlingBar 450 | SlingGuard 450 | Universal SlingBar 450 | Universal SlingBar 600 | Universal TwinBar 670 | SlingGuard 670 Twin | Sling Cross-bar 450 | Sling Cross-bar 670 |
|---|------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | Ultra LiftPants, XXL   | ✓                     | ✓              | ✓                      | ✓                      | ✓                     | ✓                   | ✓                   | ✓                   |
| Ultra LiftPants, XXXL   | ✓                      | ✓                     | ✓              | ✓                      | ✓                      | ✓                     | ✓                   | ✓                   | ✓                   |

Sebbene questa tabella serva da guida, è importante riconoscere che varie circostanze possono rendere le combinazioni di imbragatura e bilancino inappropriate. Le combinazioni approvate nella matrice devono comunque essere valutate e convalidate da un professionista sanitario qualificato.

Legenda: ✓ = Raccomandato

Quando si utilizzano due sollevatori (sistema UltraTwin), sono possibili solo le combinazioni riportate di seguito.

| Combinazioni raccomandate dell'imbragatura LIKO Ultra LiftPants con i bilancini Liko: | Universal SlingBar 350 | Standard SlingBar 450 | Universal SlingBar 450 | Universal SlingBar 600 |
|---|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
|   | Ultra LiftPants, XXL   | ✓                     | ✓                      | ✓                      |
| Ultra LiftPants, XXXL   | ✓                      | ✓                     | ✓                      | ✓                      |

Sebbene questa tabella serva da guida, è importante riconoscere che varie circostanze possono rendere le combinazioni di imbragatura e bilancino inappropriate. Le combinazioni approvate nella matrice devono comunque essere valutate e convalidate da un professionista sanitario qualificato.

Legenda: ✓ = Raccomandato

### Altre combinazioni

La combinazione con accessori o prodotti diversi da quelli raccomandati da Liko può mettere a rischio la sicurezza del paziente.

Liko, LikoGuard, Likorall e Viking sono marchi commerciali di Baxter International Inc. o delle sue società controllate.

Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti o immagini dei marchi qui riportati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.



www.hillrom.com

Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå, Svezia  
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom