


## Tilband

### Gebruiksaanwijzing

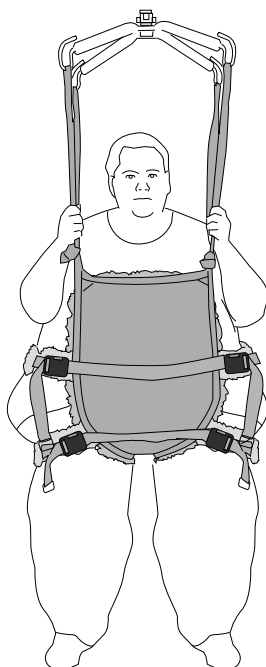

## Productbeschrijving

Voor het tillen van zeer zwaarlijvige patiënten zijn speciale technieken en tilapparatuur vereist. Liko heeft de Ultra-productreeks ontwikkeld, zodat dergelijke patiënten veilig en comfortabel kunnen worden getild.

### Beoogd gebruik

De **Liko Ultra LiftPants**-tilband biedt bij gebruik in overeenstemming met de gebruiksinformatie zeer zwaarlijvige patiënten de kans om te oefenen met staan en lopen zonder het risico om te vallen. Hij kan ook het risico op letsel bij zorgverleners verlagen.

De **Liko Ultra LiftPants** is bedoeld voor gebruik in de volgende omgevingen: gezondheidszorg, intensive care, spoedeisende hulp, revalidatie, habilitatie en thuiszorg.

De **Liko Ultra LiftPants**-tilband ondersteunt een veilige sta- en looptraining voor patiënten met een slecht evenwicht en een slechte beenfunctie. Het is essentieel dat de patiënt in staat is om gewicht op zijn benen te dragen. Met de **Liko Ultra LiftPants** kan de patiënt bewegen terwijl het lichaamsgewicht in meer of mindere mate wordt gedragen.

### Maten

De **Liko Ultra LiftPants**-tilband heeft twee heupbanden op elke zijkant voor een meer gelijkmatige gewichtsverdeling. Er zijn twee verschillende maten.

*In dit document wordt de persoon die wordt opgetild de patiënt genoemd en de persoon die hierbij helpt de zorgverlener.*

### Kiezen van een passende lift

Er wordt aanbevolen dat er ten minste twee zorgverleners aanwezig zijn bij het verplaatsen van een patiënt.

De **Liko Ultra LiftPants**-tilband kan samen met alle plafondliften en mobiele liften van Liko worden gebruikt. Een plafondlift kan door de patiënt worden gebruikt voor onbeperkte beweging binnen het tilgebied van de lift. U kunt kiezen uit:

- Het **Liko UltraTwin**-systeem met twee tileenheden. De maximale belasting is 500 kg, afhankelijk van de afzonderlijke producten die zijn opgenomen in het gemonteerde liftsysteem. Het UltraTwin-systeem is leverbaar voor zowel stationaire als vrijstaande installatie in het UltraTwin FreeSpan-systeem.
- De **LikoGuard L**-plafondlift voor het tillen tot 272 kg of de **LikoGuard XL**-plafondlift voor het tillen tot 363 kg.
- De **Viking XL** mobiele lift voor het tillen van maximaal 300 kg. Er kan een armsteun aanwezig zijn voor extra ondersteuning tijdens sta- en looptraining.

### Alternatieven

Als alternatief voor de **Liko Ultra LiftPants**-tilband raden wij het volgende aan:

- **Liko MasterVest Mod. 60** (maat XXL).
- **Liko LiftPants Mod. 92** (maat XL).

### BELANGRIJK!

Het optillen en verplaatsen van een patiënt gaat altijd met enig risico gepaard. Lees vóór het gebruik de gebruiksaanwijzingen voor zowel de patiëntlift als de tilaccessoires. Het is belangrijk dat u de volledige inhoud van de gebruiksaanwijzing begrijpt. De apparatuur mag alleen worden gebruikt door een getrainde zorgverlener. Voor de training moet een zorgverlener de gebruiksaanwijzing lezen en begrijpen. Controleer of de tilaccessoires geschikt zijn voor de lift die u wilt gebruiken. Wees voorzichtig en ga zorgvuldig te werk tijdens het gebruik. Als zorgverlener bent u altijd verantwoordelijk voor de veiligheid van de patiënt. U moet weten of de patiënt het tillen aankan. Neem contact op met de fabrikant of de leverancier als er iets onduidelijk is.

# Inhoudsopgave

Beoogd gebruik .....	1
Veiligheidsinformatie .....	3
Symboolbeschrijving .....	4
Verzorging en inspectie .....	5
Definities .....	5
Instructies voor het bevestigen van een tilband aan verschillende tiljukken .....	6
Instructies voor het bevestigen van een Ultra LiftPants-tilband aan een tiljuk met 4 haken (TwinBars en Cross-bars) .....	7
De juiste maat kiezen .....	7
Afmetingen .....	8
De Ultra LiftPants aanbrengen .....	9
Het afstellen van de lussenbanden .....	10
De Ultra LiftPants verwijderen .....	11
Optionele onderdelen .....	11
Overzicht <b>Liko</b> Ultra LiftPants-tilband Mod. 920 .....	12
Aanbevolen combinaties .....	12

## Veiligheidsinformatie

### **Bedenk vóór het tillen het volgende:**

- Een verantwoordelijke persoon binnen uw organisatie moet per geval besluiten of er een of meerdere zorgverleners nodig zijn.
- Zorg ervoor dat de gekozen tilband qua model, maat, materiaal en uitvoering voldoet aan de behoeftes van de patiënt.
- De totale maximale belasting voor een liftstelsel wordt altijd bepaald door het product binnen het stelsel met de laagste gespecificeerde maximale belasting.
- Was de tilband na elke patiënt om de veiligheid van de patiënt en de hygiëne te waarborgen.
- Plan het tillen voordat het wordt uitgevoerd, zodat het zo veilig en soepel mogelijk verloopt.
- Controleer of het tilaccessoire verticaal hangt en vrij kan bewegen.
- Hoewel de tiljucken van Liko zijn uitgerust met clips, moet er extra voorzichtig te werk worden gegaan. Controleer voordat de patiënt daadwerkelijk getild wordt en terwijl de banden volledig gestrekt zijn of de banden correct aan de haken van het tiljuk zijn bevestigd.
- Til een patiënt nooit hoger dan nodig is voor het verplaatsen.
- Controleer of de wielen van de rolstoel, het bed, de brancard, enz. tijdens het tillen/verplaatsen op de rem staan.
- Werk altijd ergonomisch. Maak gebruik van de mogelijkheden van de patiënt om de patiënt actief aan de verplaatsing te laten meewerken.
- Stel de tilband niet bloot aan direct zonlicht als deze niet wordt gebruikt.

 **Een onjuiste bevestiging van de tilband aan het tiljuk kan ernstig letsel bij de patiënt veroorzaken.**

 **Laat een patiënt die is opgetild nooit zonder toezicht!**

 **Laat kinderen nooit zonder toezicht in de buurt van de tilband!**

 **Berg de tilband niet op een plek op waar deze wordt blootgesteld aan direct zonlicht of warmtebronnen, zoals een radiator, een open haard of een fornuis/oven!**

 **De tilband mag niet worden gebruikt, opgeborgen of vervoerd in de buurt van huisdieren, ongedierte of kinderen zonder toezicht!**

 **Zorg ervoor dat de patiënt en de zorgverlener tijdens het tillen uit de buurt blijven van knelpunten en bewegende delen. Er bestaat verwondingsgevaar.**

 **Controleer of de patiënt risico loopt op beknelling en houd de patiënt goed in de gaten. Zorg ervoor dat het hoofd en de ledematen van de patiënt zich niet in of tussen de lussen van de tilband bevinden tijdens het tillen. Als u een van deze instructies niet naleeft, kan dat tot ernstig of dodelijk letsel leiden.**

 **De Ultra LiftPants is niet getest voor gebruik in een MRI-omgeving (Magnetic Resonance Imaging). Verplaats de patiënt naar een compatibel ligvlak voor het uitvoeren van een MRI en verwijder de tilband uit de MRI-ruimte.**

 Medisch hulpmiddel, productklasse I

**OCTROOI [www.hillrom.com/patents](http://www.hillrom.com/patents)**

**Kan beschermd zijn door één of meer octrooien. Raadpleeg de bovenstaande website.**

De Hillrom-ondernemingen zijn eigenaar van Europese, Amerikaanse of andere octrooien en aangevraagde octrooien.

### **Productwijzigingen**

De producten van Liko worden continu verder ontwikkeld. Daarom behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving productwijzigingen aan te brengen. Neem contact op met uw vertegenwoordiger van Hillrom voor advies en informatie over productverbeteringen.

### **Design and Quality by Liko in Sweden**




























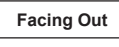

Liko is gecertificeerd conform de ISO 9001-kwaliteitscertificatie en de daaraan gelijkwaardige ISO 13485-kwaliteitscertificatie voor producenten van medische hulpmiddelen. Liko is ook gecertificeerd conform de milieunorm ISO 14001.

### **Kennisgeving voor gebruikers en/of patiënten in de EU**

Elk ernstig incident dat heeft plaatsgevonden met betrekking tot het hulpmiddel dient te worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde instantie in de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

## Symboolbeschrijving

Deze symbolen komen voor in dit document en/of op het product.

Symbool	Beschrijving	Symbool	Beschrijving
	Waarschuwing: deze situatie vereist extra zorg en aandacht. Dit symbool is een gele driehoek met een zwarte rand en een zwart uitroepteken in het midden.		
	Recyclebaar		
	Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing. Dit symbool is een blauwe cirkel met een witte afbeelding van een persoon die een boek leest.		
	Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing		<b>Let op!</b> Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.
	CE-markering. Conformiteitsmarkering voor medische hulpmiddelen in de Europese Unie, medisch hulpmiddel van klasse I.		
	Geautoriseerde vertegenwoordiger in Zwitserland		
	Wettelijke fabrikant		Productiedatum
	Productidentificatie		Medisch hulpmiddel
	Serienummer		Unieke apparaatidentificatie
	Niet stomen		Drogen aan de waslijn in de schaduw
	Niet strijken		Niet bleken
	Drogen in de droogtrommel		Niet wassen
	Niet drogen in de droogtrommel		
	Wassen Het symbool komt altijd voor in combinatie met de aanbevolen temperatuur in °C en °F.		
	Latexvrij		
	Periodieke inspectie		
	Product niet gebruiken (Alleen bij Solo-producten en alleen zichtbaar na wassen wanneer gebruik verboden is)		Naam patiënt
	Voor gebruik bij één patiënt (alleen bij Solo-producten)		
	Naar boven gericht en symbool aan de buitenkant van de apparatuur.		Symbool aan de buitenkant van de apparatuur.
 <small>(01) 0100887761997127 (11) JIMMDD (21) 012345678910</small>	GS1 Data Matrix-barcode die de volgende informatie kan bevatten. (01) Global Trade Item Number (internationaal uniek artikelnummer) (11) Productiedatum (21) Serienummer		

## Verzorging en inspectie

Controleer de tilband vóór elk gebruik. Controleer de volgende punten op slijtage en beschadigingen:

- Materiaal
- Banden
- Zomen
- Lussen
- Gesp

**⚠ Gebruik beschadigde tilaccessoires niet.**

Neem contact op met de fabrikant of de leverancier als er iets onduidelijk is.

### Instructies voor wassen en desinfecteren:

Zie hiervoor het productlabel van de tilband en de bijgevoegde bijlage 'Verzorging en onderhoud Liko-tilbanden'.

### Materiaal:

De Ultra LiftPants-tilband is gemaakt van 100% polyester.

### Als de tilband wordt gebruikt in het bad of de douche:

Na gebruik in bad of douche moet de tilband zo worden geplaatst dat deze zo snel mogelijk droogt.

### Periodieke inspectie

Het product moet ten minste elke zes maanden worden geïnspecteerd. Frequentere inspectie is mogelijk nodig als het product vaker dan normaal wordt gebruikt of gewassen. Voor protocollen kunt u contact opnemen met uw Hillrom-vertegenwoordiger.

### Verwachte levensduur

De Ultra LiftPants heeft een verwachte levensduur van 3 jaar bij normaal gebruik. De verwachte levensduur is afhankelijk van het materiaal, de gebruiksfrequentie, de wasprocedure, de droogtijd en het vervoerde gewicht. Hillrom adviseert het product alleen tijdens de verwachte levensduur te gebruiken.


### Recyclinginstructies

De hele tilband, inclusief baleinen, vulmateriaal, enz., moet gescheiden worden afgevoerd als brandbaar afval.

Hillrom voert beoordelingen uit en biedt gebruikers richtlijnen voor het veilig hanteren en afvoeren van de apparatuur om letsel zoals (maar niet beperkt tot) snijwonden, doorboring van de huid en schaafwonden te voorkomen, en voor de vereiste reiniging en desinfectie van het medische hulpmiddel na gebruik en voorafgaand aan het afvoeren. Klanten moeten zich houden aan alle nationale, provinciale, gemeentelijke en/of lokale wetten en voorschriften zoals deze gelden voor het veilig afvoeren van medische hulpmiddelen en accessoires.







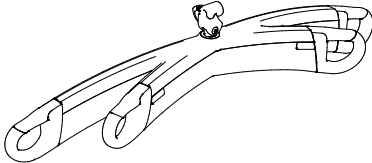
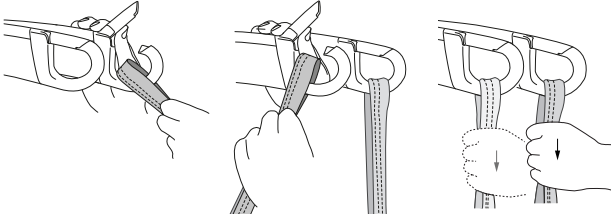
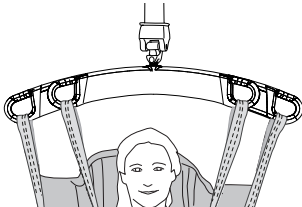
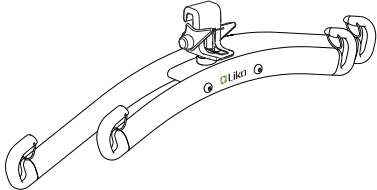
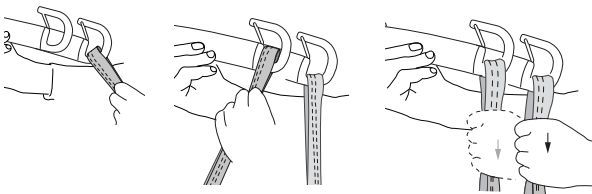
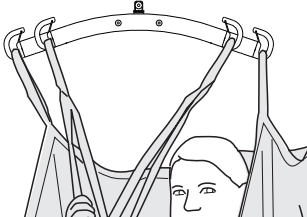
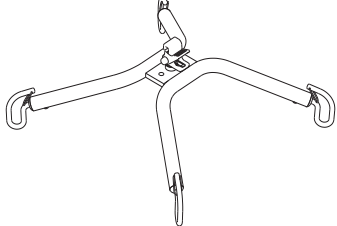
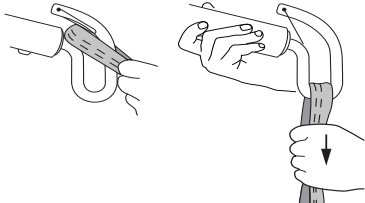
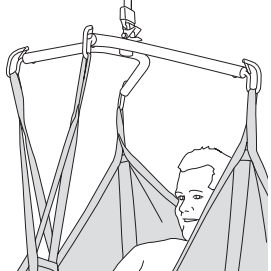
In geval van twijfel dient de gebruiker van het hulpmiddel eerst contact op te nemen met de technische ondersteuning van Hillrom voor advies over protocollen voor veilig afvoeren.

## Definities

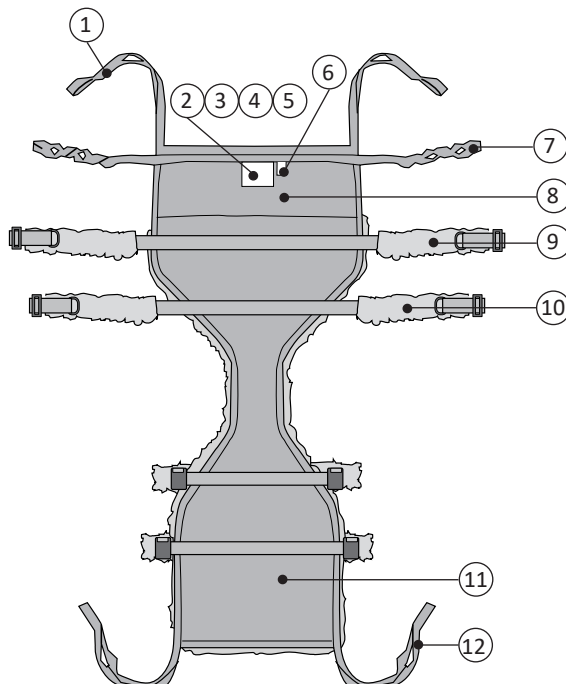


1. Achterste ophangbanden
2. Productlabel
3. Serienummer
4. Label: Periodieke inspectie
5. Label: individuele marking (Belongs to)
6. Maatmarkering (alleen voor maat XXL)
7. Lussenbanden
8. Achterste deel
9. Bovenste heupband
10. Onderste heupband
11. Voorste deel
12. Voorste ophangband


# Instructies voor het bevestigen van een tilband aan verschillende tiljukken

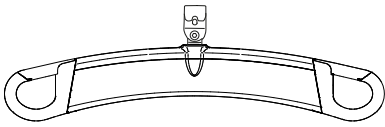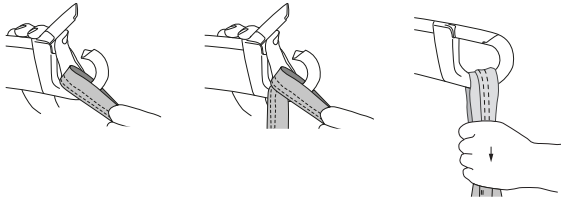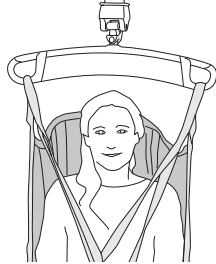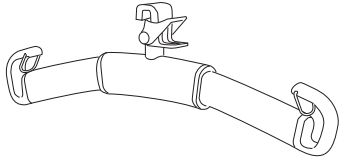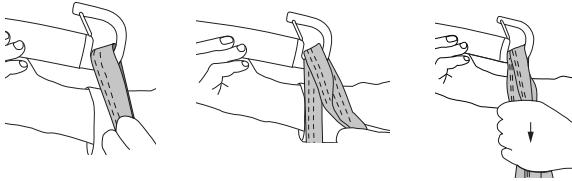Tiljuk	Tilbandlussen aan tiljukhaken	Goed
 <p data-bbox="204 495 347 528">SlingGuard</p>		
 <p data-bbox="156 790 395 824">Universal SlingBar</p>		
 <p data-bbox="165 1072 379 1106">SlingGuard Twin</p>		
 <p data-bbox="177 1368 368 1402">Universal Twin</p>		
 <p data-bbox="209 1668 336 1702">Cross-bar</p>		

## Fout!

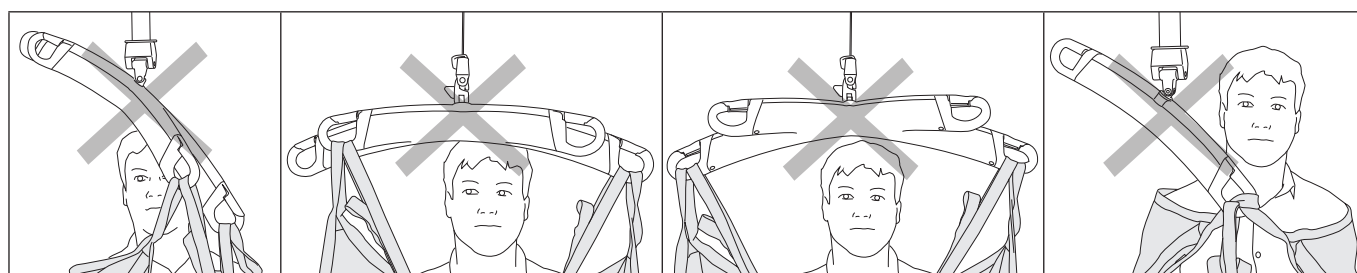

# Instructies voor het bevestigen van een Ultra LiftPants-tilband aan een tiljuk met 4 haken (TwinBars en Cross-bars)

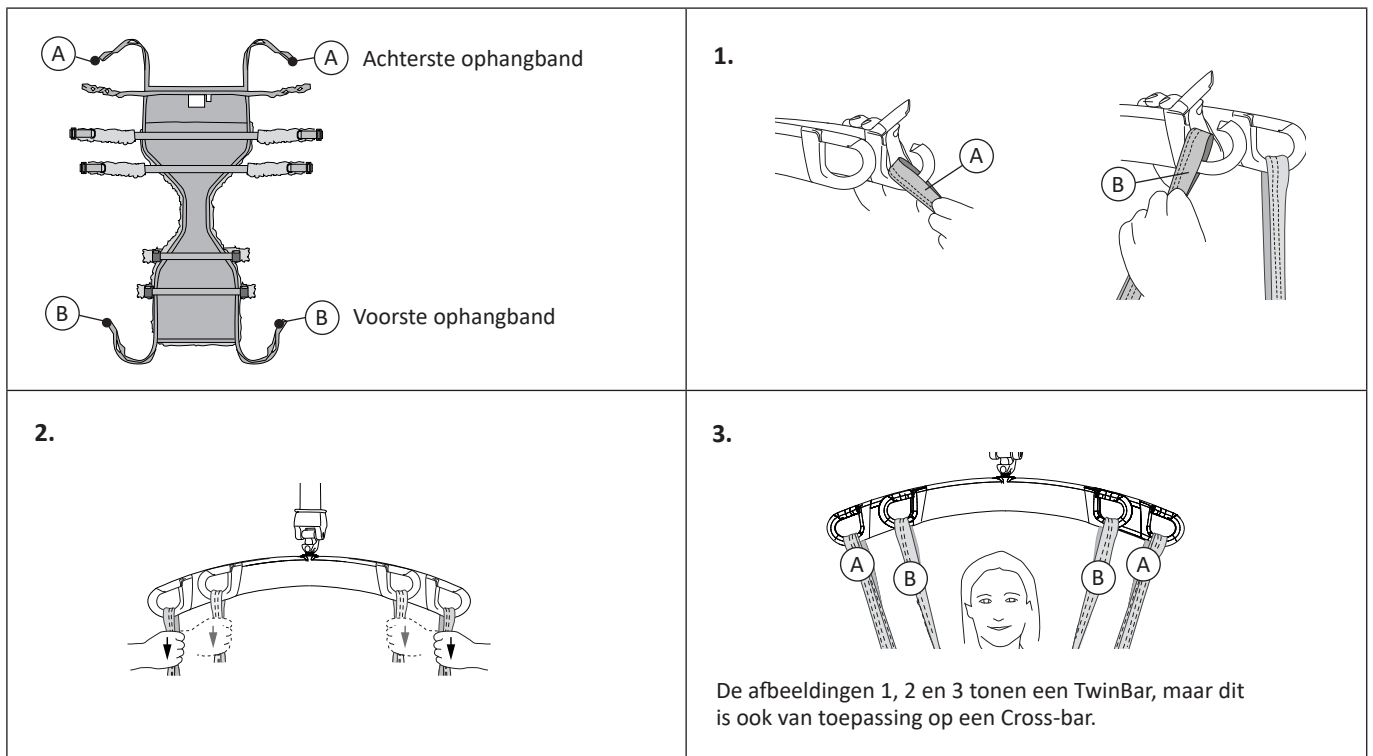



## De juiste maat kiezen

- ⚠ Kies geen te grote maat want daardoor kan mogelijk de benodigde tilhoogte niet worden bereikt.
- ⚠ Gebruik alleen een tilband met de juiste maat voor de patiënt. De juiste maat moet worden beoordeeld door een getrainde zorgverlener. Patiënten kunnen beklemd raken of stikken.


Het kiezen van de juiste maat is belangrijk om veilig en betrouwbaar te kunnen tillen en om de vereiste tilhoogte te bereiken. De Liko Ultra LiftPants-tilband moet boven de taille komen, maar niet zo hoog dat de lussenbanden in de oksels snijden. Meet met een meetlint vanaf de rug van de patiënt, onder het kruis door tot boven taille.

Zie de onderstaande meettabel voor richtlijnen. Maat XXXL heeft hogere materiaaldelen en langere heupbanden om rond een grotere buik te komen.

Raadpleeg "Afmetingen" op pagina 8 voor de borstomtrek van de patiënt en het product.

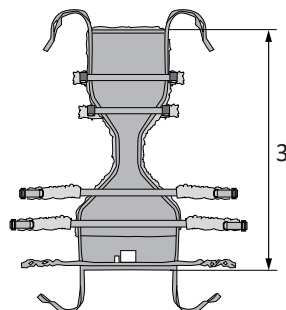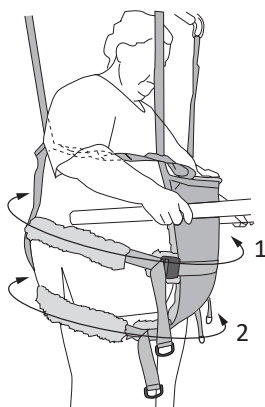


### Meet de borstomtrek van de patiënt als volgt:

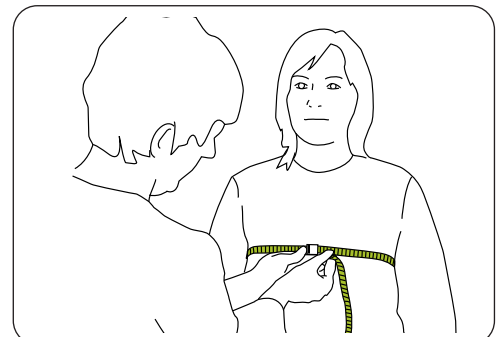

Meet de omtrek van de borst van de patiënt (onder de borsten bij vrouwen).

Afmetingen	1	2	3	Borst
XXL	185 - 260 cm	150 - 210 cm	140 cm	128 - 185 cm
XXXL	185 - 300 cm	150 - 250 cm	150 cm	172 - 222 cm

## Afmetingen

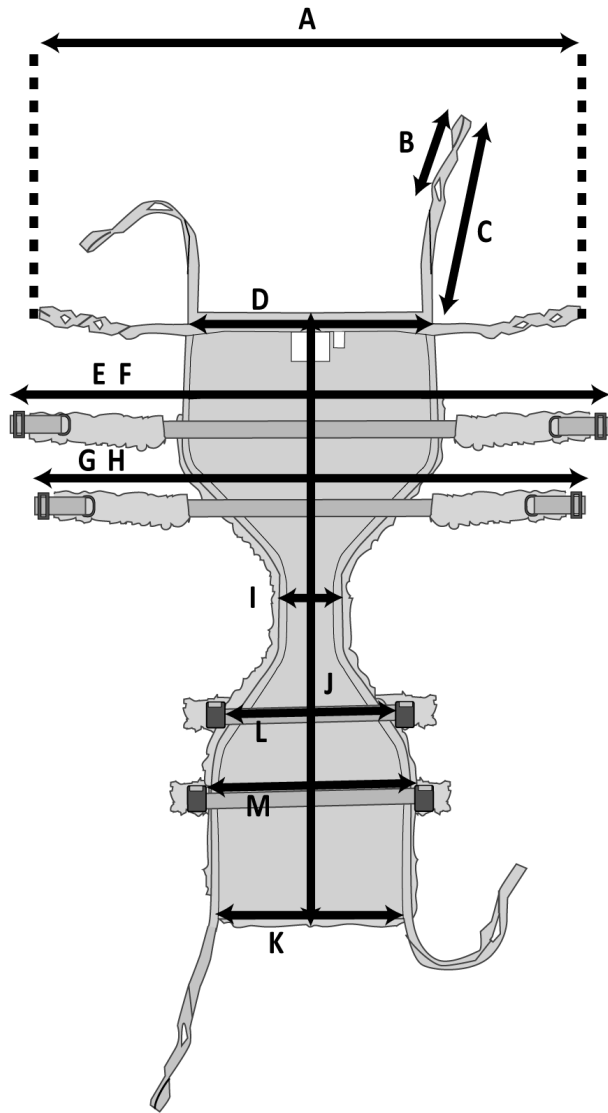

- A: achterste lussenbanden van tilband plat neergelegd
- B: lengte lus verkorten (voor en achter)
- C: lengte ophangband (voor en achter)
- D: rugbreedte
- E: bovenste heupband plat neergelegd (minimumwaarde)
- F: bovenste heupband plat neergelegd (maximumwaarde)
- G: onderste heupband plat neergelegd (minimumwaarde)
- H: onderste heupband plat neergelegd (maximumwaarde)
- I: kruisbreedte
- J: lengte hoofdpaneel
- K: borstbreedte
- L: lengte onderste heupband voor
- M: lengte bovenste heupband voor

Maten in centimeters


MAAT	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Maximale belasting (kg)	Productnr.
XXL	147	10	56	60	132	205	110	165	10	140	45	45	54	500	35920328
XXXL	185	10	56	60	132	245	107	205	10	150	45	45	54	500	35920329

Maten in inches

MAAT	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Maximale belasting (lbs)	Productnr.
XXL	58	4	22	24	52	81	43	65	4	55	18	18	21	1100	35920328
XXXL	73	4	22	24	52	97	42	81	4	59	18	18	21	1100	35920329



## De Ultra LiftPants aanbrengen

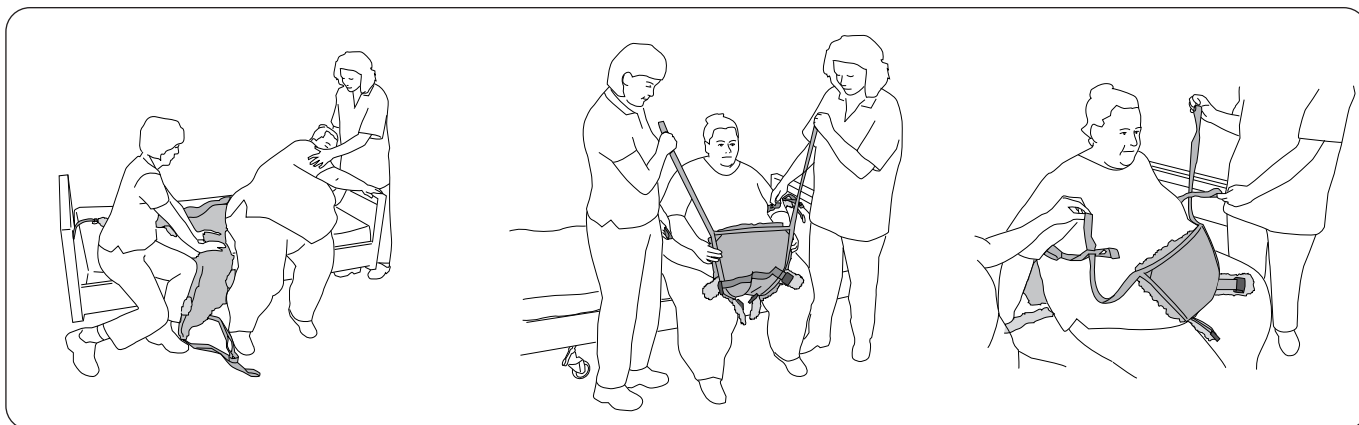


De uitgangspositie bij gebruik van de **Liko Ultra LiftPants-tilband** is de zithouding. De patiënt leunt naar de zijkant zodat de Ultra LiftPants-tilband op zijn plaats kan worden geschoven onder de billen. Plaats de Ultra LiftPants-tilband zo ver mogelijk onder de patiënt met het productlabel aan de achterkant naar buiten gericht. Zorg ervoor dat de Ultra LiftPants-tilband gecentreerd is en zich in een goede positie bevindt met evenveel broekmateriaal aan de achterkant als aan de voorkant. Stel hem indien nodig af.

Trek het voorste deel van de Ultra LiftPants-tilband omhoog tussen de benen zodat de banden vanaf de voorzijde toegankelijk zijn.

Voer de voorste ophangbanden door de lussenbanden en gebruik daarvoor de juiste lus (zie "Het afstellen van de lussenbanden" op pagina 10).

**Alternatieve manier van aanbrengen van de LIKO Ultra LiftPants-tilband:** de patiënt kan in een normale tilband worden opgetild en vervolgens worden neergelaten op de Ultra LiftPants-tilband die op een stoel of direct naast het bed is geplaatst. Tilbanden die kunnen worden gebruikt, zijn bijvoorbeeld de **Liko UltraSling Mod. 06**, de **Liko Original HighBack Sling Mod. 200** of de **Liko Soft Original HighBack Sling Mod. 26**. Deze aanbrengmethode maakt het eenvoudiger als de patiënt om een of andere reden niet naar de zijkant kan leunen of als er geen ruimte is om de Ultra LiftPants-tilband vanaf de zijkant aan te brengen.

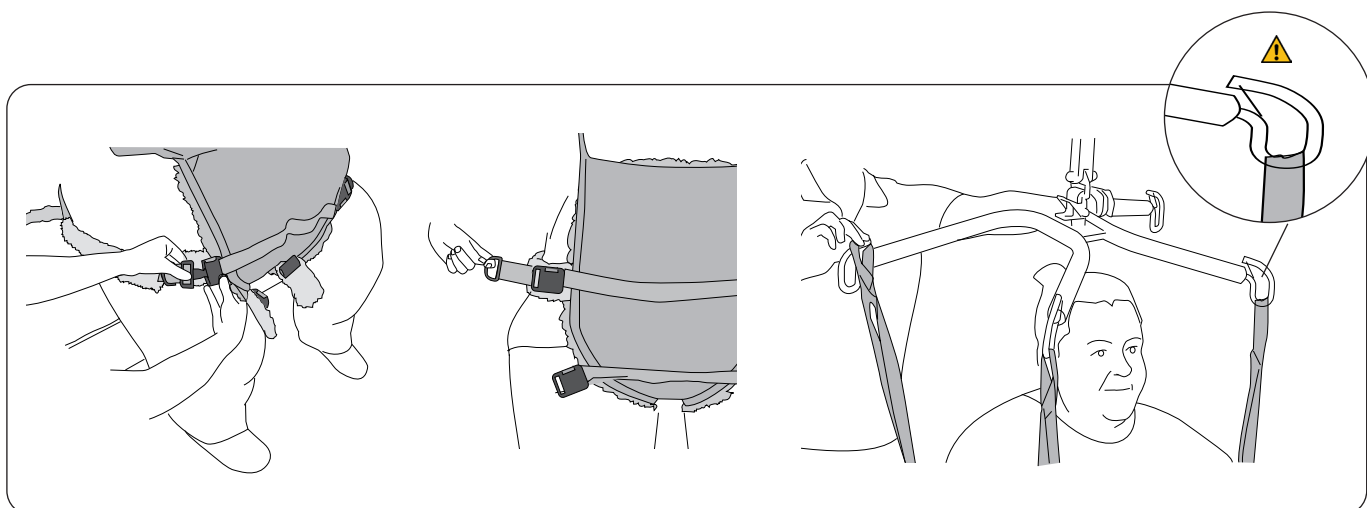


Bevestig de gespen van de heupband en trek ze strak. Afhankelijk van de grootte van de patiënt kunnen één of beide heupbanden worden bevestigd vanuit de staande houding.

**⚠️ Zorg ervoor dat de patiënt en zorgverlener uit de buurt blijven van knelpunten wanneer de gespen worden vastgemaakt. Er bestaat verwondingsgevaar.**

Bevestig de achterste ophangbanden aan de achterste haken op het tiljuk, of aan het achterste tiljuk. Bevestig de voorste ophangbanden aan de voorste haken op het tiljuk, of aan het voorste tiljuk. Gebruik de bandlus aan het uiteinde van de ophangbanden. Als de patiënt niet onder de lift kan staan, verkort u de banden (zie "Ingekorte maat" op pagina 10). Zie pagina 6 en pagina 7 voor instructies voor het bevestigen van de tilbandlussen aan verschillende tiljukken.



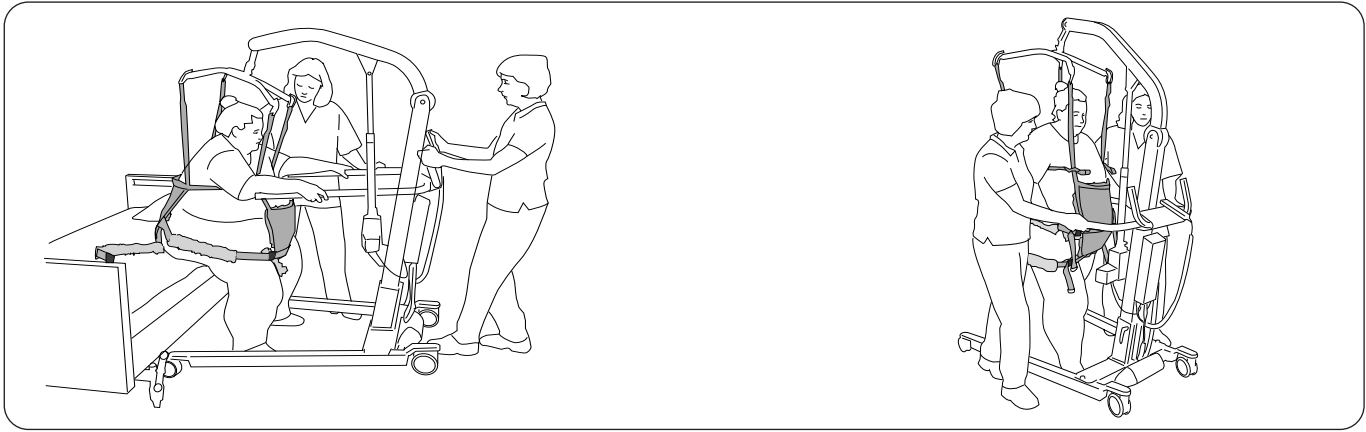

**Voordat u de patiënt helpt te staan:** zorg ervoor dat de voeten van de patiënt zodanig op de vloer staan dat de patiënt zijn/haar gewicht kan dragen. Hierdoor wordt de belasting op de lift verminderd. Laat de lift iets omhoog komen om spanning op de ophangbanden te zetten zonder de billen op te tillen, en zorg ervoor dat de lussenbanden voldoende ondersteuning bieden rond het bovenlichaam van de patiënt.

Als de patiënt staande in evenwicht is wordt de tilhoogte zo ingesteld dat de Ultra LiftPants-tilband voldoende ondersteuning biedt. Nu kan de looptraining beginnen!


**Tijdens de tilprocedure:** trek de lift vooruit in de richting van de beweging zodat de gewichtsverplaatsing goed verloopt tot de patiënt rechtop staat en in evenwicht is.

### Ingekorte maat

In bepaalde gevallen is het handig om de ophangbanden te verkorten zodat een langere patiënt voldoende ruimte heeft om te staan.

De ingekorte maat kan tijdelijk worden gebruikt om de juiste lengte te testen, maar bij langdurig gebruik kunnen de zomen beschadigd raken. Als u de ophangbanden echter wilt verkorten voor langdurig gebruik, is het raadzaam een knoop in de ophangband te leggen om deze ongeveer 10 cm in te korten. Gebruik de lus aan het uiteinde van de ophangband om de ophangband aan het tiljuk te bevestigen.

## Het afstellen van de lussenbanden

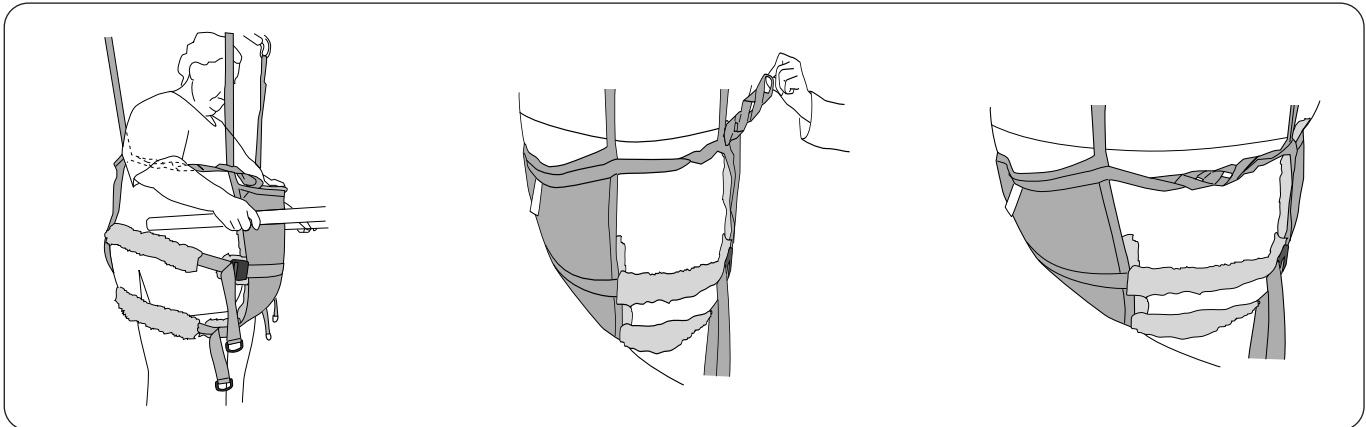


De lussenbanden mogen noch te los, noch te strak rond het bovenlichaam zijn. Weerstand met comfort is het beste.

Bij een kleinere persoon kunnen de ophangbanden door een binnenste lus gevoerd worden.


Bij een grotere persoon kunnen de steunbanden door een buitenste lus gevoerd worden.

### Lusclips

Een praktisch onderdeel voor het aanduiden van de lussen die voor een bepaalde persoon werken. Hierdoor kunnen zorgverleners gemakkelijker de juiste lus kiezen bij het aanbrengen van de Ultra LiftPants-tilband.

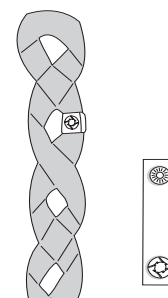

## De Ultra LiftPants verwijderen

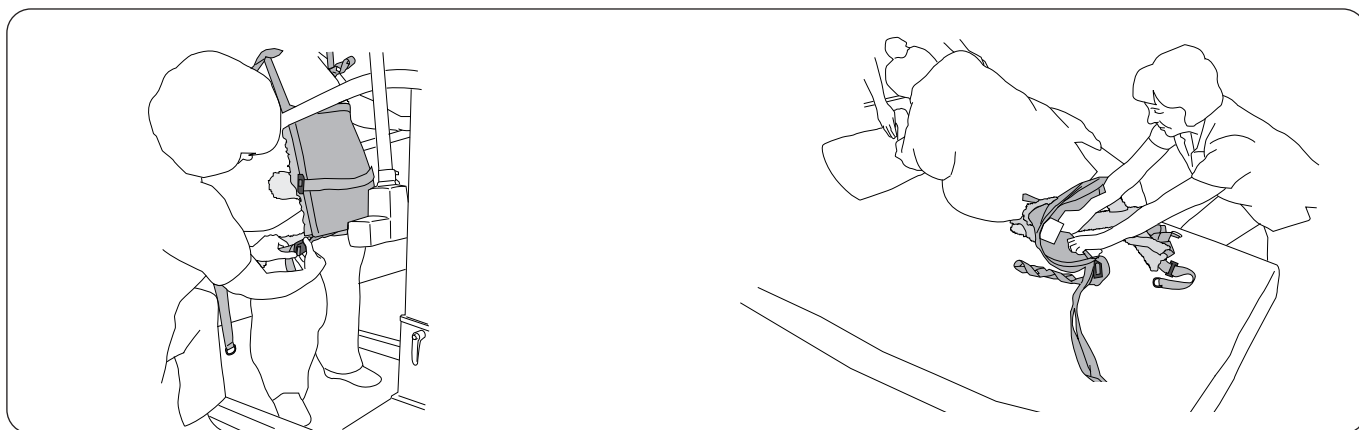

Maak de heupbanden los voordat u de patiënt in een zittende houding neerlaat en voorkom zo onnodige druk van de heupbanden.

De patiënt leunt opzij. Pak de buitenste hoek van het achterste deel van de Ultra LiftPants-tilband vast. Vouw de Ultra LiftPants-tilband nu onder zichzelf naar binnen en trek hem weg.

## Accessoires


### Extension Loop

De Extension Loops zijn verkrijgbaar in twee verschillende lengtes en in de kleur groen of grijs.

De lengte die u kiest, is afhankelijk van de mate waarin u een aanpassing wilt maken.

Extension Loop, groen, 12 cm  
 Extension Loop, groen, 22 cm  
 Extension Loop, grijs, 12 cm  
 Extension Loop, grijs, 22 cm


Productnr. 3691102  
 Productnr. 3691103  
 Productnr. 3691302  
 Productnr. 3691303

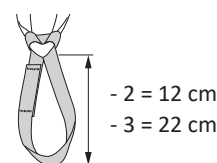

## Optionele onderdelen


Gecapitonnerde stukken voor schouderband Productnr. 3666021

Drukverlichtende gecapitonnerde stukken voor bevestiging op de voorste en/of achterste ophangbanden. De gecapitonnerde stukken hebben, voor een eenvoudige bevestiging, een **Velcro**-klittenbandstrip op een lange zijkant.

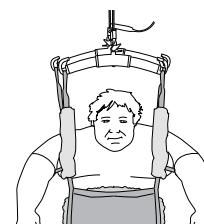


Solo Cover voor Ultra LiftPants (XXL/XXXL), 20 stuks Productnr. 3692908-2

Solo Cover voor Ultra LiftPants-tilband (XXL en XXXL) is een beschermhoes gemaakt van materiaal voor eenmalig gebruik. Deze wordt gebruikt ter voorkoming van gebruik van een vuile Ultra LiftPants-tilband en besmetting.

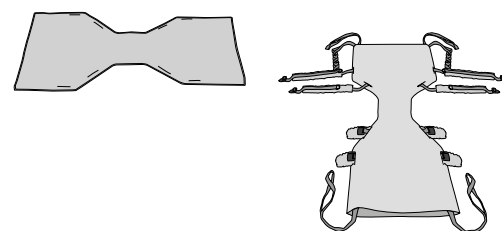

Lusclips, rood, 4 stuks  
 Lusclips, oranje, 4 stuks  
 Lusclips, geel, 4 stuks  
 Lusclips, blauw, 4 stuks  
 Lusclips, zwart, 4 stuks

Productnr. 3666033  
 Productnr. 3666034  
 Productnr. 3666035  
 Productnr. 3666036  
 Productnr. 3666037

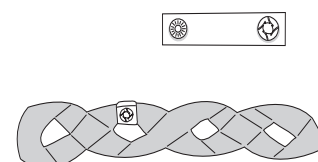

## Overzicht LIKO Ultra LiftPants-tilband Mod. 920

Product	Productnr.	Maat	Gewicht patiënt <sup>1</sup>	Lengte patiënt <sup>1</sup>	Maximale belasting <sup>2</sup>	Materiaal
Liko Ultra LiftPants	35920328	XXL	200-500 kg	170-210 cm	500 kg	Polyester
Liko Ultra LiftPants	35920329	XXXL	200-500 kg	170-210 cm	500 kg	Polyester

<sup>1</sup> Het aangegeven patiëntgewicht en de lengte zijn alleen richtlijnen; afwijkingen zijn mogelijk.

<sup>2</sup> Om de maximale belasting te behouden, moeten liften/accessoires met dezelfde of een hogere maximale belasting worden gebruikt.

Raadpleeg voor het kiezen van de juiste maat "De juiste maat kiezen" op pagina 7.

### Aanbevolen combinaties

Bij gebruik van één liftstelsel (LIKOGUARD L- en XL-plafondliften, LIKORALL 243- en 250-plafondliften, VIKING L en XL mobiele liften). De totale maximale belasting voor een liftstelsel wordt altijd bepaald door het product binnen het systeem met de laagste gespecificeerde maximale belasting.

Aanbevolen combinaties van de LIKO Ultra LiftPants-tilband met de Liko-tiljucken:	Universal SlingBar 350	Standard SlingBar 450	SlingGuard 450	Universal SlingBar 450	Universal SlingBar 600	Universal TwinBar 670	SlingGuard 670 Twin	Sling Cross-bar 450	Sling Cross-bar 670
Ultra LiftPants, XXL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ultra LiftPants, XXXL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Hoewel deze tabel als richtlijn dient, is het belangrijk om te erkennen dat bepaalde combinaties van tilbanden en tiljucken in verschillende omstandigheden ongeschikt kunnen zijn. Goedgekeurde combinaties in de matrix moeten nog steeds worden beoordeeld en gevalideerd door een getrainde zorgverlener.

Toelichting: ✓ = aanbevolen

Bij het gebruik van twee lifteenheden (UltraTwin-systeem) zijn alleen de volgende combinaties mogelijk.

Aanbevolen combinaties van de LIKO Ultra LiftPants-tilband met de Liko-tiljucken:	Universal SlingBar 350	Standard SlingBar 450	Universal SlingBar 450	Universal SlingBar 600
Ultra LiftPants, XXL	✓	✓	✓	✓
Ultra LiftPants, XXXL	✓	✓	✓	✓

Hoewel deze tabel als richtlijn dient, is het belangrijk om te erkennen dat bepaalde combinaties van tilbanden en tiljucken in verschillende omstandigheden ongeschikt kunnen zijn. Goedgekeurde combinaties in de matrix moeten nog steeds worden beoordeeld en gevalideerd door een getrainde zorgverlener.

Toelichting: ✓ = aanbevolen

### Andere combinaties

Combinaties van accessoires/producten die anders zijn dan de combinaties die worden aanbevolen door Liko, kunnen leiden tot risico's voor de veiligheid van de patiënt.

Liko, LikoGuard, LikoRall en Viking zijn handelsmerken van Baxter International Inc. of zijn dochterondernemingen.

Alle andere handelsmerken, productnamen of merkafbeeldingen die hierin worden weergegeven, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.



[www.hillrom.com](http://www.hillrom.com)

Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå, Zweden  
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

**Hill-Rom**