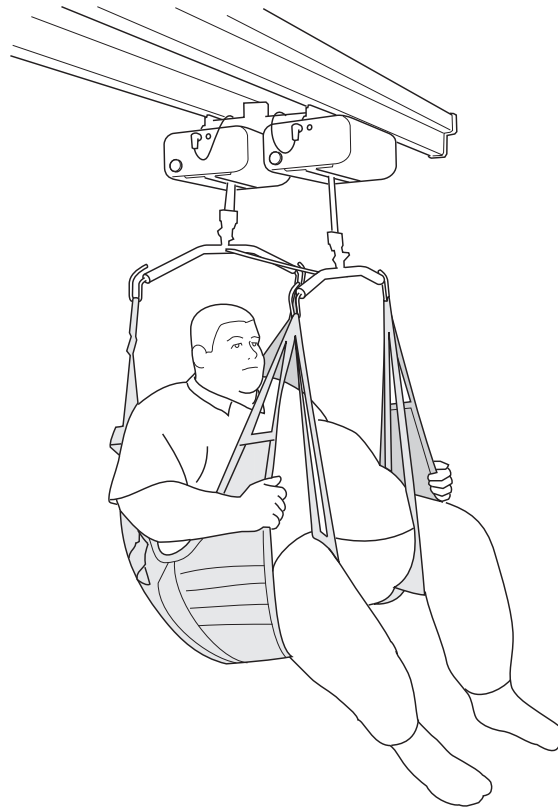


Arnés Liko™ UltraSling, modelo 06



Guía de instrucciones



Descripción del producto

La elevación de pacientes extremadamente pesados exige dispositivos y métodos de ayuda diseñados especialmente para ese propósito. Liko ha desarrollado la gama de productos Ultra para que los cuidadores puedan elevar pacientes pesados de forma segura y cómoda.

UltraSling sostiene toda la espalda hasta los hombros. Su diseño permite conectar cada soporte de pierna a la percha de manera individual, permitiendo más espacio para el abdomen y una sujeción óptima de las piernas.

Se recomienda que al menos dos cuidadores presten ayuda durante la transferencia.

UltraSling se utiliza junto con el sistema de elevación UltraTwin™ de Liko. Dependiendo de los accesorios individuales que se utilicen, el sistema podrá elevar una carga máxima de 500 kg (1100 lb). Las versiones del sistema UltraTwin están disponibles tanto para la instalación permanente como para la instalación autónoma, por ejemplo, en el sistema FreeSpan™ de Liko.





















En este documento, se denomina paciente a la persona elevada y cuidadores a las personas que le asisten.

IMPORTANTE

La elevación y el traslado de un paciente siempre implican un cierto riesgo. Lea la guía de instrucciones de la grúa de pacientes y de los accesorios de elevación antes de su uso. Es importante comprender la totalidad del contenido de la guía de instrucciones. El equipo solo debe ser utilizado por personal capacitado. Asegúrese de que los accesorios de elevación son adecuados para la grúa que se está utilizando. Tenga cuidado y precaución durante su uso. Como cuidador, usted es el responsable de la seguridad del paciente. Debe conocer la capacidad del paciente para soportar la elevación. Si no está seguro de algo, póngase en contacto con el fabricante o con el proveedor.

Descripción de los símbolos

Estos símbolos se pueden encontrar en este documento o en el producto.

Símbolo	Descripción
	Advertencia: esta situación requiere cuidado y atención especial.
	Lea la guía de instrucciones antes de utilizar el producto.
	Marca CE
	Fabricante legal
	Fecha de fabricación
	Identificador de producto
	Número de serie
	Producto sanitario
	No limpiar en seco
	No planchar
	Secar en secadora
	No secar en secadora
	Lavado El símbolo siempre va acompañado de la temperatura recomendada en °C y °F.
	No contiene látex.
	Inspección periódica
	No usar lejía
	Tender las prendas a la sombra
	Dirección hacia arriba y símbolo en la parte exterior del equipo
	Símbolo en la parte exterior del equipo
	El código de barras Data Matrix GS1 puede contener la siguiente información. (01) Número global de artículo comercial (11) Fecha de fabricación (21) Número de serie


Instrucciones de seguridad

⚠ Antes de realizar la elevación, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Una persona responsable de su organización debe decidir si es necesaria la asistencia de uno o más cuidadores, según cada caso.
- Asegúrese de que el arnés seleccionado satisface las necesidades del paciente en cuanto a modelo, talla, tejido y diseño.
- Por motivos de seguridad e higiene, utilice arneses individuales.
- Planifique la elevación para que se realice de forma tan segura y práctica como sea posible.
- Compruebe que el accesorio de elevación esté suspendido verticalmente y se desplace con libertad.
- Aunque las perchas Liko están equipadas con pestillos, se debe tener especial cuidado. Antes de elevar al paciente de la superficie donde se encuentra y una vez que las cintas del arnés se hayan extendido completamente, asegúrese de que estas estén correctamente sujetas a los ganchos de la percha.
- Asegúrese de que el paciente repose de forma segura en el arnés antes de trasladarlo a otra ubicación.
- No eleve nunca a un paciente por encima de la superficie donde se encuentra más de lo estrictamente necesario para completar la elevación y el traslado.
- Nunca deje al paciente desatendido durante una elevación.
- Asegúrese de que las ruedas de la silla de ruedas, cama, camilla, etc. están bloqueadas durante una elevación o traslado.
- Trabaje siempre de forma ergonómica. Utilice la capacidad del paciente para que participe activamente en las operaciones.
- Cuando el arnés no esté en uso, no lo deje bajo la luz directa del sol.
- Se recomienda quitar el arnés después de realizar el traslado.

⚠ Enganchar de manera incorrecta el arnés a la percha puede provocar lesiones graves al paciente.

⚠ Girar manualmente al paciente en la cama puede provocar lesiones al cuidador.

 Producto sanitario de clase I

Modificaciones en los productos

Los productos Liko están en un continuo desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de realizar modificaciones en ellos sin previo aviso. Póngase en contacto con su representante de Hill-Rom para obtener asesoramiento e información sobre las actualizaciones de los productos.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko posee la certificación de calidad de acuerdo a la ISO 9001 y su certificación correspondiente para el sector de los productos sanitarios ISO 13485. Liko también posee la certificación medioambiental de acuerdo a la ISO 14001.

Aviso para usuarios o pacientes de la UE

Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentran el usuario o el paciente.

Cuidado y mantenimiento

Compruebe el arnés antes de cada uso. Compruebe los siguientes puntos en relación con el uso y el desgaste:

- Tejido
- Cintas
- Costuras
- Lazos

⚠ No utilice accesorios de elevación que estén dañados.

Si no está seguro de algo, póngase en contacto con el fabricante o con el proveedor.

Instrucciones de lavado: Consulte la etiqueta del producto del arnés y el apéndice adjunto "Cuidado y mantenimiento de los arneses Liko".

Inspección periódica

El producto debe inspeccionarse al menos una vez cada 6 meses. Es posible que se requieran inspecciones más frecuentes si el producto se utiliza o se lava con más frecuencia de lo normal. Para los protocolos, póngase en contacto con su representante de Hill-Rom.

Tiempo de vida útil estimado

El tiempo de vida útil estimado del producto es de 1 a 3 años con un uso normal. El tiempo de vida útil estimado varía dependiendo del tejido, la frecuencia de uso, el procedimiento de lavado y el peso soportado.

Instrucciones de reciclaje

Todo el arnés (incluidos los listones, el material de relleno, etc.) debe clasificarse como residuo combustible.

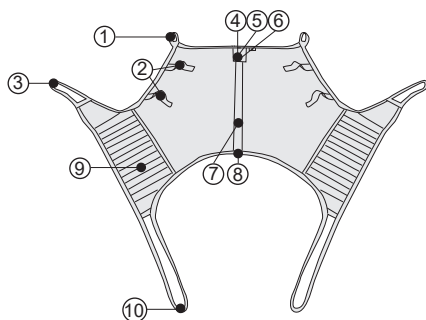
Hill-Rom evalúa y proporciona orientación a los usuarios sobre la manipulación y la eliminación seguras de sus dispositivos para ayudar a prevenir lesiones, entre las que se incluyen cortes, punciones en la piel o abrasiones, y sobre la limpieza y desinfección necesarias del producto sanitario después de su uso y antes de su eliminación. Los clientes deben cumplir todas las leyes y normativas federales, estatales, regionales o locales relativas a la eliminación segura de los productos sanitarios y los accesorios médicos.

En caso de duda, el usuario del dispositivo debe ponerse en contacto primero con el servicio de asistencia técnica de Hill-Rom para obtener orientación sobre los protocolos de eliminación segura.

Carga máxima

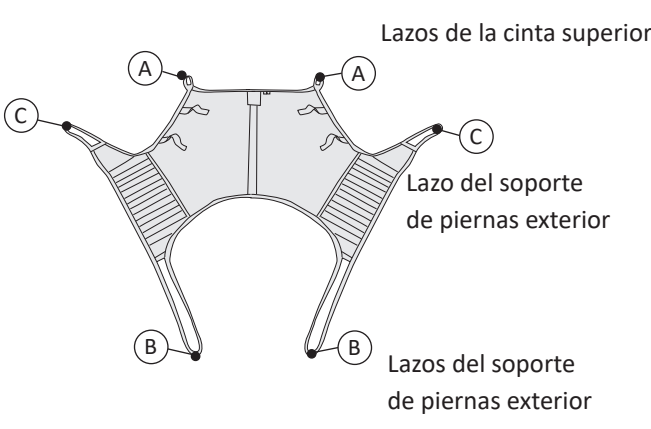
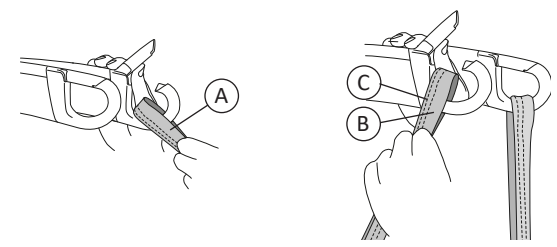
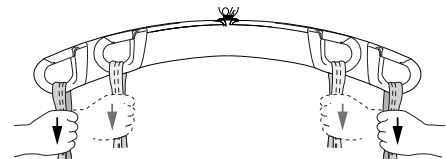
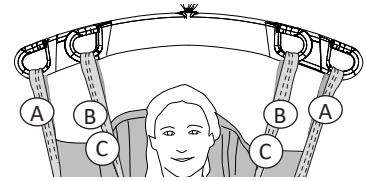
Se pueden aplicar diferentes cargas máximas permitidas a los distintos productos del sistema de elevación ya montado: sistema de raíl, unidad de elevación, percha, arnés y otros accesorios utilizados. En el caso del sistema de elevación en su conjunto, se debe respetar la carga máxima permitida menor de los distintos elementos que constituyen el sistema. Para que Liko UltraSling pueda transportar un peso de 500 kg (1100 lb), tanto la unidad de elevación como la percha y otros accesorios utilizados deben estar aprobados para esa carga máxima. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su representante de Hill-Rom.

Definiciones



1. Lazos de cinta superiores
2. Manillas
3. Lazo del soporte de piernas exterior
4. Etiqueta del producto
5. Etiqueta: Inspección periódica
6. Etiqueta: Marca individual (Belongs to)
7. Cinta central del respaldo
8. Extremo inferior
9. Soporte de piernas
10. Lazos del soporte de piernas exterior

Cómo enganchar un arnés UltraSling a una percha

 <p>Lazos de la cinta superior</p> <p>Lazo del soporte de piernas exterior</p> <p>Lazos del soporte de piernas exterior</p>	<p>1.</p> 
<p>2.</p> 	<p>3.</p>  <p>Las ilustraciones 1, 2 y 3 muestran el uso de perchas con dos anchos diferentes. Se aplica el mismo principio si se utilizan dos perchas Universal SlingBar 600.</p>

Utilización del arnés UltraSling en posición sentada:

1. Coloque el arnés por detrás de la espalda del paciente con la etiqueta hacia fuera y hacia arriba. Usando la palma de su mano, lleve el extremo inferior del arnés hacia la parte inferior del coxis del paciente.
2. Coloque los soportes de piernas a lo largo de la parte exterior de cada muslo, para que el tejido del borde inferior del arnés quede completamente extendido.
3. Empuje los soportes de piernas debajo de las piernas del paciente, con los lazos por debajo del tejido. Cuando el tejido de los soportes de piernas alcance la parte interior de los muslos, tire de los lazos de soporte de piernas. Tire de los lazos interiores y exteriores hasta que tengan la misma longitud.
4. Enganche los lazos de la cinta a la percha. Los lazos de la cinta superior están sujetos a la percha más ancha y los lazos soporte de piernas están sujetos a la percha más estrecha.
5. Eleve al paciente.

Para colocar el arnés UltraSling en posición horizontal, recomendamos la sábana de movilización RepoSheet™ Original de Liko para evitar hacer rodar al paciente. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de Hill-Rom.

Resumen del arnés Liko™ UltraSling, modelo 06

Producto	N.º de prod.	Talla	Material	Carga máxima
Liko UltraSling	3506115	Normal	Poliéster	500 kg (1100 lb)

Combinaciones recomendadas

Sistema UltraLift: Recomendamos dos perchas Universal Slingbar 600 (n.º de prod. 3156086) o la Universal SlingBar 450 (n.º de prod. 3156085) junto con la Universal SlingBar 600 (n.º de prod. 3156086). Si utiliza perchas con dos anchos diferentes, la más ancha deberá utilizarse con los lazos de cinta superiores del arnés y la más estrecha con los lazos de cinta de soporte de piernas.

