

Productbeschrijving

Het LikoStretch Mod 600 IC-accessoire met Straps 600 IC is bedoeld voor horizontaal tillen en verplaatsen in extra veeleisende tilsituaties. De banden worden op comfortabele wijze onder de patiënt geplaatst zonder dat de patiënt hoeft te worden gedraaid of gerold.

Het LikoStretch Mod 600 IC-accessoire kan worden gebruikt in combinatie met: LikoGuard™-plafondlift, Likorall™-plafondlift, Multirall™-plafondlift, Viking™ L mobiele lift, Viking™ XL mobiele lift en Golvo™ mobiele lift.

In dit document wordt de persoon die wordt opgetild de patiënt genoemd, en de persoon die hierbij helpt de zorgverlener.



BELANGRIJK!

Het optillen en verplaatsen van een patiënt gaat altijd met enig risico gepaard. Lees vóór het gebruik de gebruiksaanwijzingen voor zowel de patiëntlift als de tilaccessoires. Het is belangrijk dat u de volledige inhoud van de gebruiksaanwijzingen begrijpt. De apparatuur mag alleen worden gebruikt door getraind personeel. Controleer of de tilaccessoires geschikt zijn voor de lift die u wilt gebruiken. Wees voorzichtig en ga zorgvuldig te werk tijdens het gebruik. Als zorgverlener bent u altijd verantwoordelijk voor de veiligheid van de patiënt. U moet weten of de patiënt het tillen aankan. Neem contact op met de fabrikant of leverancier als er iets onduidelijk is.

Inhoudsopgave

Symboolbeschrijving	3
Veiligheidsinstructies	4
Definities	4
Technische gegevens	4
Maximale belasting	5
Aanbevolen tilaccessoires	5
Montage	6
Tillen met banden	7
Bijstellen van het zwaartepunt tijdens het tillen met LiftStraps.....	9
Verzorging en onderhoud.....	10

Symboolbeschrijving

Deze symbolen komen voor in dit document en/of op het product.

Symbool	Beschrijving
	Waarschuwing: deze situatie vereist extra zorg en aandacht
	Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing
	Dit product voldoet aan de EC-richtlijnen.
	Fabrikant
	Productiedatum.
	Let op! Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie
	Productidentificatie
	Serienummer
	Medisch hulpmiddel
	Recyclebaar
	GS1 Data Matrix-barcode die de volgende informatie kan bevatten (01) Global Trade Item Number (internationaal uniek artikelnummer) (11) Productiedatum (21) Serienummer

Veiligheidsinstructies

⚠ Bedenk vóór het tillen het volgende:


- Controleer of het tilaccessoire correct aan de lift bevestigd is.
- Wij adviseren dat bij het tillen met het LikoStretch™ Mod 600 IC-accessoire ten minste twee zorgverleners assisteren.
- Plan het tillen voordat het wordt uitgevoerd, zodat het zo veilig en soepel mogelijk verloopt.
- Controleer voordat de patiënt daadwerkelijk getild wordt maar terwijl de banden volledig gestrekt zijn, of de banden correct aan de stretcher zijn bevestigd.
- Zorg ervoor dat de zwenkwielen op bedden, stretchers enz. tijdens het tillen/verplaatsen op de rem staan. De zwenkwielen van de mobiele lift moeten echter zijn ontgrendeld wanneer deze met de stretcher worden gebruikt.
- Omdat het LikoStretch Mod 600 IC-accessoire zelfvergrendelende tilbanden heeft, moet de patiënt volledig op een stevig oppervlak rusten voordat de banden losgaan.

⚠ Laat een patiënt die is opgetild nooit zonder toezicht achter.

⚠ De stretcher mag onder geen enkele omstandigheid worden aangepast. Neem contact op met Hill-Rom als u nog vragen hebt.

CE Medisch hulpmiddel, productklasse I

Definities

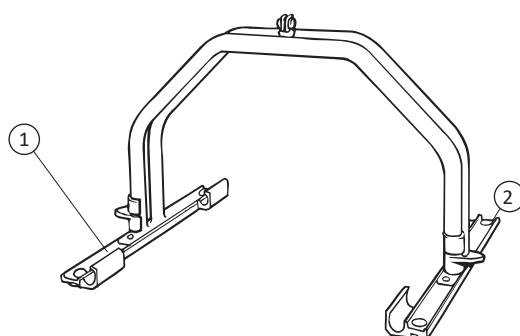

1. Liftrail
2. Veiligheidsvergrendeling

Voor een compleet tilsysteem zijn de volgende tilaccessoires nodig: SideRails, banden.
Zie "Aanbevolen tilaccessoires" op pagina 5.

Technische gegevens

Maximale belasting: 250 kg
Breedte: 80 cm

Maximale belasting

De maximale belasting kan verschillen afhankelijk van de producten die op het liftstelsel zijn gemonteerd, zoals de lift, het tiljuk, tilband en andere accessoires. Voor het gemonteerde liftstelsel is de maximale belasting altijd gelijk aan de laagste maximale belasting van iedere afzonderlijke component. Bijvoorbeeld: het LikoStretch™ Mod 600 IC-accessoire heeft een maximale belasting van 250 kg. In combinatie met de Quick-release Hook Universal met een maximale belasting van 300 kg en een Likorall™-plafondlift met een maximale belasting van 200 kg, geldt de maximale belasting van 200 kg voor het gemonteerde tilstelsel.

Zie hiervoor de markeringen op de lift en de tilaccessoires of neem bij vragen contact op met uw vertegenwoordiger van Hill-Rom.


Aanbevolen tilaccessoires

SideRails 600 (paar)

Te combineren met banden.

Max. 250 kg

productnr. 3166506

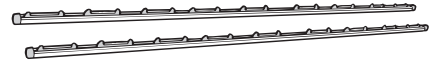


Straps Mod 600 IC, 8 stuks/set

Polyester.

Max. 250 kg onafhankelijk van het aantal gebruikte banden (6 - 8 stuks).

productnr. 3684001

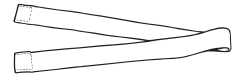

Spatula Mod 600 IC

Voor het gemakkelijk en comfortabel aanbrengen van banden

productnr. 3684002




Stretch Leveller

Aanbevolen accessoire voor het balanceren van het zwaartepunt tijdens het tillen.

Max. 300 kg

productnr. 3156200

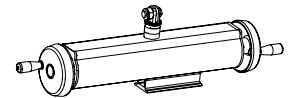


Vaste kit 4

Past op het LikoStretch Mod 600 IC-accessoire in combinatie met de LikoGuard™ L-, XL-plafondlift.

LET OP! Moet worden samengesteld door door Hill-Rom geautoriseerd personeel!

productnr. 3308860

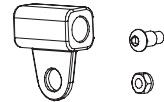


Quick-release Hook TDM

De Quick-release Hook TDM van Liko maakt deel uit van een systeem waarmee snel en eenvoudig tilaccessoires kunnen worden verwisseld op de mobiele en stationaire liften van Liko.

Max. 300 kg

productnr. 3156502

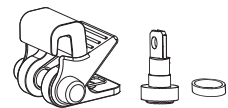

Neem contact op met uw vertegenwoordiger van Hill-Rom voor meer informatie.

Adapter 12 mm


Max. 300 kg

productnr. 2016504




Montage

Vaste montage

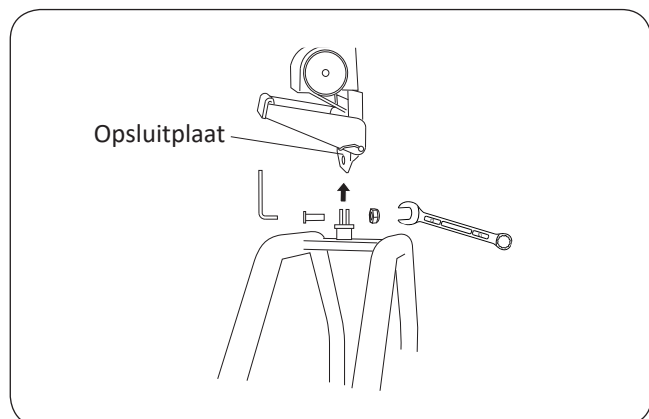

Likorall™ 242-plafondlift (niet R2R) en Golvo™ mobiele lift
Het LikoStretch Mod 600 IC-accessoire wordt rechtstreeks met M10 x 25 schroeven en moeren in de opsluitplaat van de lift gemonteerd.

Aanbevolen gereedschappen: 6 mm inbussleutel en 17 mm ringsleutel.

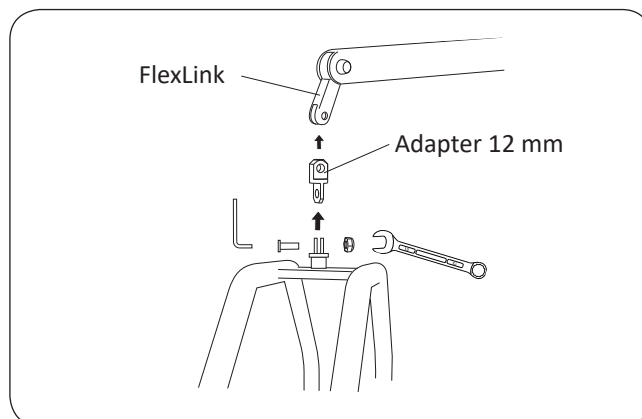


Viking™ L mobiele lift, Viking™ XL mobiele lift

Het LikoStretch Mod 600 IC-accessoire wordt gemonteerd via de adapter 12 mm (accessoire, zie pagina 6) met M10 x 25 schroeven en moeren.

Aanbevolen gereedschappen: 6 mm inbussleutel en 17 mm ringsleutel.

Montage met snelkoppeling

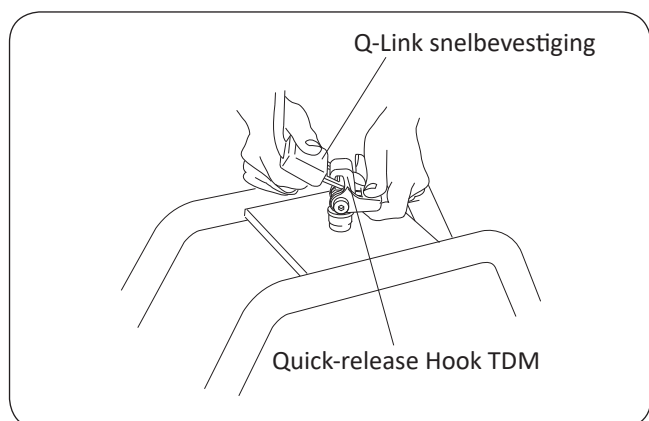


Het LikoStretch Mod 600 IC-accessoire kan zijn voorzien van de Quick-release Hook TDM (zie pagina 5) waarmee deze snel en eenvoudig zonder gereedschap aan de lift bevestigd kan worden.

De lift moet zijn voorzien van de Q-Link snelbevestiging om de Quick-release Hook TDM te kunnen bevestigen. Sommige liften in het assortiment van Liko (Multirall-plafondlift, Likorall R2R-plafondlift) hebben dit als standaardoptie, terwijl andere liften die bedoeld zijn voor het gebruik met het LikoStretch Mod 600 IC-accessoire kunnen worden aangevuld met de Q-Link snelbevestiging als extra optie.


Tillen met banden

Plaats de draagbanden op de gewenste posities onder het lichaam; het aantal benodigde banden moet per geval door het verantwoordelijke verplegend personeel worden bepaald (zie de alternatieven hieronder). Om veiligheidsredenen is het LikoStretch Mod 600 IC-accessoire zo ontworpen dat de banden automatisch worden vergrendeld wanneer er belasting op de correct bevestigde banden wordt uitgeoefend. Daarom moet de patiënt op het bed worden neergelaten voordat de banden kunnen worden losgemaakt en verplaatst.


6 banden

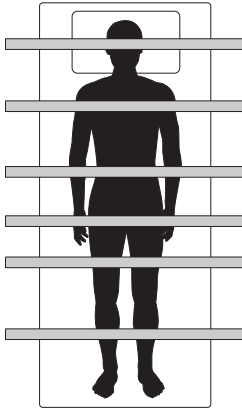


7 banden

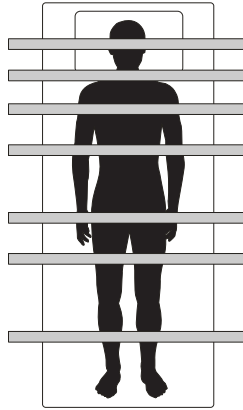


8 banden

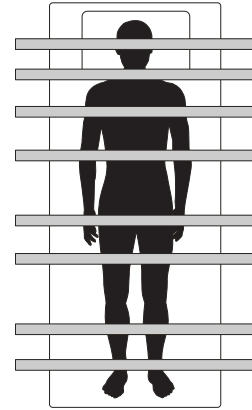


Begin met het leggen van de banden boven de plaatsen op het lichaam waar de banden later zullen gaan tillen.

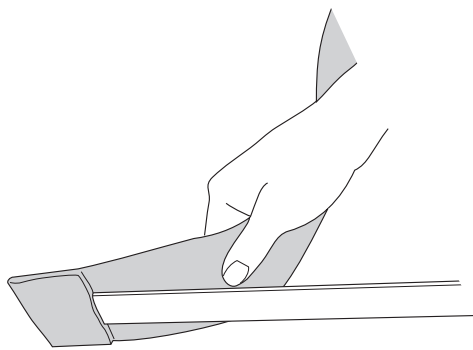


Steek de spatel in de kleine zak op de band. Draai de band zodanig dat de zak naar beneden wijst. Het is veel gemakkelijker om de banden te plaatsen als het oppervlak/bedlaken strak en gelijkmatig is.

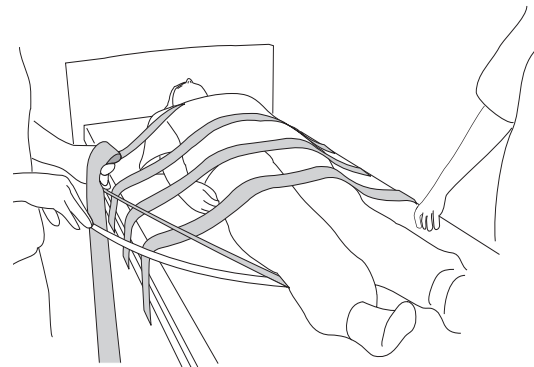


Plaats de banden met de spatel onder de patiënt. Houd de band ongeveer 40° van het bed en duw de spatel voorzichtig schuin naar beneden en naar binnen.

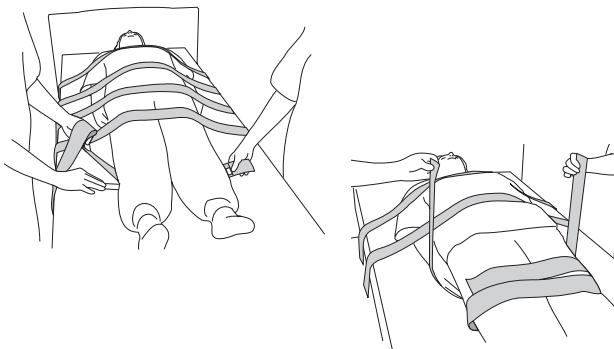

Pak de band aan de tegenoverliggende kant vast en trek deze naar buiten zodat hij aan beide zijden even lang is. Wanneer elke band is geplaatst, legt u de banduiteinden boven op de patiënt.

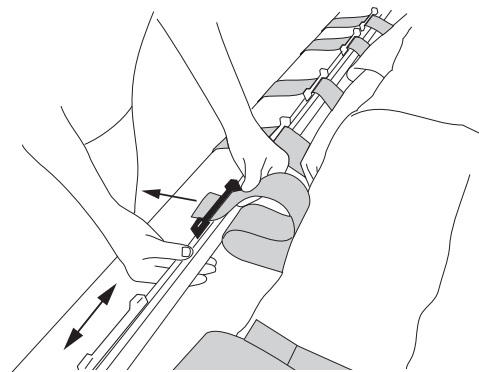


Verwijder de SideRails en steek de banden door de bandvergrendelingen, zoals is afgebeeld. **LET OP! Begin altijd door de banden vanaf het hoofdeinde naar beneden te trekken.** De bandvergrendelingen kunnen opzij schuiven, zodat ze overeenkomen met de positie van de banden.

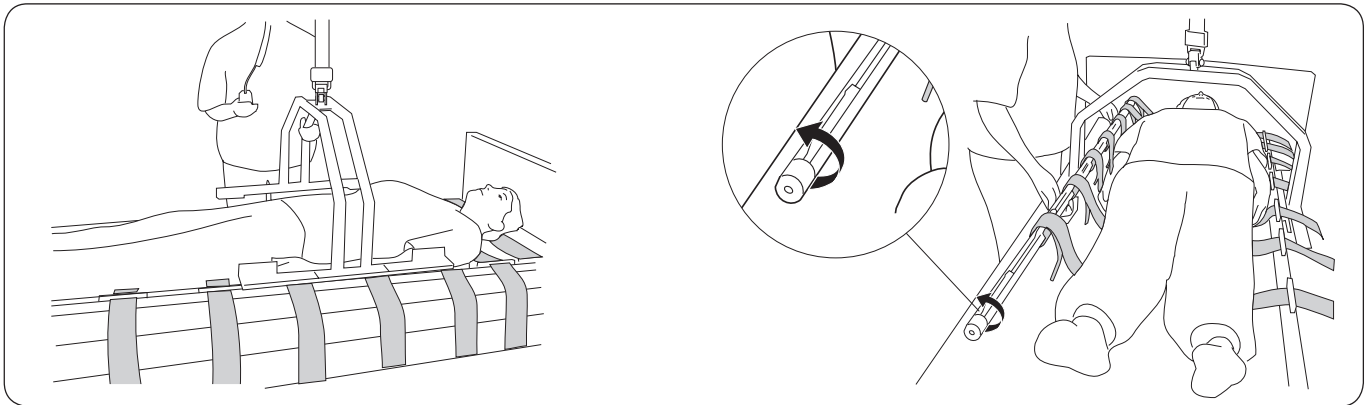


Laat de stretcher neer op het bed, recht boven het zwaartepunt van de patiënt; dit punt ligt gewoonlijk vlak onder de navel.

Trek de SideRail naar u toe. Draai de SideRail vervolgens 360° (helemaal rond), zoals wordt weergegeven op de afbeelding. **LET OP! De uiteinden van de banden bevinden zich dan onder de banden.**

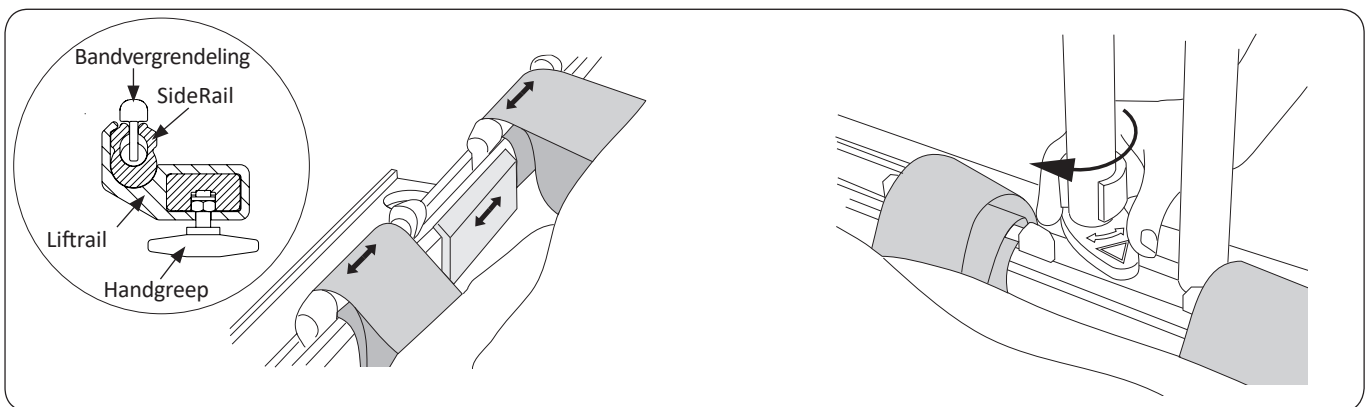

Plaats de SideRails zodanig in de liftrail van de stretcher dat ze op hun plaats worden vergrendeld. Zorg ervoor dat de banden niet klem komen te zitten tussen de liftrail en de SideRail. Als dit het geval is, stelt u de liftrail af met de handgreep aan de onderkant of verplaatst u de band.

Draai de rode veiligheidsvergrendeling naar binnen over de SideRail. (Zelfs bij een gedeeltelijke draai, d.w.z. minder dan 180°, kan de SideRail niet onbedoeld worden losgehaakt.)

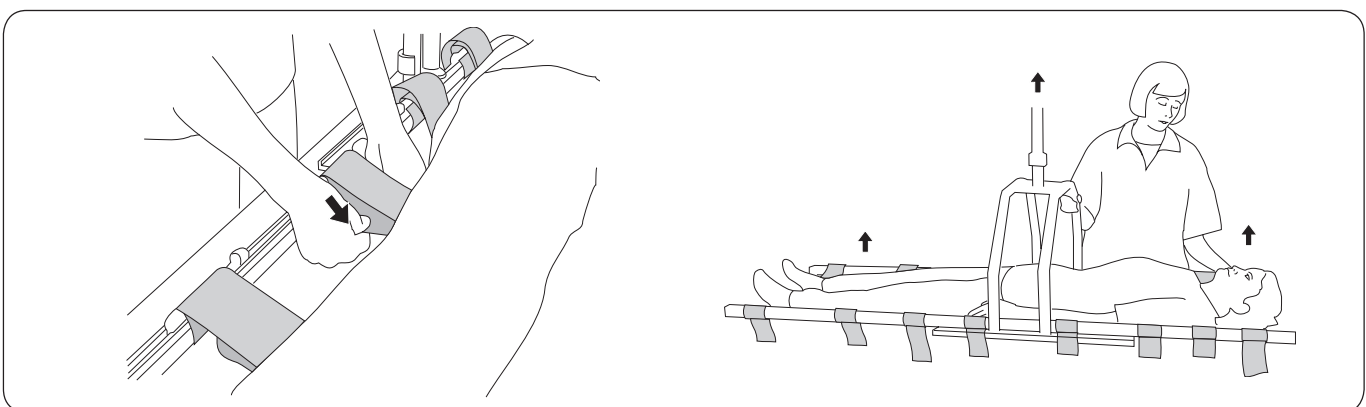


Trek elke band strak door het uiteinde van de band inwaarts te trekken – iets neerwaarts en naar de patiënt toe, zoals wordt getoond op de afbeelding.

Het tillen kan beginnen. Controleer of de patiënt in de gewenste positie hangt, d.w.z. horizontaal of normaal met het hoofd iets hoger. Zie "Bijstellen van het zwaartepunt tijdens het tillen met banden", pagina 9.



Als het tillen is voltooid, verwijdert u de banden volgens de beschrijving hieronder.

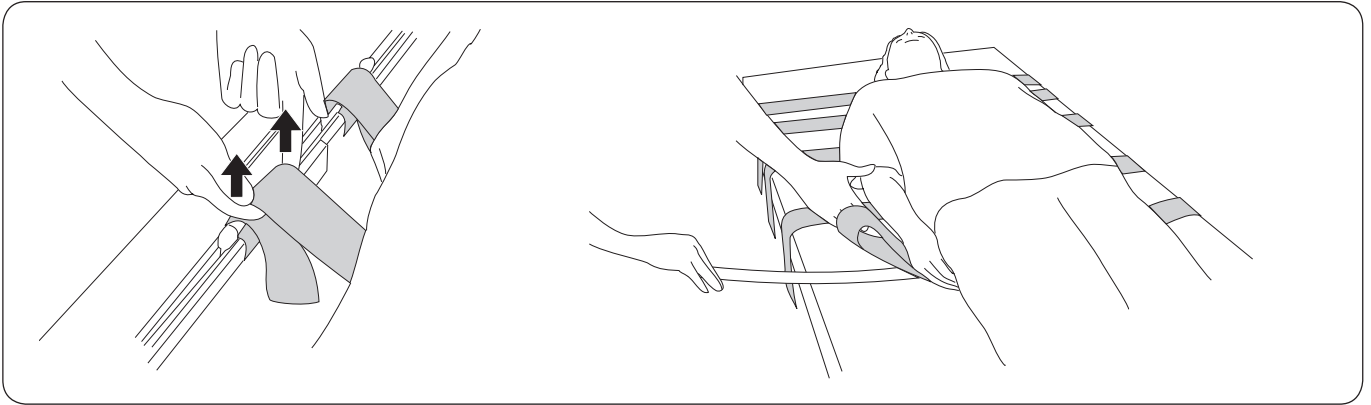


Laat de patiënt neer op een stevig oppervlak. Maak de banden los door ze recht omhoog te tillen, zoals wordt weergegeven op de afbeelding. Wanneer alle banden zijn losgemaakt, kan de SideRail worden losgehaakt en verwijderd. Vergeet niet de veiligheidsvergrendeling terug te draaien zodat deze een hoek van 90° maakt ten opzichte van de liftrail.

Verwijder de banden door ze voorzichtig onder de patiënt te geleiden met behulp van de spatel. Duw voor de minste wrijving de uiteinden van de banden onder de banden zelf. U kunt ook de banden voorzichtig onder de patiënt uit trekken zonder de spatel.


Bijstellen van het zwaartepunt tijdens het tillen met banden

Door het bijstellen van de plaats van de stretcher

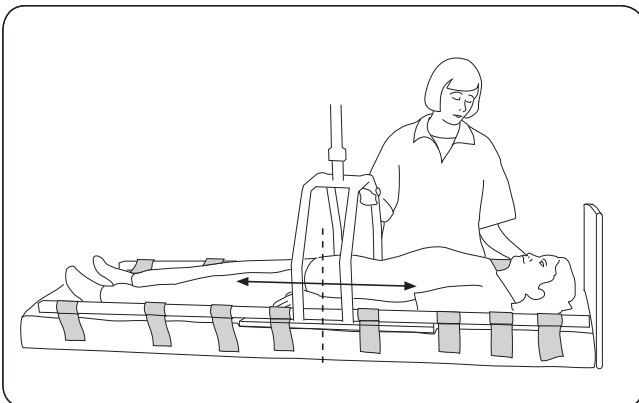

Als de patiënt tijdens het tillen niet in evenwicht is, past u dit aan door de patiënt op een stevige basis te laten zakken, zodat het gewicht op de banden kan worden ontlast. In deze positie kunnen de SideRails langs de tilrail van de stretcher worden verplaatst om de juiste balans te bereiken.

Met het tilaccessoire Stretch Leveller

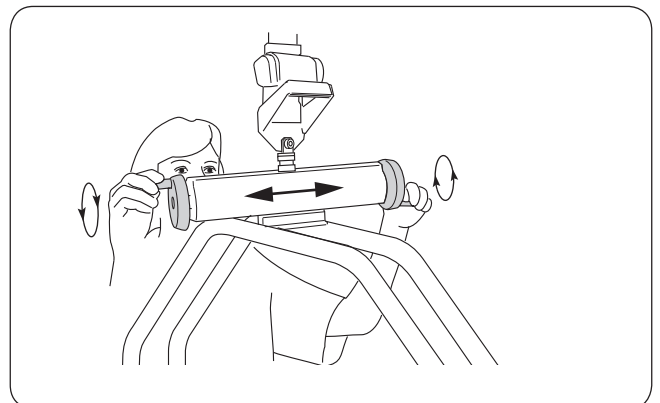

Met de Stretch Leveller (zie pagina 5) kan het de zwaartepunt gemakkelijk worden geregeld terwijl de patiënt opgetild is door aan de knoppen op de Stretch Leveller te draaien.

Verzorging en onderhoud

Voor probleemloos gebruik moeten voor elk gebruik bepaalde details worden gecontroleerd:

- controleer de stretcher en tilaccessoires op uitwendige beschadigingen
- controleer of de veiligheidsvergrendelingen goed werken.

Reinig de stretcher indien nodig met een vochtige doek, met gebruik van warm water of ontsmettingsmiddelen.

LET OP! Gebruik geen schoonmaakmiddelen die fenol of chloor bevatten, omdat deze aluminium en polyamide kunnen beschadigen.

⚠ De stretcher mag niet worden blootgesteld aan stromend water.

Service

Ten minste eenmaal per jaar moet een periodieke inspectie van de stretcher worden uitgevoerd.

⚠ Periodieke inspecties moeten worden uitgevoerd door personeel dat door Hill-Rom is geautoriseerd.

⚠ Het is niet toegestaan onderhoud te plegen aan de stretcher als er een patiënt op ligt.

Onderhoudsovereenkomst

Hill-Rom biedt klanten de gelegenheid tot het afsluiten van een servicecontract voor onderhoud en regelmatige controle van uw Liko-product.

Verwachte levensduur

Bij correcte behandeling, onderhoud en periodieke inspecties conform de instructies van Liko heeft het product een verwachte levensduur van 10 jaar.

Recyclinginstructies

De stretcher moet worden gerecycled als metaal.

Hill-Rom voert beoordelingen uit en biedt gebruikers richtlijnen voor het veilig hanteren en afvoeren van de apparatuur om letsel zoals (maar niet beperkt tot) snijwonden, doorboring van de huid en schaafwonden te voorkomen, en voor de vereiste reiniging en desinfectie van het medische hulpmiddel na gebruik en voorafgaand aan het afvoeren. Klanten moeten zich houden aan alle federale, landelijke, regionale en/of lokale wetten en voorschriften zoals deze gelden voor het veilig afvoeren van medische hulpmiddelen en accessoires.

In geval van twijfel dient de gebruiker van het hulpmiddel eerst contact op te nemen met de technische ondersteuning van Hill-Rom voor advies over protocollen over veilig afvoeren.

Productwijzigingen

Producten van Liko worden continu verder ontwikkeld. Daarom behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving productwijzigingen aan te brengen. Neem contact op met uw vertegenwoordiger van Hill-Rom voor advies en informatie over productverbeteringen.

Design and Quality by Liko in Sweden


Liko is gecertificeerd conform de ISO 9001-kwaliteitscertificatie en de daaraan gelijkwaardige ISO 13485-kwaliteitscertificatie voor de medische-hulpmiddelenindustrie. Liko is ook gecertificeerd conform de milieustandaard ISO 14001.

Kennisgeving voor gebruikers en/of patiënten in de EU

Elk ernstig incident dat heeft plaatsgevonden met betrekking tot het hulpmiddel dient te worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde instantie van de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.



www.hillrom.com

 Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Zweden
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom