

Upute za uporabu



















Proizvod Octo Liftsheet namijenjen je za podizanje i premještanje pacijenata u vodoravnom položaju. Namijenjen je samo za uporabu s priborom OctoStretch™, br. artikla 3156056.


VAŽNO!

Podizanje i premještanje pacijenta uvijek podrazumijeva određen stupanj opasnosti. Prije uporabe pročitajte upute za uporabu dizalice za pacijenta i pribora Liko OctoStretch. Važno je potpuno razumijevanje sadržaja uputa za uporabu. Opremu smije upotrebljavati samo obučeno osoblje. Budite pažljivi i oprezni tijekom uporabe. Kao njegovatelj odgovorni ste za sigurnost pacijenta u svakom trenutku. Ako vam nešto nije jasno, obratite se proizvođaču ili dobavljaču.

Opis simbola

Ovi se simboli mogu pronaći u ovom dokumentu i/ili na proizvodu.

Simbol	Opis
	Upozorenje; ova situacija zahtijeva dodatnu pažnju i pozornost.
	Oznaka CE
	Zakonski proizvođač
	Datum proizvodnje
	Pročitajte upute za uporabu prije uporabe.
	Identifikator proizvoda
	Serijski broj
	Medicinski proizvod
	Nemojte kemijski čistiti
	Nemojte glačati
	Ne sušite u sušilici za rublje
	Pranje Simbol se uvijek navodi u kombinaciji s preporučenom temperaturom iskazanom u °C i °F.
	Ne sadrži lateks
	Nemojte izbjeljivati
	Periodički pregled
	Smjer prema gore i simbol na vanjskoj površini proizvoda.
	Simbol na vanjskoj površini proizvoda.
	GS1 podatkovna matrica barkodova koja može sadržavati sljedeće podatke. (01) Globalni broj trgovačke jedinice (11) Datum proizvodnje (21) Serijski broj

 Medicinski proizvod klase I

Sigurnosne upute

Izmjene proizvoda

Proizvodi Liko podliježu stalnom razvoju i stoga pridržavamo pravo na izmjene proizvoda bez prethodne obavijesti. Obratite se predstavniku tvrtke Hill-Rom za savjet i informacije o nadogradnjama proizvoda.

Design and Quality by Liko in Sweden

Sustav upravljanja za proizvodnju i razvoj proizvoda certificiran je u skladu s normom ISO9001 i pripadajućom normom za medicinske proizvode ISO13485. Sustav upravljanja također je certificiran u skladu s ekološkom normom ISO14001.

Napomena za korisnike i/ili pacijente unutar EU-a

Svaki ozbiljan incident koji se dogodi, a vezan je uz uređaj, treba prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj korisnik i/ili pacijent imaju nastan.

Njega i održavanje

Pregledajte proizvod prije svake uporabe. Pregledajte sljedeće stavke u pogledu trošenja i oštećenja:

- tkanina
- šavovi
- petlje

⚠ Ne upotrebljavajte oštećeni pribor za podizanje.

Ako nešto nije jasno, obratite se proizvođaču ili dobavljaču.

Upute za pranje

Pogledajte oznaku proizvoda na priboru za podizanje i dodatak „Njega i održavanje Liko nosiljki“.

Periodički pregled

Proizvod treba pregledati najmanje svakih šest mjeseci. Češći pregledi mogu biti potrebni ako se proizvod upotrebljava ili pere češće nego što je to ubičajeno. Ako vas zanimaju protokoli, obratite se svojem predstavniku tvrtke Hill-Rom.

Očekivani životni vijek

Proizvod ima očekivani životni vijek od 5 godina. Očekivani životni vijek temelji se na 10 uporaba dnevno i pranju jedanput tjedno u skladu s uputama za pranje. Hill-Rom preporučuje da proizvod upotrebljavate samo tijekom njegovog životnog vijeka.

Upute za recikliranje


Cijeli proizvod LiftSheet treba odložiti kao zapaljivi otpad.

Hillrom izrađuje procjene i daje smjernice svojim korisnicima o sigurnom rukovanju i odlaganju njegovih proizvoda radi sprječavanja ozljeda, uključujući, između ostalog, o sljedećem: posjekotine, kožni ubodi, ogrebotine, nužno čišćenje i dezinfekcija medicinskog proizvoda nakon uporabe i prije odlaganja. Kupci se trebaju pridržavati svih saveznih, državnih, regionalnih i/ili lokalnih zakona i propisa koji se tiču sigurnog odlaganja medicinskih proizvoda i pribora.

U slučaju dvojbi, korisnik uređaja prvo se mora obratiti tehničkoj podršci tvrtke Hillrom radi dobivanja uputa o protokolima za sigurno odlaganje.

Pregled proizvoda Liko™ Octo LiftSheet™

Naziv	Veličina	Br. artikla	Materijal	Duljina (a X b)	Maks. opterećenje
Octo LiftSheet	M	3683105	Poliester	160 x 50 cm	200 kg
Octo LiftSheet	L	3683106	Poliester	170 x 90 cm	200 kg

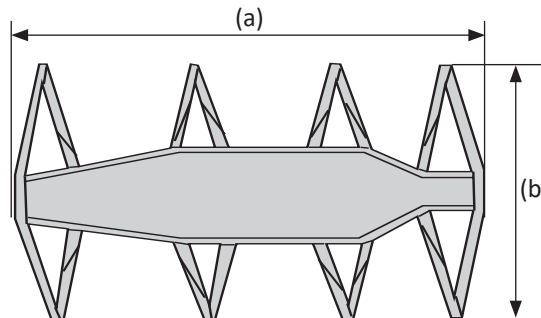

www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Švedska
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom