

## Инструкция

Подъемный гамак Octo LiftSheet предназначен для подъема и перемещения пациентов в горизонтальном положении. Он предназначен для использования только с подвесным устройством OctoStretch™ (номер по каталогу: 3156056).



### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Подъем и перемещение пациента всегда сопряжены с определенными рисками. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией к подъемнику и подвесному устройству OctoStretch компании Liko. Важно детально разобраться в данных, приведенных в инструкции. Эксплуатация оборудования должна проводиться только сотрудниками, прошедшими соответствующее обучение. Проявляйте осмоторительность и осторожность во время эксплуатации. Вы, как лицо, осуществляющее уход за пациентом, всегда несете ответственность за безопасность пациента. При возникновении вопросов обращайтесь к производителю или поставщику.

## Описание символов

В настоящем документе и/или на изделии можно найти следующие символы.

Символ	Описание
	Предупреждение: эта ситуация требует исключительной осторожности и особой внимательности
	Маркировка CE
	Официальный производитель
	Дата изготовления
	Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией
	Идентификатор изделия
	Серийный номер
	Медицинское устройство
	Не подвергать химической чистке
	Не гладить утюгом
	Не подвергать машинной сушке
	Стирка Данный символ всегда сопровождается значением рекомендуемой температуры стирки в градусах Цельсия (°C) и Фаренгейта (°F)
	Не содержит латекса
	Не отбеливать
	Периодическая проверка
	Указатель направления вверх и маркировка на внешней стороне изделия
	Маркировка на внешней стороне изделия
	Матричный код GS1 Data Matrix, содержащий следующие данные: (01) — глобальный номер товарной единицы (11) — дата производства (21) — серийный номер

Медицинское устройство класса I

# Инструкции по технике безопасности

## Модификации изделия

Продукция компании Liko непрерывно совершенствуется, поэтому мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Для получения консультации и сведений об обновлении продукции обращайтесь в представительство компании Hill-Rom.

## Design and Quality by Liko in Sweden

Система управления как производством, так и совершенствованием продукции соответствует требованиям стандарта ISO 9001, а также требованиям эквивалентного ему стандарта ISO 13485 для медицинского оборудования. Кроме того, система управления соответствует требованиям экологического стандарта ISO 14001.

## Примечание для пользователей и/или пациентов в ЕС

Обо всех серьезных происшествиях, связанных с данным устройством, необходимо сообщать производителю, а также сотрудникам уполномоченного органа региона, в котором находится пользователь и/или пациент.

## Обслуживание и уход

Проверяйте состояние изделия перед каждым использованием. Проверьте следующие элементы на предмет износа и повреждений:

- Материя
- Швы
- Петли

**⚠ Не используйте поврежденные принадлежности для подъема.**

При возникновении вопросов обращайтесь к производителю или поставщику.

## Инструкции по стирке

См. этикетку изделия на принадлежности для подъема и приложение «Уход и техобслуживание строп Liko».

## Периодическая проверка

Осмотр изделия необходимо проводить не реже, чем раз в полгода. Более частые проверки требуются, если изделие используется или подвергается стирке чаще обычного. Для получения инструкций обращайтесь в представительство компании Hill-Rom.

## Ожидаемый срок службы

Ожидаемый срок службы изделия составляет 5 лет. Ожидаемый срок службы рассчитывается с учетом того, что изделие используется 10 раз в день и подвергается стирке один раз в неделю в соответствии с инструкциями по стирке. Компания Hill-Rom рекомендует использовать изделие только на протяжении ожидаемого срока службы.

## Инструкции по переработке


Все компоненты подъемного гамака LiftSheet подлежат сортировке как горючие отходы.

Компания Hillrom проводит оценку и предоставляет пользователям рекомендации по безопасной эксплуатации и утилизации устройств с целью профилактики травмирования, включая, помимо прочего, предотвращение таких травм, как порезы, повреждения кожного покрова, ссадины, а также предоставляет рекомендации по чистке и дезинфекции медицинских устройств после использования и перед их утилизацией. Утилизация медицинских устройств и принадлежностей должна проводиться безопасным способом в соответствии со всеми федеральными, государственными, региональными и/или местными законами и нормативными правилами.

При наличии сомнений пользователь устройства должен сначала обратиться в службу технической поддержки компании Hillrom за разъяснением правил безопасной утилизации.

## Обзор гамака Octo LiftSheet™ компании Liko™

Название	Размер	Номер по каталогу	Материал	Длина (a X b)	Максимальная грузоподъемность
Octo LiftSheet	M	3683105	Полиэстер	160 x 50 см	200 кг
Octo LiftSheet	L	3683106	Полиэстер	170 x 90 см	200 кг

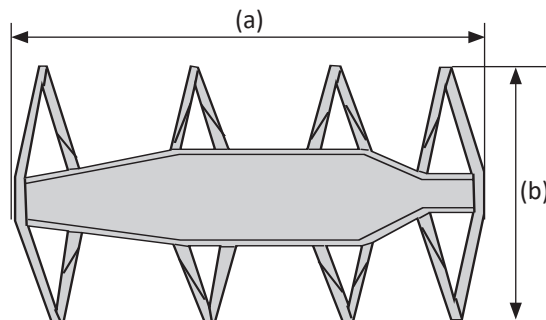

[www.hillrom.com](http://www.hillrom.com)

Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå, Sweden (Швеция)  
+46 (0) 920-474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for  
patients and their caregivers:

**Hill-Rom**