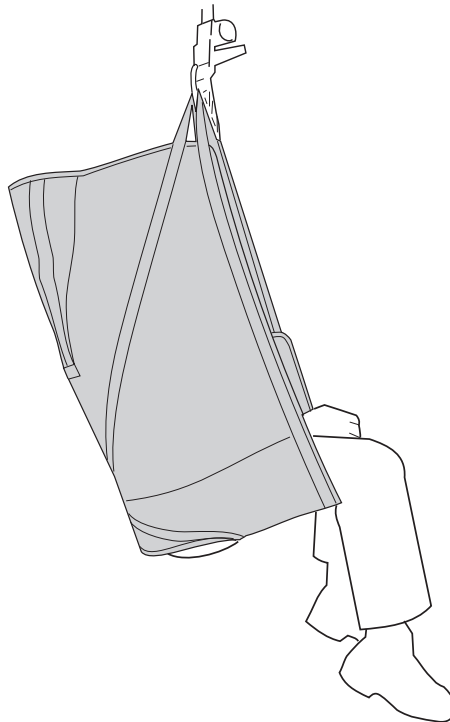


Solo HighBack Sling Mod. 25



Gebruiksaanwijzing



Productbeschrijving

De patiënt zit comfortabel en veilig in de Solo HighBack Sling. Dankzij het innovatieve 'omwikkel'-ontwerp is de Solo HighBack Sling zeer eenvoudig om te doen en weer te verwijderen. De Solo HighBack Sling is zo ontworpen dat elke patiënt dit hulpmiddel zonder individuele aanpassingen kan gebruiken. Een goed en zorgvuldig aangebrachte Solo HighBack Sling biedt de patiënt een hoge mate van comfort en laat de patiënt zich veilig voelen.

De Solo HighBack Sling biedt ondersteuning voor het hele lichaam en zorgt voor een licht naar achteren gekantelde zithouding die geschikt is voor patiënten met een slechte stabiliteit van de romp. Voor grotere maten van de tilband kan een combinatie met een TwinBar 670 de perfecte keuze zijn.

De Solo HighBack Sling wordt aanbevolen voor het tillen van een patiënt vanuit en naar een bed, rolstoel of toilet.

Het is belangrijk om de juiste maat te kiezen voor optimaal comfort en optimale veiligheid. Bij een te grote tilband kan de patiënt uit de band glijden, terwijl een te kleine tilband te strak in het kruis zit en ongemak kan veroorzaken.

De Solo HighBack Sling kan samen met alle plafondliften en mobiele liften van Liko worden gebruikt. U kunt kiezen tussen de plafondliften LikoGuard™, Likorall™ en Multirall™ of de mobiele liften Golvo™, Viking™, Uno™ en Liko™ M220/M230.












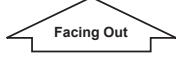
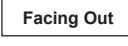

In dit document is de patiënt degene die wordt opgetild en de persoon die hierbij helpt wordt de zorgverlener genoemd.

BELANGRIJK!

Het optillen en verplaatsen van een patiënt gaat altijd met enig risico gepaard. Lees vóór het gebruik de gebruiksaanwijzingen voor zowel de patiëntlift als de tilaccessoires. Het is belangrijk dat u de volledige inhoud van de gebruiksaanwijzingen begrijpt. De apparatuur mag alleen worden gebruikt door getraind personeel. Controleer of de tilaccessoires geschikt zijn voor de lift die u wilt gebruiken. Wees voorzichtig en ga zorgvuldig te werk tijdens het gebruik. Als zorgverlener bent u altijd verantwoordelijk voor de veiligheid van de patiënt. U moet weten of de patiënt het tillen aankan. Neem contact op met de fabrikant of leverancier als er iets onduidelijk is.

Symboolbeschrijving

Deze symbolen komen voor in dit document en/of op het product.

Symbool	Beschrijving
	Waarschuwing. Wordt gebruikt waar extra zorg en aandacht nodig zijn.
	Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing
	CE-markering
	Juridisch fabrikant
	Productiedatum
	Referentienummer
	Serienummer
	Medisch hulpmiddel
	Niet wassen
	Latexvrij
	Product niet gebruiken (Alleen Solo-producten en zichtbaar na wassen wanneer gebruik verboden is).
	Omhoog gericht en symbool aan de buitenkant van het product
	Symbool aan de buitenkant van het product.
	GS1 Data Matrix-barcode die de volgende informatie kan bevatten. (01) Global Trade Item Number (internationaal uniek artikelnummer) (11) Productiedatum (21) Serienummer

Veiligheidsinstructies

Bedenk vóór het tillen het volgende:

- Een verantwoordelijke persoon binnen uw organisatie moet per geval besluiten of er een of meerdere zorgverleners nodig zijn.
- Zorg ervoor dat de gekozen tilband qua model, maat, materiaal en uitvoering voldoet aan de behoeftes van de patiënt.
- De totale maximale belasting voor een lift systeem wordt altijd bepaald door het product binnen het systeem met de laagste gespecificeerde maximale belasting.
- Gebruik om veiligheidsredenen en voor de hygiëne individuele tilbanden.
- Plan het tillen voordat het wordt uitgevoerd, zodat het zo veilig en soepel mogelijk verloopt.
- Controleer of het tilaccessoire verticaal hangt en vrij kan bewegen.
- Hoewel de tiljukken van Liko zijn uitgerust met clips, moet er extra voorzichtig te werk worden gegaan. Controleer voordat de patiënt daadwerkelijk getild wordt maar terwijl de banden volledig gestrekt zijn, of de banden correct aan de haken van het tiljuk zijn bevestigd.
- Zorg ervoor dat de patiënt goed in de tilband zit, voordat deze naar een andere plaats wordt gebracht.
- Til een patiënt nooit hoger dan nodig is voor het volledig tillen en verplaatsen.
- Laat een patiënt die is opgetild nooit zonder toezicht achter.
- Controleer of de wielen van de rolstoel, het bed, de brancard, enz., tijdens het tillen en verplaatsen op de rem staan.
- Zorg ervoor dat de band niet in aanraking komt met puntige of scherpe voorwerpen.
- Trek of ruk niet aan de band bij het positioneren van de patiënt in een rolstoel of bed.
- Werk altijd ergonomisch. Gebruik de mogelijkheden van de patiënt om actief aan de verplaatsing mee te werken.
- Het is raadzaam om de tilband na het verplaatsen te verwijderen.

 **Een onjuiste bevestiging van de tilband aan het tiljuk kan ernstig letsel bij de patiënt veroorzaken.**

 **Handmatig draaien van de patiënt in bed kan letsel bij de zorgverlener veroorzaken.**

 Medisch hulpmiddel, productklasse I

OCTROOI www.hillrom.com/patents

Kan beschermd zijn door een of meer octrooien. Raadpleeg de bovenstaande website.

De Hill-Rom-ondernemingen zijn eigenaar van Europese, Amerikaanse of andere octrooien en aangevraagde octrooien.

Productwijzigingen

De producten van Liko worden continu verder ontwikkeld. Daarom behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving productwijzigingen aan te brengen. Neem contact op met uw vertegenwoordiger van Hill-Rom voor advies en informatie over productverbeteringen.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko is gecertificeerd conform de ISO 9001-kwaliteitscertificatie en de daaraan gelijkwaardige ISO 13485-kwaliteitscertificatie voor de medische-hulpmiddelenindustrie.

Liko is ook gecertificeerd conform de milieustandaard ISO 14001.

Kennisgeving voor gebruikers en/of patiënten in de EU

Elk ernstig incident dat heeft plaatsgevonden met betrekking tot het hulpmiddel dient te worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde instantie van de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

Verzorging en inspectie

Controleer de tilband vóór elk gebruik. Controleer de volgende punten op slijtage en beschadigingen:

- Materiaal
- Banden
- Zomen
- Draaglussen

⚠ Gebruik geen beschadigde tilaccessoires.

Neem contact op met de fabrikant of leverancier als er iets onduidelijk is.



NIET WASSEN. Op het waarschuwingslabel aan de achterkant van de tilband staat het symbool voor NIET WASSEN.



Als de tilband wordt gewassen, valt dit label uit elkaar en wordt het symbool NIET GEBRUIKEN weergegeven. De tilband moet dan worden weggegooid.

Verwachte levensduur

⚠ De Solo HighBack Sling is een wegwerpartikel en is uitsluitend bestemd voor individueel gebruik. Schrijf de naam van de patiënt op het productlabel op de rugzijde van de tilband, als de juiste maat voor een bepaalde patiënt is gevonden.

De Solo HighBack Sling mag niet meer gebruikt worden:

- wanneer hij vuil of mogelijk besmet is
- wanneer hij beschadigd is
- wanneer de patiënt hem niet meer nodig heeft.

Werp de tilband weg volgens de bepalingen van het ziekenhuis of de zorginstelling.

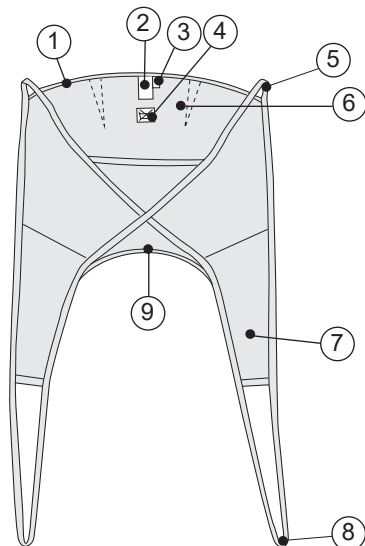
Recyclinginstructies

Het hele product, inclusief baleinen, vulmateriaal, enz., moet gescheiden worden afgevoerd als brandbaar afval


Hill-Rom voert beoordelingen uit en biedt gebruikers richtlijnen voor het veilig hanteren en afvoeren van de apparatuur om letsels zoals (maar niet beperkt tot) snijwonden, doorboring van de huid en schaafwonden te voorkomen, en voor de vereiste reiniging en desinfectie van het medische hulpmiddel na gebruik en voorafgaand aan verwijdering. Klanten moeten zich houden aan alle federale, landelijke, regionale en/of lokale wetten en voorschriften zoals deze gelden voor het veilig afvoeren van medische hulpmiddelen en accessoires.

In geval van twijfel dient de gebruiker van het hulpmiddel eerst contact op te nemen met de technische ondersteuning van Hill-Rom voor advies over protocollen over veilig afvoeren.

Definities


















Maat M/smal, M, L

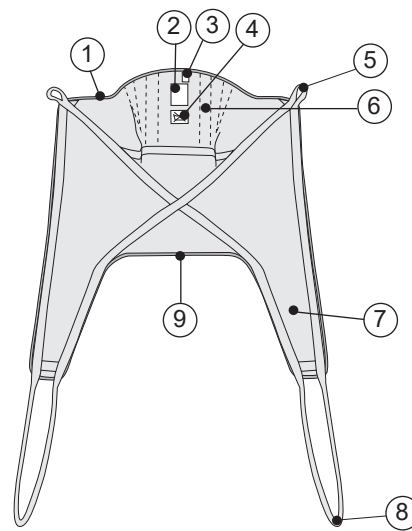


Maat XL

1. Boorden (maatmarkering)
2. Productlabel
3. Label: jaar/maand van productie
4. Waarschuwinglabel: niet wassen
5. Bovenste bandlus
6. Head Support
7. Beensteunen
8. Beensteunlussen
9. Onderrand

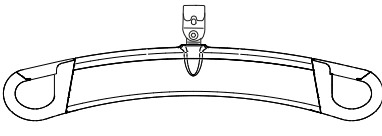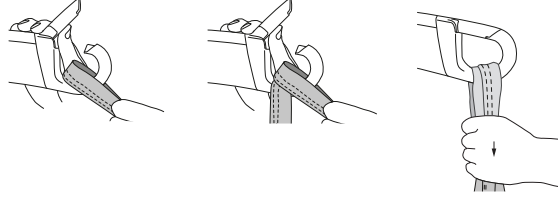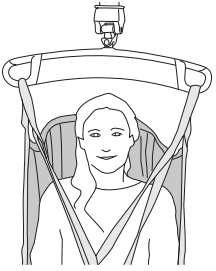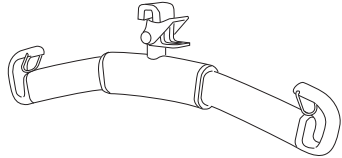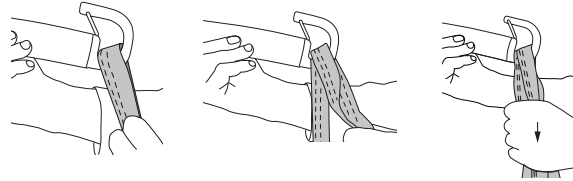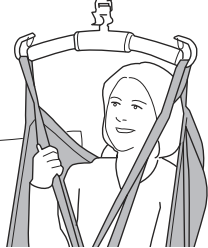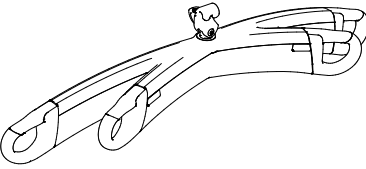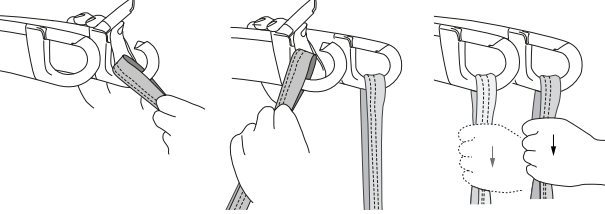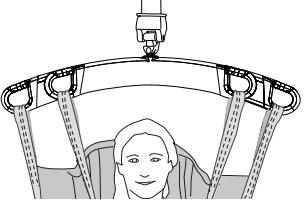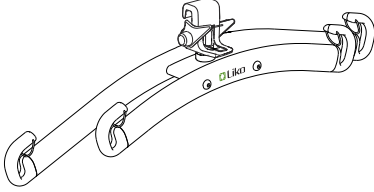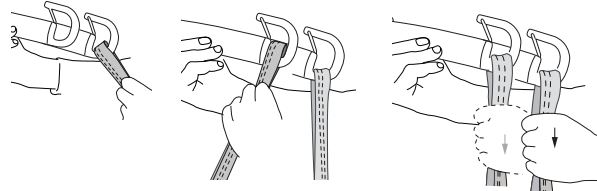
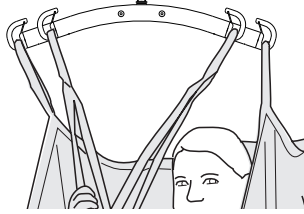
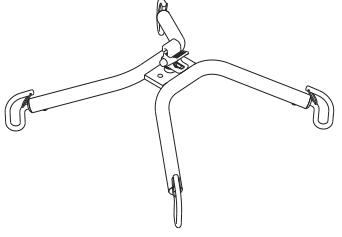
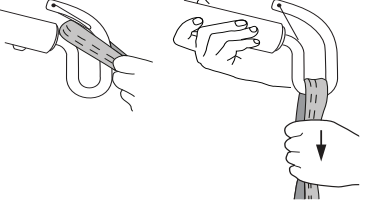
Instructies voor het bevestigen van een tilband aan verschillende tiljukken

Tiljuk	Tilbandlussen aan tiljukhaken	Goed
 <p data-bbox="279 492 422 526">SlingGuard</p>		
 <p data-bbox="287 784 414 817">Universal</p>		
 <p data-bbox="247 1064 462 1097">SlingGuard Twin</p>		
 <p data-bbox="255 1366 446 1400">Universal Twin</p>		
 <p data-bbox="287 1668 414 1702">Cross-Bar</p>		

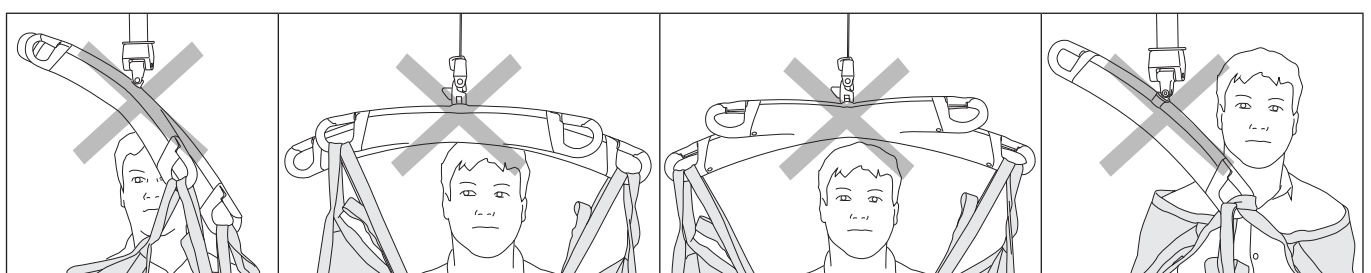Fout!




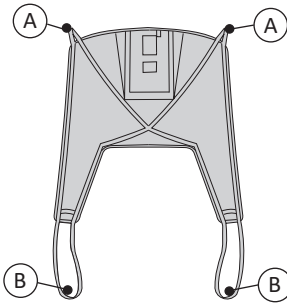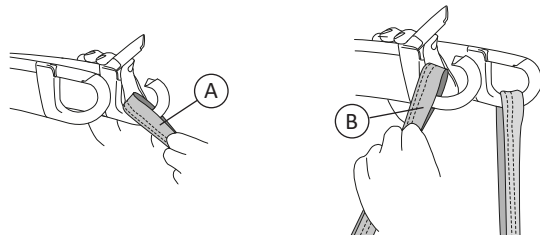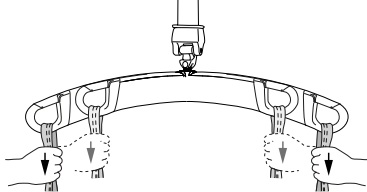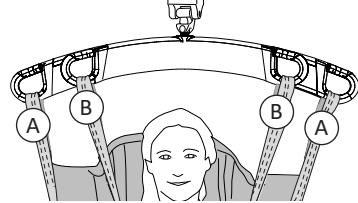Instructies voor het bevestigen van een Solo HighBack Sling aan een tiljuk met 4 haken (Twin-Bars en Cross-Bars)

 <p>A Bovenste bandlussen</p> <p>B Beensteunlussen</p>	<p>1.</p> 
<p>2.</p> 	<p>3.</p>  <p>De afbeeldingen 1, 2, en 3 tonen een twinbar maar dit is ook van toepassing op een Cross-Bar.</p>

Tillen vanuit een zittende positie

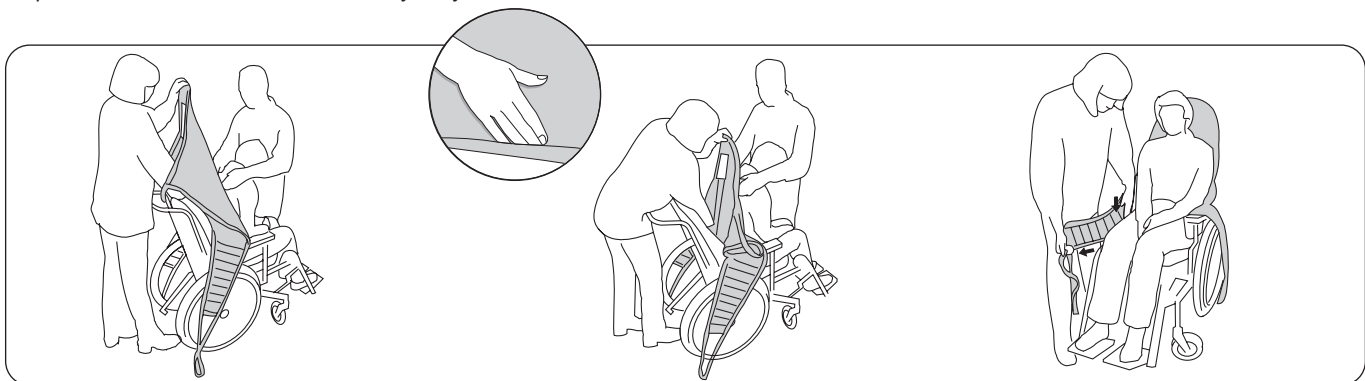Het wordt aanbevolen om twee zorgverleners te laten helpen bij het aanbrengen van de tilband, volgens de ergonomische principes. De patiënt zal normaal gesproken tijdens het aanbrengen van de tilband enigszins naar voren moeten leunen en een zorgverlener moet voor de patiënt staan om te voorkomen dat hij of zij naar voren valt.




Plaats de tilband achter de rug van de patiënt, met het productlabel naar buiten. Vouw de onderrand over uw vingertoppen, zodat u de band gemakkelijker op zijn plaats kunt brengen.

Druk de onderrand van de tilband met uw handpalm naar beneden tot het stuitbeen van de patiënt, **dit is zeer belangrijk**. Goede positionering gaat makkelijker als de patiënt iets naar voren leunt.

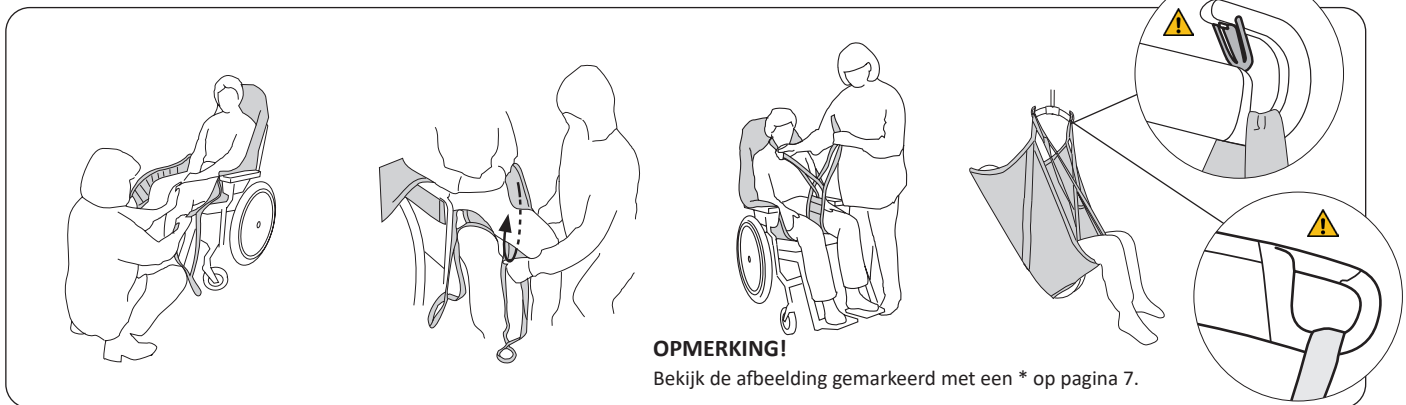Trek de beensteunen uit langs de buitenzijde van de dijen. **Nuttige tip:** door uw handpalm tussen het lichaam en de beensteun te plaatsen, kunt u de onderrand van de beensteun in de richting van het zitgedeelte trekken. Trek tegelijkertijd met uw andere hand de beensteun naar voren om deze uit te rekken.





OPMERKING!

Bekijk de afbeelding gemarkeerd met een * op pagina 7.

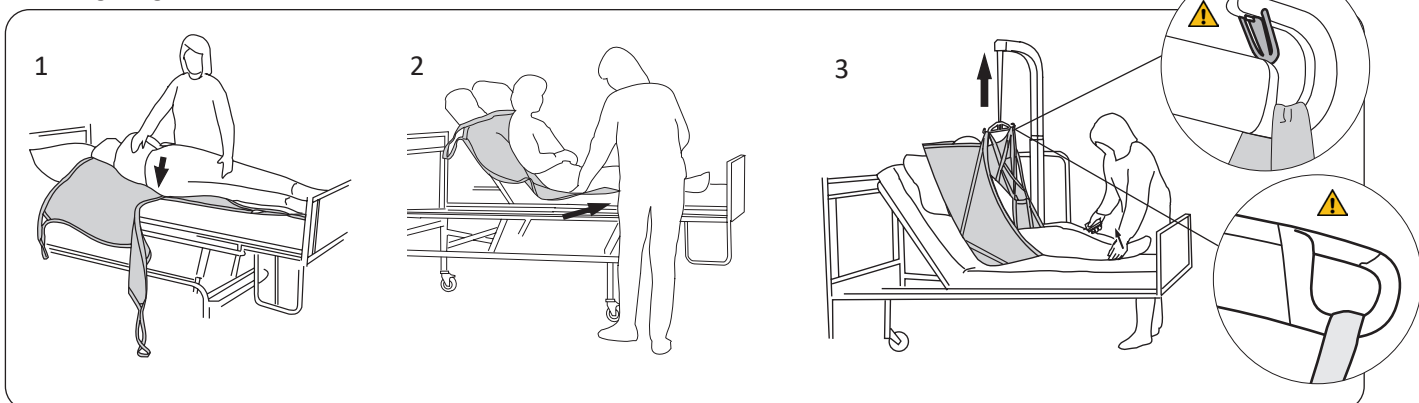
Nuttige tip: door zachtjes tegen knieschijven van de patiënt te duwen, kunt u de beensteunen strak onder het zitvlak trekken, zodat de plooiën op de rugzijde worden strakgetrokken. Zorg ervoor dat beide beensteunen even ver naar voren staan.

Plaats de beensteunen van de tilband onder beide dijen. Zorg ervoor dat het materiaal zonder plooiën onder de dijen ligt en dat het goed rond de benen zit.

Gewoonlijk wordt één beensteun door de andere gevoerd zodat ze kruisen voordat ze aan het tiljuk worden gehaakt. Haak eerst de bovenste bandlussen aan het tiljuk en vervolgens de beensteunlussen. Zie pagina 5-6 voor instructies voor het bevestigen van de tilbandlussen aan verschillende tiljukken. Til de patiënt.

Tillen vanuit een horizontale positie

Denk aan uw eigen werkhouding en het comfort van de patiënt. Gebruik indien mogelijk de functies voor het omhoog- en omlaagbrengen van het bed.




1. Draai de patiënt naar u toe om te voorkomen dat hij/zij uit het bed valt. Plaats de onderrand van de tilband zo ver mogelijk onder de patiënt, zodat deze zich **op gelijke hoogte met het stuitbeen van de patiënt** bevindt. Vouw de tilband een beetje samen en leg deze zo dat het 'deel voor het midden van de rug' overeenkomt met de positie van de ruggengraat van de patiënt wanneer hij of zij voorzichtig wordt teruggedraaid. Zorg dat de tilband ook aan de andere kant van de patiënt goed ligt. Breng de rugleuning van het bed omhoog, indien mogelijk.

2. Schuif de beensteunen op hun plaats onder de dijen. Dit gaat het gemakkelijkst als de knieën gebogen zijn. Zorg ervoor dat het materiaal zonder plooiën onder de dijen ligt en dat het goed rond de benen zit. De beensteunen kunnen dan op verschillende manieren aan het tiljuk worden vastgehaakt.

3. Plaats indien nodig een klein kussen onder het hoofd van de patiënt. Bevestig eerst de bovenste bandlussen aan het tiljuk en vervolgens de beensteunlussen. Zie pagina 5-6 voor instructies voor het bevestigen van de tilbandlussen aan verschillende tiljukken. Til de patiënt.

Tillen naar een stoel

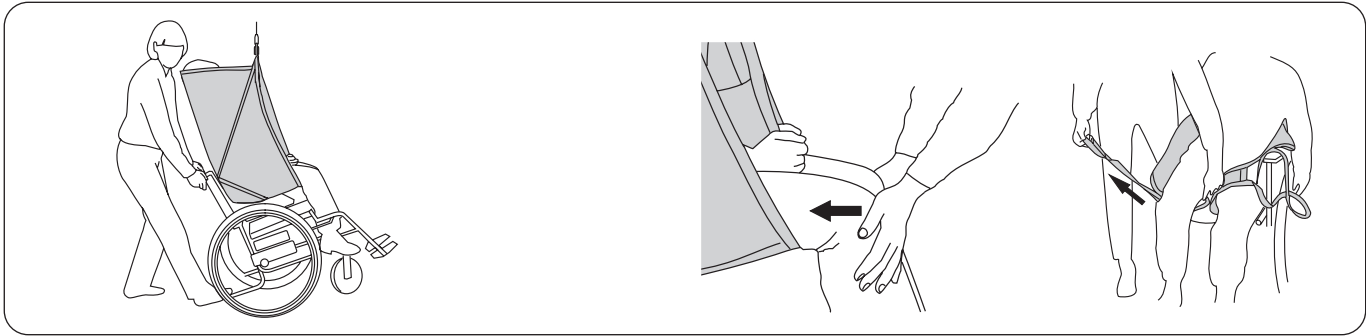Bij het plaatsen van de patiënt in de rolstoel moet de patiënt diep genoeg in de stoel gezet worden om comfortabel te kunnen zitten. Er zijn verschillende manieren om dit te doen.




Kantel de rolstoel iets naar achteren tijdens het dalen van de patiënt om de plaatsing in de rolstoel gemakkelijker te maken. Laat het zitvlak van de patiënt tijdens de laatste fase van de daalbeweging tegen de rugleuning naar beneden schuiven. Verplaats de rolstoel door uw voet op de kantelhendel te plaatsen.

Alternatief: duw de knieën van de patiënt tijdens het neerlaten iets omhoog, zodat het zitvlak van de patiënt richting de rugleuning van de stoel wordt geleid. Verwijder de beensteunen zorgvuldig. De makkelijkste manier om dat te doen, is door de band onder de beensteun door te trekken en deze *onder* het materiaal uit te trekken. Verwijder de tilband door deze voorzichtig omhoog te trekken.

Tillen naar een horizontale positie

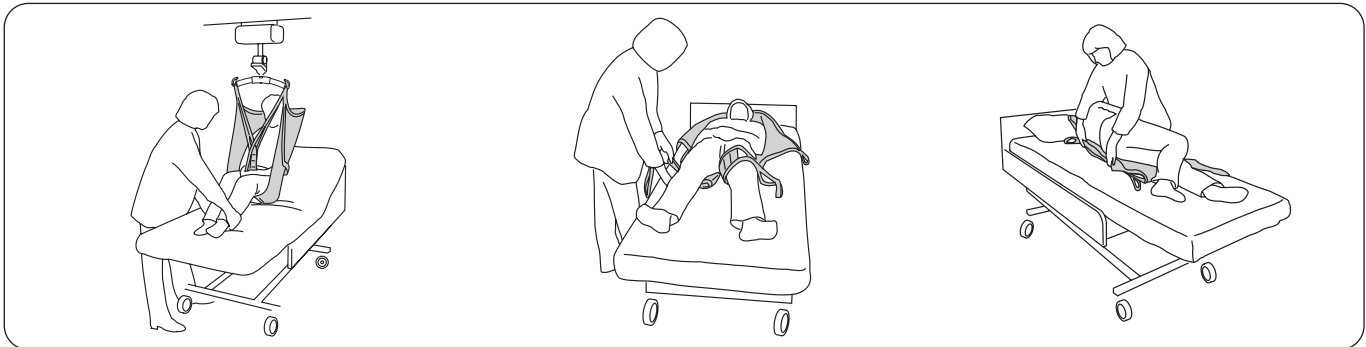Denk aan uw eigen werkhouding en het comfort van de patiënt. Gebruik indien mogelijk de functies voor het omhoog- en omlaagbrengen van het bed.




Geleid de patiënt boven het bed en zet de rugsteun van het bed omhoog voor zoveel mogelijk comfort. Plaats de patiënt op het bed. Laat de rugsteun zakken.

Verwijder de beensteunen door de bandlussen onder het materiaal uit te trekken.

Draai de patiënt voorzichtig naar één kant en rol de tilband naar binnen onder hem/haar. Draai de patiënt voorzichtig op zijn/haar rug en verwijder voorzichtig de tilband.

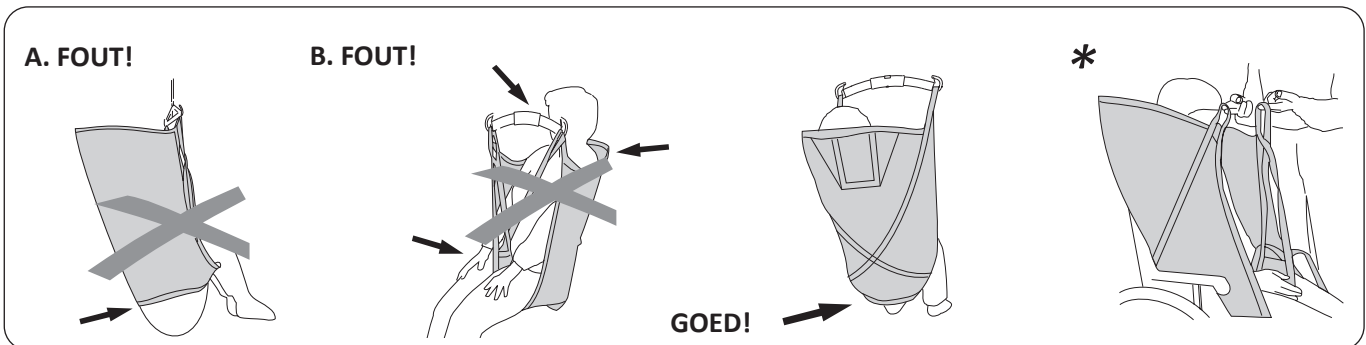De patiënt zit niet goed in de tilband - hoe komt dit?



A. Het zitvlak hangt naar beneden. Hierdoor bestaat het risico uit de tilband te glijden. De tilband is mogelijk te groot. Een andere reden kan zijn dat de lus tijdens het aanbrengen niet ver genoeg naar beneden is getrokken. Zorg ervoor dat de tilband voor het tillen om het zitvlak is gespannen (door aan de beensteunen te trekken).

B. Bij een te kleine tilband kan het tiljuk te dicht bij het gezicht komen, te strak bij het kruis zitten, ongemak veroorzaken of niet genoeg steun aan het hoofd of de rug bieden.


De onderrand van de tilband bevindt zich op dezelfde hoogte als het stuitbeen. De beensteunen zijn correct onder de benen gepositioneerd.

Nuttige tip: zorg ervoor dat alle bandlussen even lang zijn. Dat betekent dat ze op dezelfde hoogte zitten, wanneer ze worden uitgeschoven voorafgaand aan het tillen. Als dit niet het geval is, pas dan de positie van de tilband aan.

Accessoires

Extension Loop, groen, 12 cm (5 inch)
 Extension Loop, groen, 22 cm (9 inch)
 Extension Loop, grijs, 12 cm (5 inch)
 Extension Loop, grijs, 22 cm (9 inch)

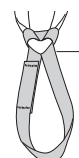productnr. 3691102
 productnr. 3691103
 productnr. 3691302
 productnr. 3691303



- 2 = 12 cm (5 inch)
 - 3 = 22 cm (9 inch)

Overzicht Solo HighBack Sling, Mod. 25

Product	Productnr.	Maat	Gewicht patiënt ¹	Maximale belasting ²
Solo HighBack Sling	3525911	M/smal	30-50 kg (66-110 lbs)	200 kg (440 lbs)
Solo HighBack Sling	3525915	M	40-80 kg (88-176 lbs)	200 kg (440 lbs)
Solo HighBack Sling	3525916	L	70-120 kg (154-265 lbs)	200 kg (440 lbs)
Solo HighBack Sling	3525917	XL	110-250 kg (243-551 lbs)	500 kg (1100 lbs)

¹ Het aangegeven patiëntgewicht is slechts een richtlijn – afwijkingen zijn mogelijk.

² Om de maximale belasting te behouden zijn liften/accessoires vereist met dezelfde of hogere belasting.

Bij een te grote tilband kan de patiënt mogelijk uit de band glijden.

Een te kleine tilband kan strak zitten bij het kruis en kan ongemak veroorzaken.

Materiaal: de maten Ms, M en L zijn gemaakt van niet-geweven polypropyleen
 de maat XL is gemaakt van niet-geweven polyester

Accessoires: balein, productnr. 31590007

Aanbevolen combinaties

Aanbevolen combinaties van Solo HighBack Slings en Liko-tiljucken:	Mini 220	Tiljuk 350 ³	SideBars 450	Tiljuk 450 ¹	Tiljuk 600 ^{4,5}	Twin-Bar 670 ²	Sling Cross-Bar 450	Sling Cross-Bar 670	Univ. SideBars + Universal 350	Univ. SideBars + Universal 450
Solo HighBack Sling, Ms	3	2	1	1	2	2	1	1	2	1
Solo HighBack Sling, M	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Solo HighBack Sling, L	3	3	1	1	1	1	2	1	1	1
Solo HighBack Sling, XL	4	3	2	1	1	1	2	1	2	1

¹ Tiljuk 450 betreft Universal SlingBar 450, productnr. 3156075, 3156085 en 3156095, en ook SlingGuard 450, productnr. 3308020 en 3308520.

² Twin-Bar 670 staat voor de Universal TwinBar 670 productnr. 3156077 en 3156087, en ook SlingGuard 670 Twin productnr. 3308040 en 3308540.

³ Tiljuk 350 betreft Universal SlingBar 350 productnr. 3156074, 3156084 en 3156094.

⁴ Tiljuk 600 betreft Universal SlingBar 600 productnr. 3156076 en 3156086.

⁵ Alleen van toepassing als de beensteunen onder beide benen overlappen.


Toelichting: 1 = Aanbevolen, 2 = Mogelijk, 3 = Afgeraden, 4 = Ongeschikt

Andere combinaties

Combinaties van accessoires/producten die anders zijn dan de combinaties die worden aanbevolen door Liko kunnen leiden tot risico's voor de veiligheid van de patiënt.



www.hillrom.com

 Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Sweden
+46 (0)920 474700

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:



Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.