

Productbeschrijving

De Solo MultiStraps zijn speciaal ontwikkeld voor veelzijdig gebruik in de gezondheidszorg. De MultiStraps worden gebruikt voor het tillen en ondersteunen van delen van het lichaam van de patiënt om onderzoek, zorg en behandeling te vergemakkelijken. De MultiStraps kunnen ook worden gebruikt om een patiënt in bed te draaien en de patiënt in een laterale positie te ondersteunen. In plaats van deze taken handmatig uit te voeren, dient het verplegend personeel de MultiStraps samen met een lift te gebruiken, waardoor mogelijk zwaar en schadelijk werk wordt vermeden.

Geschikte toepassingsgebieden zijn:

- behandeling van wonden, bijv. brandwonden
- hygiëne
- behandeling, bijv. katheterisatie
- onderzoek
- plaatsing van bedsteek
- aan-/uitkleden
- op de zij draaien.

De MultiStraps kunnen alleen of in paren worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het tillen van beide benen van de patiënt tijdens katheterisatie.

De MultiStraps zijn verkrijgbaar in verschillende modellen/breedtes. De kleinere MultiStraps zijn vaak gemakkelijker te plaatsen en geven betere toegang tot een groter huidoppervlak. Kies een bredere MultiStrap voor een groter ondersteund gebied en betere drukverdeling.

De MultiStraps zijn verkrijgbaar in twee materialen, polyester en non-woven, beide met drukvereffenende versterkte pads. De Solo MultiStrap met non-woven ontwerp is bedoeld voor kortdurend gebruik en moet worden weggegooid wanneer hij vuil is of wanneer de patiënt hem niet meer nodig heeft. Neem voor meer informatie over polyester MultiStraps contact op met uw Hill-Rom-vertegenwoordiger.

De MultiStraps kunnen in combinatie met mobiele liften of plafondliften van Liko worden gebruikt.

⚠ De MultiStraps zijn niet bedoeld om de patiënt te tillen en vervolgens te verplaatsen van de ene locatie naar de andere. Voor deze toepassingen raden wij het gebruik van een van de Liko-tilbanden aan, die in veel modellen verkrijgbaar zijn.






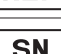








In dit document wordt de persoon die wordt opgetild de patiënt genoemd, en de persoon die hierbij helpt de zorgverlener.

BELANGRIJK!

Het optillen en verplaatsen van een patiënt gaat altijd met enig risico gepaard. Lees vóór het gebruik de gebruiksaanwijzingen voor zowel de patiëntlift als de tilaccessoires. Het is belangrijk dat u de volledige inhoud van de gebruiksaanwijzingen begrijpt. De apparatuur mag alleen worden gebruikt door getraind personeel. Controleer of de tilaccessoires geschikt zijn voor de lift die u wilt gebruiken. Wees voorzichtig en ga zorgvuldig te werk tijdens het gebruik. Als zorgverlener bent u altijd verantwoordelijk voor de veiligheid van de patiënt. U moet weten of de patiënt het tillen aan kan. Neem contact op met de fabrikant of leverancier als er iets onduidelijk is.

Symboolbeschrijving

Deze symbolen komen voor in dit document en/of op het product.

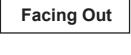Symbool	Beschrijving
	Waarschuwing. Wordt gebruikt waar extra zorg en aandacht nodig zijn.
	Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing
	CE-markering
	Juridisch fabrikant
	Productiedatum
	Referentienummer
	Serienummer
	Medisch hulpmiddel
	Niet wassen
	Latexvrij
	Product niet gebruiken (Alleen Solo-producten en zichtbaar na wassen wanneer gebruik verboden is).
	Omhoog gericht en symbool aan de buitenkant van het product
	Symbool aan de buitenkant van het product.
	GS1 Data Matrix-barcode die de volgende informatie kan bevatten. (01) Global Trade Item Number (internationaal uniek artikelnummer) (11) Productiedatum (21) Serienummer

Veiligheidsinstructies

Bedenk vóór het tillen het volgende:

- kies de MultiStrap die het meest geschikt is voor de betreffende taak.
- let op of er sprake is van een gevoelige huid, drukgevoeligheid of pijn op de plekken waar de MultiStraps moeten worden aangebracht.
- zorg ervoor dat de patiënt de juiste mobiliteit in de gewrichten heeft die nodig is om lichaamsdelen passief te tillen met de MultiStraps.
- plan het tillen voordat het wordt uitgevoerd, zodat het zo veilig en soepel mogelijk verloopt.
- hoewel de tiljucken van Liko zijn uitgerust met veiligheidsclips, moet er extra voorzichtig te werk worden gegaan. Controleer voordat ledematen worden getild, terwijl de banden volledig gestrekt zijn, of de bandlussen correct aan het tiljuk zijn bevestigd.
- laat een patiënt die is opgetild nooit zonder toezicht.
- tijdens het tillen/verplaatsen moeten de wielen van het bed zijn vastgezet. Deze aanbeveling geldt met name bij het omdraaien van patiënten.
- gebruik bedrails tijdens het omdraaien; dit is vooral belangrijk wanneer slechts één zorgverlener de taak uitvoert.
- plan het tillen voordat het wordt uitgevoerd, zodat het zo veilig en soepel mogelijk verloopt.
- werk altijd ergonomisch.

Geregistreerd ontwerp

Productwijzigingen

De producten van Liko worden continu verder ontwikkeld. Daarom behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving productwijzigingen aan te brengen. Neem contact op met uw vertegenwoordiger van Hill-Rom voor advies en informatie over productverbeteringen.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko is gecertificeerd conform de ISO 9001-kwaliteitscertificatie en de daaraan gelijkwaardige ISO 13485-kwaliteitscertificatie voor de medische hulpmiddelenindustrie.

Liko is ook gecertificeerd conform de milieustandaard ISO 14001.

Kennisgeving voor gebruikers en/of patiënten in de EU

Elk ernstig incident dat heeft plaatsgevonden met betrekking tot het hulpmiddel dient te worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde instantie van de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

Verzorging en inspectie

Controleer de MultiStrap vóór elk gebruik. Controleer de volgende punten op slijtage en beschadigingen:

- materiaal
- banden
- zomen
- bandlussen

 **Gebruik geen beschadigde tilaccessoires.**

Neem contact op met de fabrikant of leverancier als er iets onduidelijk is.



NIET WASSEN. Op de achterkant van de MultiStrap (geldt voor Solo MultiStrap standaard en Solo MultiStrap breed) staat een label met dit symbool. Als de MultiStrap wordt gewassen, lost dit label op en verschijnt het symbool NIET GEBRUIKEN. De MultiStrap moet dan worden weggegooid.



Verwachte levensduur

 Solo MultiStrap is een wegwerpartikel, bedoeld voor individueel gebruik.

De Solo MultiStrap mag niet meer gebruikt worden:

- wanneer hij vuil of mogelijk besmet is
- wanneer hij beschadigd is
- wanneer de patiënt hem niet meer nodig heeft.


Recyclinginstructies

Het gehele product moet worden gesorteerd als brandbaar afval.

Hill-Rom voert beoordelingen uit en biedt gebruikers richtlijnen voor het veilig hanteren en afvoeren van de apparatuur om letsel zoals (maar niet beperkt tot) snijwonden, doorboring van de huid en schaafwonden te voorkomen, en voor de vereiste reiniging en desinfectie van het medische hulpmiddel na gebruik en voorafgaand aan verwijdering. Klanten moeten zich houden aan alle federale, landelijke, regionale en/of lokale wetten en voorschriften zoals deze gelden voor het veilig afvoeren van medische hulpmiddelen en accessoires.


In geval van twijfel dient de gebruiker van het hulpmiddel eerst contact op te nemen met de technische ondersteuning van Hill-Rom voor advies over protocollen over veilig afvoeren.

Definities

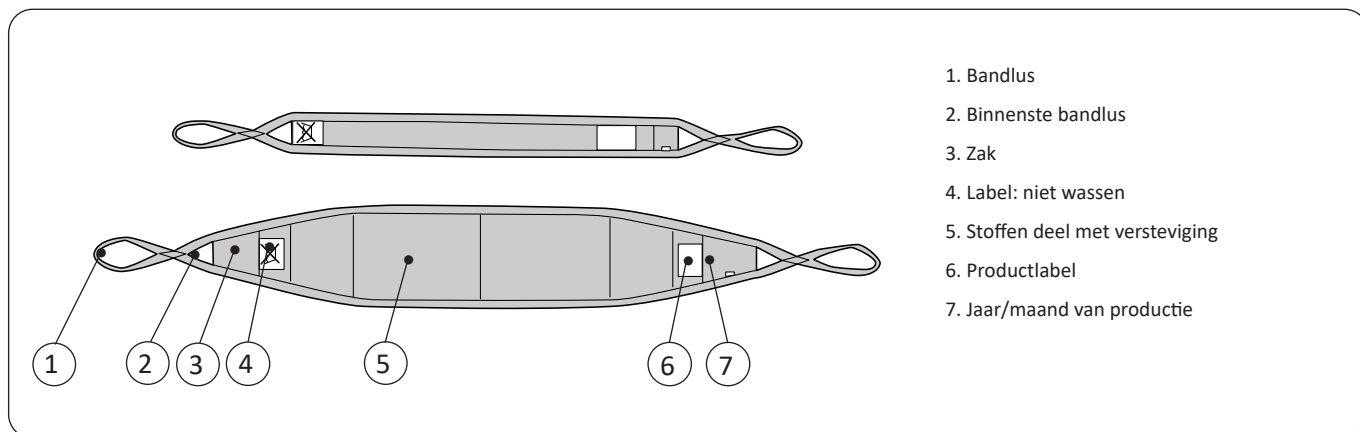

1. Bandlus
2. Binnenste bandlus
3. Zak
4. Label: niet wassen
5. Stoffen deel met versteviging
6. Productlabel
7. Jaar/maand van productie

Gebruik

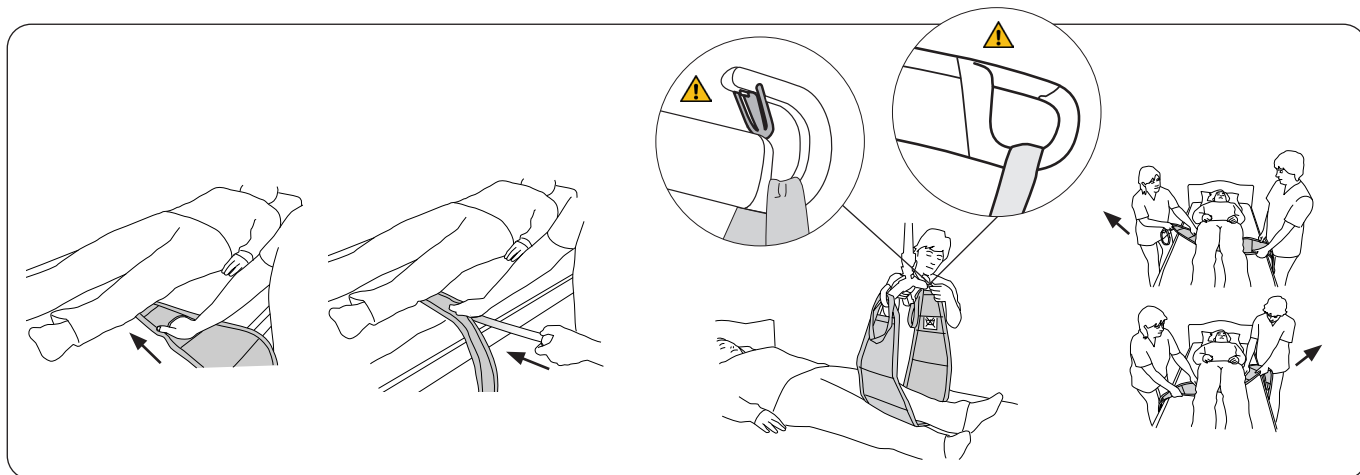

Breng de MultiStrap aan onder het lichaamsdeel dat moet worden getild/ondersteund. Vouw de bandlus onder de MultiStrap en duw deze onder het lichaam van de patiënt. Steek uw hand of gebruik de spatel in de MultiStrap-zak om het aanbrengen te vergemakkelijken (zie bovenstaande afbeeldingen).

Haal de bandlus er aan de andere kant uit en trek de MultiStrap naar voren zodat het lichaamsdeel in het midden van de band wordt geplaatst.

Bevestig de bandlussen aan het tiljuk. Gebruik de binnenste bandlus als de tilhoogte onvoldoende is.


De MultiStrap kan ook daar worden geplaatst waar de meeste ruimte is, bijvoorbeeld onder de knieën, en vervolgens voorzichtig op zijn plaats onder de patiënt worden getrokken. Dit kan vereenvoudigd worden door de MultiStrap afwisselend van links naar rechts te trekken totdat deze op de gewenste plek zit, bijvoorbeeld onder de billen.

OPMERKING: de MultiStrap kan ook worden gebruikt in combinatie met de HandySheet™, die wordt aanbevolen voor zware patiënten of wanneer u extra voorzichtig moet zijn met de patiënt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Hill-Rom-vertegenwoordiger.


Tillen en ondersteunen

Plaats de MultiStrap onder het deel van het lichaam van de patiënt dat moet worden getild/ondersteund. Controleer voorafgaand aan het tillen of de bandlussen goed aan het tiljuk zijn bevestigd. Til tot de gewenste hoogte.


Voorbeeld

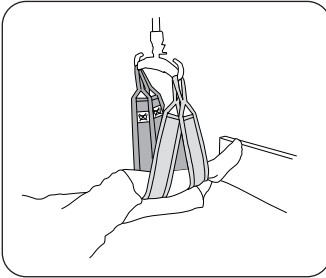


Afb. 1. Een been met twee MultiStraps tillen/ondersteunen

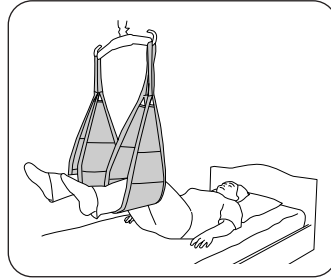

Afb. 2. Beide benen met twee MultiStraps tillen/ondersteunen

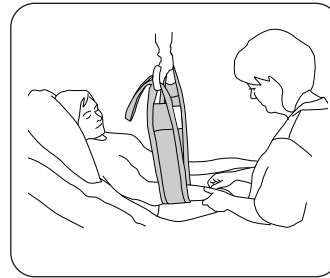

Afb. 3. Arm tillen/ondersteunen

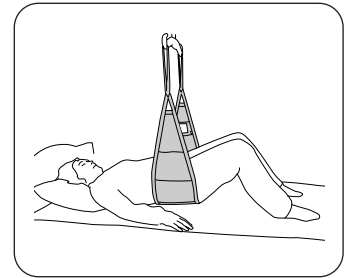


Afb. 4. Billen tillen/ondersteunen

Er wordt een tiljuk met tweepuntsophanging aanbevolen voor het tillen/ondersteunen conform bovenstaande voorbeelden. Er kunnen één MultiStrap (afb. 3) of twee MultiStraps (afb. 1) worden gebruikt.

Op de zij draaien

De patiënt op de zij draaien kan worden gedaan door één enkele zorgverlener, maar we raden aan dat twee zorgverleners elkaar helpen. Dit is een tijdsbesparende en efficiënte manier van werken. Gebruik de bedrails, met name als slechts één zorgverlener het draaien uitvoert.

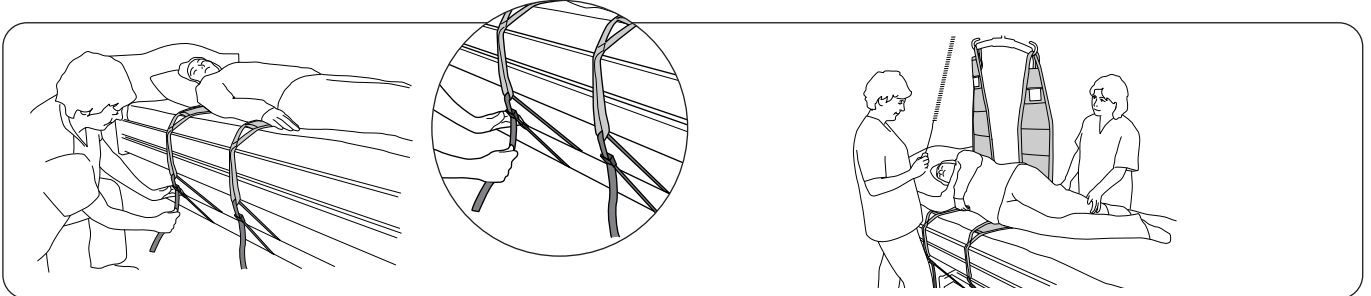


Gebruik twee MultiStraps; plaats de ene onder de schouders en de andere onder de heupen. Indien nodig kunnen de bandlussen op een geschikte plek aan het bed worden bevestigd met behulp van FixStraps 135 cm (53 inch.), productnr. 3696001. Dit houdt de MultiStraps op hun plek tijdens het draaien.

Bereid de handeling voor door de patiënt zo te plaatsen dat het draaien mogelijk is; één arm naar de zijkant en één been over het andere. Til de patiënt zo dat deze zijwaarts wordt gedraaid met behulp van de lift. Til de patiënt niet zo hoog dat er het gevaar bestaat dat de patiënt omrolt. Pas de houding van de patiënt zo aan dat deze comfortabel is.

⚠Til niet te hoog!

Bij op de zij draaien raden we een tiljuk met tweepuntsophanging aan.

Verwijderen

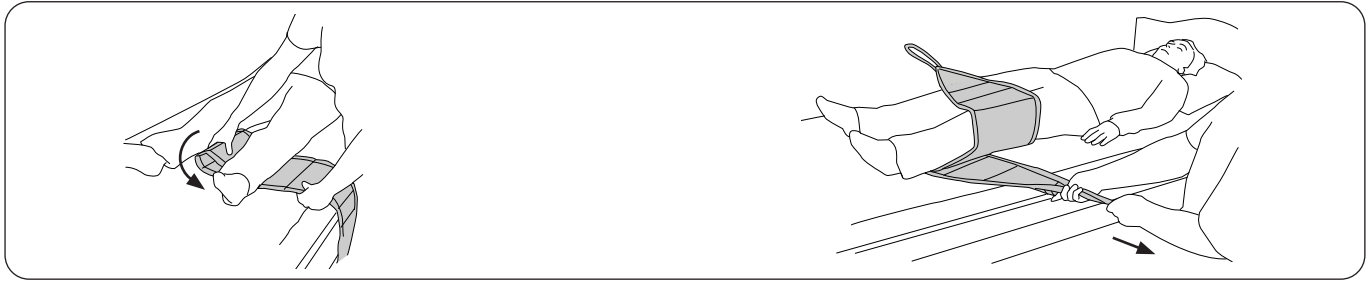

Afb. 5.

Afb. 6.

Vouw de bandlus onder de MultiStrap (afb. 5). Pak de bandlus vast en verwijder de MultiStrap voorzichtig (afb. 6).

De MultiStrap kan ook voorzichtig naar buiten worden getrokken wanneer er extra ruimte is, bijvoorbeeld onder de knieën.

Voor extra voorzichtig verwijderen gebruikt u een HandySheet™. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Hill-Rom-vertegenwoordiger.

Overzicht Solo MultiStrap™

Naam	Breedte	Productnr.	Max. belasting	Materiaal
Solo MultiStrap standaard	10 cm	3695915	200 kg	Non-woven polypropyleen
Solo MultiStrap breed	25 cm	3695916	200 kg	Non-woven polypropyleen

Om de maximale belasting te behouden, zijn een lift/accessoires nodig voor dezelfde of een hogere belasting.

Accessoires:	Spatula Mod 600 IC (geschikt voor MultiStrap standaard en breed)	3684002
	FixStrap 135 cm (53 inch.)	3696001

Aanbevolen combinaties

MultiStrap kan in combinatie met de volgende tiljucken worden gebruikt:

Tiljuk met tweepuntsophanging: Universal SlingBar 350/450, SlingGuard 450.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Zweden
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom