

## Upute za uporabu












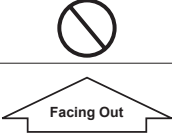


Proizvod Solo Octo LiftSheet je plahta za podizanje za jednokratnu uporabu namijenjena za podizanje i premještanje pacijenata u vodoravnom položaju. Namijenjen je samo za uporabu s priborom Liko OctoStretch, br. artikla 3156056.

### VAŽNO!


Podizanje i premještanje pacijenta uvijek podrazumijeva određen stupanj opasnosti. Prije uporabe pročitajte upute za uporabu dizalice za pacijenta i pribora Liko OctoStretch. Važno je potpuno razumijevanje sadržaja uputa za uporabu. Opremu smije upotrebljavati samo obučeno osoblje. Budite pažljivi i oprezni tijekom uporabe. Kao njegovatelj odgovorni ste za sigurnost pacijenta u svakom trenutku. Ako vam nešto nije jasno, obratite se proizvođaču ili dobavljaču.

## Opis simbola

Ovi se simboli mogu pronaći u ovom dokumentu i/ili na proizvodu.

Simbol	Opis
	Upozorenje; ova situacija zahtijeva dodatnu pažnju i pozornost.
	Pročitajte upute za uporabu prije uporabe
	Oznaka CE
	Zakonski proizvođač
	Datum proizvodnje
	Identifikator proizvoda
	Serijski broj
	Medicinski proizvod
	Ne perite
	Ne sadrži lateks
	Ne upotrebljavajte proizvod (samo proizvodi Solo i vidljivo je nakon pranja kada je uporaba zabranjena).
	Smjer prema gore i simbol na vanjskoj površini proizvoda
	Simbol na vanjskoj površini proizvoda.
 (01) 0100887761997127 (11) GGMMDD (21) 012345678910	GS1 podatkovna matrica barkodova koja može sadržavati sljedeće podatke: (01) Globalni broj trgovačke jedinice (11) Datum proizvodnje (21) Serijski broj

## Sigurnosne upute

 Medicinski proizvod klase I

### Izmjene proizvoda

Proizvodi Liko podliježu stalnom razvoju i stoga pridržavamo pravo na izmjene proizvoda bez prethodne obavijesti. Obratite se predstavniku tvrtke Hill-Rom za savjet i informacije o nadogradnjama proizvoda.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko ima certificiranu kvalitetu u skladu s normom ISO 9001 i odgovarajućom normom za industriju medicinskih uređaja ISO 13485. Liko je također certificiran u skladu s ekološkom normom ISO 14001.

#### Napomena za korisnike i/ili pacijente unutar EU-a

Svaki ozbiljan incident koji se dogodi, a vezan je uz uređaj, treba prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj korisnik i/ili pacijent imaju nastan.

## Održavanje i pregled

Pregledajte proizvod prije svake uporabe. Pregledajte sljedeće stavke u pogledu trošenja i oštećenja:

- tkanina
- trake
- šavovi
- petlje

**⚠ Ne upotrebljavajte oštećeni pribor za podizanje.**

Ako nešto nije jasno, obratite se proizvođaču ili dobavljaču.



NE PERITE. Oznaka opreza koja se nalazi na stražnjem dijelu plahte za podizanje prikazuje simbol NE PERITE. Ako je plahta za podizanje oprana, ova se oznaka raspadne i prikazuje se simbol NE UPOTREBLJAVAJTE. Plahtu za podizanje tada treba baciti.

#### Očekivani životni vijek

**⚠ VAŽNO!**

Solo Octo Liftsheet proizvod je za jednokratnu uporabu i namijenjen je za uporabu samo na jednom pacijentu.

Nakon što se za određenog pacijenta odredi pravilna veličina, zapišite ime pacijenta na etiketu proizvoda na stražnjem dijelu plahte za podizanje.

Proizvod Solo Octo Liftsheet ne smije se upotrebljavati:

- ako je zaprljan ili se sumnja na onečišćenje
- ako je oštećen
- kada pacijentu više nije potreban.


#### Upute za recikliranje

Cijeli proizvod treba odložiti kao zapaljivi otpad.

Hill-Rom izrađuje procjene i daje smjernice svojim korisnicima o sigurnom rukovanju i odlaganju njegovih proizvoda radi sprječavanja ozljeda, uključujući, između ostalog, o sljedećem: posjekotine, kožni ubodi, ogrebotine, nužno čišćenje i dezinfekcija medicinskog proizvoda nakon uporabe i prije odlaganja. Kupci se trebaju pridržavati svih saveznih, državnih, regionalnih i/ili lokalnih zakona i propisa koji se tiču sigurnog odlaganja medicinskih proizvoda i pribora.

U slučaju dvojbi, korisnik uređaja prvo se mora obratiti tehničkoj podršci tvrtke Hill-Rom radi dobivanja uputa o protokolima za sigurno odlaganje.

## Pregled proizvoda Solo Octo LiftSheet™

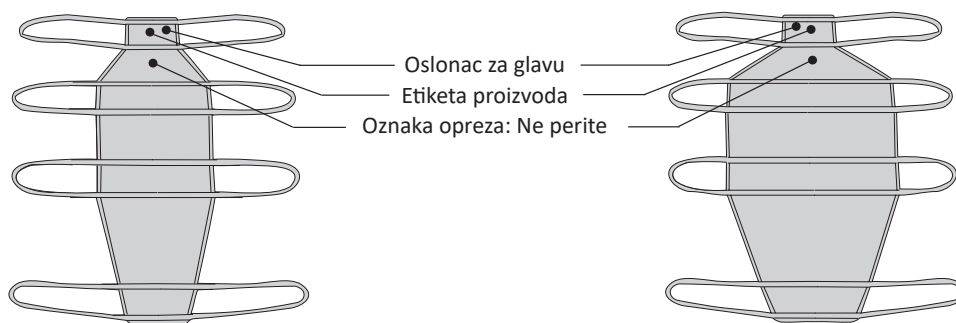

3683905 – Solo Octo Liftsheet, srednja  
Veličina plahte: 500 x 1600 mm (WxL)

3683906 – Solo Octo Liftsheet, velika  
Veličina plahte: 900 x 1700 mm (WxL)

**Maksimalno opterećenje: 200 kg**



[www.hillrom.com](http://www.hillrom.com)

Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå, Švedska  
+46 (0)920 474700

LIKO AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for  
patients and their caregivers:

**Hill-Rom**