

## Bruksanvisning












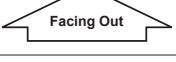


Solo Octo Lyftduk är en lyftduk för kortvarig användning för att lyfta och förflytta brukare i horisontell position. Den är endast avsedd för användning med Liko Planlyft Bläckfisken, art.nr 3156056.

### VIKTIGT!

Lyft och överflyttning av en person medför alltid en viss risk. Läs bruksanvisningen för både patientlyften och för Liko Octo Planlyft före användning. Det är viktigt att helt och fullt förstå innehållet i bruksanvisningen. Utrustningen får endast användas av utbildad personal. Iakttag försiktighet och omsorg vid användandet. Som medhjälpare är du alltid ansvarig för brukarens säkerhet. Kontakta tillverkaren eller leverantören om något är oklart.

## Symbolbeskrivning

Dessa symboler finns i det här dokumentet och/eller på produkten.

Symbol	Beskrivning
	Varning! Den här situationen kräver extra försiktighet och uppmärksamhet.
	Läs bruksanvisningen före användning
	CE-märkning
	Juridisk tillverkare
	Tillverkningsdatum
	Produktidentifikation
	Serienummer
	Medicinteknisk produkt
	Skall ej tvättas
	Latexfri
	Skall ej användas (Endast Solo-produkter. Syns efter tvätt, varvid användning är förbjuden.)
	Riktning uppåt och symbol på produktens utsida
	Symbol på produktens utsida.
 (01) 0100887761997127 (11) AAMMDD (21) 012345678910	GS1-datamatrixstreckkod som kan innehålla följande information. (01) GTIN-artikelnummer (11) Produktionsdatum (21) Serienummer

## Säkerhetsföreskrifter

 Medicinteknisk produkt klass I

### Produktändringar

Likos produkter utvecklas ständigt varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i produkter utan föregående notis. Kontakta en representant för Hill-Rom för att få information, råd och eventuella uppdateringar.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och motsvarigheten ISO 13485 för medicintekniska företag.  
Liko är också certifierat i enlighet med miljöstandarden ISO 14001.

### Meddelande till användare och/eller patienter i EU

Alla allvarliga incidenter som har inträffat i relation till produkten ska rapporteras till tillverkaren och berörd myndighet i medlemsstaten där användaren och/eller brukaren befinner sig.

## Skötsel och inspektion

Kontrollera produkten före varje användning. Kontrollera att följande inte uppvisar tecken på slitage och skador:

- tyg
- band
- sömmar
- upphängningsöglor.

### ⚠ Använd inte skadade lyfttillbehör.

Kontakta tillverkaren eller leverantören om något är oklart.



SKALL EJ TVÄTTAS. Varningsetiketten på baksidan av lyftduken visar symbolen SKALL EJ TVÄTTAS. Om lyftduken tvättas faller den här etiketten sönder så att symbolen SKALL EJ ANVÄNDAS visas. Lyftduken måste då kasseras.

### Förväntad livslängd

#### ⚠ VIKTIGT!

Solo Octo Lyftduk är en förbrukningsartikel som är avsedd för individuell användning.

När rätt storlek har fastställts för en viss brukare skriver du patientens namn på produktetiketten på baksidan av lyftduken.

Upphör med användningen av Solo Octo Liftsheet:

- om den är smutsig eller misstänks vara förorenad
- om den är skadad
- när brukaren inte längre behöver den.


### Återvinningsinstruktioner

Hela produkten ska sorteras som brännbart avfall.

Hill-Rom gör utvärderingar och vägleder användarna om säker hantering och kassering av produkter för att förebygga skador, inklusive, men inte begränsat till: skärsår, sticksår, skrubbsår och eventuell rengöring och desinficering av den medicintekniska produkten efter användning och före kassering. Kunderna bör följa alla federala, statliga, regionala och/eller lokala lagar och förordningar som gäller säker kassering av medicinsk utrustning och tillbehör.

Vid tveksamhet ska användaren av enheten i första hand kontakta Hill-Roms tekniska support för råd om säker kassering.

## Överblick Solo Octo LiftSheet™

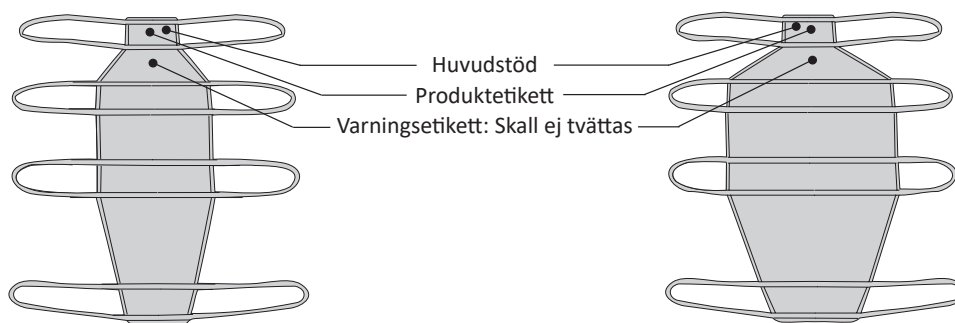

3683905 – Solo Octo Lyftduk, Medium  
Dukstorlek: 500 x 1 600 mm (B x L)

3683906 - Solo Octo Lyftduk, Large  
Dukstorlek: 900 x 1 700 mm (B x L)

Maxlast: 200 kg



[www.hillrom.com](http://www.hillrom.com)

Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå, Sverige  
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for  
patients and their caregivers:

**Hill-Rom**