

Descripción del producto

El Solo SupportVest se utiliza junto con la grúa de bipedestación Sabina™ para facilitar la elevación de pacientes desde posición sentada a posición en pie. El Solo SupportVest levanta por detrás de la espalda y por debajo de los brazos. Es adecuado para pacientes que necesitan ayuda para ponerse de pie, pero que son capaces de permanecer de pie por sí mismos una vez que se levantan.

El Solo SupportVest está diseñado principalmente para su uso junto con la grúa de bipedestación Sabina con la percha 350 (delgada).

Juntos, el Solo SupportVest y la grúa de bipedestación Sabina forman una unidad funcional. Para obtener información completa y los mejores resultados, lea las guías de instrucciones de ambos productos.

El Solo SupportVest está diseñado para su uso a corto plazo por un único paciente. No se puede lavar. En su lugar, debe desecharse cuando esté sucio o cuando el paciente ya no lo necesite. La gama de productos de Liko incluye varios modelos de chalecos lavables para un uso a largo plazo que se pueden utilizar junto con la grúa de bipedestación Sabina.

En este documento, se denomina paciente a la persona elevada y cuidador a la persona que le asiste.



IMPORTANTE

La elevación y el traslado de un paciente siempre implican un cierto riesgo. Lea la guía de instrucciones de la grúa de pacientes y de los accesorios de elevación antes de su uso. Es importante comprender la totalidad del contenido de la guía de instrucciones. El equipo solo debe ser utilizado por personal capacitado. Asegúrese de que los accesorios de elevación son adecuados para la grúa que se está utilizando. Tenga cuidado y precaución durante su uso. Como cuidador, usted es el responsable de la seguridad del paciente. Debe conocer la capacidad del paciente para soportar la elevación. Si no está seguro de algo, póngase en contacto con el fabricante o proveedor.

Descripción de los símbolos

Estos símbolos se pueden encontrar en este documento o en el producto.

Símbolo	Descripción
	Advertencia: esta situación requiere cuidado y atención especial.
	Leer la guía de instrucciones antes de usar
	Marca CE
	Fabricante legal
	Fecha de fabricación
	Identificador de producto
	Número de serie
	Dispositivo médico
	No lavar
	No contiene látex
	No utilizar el producto (Únicamente aparece tras el lavado de los productos Solo cuando su uso está prohibido.)
	Dirección hacia arriba y símbolo en la parte exterior del producto
	Símbolo en la parte exterior del equipo
 <small>(01) 0100887761997127 (11) AAAMDD (21) 012345678910</small>	El código de barras Data Matrix GS1 puede contener la siguiente información: (01) Número global de artículo comercial (11) Fecha de fabricación (21) Número de serie

Instrucciones de seguridad

Antes de realizar la elevación, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- La necesidad de uno o más cuidadores vendrá determinada según el caso.
- Planifique la elevación con cuidado para garantizar que se realiza de la forma más segura y cómoda posible.
- Asegúrese de que las ruedas de la silla de ruedas, la cama, la camilla, etc. están bloqueadas durante una elevación o un traslado.
- Aunque las perchas Liko están equipadas con pestillos de seguridad, se debe proceder con especial cuidado. Antes de elevar al paciente de la superficie subyacente, pero después de que las cintas se hayan extendido completamente, asegúrese que estas estén correctamente sujetas a la percha.
- La altura a la que debe elevarse a un paciente se debe determinar de forma individual de antemano.
- Nunca deje al paciente desatendido durante una elevación.

 Producto médico de clase I

Modificaciones en los productos

Los productos Liko están en un continuo desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de realizar modificaciones en ellos sin previo aviso. Póngase en contacto con su representante de Hill-Rom para obtener asesoramiento e información sobre actualizaciones de productos.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko posee la certificación de calidad de acuerdo con la ISO 9001 y su certificación correspondiente para empresas médico-técnicas, ISO 13485.

Liko posee la certificación medioambiental de acuerdo con la ISO 14001.

Aviso para usuarios o pacientes de la UE

Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentran el usuario o el paciente.

Cuidado e inspección

Compruebe el arnés antes de cada uso. Compruebe los siguientes puntos en relación con el uso y desgaste:

- Tejido
- Cintas
- Costuras

No utilice accesorios de elevación que no estén en buen estado.

Si no está seguro de algo, póngase en contacto con el fabricante o proveedor.



NO LAVAR. En la etiqueta de advertencia situada en la parte posterior del arnés aparece el símbolo de NO LAVAR.



Si se lava el arnés, la etiqueta se desintegra para mostrar el símbolo de NO UTILIZAR y, por lo tanto, el arnés deberá desecharse.

Tiempo de vida útil estimado

 El Solo SupportVest es un artículo desechable concebido para usarse con un único paciente. Cuando se ha determinado la talla correcta para un paciente concreto, escriba su nombre en la etiqueta del producto en la parte posterior del chaleco. El Solo SupportVest no se debe utilizar:

- Si no está limpio o si se sospecha que se ha contaminado.
- Si está dañado.
- Cuando el paciente ya no lo necesita.


Instrucciones de reciclaje

Todo el producto (incluidos los listones, el material de relleno, etc.) debe clasificarse como residuo combustible.

Hill-Rom evalúa y proporciona orientación a los usuarios sobre la manipulación y la eliminación seguras de sus dispositivos para ayudar a prevenir lesiones, entre las que se incluyen cortes, punciones en la piel o abrasiones, y sobre la limpieza y desinfección del dispositivo médico necesarias después de su uso y antes de su eliminación. Los clientes deben cumplir todas las leyes y normativas federales, estatales, regionales o locales relativas a la eliminación segura de los dispositivos y accesorios médicos.

En caso de duda, el usuario del dispositivo debe ponerse en contacto primero con el servicio de asistencia técnica de Hill-Rom para obtener orientación sobre los protocolos de eliminación segura.

Definiciones

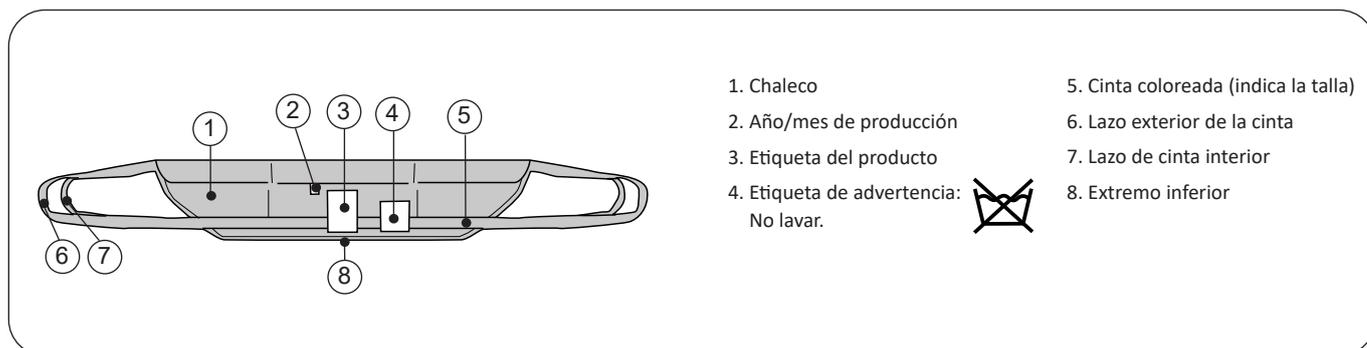


Descripción de la función de lazos de cinta

El Solo SupportVest está equipado con dos lazos de cinta: uno interior y otro exterior, para lograr una flexibilidad óptima durante su uso. Por lo general, se recomienda enganchar los lazos de cinta interiores a la percha para lograr la máxima posición de pie y permitir al paciente alcanzar y agarrar la percha, y, por tanto, participar de forma activa en el proceso de elevación.

Los lazos de cinta exteriores se utilizan cuando el contorno del paciente necesita más espacio o si el paciente es de baja estatura en relación con la altura de los ganchos de elevación de la grúa Sabina™.

En los casos en los que se utilizan lazos de cinta interiores, se recomienda conectar también los lazos de cinta exteriores a los ganchos de elevación. Esto permite tener un mejor control visual de los lazos de cinta.


Uso del Solo SupportVest con la grúa de bipedestación Sabina.

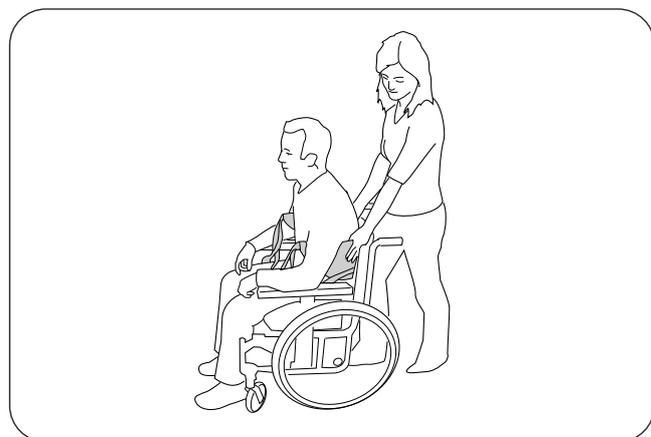

1. Coloque el chaleco en la parte inferior de la espalda del paciente con la etiqueta del producto hacia fuera. El borde inferior del chaleco debe quedar a la altura de la cintura.

⚠ Los brazos del paciente deben colocarse **siempre** por fuera del chaleco para prevenir que el chaleco se deslice.

Consulte la sección "Descripción de la función de lazos de cinta" que aparece anteriormente para saber qué lazos de cinta son los más adecuados.

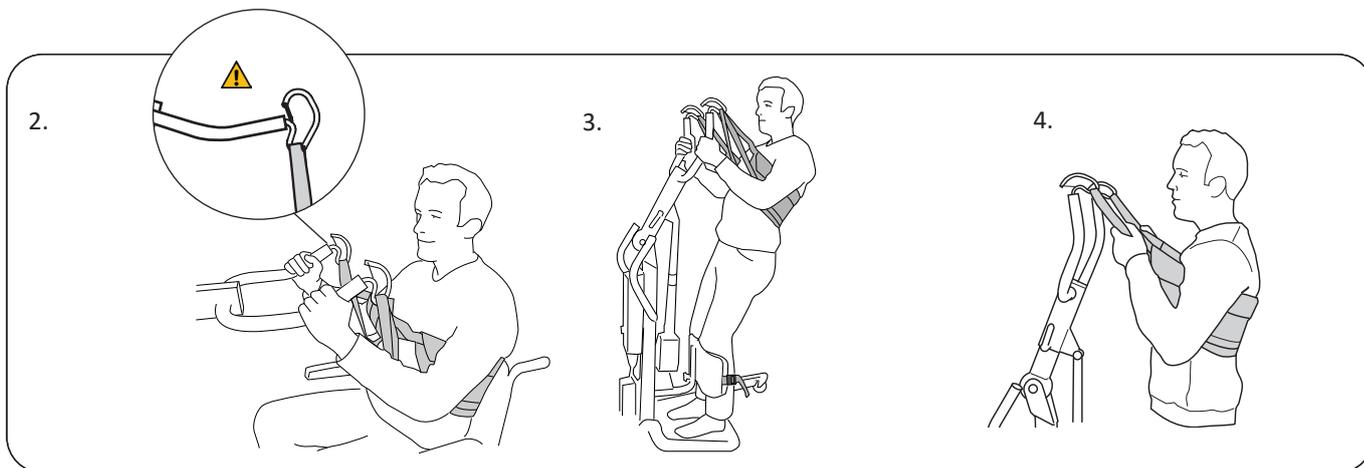

2. Gire la grúa Sabina™ hacia el paciente. Ajuste la anchura de la base para que la grúa quede lo suficientemente cerca del paciente. Los pies del paciente deben colocarse en el centro del reposapiés. Ajuste la profundidad del soporte de piernas inferior de modo que las espinillas queden paralelas al soporte. Ajuste la altura del soporte de modo que el borde superior quede justo debajo de las rótulas. Abroche y apriete la cinta para las pantorrillas.

Ahora es el momento de conectar los lazos de cinta, previamente seleccionados y probados, a los ganchos de la percha.

Consejo: Tenga en cuenta que es más fácil para el paciente elevarse desde una posición sentada a una de pie si está sentado relativamente erguido. Es decir, cuando las articulaciones de la cadera están al mismo nivel que las de la rodilla o, preferiblemente, a una altura superior.

3. Elevación. Accione el movimiento de elevación mediante los botones de ascenso y descenso del mando. Hay dos velocidades. Se debe animar al paciente, en la medida de lo posible, a agarrarse la percha.

⚠ Antes de elevar al paciente de la superficie donde se encuentra, pero después de que las cintas se hayan extendido completamente, es importante asegurarse de que las cintas estén correctamente sujetas a la percha.

Se recomienda que el paciente recline un poco la parte superior del cuerpo. De esta manera se compensa la debilidad de los músculos extensores de la parte inferior del cuerpo. Así se facilita el paso de la posición sentada a la posición en pie, se mejora la comodidad y se evita que el chaleco se deslice hacia arriba. La altura a la que el paciente debe elevarse deberá determinarse con anterioridad a cada caso.

4. **Consejo:** En caso de que el chaleco se deslice hacia arriba durante la elevación, el paciente puede agarrar los lazos de cinta en lugar de agarrar la percha. Esta acción le ayudará a mantener el chaleco en su sitio y le proporcionará un buen apoyo en la espalda durante la elevación.

Colocación de prueba

Regulación de la altura máxima de elevación


La altura máxima de elevación se ajusta de la siguiente manera:

- Ajuste de la altura del mástil de la base de la grúa. Consulte la guía de instrucciones de Sabina.
- Consulte "Descripción de la función de lazos de cinta" en la página 4 para elegir los lazos de cinta interiores o exteriores del chaleco.
- La talla del chaleco. Un chaleco de menor talla hace posible una mayor elevación.

Chalecos alternativos para la elevación

Si el paciente necesita un cinturón por motivos de seguridad durante la elevación, se recomienda el uso del Liko™ SafetyVest o del Liko™ ComfortVest.

Accesorios

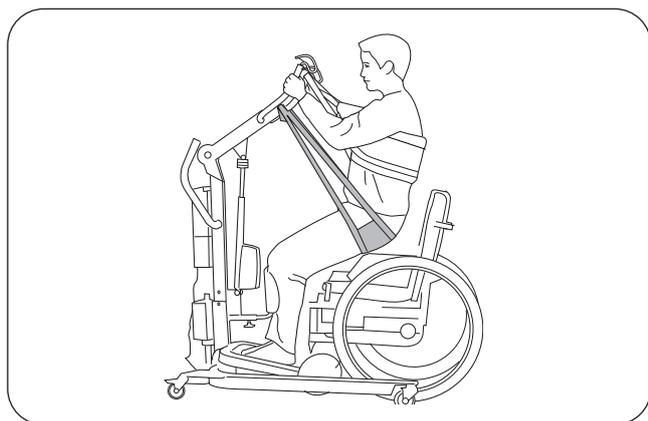

1. Sabina™ Seatstrap

N.º de prod. 3591115

En algunos casos, se puede utilizar una Seatstrap para facilitar la elevación. La Seatstrap debe empujarse hacia abajo todo lo posible en dirección al coxis para que ayude al proceso de elevación desde debajo de las nalgas. Una vez que el paciente se encuentra erguido, se libera la carga de la Seatstrap y es posible apartarla hacia un lado en situaciones como las visitas al baño, por ejemplo.

La Seatstrap requiere un accesorio especial: SeatStrap SlingBar. Antes de usar el dispositivo, lea atentamente la guía de instrucciones de la Seatstrap.

2. Seatstrap Slingbar

N.º de prod. 2027006


3. Sabina™ 350 Slingbar

N.º de prod. 2027002

Accesorios


Extension Loop, verde, 12 cm (5 pulg.)
 Extension Loop, verde, 22 cm (9 pulg.)
 Extension Loop, gris, 12 cm (5 pulg.)
 Extension Loop, gris, 22 cm (9 pulg.)

N.º de prod. 3691102
 N.º de prod. 3691103
 N.º de prod. 3691302
 N.º de prod. 3691303

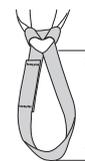

- 2 = 12 cm (5 pulg.)
 - 3 = 22 cm (9 pulg.)

Resumen del Solo SupportVest™, modelo 911

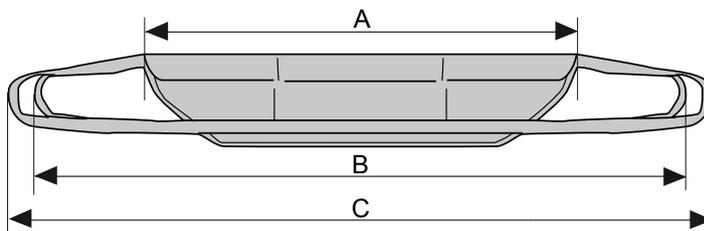

Descripción	N.º de prod.	Talla	Color de la cinta	Ancho del chaleco: cm (pulg.)	Carga máx.: kg (lb)
Solo SupportVest	35911915	M	Mediana	Amarillo	A: 90 (35,4) B: 138 (54,3) C: 148 (58,3) 200 (440)
Solo SupportVest	35911916	L	Grande	Azul	A: 105 (41,3) B: 153 (60,2) C: 163 (64,2) 200 (440)

Material: Polipropileno no tejido.

Elección de la talla correcta

El chaleco debe rodear por completo la espalda y la zona debajo de los brazos para garantizar una comodidad óptima. Si el chaleco es demasiado grande, es posible que el paciente no pueda coger la percha o elevarse a una posición de completamente de pie.

Combinaciones recomendadas

El Solo SupportVest está diseñado para utilizarse únicamente con la grúa de bipedestación Sabina™ de Liko. Se recomienda Sabina™ II 350 SlingBar.

Otras combinaciones

La combinación de accesorios y productos que no sean los recomendados por Liko puede poner en riesgo la seguridad del paciente.