

Productbeschrijving

Het Solo SupportVest wordt gebruikt in combinatie met de Sabina™-opstalift om patiënten vanuit een zittende naar een staande positie te tillen. Het Solo SupportVest geeft ondersteuning aan de rug en onder de armen tijdens het omhoogtillen. Het is geschikt voor patiënten die ondersteuning nodig hebben bij het opstaan, maar die in staat zijn om zelfstandig te staan zodra ze overeind staan.

Het Solo SupportVest is bedoeld voor gebruik in combinatie met de Sabina-opstalift en een 350-tiljuk (smal).

Samen vormen het Solo SupportVest en de Sabina-opstalift een functionele eenheid. Lees de gebruiksaanwijzingen van beide producten voor volledige informatie en de beste resultaten.

Het Solo SupportVest is bedoeld voor kortetermijngebruik door één patiënt. Het kan niet worden gewassen. Het moet worden afgevoerd wanneer het vuil is geworden of de patiënt het niet langer nodig heeft. Het productassortiment van Liko omvat diverse modellen wasbare vesten voor langdurig gebruik die in combinatie met de Sabina-opstalift kunnen worden gebruikt.

In dit document wordt de persoon die wordt opgetild de patiënt genoemd en de persoon die hierbij helpt de zorgverlener.












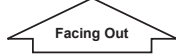




BELANGRIJK!

Het optillen en verplaatsen van een patiënt gaat altijd met enig risico gepaard. Lees vóór het gebruik de gebruiksaanwijzingen voor zowel de patiëntlift als de tilaccessoires. Het is belangrijk dat u de volledige inhoud van de gebruiksaanwijzingen begrijpt. De apparatuur mag alleen worden gebruikt door getraind personeel. Controleer of de tilaccessoires geschikt zijn voor de lift die u wilt gebruiken. Wees voorzichtig en ga zorgvuldig te werk tijdens het gebruik. Als zorgverlener bent u altijd verantwoordelijk voor de veiligheid van de patiënt. U moet weten of de patiënt het tillen aankan. Neem contact op met de fabrikant of leverancier als er iets onduidelijk is.

Symboolbeschrijving

Deze symbolen komen voor in dit document en/of op het product.

Symbool	Beschrijving
	Waarschuwing: deze situatie vereist extra zorg en aandacht.
	Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing
	CE-markering
	Juridisch fabrikant
	Productiedatum
	Productidentificatie
	Serienummer
	Medisch hulpmiddel
	Niet wassen
	Latexvrij
	Product niet gebruiken (Alleen Solo-producten en zichtbaar na wassen wanneer gebruik verboden is).
	Omhoog gericht en symbool aan de buitenkant van het product
	Symbool aan de buitenkant van het product.
	GS1 Data Matrix-barcode die de volgende informatie kan bevatten. (01) Global Trade Item Number (internationaal uniek artikelnummer) (11) Productiedatum (21) Serienummer

Veiligheidsinstructies

Bedenk vóór het tillen het volgende:

- de noodzaak voor één of meer zorgverleners moet per geval worden bepaald.
- plan het tillen zorgvuldig zodat het zo veilig en comfortabel mogelijk wordt uitgevoerd.
- controleer of de wielen van de rolstoel, het bed, de brancard, enz. tijdens het tillen/verplaatsen op de rem staan.
- hoewel tiljukken van Liko zijn voorzien van veiligheidsclips moet er goed worden opgelet. Controleer, voordat de patiënt daadwerkelijk getild wordt maar terwijl de banden gestrekt zijn, of de lussen correct aan de tilband gehaakt zijn.
- de hoogte van het tillen van de patiënt moet vooraf individueel worden bepaald.
- laat een patiënt die is opgetild nooit zonder toezicht!

 Medisch hulpmiddel, productklasse I

Productwijzigingen

De producten van Liko worden continu verder ontwikkeld. Daarom behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving productwijzigingen aan te brengen. Neem contact op met uw vertegenwoordiger van Hill-Rom voor advies en informatie over productverbeteringen.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko is gecertificeerd conform de ISO 9001-kwaliteitscertificatie en de daaraan gelijkwaardige ISO 13485-kwaliteitscertificatie voor de medische-hulpmiddelenindustrie.

Liko is ook gecertificeerd conform de milieustandaard ISO 14001.

Kennisgeving voor gebruikers en/of patiënten in de EU

Elk ernstig incident dat heeft plaatsgevonden met betrekking tot het hulpmiddel dient te worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde instantie van de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

Verzorging en inspectie

Controleer de tilband vóór elk gebruik. Controleer de volgende punten op slijtage en beschadigingen:

- materiaal
- banden
- zomen

Gebruik geen beschadigde tilaccessoires.

Neem contact op met de fabrikant of leverancier als er iets onduidelijk is.




NIET WASSEN. Op het waarschuwingslabel aan de achterkant van de tilband staat het symbool voor NIET WASSEN.



Als de tilband wordt gewassen, valt dit label uit elkaar en wordt het symbool NIET GEBRUIKEN weergegeven. De tilband moet dan worden weggegooid.

Verwachte levensduur

 Het Solo SupportVest is een artikel voor eenmalig gebruik en is uitsluitend bestemd voor individueel gebruik. Schrijf de naam van de patiënt op het productlabel op de rugzijde van het vest zodra de juiste maat voor een bepaalde patiënt is gevonden.

Het Solo SupportVest mag niet meer gebruikt worden:

- als het vuil of mogelijk besmet is
- het beschadigd is
- de patiënt het niet meer nodig heeft.


Recyclinginstructies

Het hele product, inclusief baleinen, vulmateriaal enz., moet gescheiden worden afgevoerd als brandbaar afval.

Hill-Rom voert beoordelingen uit en biedt gebruikers richtlijnen voor het veilig hanteren en afvoeren van de apparatuur om letsel zoals (maar niet beperkt tot) snijwonden, doorboring van de huid en schaafwonden te voorkomen, en voor de vereiste reiniging en desinfectie van het medische hulpmiddel na gebruik en voorafgaand aan verwijdering. Klanten moeten zich houden aan alle federale, staats-, regionale en/of lokale wetten en voorschriften die gelden voor het veilig afvoeren van medische hulpmiddelen en accessoires.

In geval van twijfel dient de gebruiker van het hulpmiddel eerst contact op te nemen met de technische ondersteuning van Hill-Rom voor advies over protocollen voor veilig afvoeren.

Definities

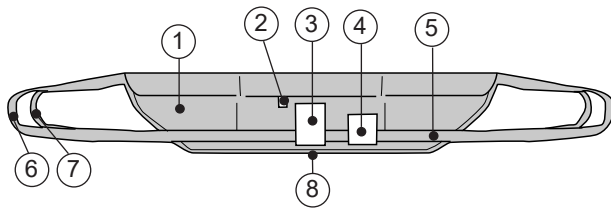

1. Vest
2. Jaar/maand van productie
3. Productlabel
4. Waarschuwingsetiket:
Niet wassen.

5. Gekleurde band
(geeft de maat aan)
6. Buitenste bandlus
7. Binnenste bandlus
8. Onderrand




Beschrijving van de bandlusfunctie

Het Solo SupportVest is voorzien van twee bandlussen: een bandlus aan de binnenkant en een bandlus aan de buitenkant, voor optimale flexibiliteit tijdens het gebruik. We raden doorgaans aan de binnenste bandlussen aan het tiljuk te bevestigen om zo rechtop mogelijk te komen te staan en ervoor te zorgen dat de patiënt het tiljuk kan vastpakken. Zo neemt de patiënt actief deel aan het opstaan.

De buitenste bandlussen worden gebruikt als er door de omvang van de patiënt meer ruimte nodig is of als de patiënt, gezien de hoogte van de tilhaken van de Sabina™, relatief klein is.


Als de binnenste bandlussen worden gebruikt adviseren wij om de buitenste bandlussen ook aan de tilhaken te bevestigen. Hierdoor zijn de bandlussen beter zichtbaar.

Gebruik van het Solo SupportVest in combinatie met de Sabina-opstaliift

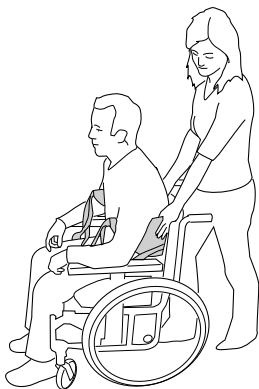

1. Leid het vest langs de rug van de patiënt naar beneden, met het productlabel naar buiten gericht. De onderrand van het vest moet zich op taillehoogte bevinden.

⚠ De armen van de patiënt moeten **altijd** buiten het vest worden gehouden zodat het vest niet omhoog kan glijden. Bepaal welke bandlussen de beste keuze zijn; zie hierboven 'Beschrijving van de bandlusfunctie'.

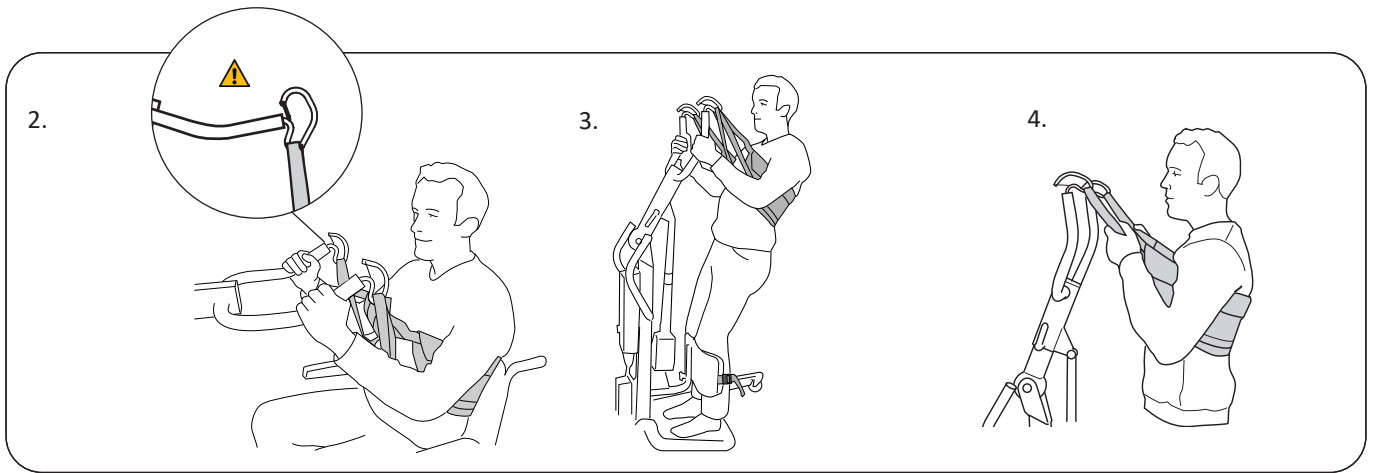

2. Rol de Sabina™-opstalift naar de patiënt toe. Pas de breedte van het onderstel aan zodat de opstalift dicht genoeg bij de patiënt kan komen. De voeten van de patiënt moeten in het midden van de voetsteun worden geplaatst. Pas de diepte van de onderbeensteun aan zodat de schenen van de patiënt parallel lopen met de steun. Stel de hoogte van de steun zodanig af dat de bovenrand zich net onder de knieschijven bevindt. Maak de kuitband vast en trek deze aan.

Vervolgens bevestigt u de gekozen en eerder geteste bandlussen aan de haken van het tiljuk.

Nuttige tip: de patiënt kan gemakkelijker van een zittende naar een staande stand komen als hij relatief rechtop zit. Dat wil zeggen: de heupgewrichten zijn op dezelfde hoogte, of liever hoger, dan de kniegewrichten.

3. Tillen. Bedien de liftbeweging met de knoppen omhoog en omlaag op de handbediening. Er zijn twee snelheden. Moedig de patiënt, indien mogelijk, aan om het tiljuk vast te pakken.

⚠ Voordat de patiënt van het onderliggende oppervlak wordt getild, maar terwijl de banden volledig zijn gestrekt, moet worden gecontroleerd of de banden correct aan het tiljuk zijn bevestigd.

We raden patiënten aan om met het bovenlichaam iets naar achteren te leunen. Dit compenseert de zwakke spiermassa van het onderlichaam. Dit maakt de bediening van de opsta-actie gemakkelijker, verbetert het comfort en voorkomt dat het vest omhoog glijdt. De tilhoogte van de patiënt moet vooraf van geval tot geval worden bepaald.

4. **Nuttige tip:** wanneer het vest tijdens het tillen omhoog schuift, kan de patiënt de bandlussen vastpakken in plaats van het tiljuk. Dit helpt om het vest op zijn plaats te houden en biedt goede ondersteuning voor de rug tijdens het tillen.

Proefpassessie

Instelling van de maximale tilhoogte


De maximale tilhoogte wordt als volgt ingesteld:

- hoogte-instelling van de mast aan het onderstel van de opstalift. Zie de gebruiksaanwijzing van de Sabina.
- kies de binnenste of buitenste bandlussen van het vest, zie pagina 4 'Beschrijving van de bandlusfunctie'.
- de grootte van het vest. Met een vest in een kleinere maat is het mogelijk om hoger te tillen.

Alternatieve vesten voor tillen

Als de patiënt tijdens het tillen voor de veiligheid een tailleband nodig heeft adviseren wij het gebruik van een Liko™ SafetyVest of Liko™ ComfortVest.

Accessoires

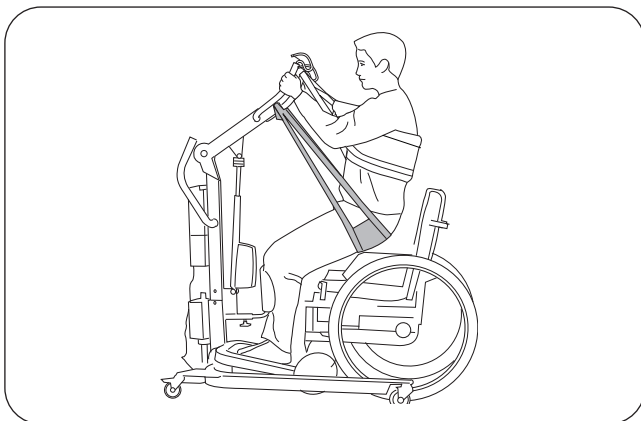

1. Sabina™-zitvlakband

productnr. 3591115

In sommige gevallen kan er een zitvlakband worden gebruikt om het tillen te vergemakkelijken. De zitvlakband moet zo ver mogelijk naar beneden worden gedruwd in de richting van het stuitbeen en biedt ondersteuning onder de billen tijdens het tillen. Zodra de patiënt rechtop staat, wordt de belasting van de zitvlakband weggenomen en kan deze aan één kant worden verwijderd, bijvoorbeeld tijdens toiletbezoeken.

Voor de zitvlakband is een speciale accessoire vereist: Seatstrap Slingbar. Lees de gebruiksaanwijzing van de zitvlakband zorgvuldig door voordat u deze gebruikt.

2. Seatstrap SlingBar

productnr. 2027006


3. Sabina™ 350-tiljuk

productnr. 2027006


Accessoires

Extension Loop, groen, 12 cm
Extension Loop, groen, 22 cm
Extension Loop, grijs, 12 cm
Extension Loop, grijs, 22 cm

productnr. 3691102
productnr. 3691103
productnr. 3691302
productnr. 3691303

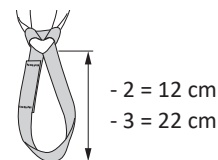

Overzicht Solo SupportVest™, mod. 911

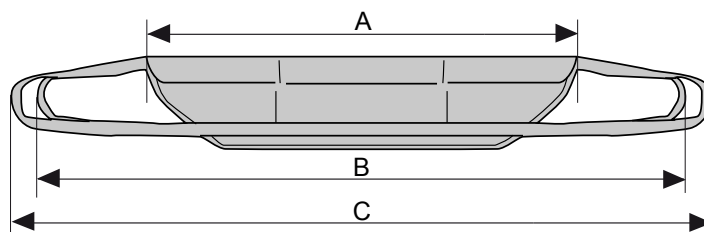

Beschrijving	Productnr.	Maat		Kleur van de band	Breedte vest: cm			Max. belasting: kg
Solo SupportVest	35911915	M	Medium	Geel	A: 90	B: 138	C: 148	200
Solo SupportVest	35911916	L	Large	Blauw	A: 105	B: 153	C: 163	200

Materiaal: niet-geweven polypropyleen.

De juiste maat kiezen

Voor een optimaal comfort moet het vest volledig rond de rug en onder de armen liggen.

Als het vest te groot is kan de patiënt mogelijk niet het tiljuk pakken of in een volledig rechtopstaande houding komen.

Aanbevolen combinaties

Het Solo SupportVest is uitsluitend bedoeld voor gebruik met de Sabina™-opstaliften van Liko. Wij raden het Sabina™ II 350-tiljuk aan.

Andere combinaties

Combinaties van accessoires/producten die anders zijn dan de combinaties die worden aanbevolen door Liko kunnen leiden tot risico's voor de veiligheid van de patiënt.