


BRAUN

WelchAllyn®

ThermoScan®

Nabíjacia stanica
Návod na použitie

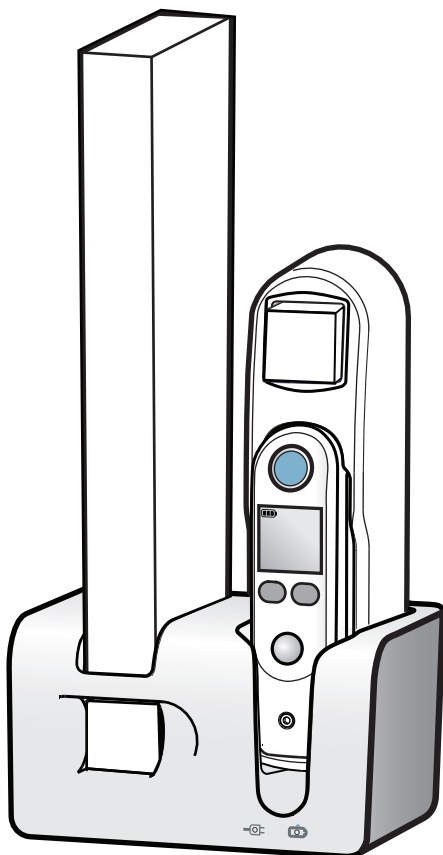

PRO 6000
Nabíjacia stanica

BRAUN**ThermoScan®**

Nabíjacia stanica PRO 6000

Táto príručka sa vzťahuje na príslušenstvo na meranie teploty **REF 901009**

Výrobca:
Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153
USA



107983 (CD)
DIR 80025839
Dátum revízie: 2019-09



Welch Allyn Limited
Navan Business Park
Dublin Road,
Navan, County Meath
Republic of Ireland
C15 AW22

Informácie o ľubovoľnom produkte Welch Allyn si vyžiadajte na adrese:

Technická podpora Welch Allyn:

www.welchallyn.com/support

Navštívte webové lokality:

www.welchallyn.com/about/company/locations.htm

Náhradné diely

Úplný zoznam dielov nájdete na webovej lokalite

www.welchallyn.com

Informácie o patentoch nájdete na lokalite

www.welchallyn.com/patents

© 2019 Všetky práva vyhradené.

Vyrobené v Mexiku

Tento produkt je vyrobený v licencií od značky „Braun“.


„Braun“ je registrovaná ochranná známka spoločnosti Braun GmbH, Kronberg, Nemecko.

ThermoScan® je registrovaná ochranná známka, ktorú vlastní spoločnosť Helen of Troy Limited.

Používajte
výhradne
Hillrom
kryty na sondy



1. Nabíjacia stanica Braun Thermoscan® PRO 6000

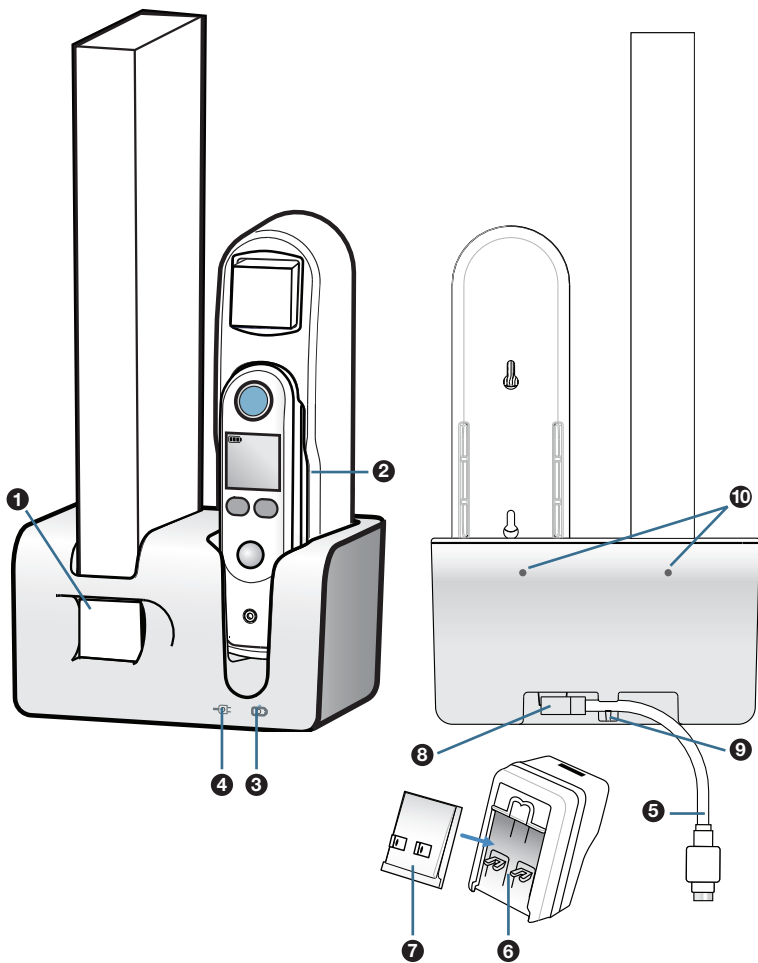

2. Súčasti balenia

Nabíjacia stanica Braun ThermoScan® PRO 6000

CD s dokumentáciou: návod na použitie, softvér Welch Allyn Service Tool (dostupný cez internetové pripojenie) a inštaláčna príručka softvéru Service Tool (dostupná cez internetové pripojenie).

- 1 Súprava nabíjateľných batérií (NiMH)
- 1 Súprava vymeniteľných nástenných zástrčiek
- 1 Nástenný adaptér a kábel USB

3. Opis produktu

- ❶ Úložný priestor na rukáv 200 krytov na sondy Braun
- ❷ Ušný teplomer Braun ThermoScan® PRO 6000 v podstavci
- ❸ Indikátor nabitia
- ❹ Indikátor napájania
- ❺ Kábel USB
- ❻ Nástenný adaptér
- ❼ Vymeniteľná zástrčka (dostupná v 4 rôznych konfiguráciách)

Číslo modelu	Konfigurácia zástrčky	
PRO6000BSNA/ 06000-100	Zástrčka pre Severnú Ameriku/ Čínu	
PRO6000BSEU/ 06000-125	Zástrčky pre EÚ a UK	
PRO6000BSC/ 06000-575	Zástrčky pre Severnú Ameriku/ Čínu, EÚ a UK	
PRO6000BSAU/ 06000-150	Zástrčka pre Austráliu	

- ❽ Adaptér na pripojenie pomocou USB
- ❾ Svorka na prichytenie kábla USB
- ❿ Otvory na montáž na stenu








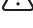








UCHOVAJTE SI TENTO NÁVOD

Nabíjacia stanica pre ušný teplomer Braun Thermoscan® PRO 6000 – teplomer klinickej triedy – zabezpečuje funkciu nabíjania a zabezpečenia, ako aj úložný priestor pre teplomer a dávkovače krytov na sondy. Pred použitím si pozorne prečítajte návod na používanie.

4. Výstrahy a preventívne opatrenia



Minimalizácia nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom:

-  **VÝSTRAHA** Nedotýkajte sa nabíjacej stanice, ak spadla do vody. Okamžite vytiahnite zo zdroja napájania.
 -  **VÝSTRAHA** Nabíjaciú stanicu nedávajte, neskladujte ani nenabíjajte tam, kde môže spadnúť alebo byť stiahnutá do umývadla alebo drezu. Neponárajte ani nehádzte do vody, ani do inej tekutiny.
 -  **VÝSTRAHA** Odpojte túto nabíjaciú stanicu pred čistením.
 -  **VÝSTRAHA** Nabíjacia stanica disponuje nízkonapäťovým nástenným adaptérom (zdravotnícky adaptér na montáž na stenu, typ TMW7-5-IPW). Nesmiete preto meniť jej súčasti ani nimi manipulovať. Inak hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
 -  **VÝSTRAHA** Iba na profesionálne použitie.
 -  **UPOZORNENIE** Ak chcete teplomer nabíť, nabíjaciú stanicu používajte iba so súpravou nabíjateľných batérií dodanou s touto jednotkou.
- Aby sa znížilo nebezpečenstvo popálenín, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb:
-  **VÝSTRAHA** Nabíjacia stanica sa nesmie používať vo vzdialenosti do 1,5 m (4,92 stôp) od pacienta.
 -  **UPOZORNENIE** Toto zariadenie používajte iba na tie účely, na ktoré je určené podľa návodu. Nepoužívajte prípojky, ktoré neodporúča výrobca.
 -  **VÝSTRAHA** Neupravujte toto zariadenie bez oprávnenia od výrobcu.
 -  **UPOZORNENIE** Zariadenie by sa nemalo nikdy vystavovať teplotám nižším ako -20 °C (-4 °F) a vyšším ako +50 °C (122 °F). Zariadenie a kábel udržiavajte vždy suché. So zariadením nemanipulujte mokrymi rukami. Neskladujte vo vlhkom prostredí. Neovíjajte kábel okolo zariadenia, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Je dôležité pravidelne (každé 3 mesiace) kontrolovať, či kábel nie je poškodený, predovšetkým na každom konci, kde kábel prechádza do zástrčky.
 -  **VÝSTRAHA** Toto zariadenie nikdy nepoužívajte, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, ak nefunguje správne, ak spadlo alebo je poškodené alebo ak spadlo do vody. Vráťte zariadenie do servisného strediska na kontrolu a opravu.
 -  **UPOZORNENIE** Udržiavajte kábel mimo horúcich povrchov.
 -  **VÝSTRAHA** Do otvoru nikdy nevhadzujte ani nezasúvajte žiadne predmety.
 -  **UPOZORNENIE** Zástrčku zapojte vždy najprv do zariadenia, až potom do siete napájania.
 -  **UPOZORNENIE** Tento prístroj je v súlade s platnými povinnými normami týkajúcimi sa elektromagnetického rušenia a iným zariadeniam by nemal spôsobovať problém, ani iné zariadenia by ho nemali ovplyvniť. V rámci preventívnych opatrení nepoužívajte toto zariadenie v tesnej blízkosti iných zariadení.
 -  **VÝSTRAHA** Nedávajte zariadenie do polohy, z ktorej bude ťažké používať ho alebo odpojiť zariadenie (zástrčku).

5. Zostavenie

5.1 Vloženie batérií



Nabíjacia stanica sa dodáva s 1 súpravou nabíjateľných batérií. Ak chcete použiť funkciu nabíjania, vložte súpravu nabíjateľných batérií do priehradky na batérie teplomera.

Súprava batérií nemusí byť pri dodaní nabitá.




UPOZORNENIE Pred použitím zariadenie nabíjajte 3 hodiny v nabíjacej stanici.
Pozri časť 5.2 „Pripájanie“ a 5.4 „Nabíjanie teplomera“.


- 1 Otvorte dverka priestoru na batérie tak, že prstom alebo ostrým predmetom, napríklad perom, posuniete západku s pružinou smerom doprava. Pridržite západku v tejto otvorenej polohe, uchopte dverka priestoru na batérie a odstráňte ich.

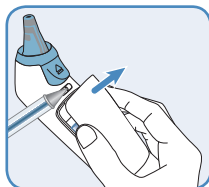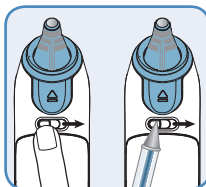

- 2 Vložte súpravu nabíjateľných batérií do priehradky na batérie so štítkom na batériách smerujúcim von.

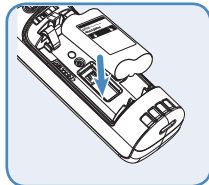

- 3 Zaklapnite dverka priestoru na batérie späť na svoje miesto a skontrolujte, či sa západka vráti späť do pôvodnej zaistenej polohy.

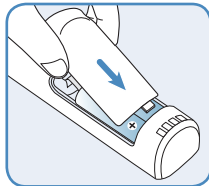

Tento produkt obsahuje batérie a recyklovateľný elektronický odpad.



Ak chcete chrániť životné prostredie, nevyhadzujte ho do netriedeného odpadu, ale zoberte ho do vhodného miestneho zberného miesta v súlade so štátnymi alebo miestnymi predpismi.



UPOZORNENIE Nerozoberajte, neskratujte ani nevyhadzujte do ohňa. Nemiešajte s rozdielnymi typmi batérií.


5.2 Pripájanie

- 1 Kábel USB pripojíte do zadnej časti nabijacej stanice (1a) a prevlečte kábel cez príchytňú svorku (1b).

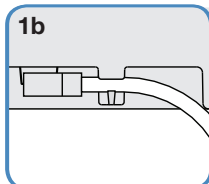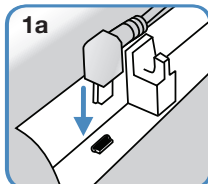


- 2 Vyberte vhodnú vymeniteľnú zástrčku pre svoju krajinu a región (ak je dodaných viacero zástrčiek).

- 3 Zapojte zástrčku do nástenného adaptéra.

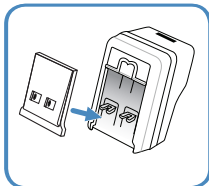


- 4 Zapojte kábel USB do nástenného adaptéra.

- 5 Zapojte celú zostavu do zásuvky elektrickej siete.

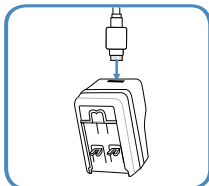

- 6 Rozsvieti sa zelené svetlo, čo znamená, že nabijacia stanica je pripravená na použitie.

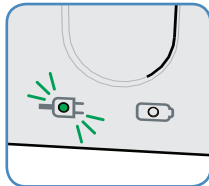

5.3 Pokyny na montáž (voliteľné)


Nabíjacia stanica možno namontovať na stenu alebo upevniť na rovny povrch. Nabíjacia stanica by sa mala namontovať na stenu do vykonaní kroku 3 časti 5.2 „Pripájanie“.

Na montáž sú potrebné tieto materiály:

- 2 ks skrutky Philips s krížovou drážkou veľkosti 8 (dodané)
- 2 úchytky Flush na montáž do sadrokartónu (dodané)
- Meradlo (nie je súčasťou dodávky)
- Krížový skrutkovač Phillips veľkosti 2 (nie je súčasťou dodávky)

Montáž na stenu:

- 1 Uistite sa, že kábel USB je odpojený zo siete napájania, ale stále je pripojený k nabíjacej stanici. Prípojka USB na nabíjacej stanici nebude po montáži dostupná.

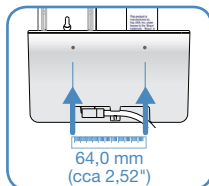

- 2 Nájdite skrutky a úchytky na montáž do sadrokartónu dodané s nabíjajúcou stanicou.


- 3 Nájdite montážne otvory na zadnej strane nabíjacej stanice.

- 4 Pomocou dodaných úchytiak a skrutiek do sadrokartónu upevnite nabíjajúcu stanicu na stenu alebo na iné zabezpečené miesto.

Poznámka: Ak nabíjajúcu stanicu pripevňujete na iný povrch ako sadrokartón, použite úchytky vhodné pre daný povrch.

5.4 Nabíjanie teplomera


- 1 Vložte teplomer s nainštalovanou súpravou nabíjateľných batérií do stojana teplomera (1a). Vložte teplomer v stojane do nabíjacej stanice (1b).

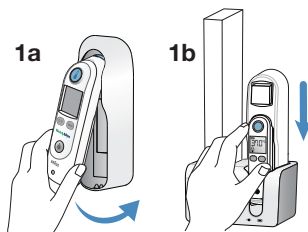

- 2 Teplomer vydá počuteľné pípnutie.




- 3 Indikátor nabitia na nabíjacej stanici sa rozsvieti na žlté.

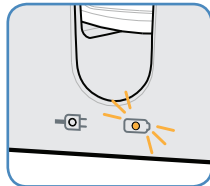

- 4 Na LCD displeji teplomera sa zobrazí stav nabitia batérie.


Keď je teplomer celkom nabitý, indikátor nabitia na nabíjacej stanici sa zmení na zelenú (približne 3 h, ak je batéria vybitá). Batérie nie je možné nabiť nadmerne. Keď sa teplomer nepoužíva, odporúča sa skladovať ho v nabíjacej stanici, aby si uchoval stav plného nabitia.

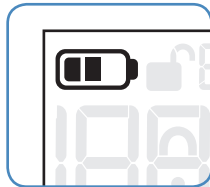

Dokonca aj s plne nabitou batériou môže trvať až 5 minút, kým nabíjacia stanica rozozná plnú úroveň batérie. Ak k tomu dôjde, indikátor nabitia bude po inštalácii teplomera v nabíjacej stanici žltý a potom sa zmení na zelený, keď bude rozoznaná plne nabitá batéria.

Ak spozorujete, že nabíjacia stanica indikuje plné nabitie (zelený indikátor nabitia), ale LCD displej teplomera neindikuje plné nabitie, môže to byť dôsledok prehriatia nabíjacej stanice alebo batérií.

Odporúčame vám premiestniť nabíjajúcu stanicu do chladnejšieho prostredia.

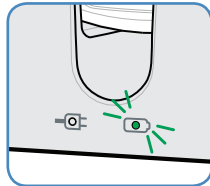


Ak indikátor nabitia nesvieti, mohlo dôjsť k jednému z nasledujúceho:

- Sú inštalované alkalické batérie (nenabíjateľné)
- Teplomer/nabíjacia stanica nie sú správne zapojené do elektrickej siete
- Teplomer nie je správne nainštalovaný v nabíjacej stanici

6. Funkcia zabezpečenia


Ušný teplomer Braun Thermoscan® PRO 6000 je vybavený funkciou zabezpečenia, ktorá vyžaduje návrat teplomera na nabíjajúcu stanicu vo vopred vybranom čase. Ak sa tento čas presiahne, teplomer sa zamkne. Funkciu zabezpečenia možno nastaviť pomocou nástroja Service Tool až na 12 hodín/720 minút.

Keď ušný teplomer Braun Thermoscan® PRO 6000 odchádza z továrne, funkcia zabezpečenia je vypnutá. Zabezpečenie je dostupné iba pomocou softvéru Welch Allyn Service Tool a vyžaduje na svoju iniciáciu nabíjajúcu stanicu alebo akékoľvek kompatibilné zariadenie Welch Allyn Vital Signs. Funkcia zabezpečenia sa môže používať s nabíjateľnými alebo alkalickými batériami. Informácie o tom, ako sa dostať k tejto funkcii a zmeniť nastavenia, nájdete v časti 6.2 „Nastavenia“.


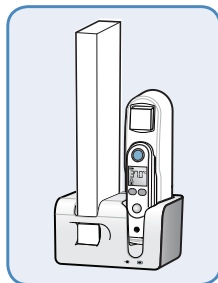


6.1 Ako to funguje


- 1 Keď je aktivovaná funkcia zabezpečenia, vedľa indikátora batérie sa počas normálneho používania bude zobrazovať odomknutá ikona, čo znamená, že je aktívna funkcia zabezpečenia.

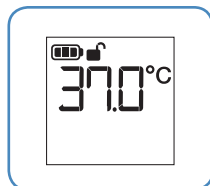


- 2 Keď sa teplomer nachádza v rámci 60 minút časového limitu, vedľa odomknutej ikony sa bude zobrazovať počítadlo času ukazujúce, koľko minút ešte zostáva.

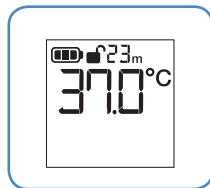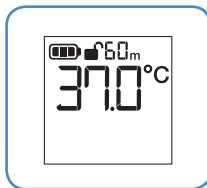


- 3 V čase 5 minút pred vypršaním limitu začne teplomer pípať raz za minútu a bude blikať odomknutá ikona, čo znamená, že teplomer sa čoskoro zamkne.

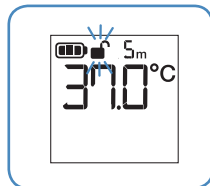

- 4** Po vypršaní časového limitu sa odomknutá ikona a počítadlo času nahradia zamknutou ikonou a teplomer zapípa každých 5 minút, čím indikuje stav zamknutia. Stlačenie akéhokoľvek tlačidla v zamknutom stave bude viesť k chybovému pípaniu a k žiadnej inej odozve teplomera. Teplomer nie je možné používať, keď je zamknutý.

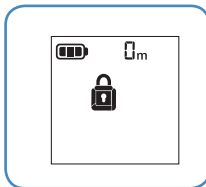


- 5** Odomknite teplomer tak, že ho vrátite na nabíjaciu stanicu.

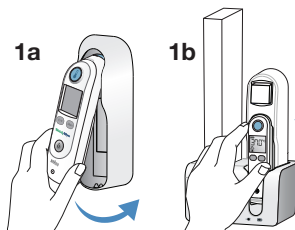

- 6** Teplomer vydá počuteľné pípnutie a na 5 sekúnd sa rozsvieti podsvietenie.




- 7** Časový limit sa obnoví a teplomer sa vráti do odomknutého stavu pre normálnu prevádzku. Po dosiahnutí odomknutého stavu teplomer zapípa a obnoví sa displej.

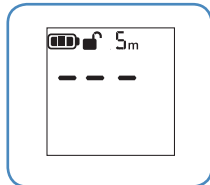

8 Nabíjanie teplomera s aktivovanou funkciou zabezpečenia:

Ak sú nainštalované nabíjateľné batérie, rozsvieti sa žlté svetlo na nabíjacej stanici, čo znamená, že sa obnovilo nabíjanie, a na displeji teplomera sa zobrazí ikona batérie.

Ak sú v teplomere nainštalované alkalické batérie (nenabíjateľné), na nabíjacej stanici sa nerozsvieti žlté svetlo, na displeji teplomera sa nebude zobrazovať ikona batérie a batérie sa nebudú nabíjať ani vtedy, keď je aktívna funkcia zabezpečenia.

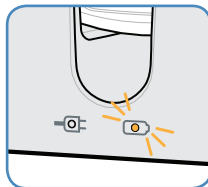

6.2 Nastavenia funkcií zabezpečenia


Nabíjacia stanica alebo kompatibilné zariadenie Welch Allyn Vital Signs sa môžu používať spolu s nástrojom Welch Allyn Service Tool na úpravu nastavení na teplomere.

Na zmenu konfigurácie teplomera je nutný softvér Welch Allyn Service Tool.


Na pripojenie k počítaču, na ktorom beží softvér Welch Allyn Service Tool, je nutná nabíjacia stanica a nabíjateľné batérie, alebo zariadenie kompatibilné s Welch Allyn.

Podľa pokynov získate prístup k pokročilým nastaveniam ušného teplomera Braun ThermoScan® PRO 6000 pomocou softvéru Welch Allyn Service Tool.

- 1 Vložte ušný teplomer Braun ThermoScan® PRO 6000 do nabíjacej stanice.

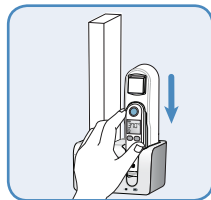

- 2 Odporúčaným spôsobom je pripojenie pomocou kábla USB zapojeného do adaptéra v stene – odpojte ho od adaptéra v stene a pripojte ho k svojmu počítaču.

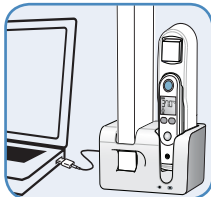



- 3 a. Spustíte softvér Welch Allyn Service Tool.
- b. Ak sa zobrazí úvodná obrazovka s hlásením „Add new features“ (Pridať nové funkcie) a tlačidlom „Service“ (Servis), kliknite na „Service“.
- c. Prihlásite sa ako ADMIN bez hesla alebo použite ľubovoľné konto, ktoré ste predtým vytvorili.

Poznámka: Ak sa nezobrazí výzva na prihlásenie, kliknite na tlačidlo Log on (Prihlásiť sa). Na prístup k dialógovému oknu konfigurácie musíte byť prihlásení.


- 4 Zvýraznite kliknutím na teplomer Braun v zozname zariadení a kliknite na vybrané tlačidlo.

- 5 Otvorí sa karta Device (Zariadenie).

- 6 Kliknite na kartu Configure (Konfigurovať) napravo od karty s informáciami o zariadení.

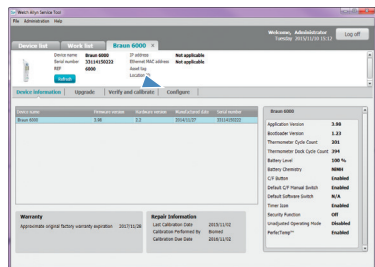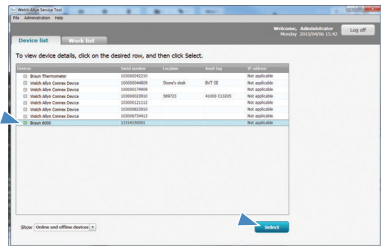


- 7 Kliknite na tlačidlo Change (Zmeniť) v poli s aktuálnymi nastaveniami. Otvorí sa dialógové okno s nastaveniami konfigurácie.

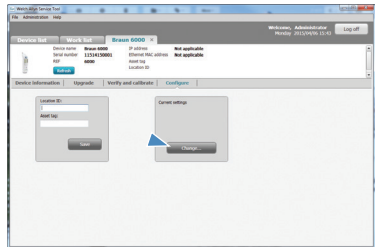

- 8 Ak chcete vybrať funkciu Security (Zabezpečenie), kliknite na rozbaľovaciu ponuku a kliknite na požadovanú hodnotu času alebo ju deaktivujte kliknutím na Off (Vypnúť).

Po výbere požadovaných nastavení kliknite na tlačidlo Save (Uložiť), tým nastavenia odošlete do teplotera Braun a dialógové okno sa zavrie.

Ak chcete zavrieť dialógové okno bez zmeny nastavení, kliknite na tlačidlo Cancel (Zrušiť).

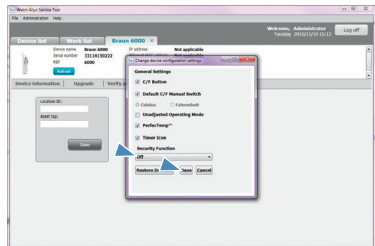

6.3 Servisné nástroje

Ďalšie informácie o softvéri Service Tool a pokyny na jeho inštaláciu nájdete na lokalite www.welchallyn.com, servisný nástroj si môžete prevziať po zadaní volieb Services & Support Tab/Service Centers/Download service tool (Karta služieb a podpory/Servisné centrá/Prevzatie servisného nástroja).

7. Údržba a servis

7.1 Čistenie



Upozornenie

UPOZORNENIE Pri čistení kovových elektrických kontaktov nepoužívajte roztoky s bielidlom žiadneho druhu. Dôjde k poškodeniu kontaktov.

UPOZORNENIE Kontakty čistite iba 70 % izopropylalkoholom. Nechajte kontakty schnúť 1 minútu.

V prípade potreby vyčistite nabíjajúcu stanicu mierne navlhčenou utierkou alebo čistiacou utierkou so 70 % roztokom izopropyl- alebo etylalkoholu, 10 % roztokom chlórového bielidla, nefarbiacimi čistiacimi prostriedkami (napr. Metrex CaviWipes™, PDI Sani-Coth®) alebo čistiacimi roztokmi na báze peroxidu vodíka (napr. Virox a Oxivir).






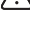
Schválené čistiace roztoky			
Druh	Roztok alebo značka	Telo nabíjacej stanice	Kontakty
Chlór a zlúčeniny chlóru	10 % roztok chlórového bielidla	Áno	Nie
Štvormocné amóniové zlúčeniny	CaviWipes™ Clinell® – univerzálne utierky SaniCloth Metrex	Áno	Nie
Peroxid vodíka	Virox Oxivir	Áno	Nie
Alkohol	70 % izopropylalkohol alebo etylalkohol	Áno	Áno

Je možné, že periodicky budú prebiehať skúšky kompatibility ďalších čistiacich prostriedkov. Ak chcete použiť čistiaci prostriedok, ktorý nie je uvedený v zozname, obráťte sa na spoločnosť Welch Allyn s otázkou, či je tento čistiaci prostriedok schválený na použitie.

Poznámka: Ak kontakty prídu do styku s akýmkoľvek čistiacim prostriedkom iným ako izopropylalkohol alebo etylalkohol, ihneď ich dosucha utrite. Potom vyčistíte kontakty izopropyl- alebo etylalkoholom.



Upozornenie

-  **UPOZORNENIE** **Nepoužívajte** abrazívne čistiace prostriedky.
-  **VÝSTRAHA** Pred akoukoľvek údržbou alebo servisom vytriahnite nabíjajúcu stanicu zo siete napájania.
-  **VÝSTRAHA** **Neponárajte** nabíjajúcu stanicu do vody ani do žiadnej inej tekutiny.
-  **UPOZORNENIE** Utierky by mali byť vlhké, nie mokré. Nadmerné množstvo tekutiny môže poškodiť nabíjajúcu stanicu.
-  **UPOZORNENIE** Ušný teplomer a stojan Braun Thermoscan® PRO 6000 čistite podľa pokynov na čistenie uvedených v návode na používanie, údržbu a servis zariadenia PRO 6000.
-  **VÝSTRAHA** Je dôležité pravidelne (každé 3 mesiace) kontrolovať, či kábel nie je poškodený, predovšetkým na každom konci, kde kábel prechádza do zástrčky.

7.2 Pokyny na skladovanie

Teplomer a kryty na sondy skladujte na suchom mieste (teplomer nie je chránený proti vniknutiu vody), bez prachu a znečistenia, nie na priamom slnečnom svetle. Okolité teplota musí zostať viac-menej konštantná a v rozsahu -20 až 50 °C (-4 až 122 °F).

8. Technické údaje

Rozsah okolitej teploty pri prevádzke: 10 – 40 °C (50 – 104 °F)

Klasifikácia externého medicínsky certifikovaného zdroja napätia:

Výstupné napätie:	5 V DC
Výstupný prúd:	1 A
Vstupné napätie:	100 – 240 V AC
Vstupný prúd:	0,3 A
Vstupná frekvencia:	50 – 60 Hz

Rozsahy pri dlhodobom skladovaní

Teplota pri skladovaní:	-20 až 50 °C (-4 až 122 °F)
Vlhkosť pri skladovaní:	0 až 85 % bez kondenzácie
Elektrická klasifikácia:	750 mAh
Záruka na nabíjateľnú batériu:	3 roky
Kapacita batérie:	Až 700 meraní teploty pri plnom nabití/3 V
Nabíjateľný typ batérie:	upravená dvojité súprava batérií (NiMH)
Rozmery nabíjacej stanice:	89,2 mm V × 103,7 mm H × 153,0 mm Š (3,51" V × 4,08" H × 6,02" Š)
Hmotnosť nabíjacej stanice:	150 g/5,3 oz



UPOZORNENIE Toto zariadenie nepoužívajte, ak sa v blízkosti nachádza elektromagnetické alebo iné rušenie presahujúce normálny rozsah podľa IEC 60601-1-2.



Intertek



NiMH

Súlad s normami

Toto zariadenie je v súlade s nasledujúcimi bezpečnostnými a výkonnosťnými normami:

Tento produkt spĺňa ustanovenia smernice ES 93/42/EHS (Smernica o zdravotníckych pomôckach).

ANSI/AAMI STD ES60601-1, UL STD 60601-1, CAN/CSA STD C22.2 č. 60601.1, IEC 60601-1 a EN 60601-1; vydania 2 a 3.1. Zdravotnícke elektrické prístroje – časť 1: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti

BS EN 60601-1-2:2015, IEC 60601-1-2:2014

Zdravotnícke elektrické prístroje – časť 1-2: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti – pridružená norma: Elektromagnetická kompatibilita – Požiadavky a skúšky

IEC/EN 62366-1: 2015 (IEC 60601-1-6:2010+A1: 2013) Zdravotnícke pomôcky – Uplatnenie stanovenia použiteľnosti na zdravotnícke pomôcky

ISO 14971:2012 Zdravotnícke pomôcky – Aplikácia riadenia rizík pri zdravotníckych pomôckach

ZDRAVOTNÍCKE ELEKTRICKÉ PRÍSTROJE si vyžadujú špeciálne bezpečnostné opatrenia, čo sa týka elektromagnetickej kompatibility (EMC). Podrobný popis požiadaviek EMC si vyžadajte od autorizovaného miestneho servisného centra. Prenosné a mobilné rádiové frekvenčné komunikačné zariadenia môžu ovplyvniť činnosť ZDRAVOTNÍCKYCH ELEKTRICKÝCH PRÍSTROJOV

Zdravotnícke elektromagnetické prístroje s vnútorným napájaním.

Nepretržitá prevádzka.

Nie je chránené voči prieniku vody.



IPX0

Definície symbolov:



Priložná časť typu BF



Upozornenie

Upozornenia uvedené v tejto príručke opisujú okolnosti alebo postupy ktoré môžu viesť k poškodeniu zariadenia alebo iného majetku alebo k strate údajov.



Výstraha

Výstrahy uvedené v tejto príručke opisujú okolnosti alebo postupy, ktoré môžu viesť k zapríčineniu ochorenia, zranenia alebo smrti. Výstražné symboly sa zobrazia v čiernobielym dokumente na sivom pozadí.



Zariadenie triedy II



Separovaný zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Produkt nelikvidujte ako netriedený komunálny odpad.



7d Prečítajte si návod na používanie.

welchallyn.com



Indikátor napájania



Indikátor nabitia



Teplota pri skladovaní



Vlhkosť pri skladovaní

9. Obmedzená trojročná záruka výrobcu

Platná pre model nabíjacej stanice Braun Thermoscan® PRO 6000

Spoločnosť Welch Allyn (pridružená k Hill-Rom®) ručí za to, že tento produkt neobsahuje chyby materiálu a spracovania a že bude fungovať v súlade so špecifikáciami výrobcu počas obdobia troch rokov od dátumu zakúpenia od spoločnosti Welch Allyn alebo jej autorizovaných distribútorov alebo zástupcov.

Za dátum predaja sa považuje: 1) fakturovaný dátum odoslania, ak bolo zariadenie zakúpené priamo od spoločnosti Welch Allyn, 2) dátum stanovený pri registrácii produktu, 3) dátum zakúpenia produktu od autorizovaného distribútora spoločnosti Welch Allyn preukázaný na potvrdení od uvedeného distribútora, pričom rozhodujúci je najskorší z týchto dátumov.

Táto záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené: 1) manipuláciou počas prepravy, 2) používaním alebo údržbou v rozpore s popísanými pokynmi, 3) zmenou alebo opravou subjektom, ktorý nie je autorizovaný spoločnosťou Welch Allyn alebo 4) nehodami. Táto záruka sa nevzťahuje na batérie, na poškodenie otvoru na sondu, ani na poškodenie produktu spôsobené nesprávnym používaním, nedbalosťou alebo nehodou, a oprávnenou osobou je len prvý kupujúci tohto produktu. V prípade výmeny prístroja podľa tejto záruky sa na vymenený prístroj vzťahuje záruka v trvaní zvyšku záručnej doby za daný prístroj. Ďalšou podmienkou je, že záruka sa stane neplatnou, ak sa teplomer používa s akýmikoľvek krytmi na sondu inými ako originálnymi Hillrom™.